

平成 28 年 4 月 19 日

エアマットレスをお使いの方へ

パラマウントベッド株式会社

こちあ結起／こちあ 停電時の対処について

平素は弊社エアマットレスをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。停電時の対処方法についてご案内申し上げます。

【こちあ結起】

- ・ 停電時は自動で空気を保持しますので、操作は不要です。
使用状況により異なりますが、約 2 週間空気を保持することができます。
ただし、停電中はエアマットレスの圧切替などの除圧効果や機能は働きませんので、使用する方の状態に注意し必要に応じて体位変換をおこなってください。
- ・ 電源復旧後は、自動で停電前の設定で運転が再開します。
停電後に電源が復旧した場合、各機能の設定は、運転停止・停電・電源プラグを抜いた直前の設定が維持されます。
※下記の機能は、直前の残り時間が維持されます。
除湿機能（タイマー 60 分を選択している場合）／しっかりモード／背上げモード
※停電からの復帰時にすべての電気製品が一斉に運転を始めると、電気部品への悪影響により故障したりするおそれがあります。事前に電源プラグをコンセントから抜き、停電復帰後に電源プラグをコンセントに差し込んでください。

【こちあ】

- ・ 停電時にはエアマットから空気が少しずつ漏れ出します。
マットレス交換もしくはエアマットレス以外の場所へのご移動をお勧めいたします。
- ・ 電源復旧後は、自動で停電前の設定で運転が再開します。
停電後に電源が復旧した場合、各機能の設定は、運転停止・停電・電源プラグを抜いた直前の設定が維持されます。
※停電からの復帰時にすべての電気製品が一斉に運転を始めると、電気部品への悪影響により故障したりするおそれがあります。事前に電源プラグをコンセントから抜き、停電復帰後に電源プラグをコンセントに差し込んでください。

ご不明な点につきましては、ご購入いただきました販売店様、弊社営業担当又は以下に記載のお問合せ先までご連絡いただきますようお願いいたします。

■お問い合わせ先

こちあセンター 0120-02-5518

受付時間： 9:00～17:20（年始休業を除く）