

取扱説明書


7K00061700A3

保証書付

KA-202・204・206・208

パラマウント

モネータシリーズベッド

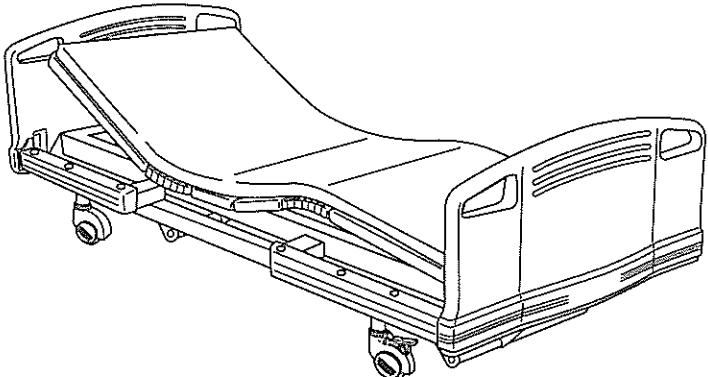

まえがき



このたびは、パラマウントモネータシリーズベッドをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、ベッドを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法を記載しています。

- ベッドをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- ベッドを使用する方ばかりでなく、付き添いの方にも正しく安全な取扱方法を説明してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社まで、お問い合わせください。


12 手動による背下げる操作／停電・故障時などの対応

1. 背下げるのしかた

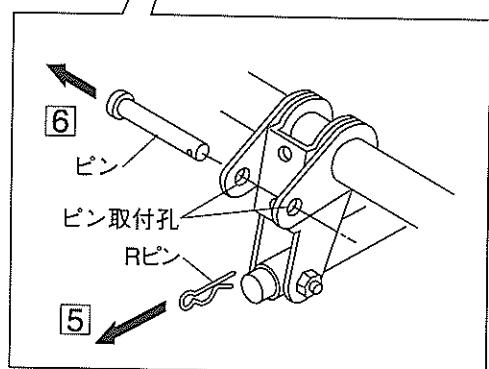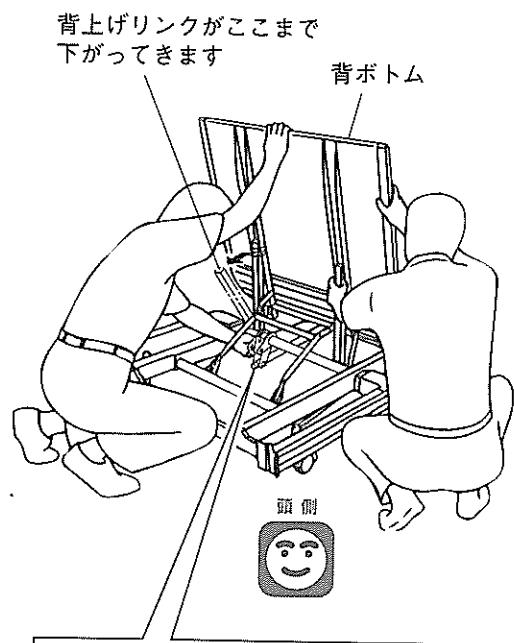

R pinの抜き方

●ペンチ、プライヤー（小）ではさんでひっぱるか
もしくは、ドライバーの先でこじると取り外しが
容易です。

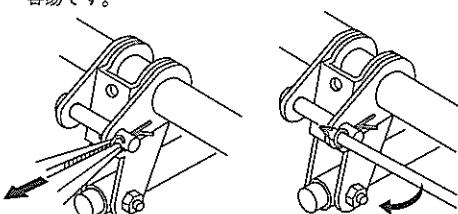

■背ボトムが上がっている状態で、停電やベッドの故障により背ボトムが下がられなくなつた場合のために、手動で背ボトムを下げる機能があります。

停電などの際には以下の手順で背下げる操作を行なってください。



- 作業は必ず2人以上で行なってください。

使用する工具 ペンチもしくはプライヤー（小）

- ①コンセントからベッドの電源プラグを抜いてください。
- ②療養している方と寝具をベッドから降ろしてください。
- ③ヘッドボードを取り外し、作業しやすくしてください。
- ④背ボトムと背上げリンクを押させてください。
- ⑤Rピンを取り外してください。
- ⑥ピンを取り外してください。ピンを取り外すと背上げリンクが自由に動くようになります。
- ⑦背上げリンクを手で支えながら背ボトムを降ろしてください。
- ⑧ヘッドボードを取り付けてください。
- ⑨寝具と療養している方をベッドに戻してください。



- 外したピンおよびRピンは復帰の際に使用します。紛失しないよう、保管してください。
- この作業を行なったときは、復帰作業を行なつてもとの状態にもどすまで電源プラグはコンセントから、抜いたままにしてください。


2.もどしかた

■停電の時には、電源が回復した後に、以下の手順でベッドを元の状態に戻し、動作の点検を行なってください。



停電以外の理由で背ボトムが下げられなくなった場合、30ページ「故障かな？と思ったら」に従ってチェックを行ない、ベッドが故障している場合には、販売店もしくは弊社までご連絡ください。



●作業は必ず2人以上で行なってください。

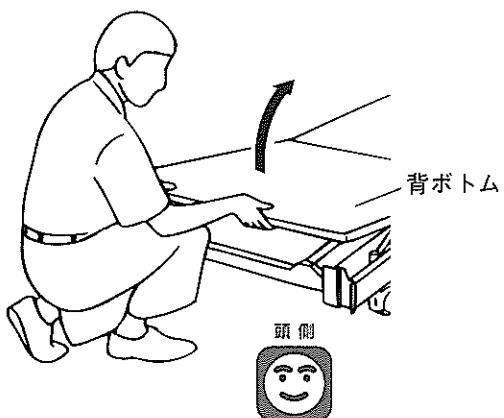

使用する部品	外したピン、Rピン各1本
使用する工具	—————

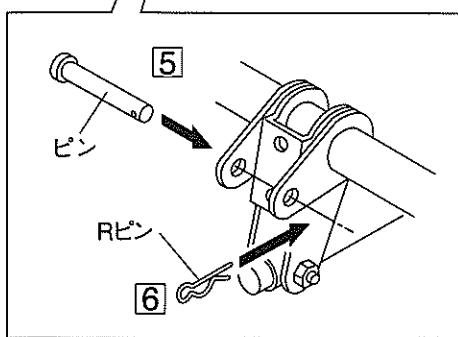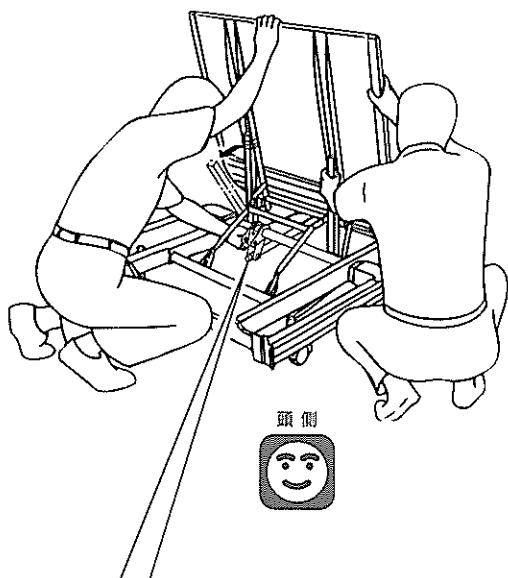

- ①コンセントからベッドの電源プラグを抜いてください。
- ②療養している方と寝具をベッドから降ろしてください。
- ③ヘッドボードを取り外し、作業しやすくしてください。
- ④背ボトムと背上げリンクを持ち上げ、支えてください。
- ⑤外してあったピンを差し込んでください。
- ⑥ピンが抜けないようにRピンを差し込んでください。
- ⑦ベッドの電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ⑧手元スイッチを操作して背ボトムを一番下まで下げてください。
- ⑨ヘッドボードを取り付けてください。
- ⑩寝具と療養している方をベッドに戻してください。