

平成 31 年 1 月

各位

パラマウントベッド株式会社

スイングアーム介助バー（KA-088 及び KA-089）をお使いのお客様へ

謹啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が平成 13 年まで製造・販売しておりましたスイングアーム介助バー（KA-088 及び KA-089）におきまして、ベッドとの取付部の空間に頭部が入り込み、ベッドの背ボトムが操作され（上げられ）、挟まった状態で発見されたとの事故情報（死亡）を入手いたしました（詳細は別紙 1 をご参照ください）。

原因や事故に至った経緯など詳細は不明ですが、同様の事故を未然に防止するため、当該情報をお客様にお伝えするとともに、すき間を埋める対応品及び現行のスイングアーム介助バー等のサイドレール類について改めてお知らせいたします。

弊社では、すき間の形状や大きさに一層配慮したベッドオプション製品（スイングアーム介助バー、ベッドサイドレールなど）を開発・ご提供すると共に、製品を安全にお使いいただくための利用方法や注意事項を、取扱説明書や製品に貼付している警告ラベルに記載するなどして、従来よりお知らせしております。

各位におかれましては、ご利用者の心身の状況や利用目的、利用環境に合った製品をお選びいただくと共に、製品の取扱説明書や警告ラベルを良くお読みいただき、正しく安全な利用方法をご理解くださいますようお願いいたします。また、製品のご利用者にも正しく安全な利用方法をご説明くださいますようお願い申し上げます。

ご不明の点がございましたら、弊社営業担当までご連絡いただけますようお願いいたします。


何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白


【別紙 1 : 入手した事故情報について】

1. 対象製品

KA-088


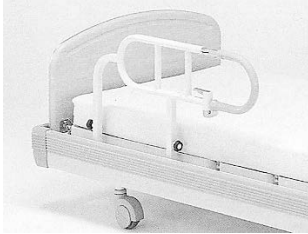


KA-089

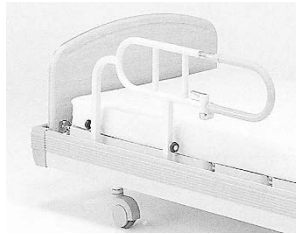

2. 事故の内容

ご利用者が、スイングアーム介助バーとベッドとの取付部の空間に頭部が入り、ベッドの背ボトムが操作された（上がった）状態で発見され、死亡が確認された。

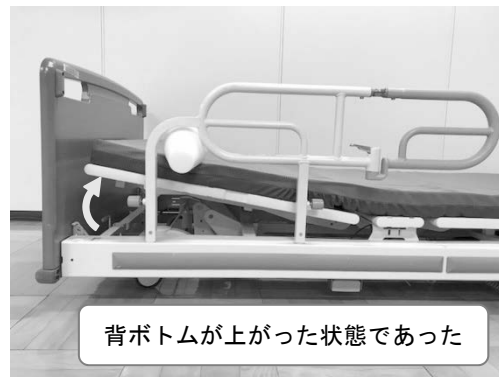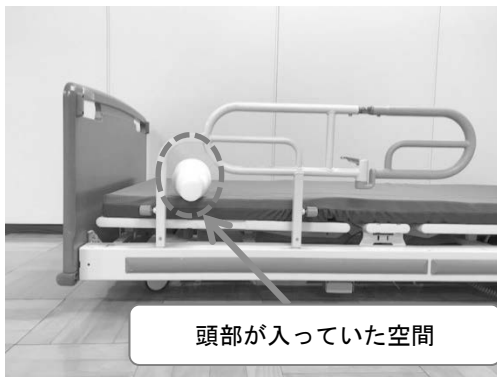

3. すき間にご注意ください

製品自体が内包するすき間やベッドや他のベッドサイドレール類との組み合わせにより生じるすき間に身体の一部（特に頭や首）を挟むと、死亡や重傷等の重大な事故につながる可能性がありますので、注意が必要です。ご利用者の心身の状況や利用目的、利用環境に応じてクッションなどですき間を埋めるなどしてください。



※ 現行のスイングアーム介助バー（KS-098シリーズ）は、適合するベッドとの組み合わせにおいて、すき間に関する規定が見直された最新の JIS 規格を満たしています。

#### 4. 特にご注意いただきたい方

- ・ 自分の体を支えられずスイングアーム介助バーなどに倒れ込む可能性のある方
- ・ 自力で危険な状態から回避することができないと思われる方
- ・ 認知機能障害などにより、ベッド上で予測できない行動をとるとと思われる方
- ・ 片マヒなどの障害などにより、体位を自分で保持できない方

#### 5. ご対応いただきたいこと

**ベッドを利用する方の心身の状況や利用目的、利用環境を考慮し、必要に応じて以下の対応をとってください。**なお、すき間の大きさや形状に配慮した現行のスイングアーム介助バー（KS-098シリーズ）に交換いただくことで、より安心してご使用いただくことができます（詳細は別紙2をご参照ください）。

- ・ クッション材や毛布などですき間を埋める
- ・ すき間を埋める対応品を利用する  
（対応品の詳細につきましては、弊社営業担当までお問合せください）
- ・ 危険な状態になっていないか、随時ベッドを利用する方の目視確認を行う



※ スイングアーム介助バーが故障した状態での利用は大変危険です。  
直ちに利用を中止し、弊社営業担当者までお問い合わせください。

旧型のスイングアーム介助バー（KA-088，KA-089）につきまして、弊社では、以下のすき間を埋める対応品を無償で提供いたしております。

注）「KA-088,KA-089」につきましては、製造終了から17年経過しており、以下の対応品の無償提供は継続していますが、修理用部品の提供は既に終了しています。予めご了承ください。

#### <すき間を埋める対応品（無償）>


##### アームスペーサー

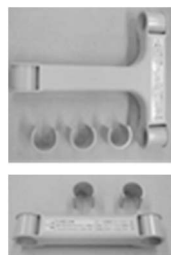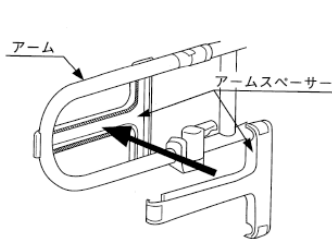

Tタイプ（写真上）：KA-089用

Iタイプ（写真下）：KA-088用

##### サイドレールカバー

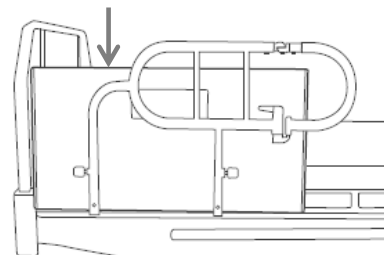

また、ベッドサイドレールなどその他の製品につきましても、製品をより安全にご利用いただくため、無償で提供している対応品がございます。

詳しくは弊社ホームページ（[https://www.paramount.co.jp/news\\_product](https://www.paramount.co.jp/news_product)）「製品に関する重要なお知らせ」をご覧ください。弊社営業担当までお問い合わせください。



以上

【別紙2：現行のベッドオプション製品について】

平成21年3月に行われたJIS規格の改正により、スイングアーム介助バーを含むベッドサイドレール類のすき間に関する規定が見直されました。


弊社の現行のスイングアーム介助バーやベッドサイドレールは、この改正されたJIS規格の規定を満たすものであり、すき間の大きさや形状に配慮した製品になっていますので、買い替えもご検討くださいますようお願い申し上げます。なお、これらの現行製品につきましては、内部のすき間を覆うカバーもございますので、ベッドに寝ている方の心身の状況に合わせてご活用ください。詳細につきましては、弊社営業担当者までご相談ください。

【スイングアーム介助バー KS-098シリーズ】

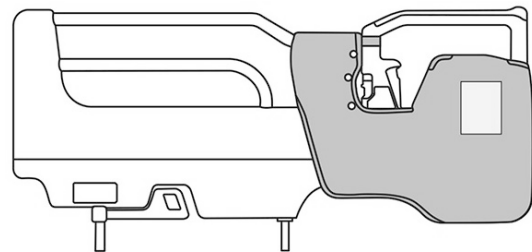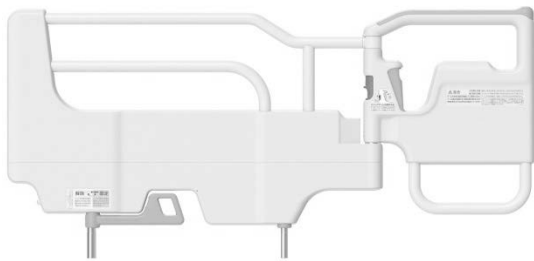

ソフトカバー使用状態

【ベッドサイドレール KS-161シリーズ】

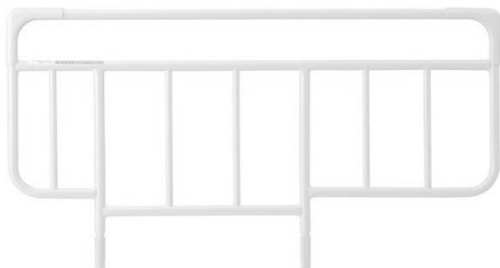

ソフトカバー使用状態

【折りたたみベッドサイドレール KS-023シリーズ（医療・介護施設専用品）】



ソフトカバー使用状態

以上