



ベッド操作アプリ

ダウンロードはこちら



※Apple、Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。



音声操作・入カスイッチ操作のお知らせ



このたび、ベッド操作アプリに「音声操作・入カスイッチ操作」機能が追加になりました。
iOS/iPad OSのみに対応する機能です。
ベッド操作アプリについては別紙「ベッド操作アプリ」カタログをご覧ください。

iOS/
iPadOS用

安全のために

ベッドの動作時間の設定

安全に少しずつベッドを動かすことができるよう、1回の操作でベッドが動く時間を設定します(3秒、4秒など)。

時間で止まる



ベッドの操作範囲の設定

「頭」「足」の角度や、「高さ」の動く範囲を設定することで、意図しない角度や高さになることを防ぎます。

角度で止まる



高さで止まる

音声操作

あらかじめ登録した言葉を順番に話すことでベッドの操作ができます。

- ① アプリの「設定」画面から「ベッド操作機能の設定」の中の「ベッド音声操作」を選択。音声操作をONにしてください。
- ② ベッドの操作画面で登録されている言葉を順番に話すことでベッドが動きます。
※登録されている言葉は、①の画面で変更することができます。




▶▶ ベッドが動きます

入カスイッチ操作

iPadやiPhoneなどに接続した入カスイッチで、ベッドの操作が可能になります。

必要なもの

この操作には、「入カスイッチ」と、入カスイッチをiPadやiPhoneに接続するための「スイッチインターフェース」が別途必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。


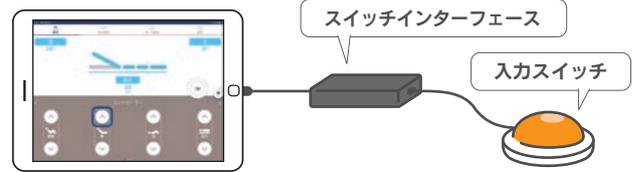


- ① iPadまたは、iPhoneの「設定」から、「アクセシビリティ」の中の「スイッチコントロール」を選択してONにします。
- ② ご用意いただいた入カスイッチと、スイッチインターフェースをiPadまたはiPhoneにつなげます。
- ③ スイッチコントロールのメニューから、モードを選択します。



グライドカーソルモード


このモードは画面に縦と横のカーソルが順番に表示されます。選択したい項目の上でカーソルを交差させると、その項目を選択することができます。

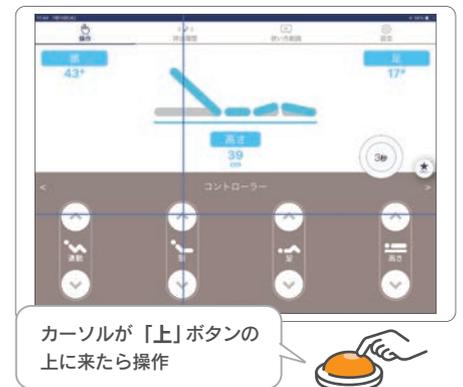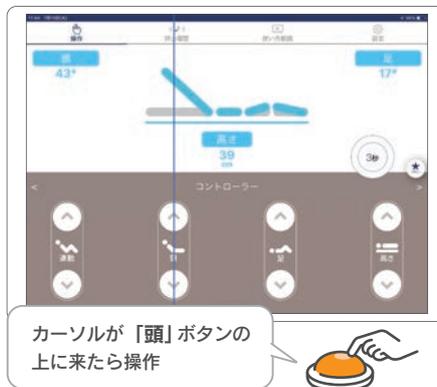

▶▶ 「頭」「上」がタップされてベッドが動きます

項目モード

このモードは画面上の項目に、順番に枠（ハイライト）が表示されます。ハイライトが選択したい項目の上に来たタイミングでスイッチを操作するとその項目を選択することができます。

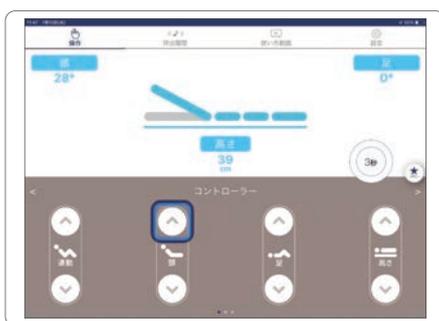

仕様

- ・ Bluetoothバージョン / Bluetooth4.2
- ・ OSバージョン、動作確認端末 / アプリ専用ホームページをご覧ください。
※一部のスマートフォンでは正しく動作しない場合があります。
- ・ 対応ベッド / 楽匠プラスシリーズ
- ・ 登録台数 / ベッド1台に対して、スマートフォンは3台まで登録できます。
また、1台のスマートフォンに複数のベッドを登録することはできません。

※アプリのご利用にはインターネットに接続できる環境が必要です。
※アプリのダウンロードとご利用には別途通信料がかかります。
※BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。本文中における®は省略しています。
※仕様変更により、内容やイラストが実際のアプリ画面と一致しない場合があります。

詳しくは専用ホームページをご覧ください。

