


PREGLAR STR

プレグラール STR マットレス


ストレッチ面とハード面、それぞれの特徴に合わせて使い分けできる
リバーシブルマットレス。

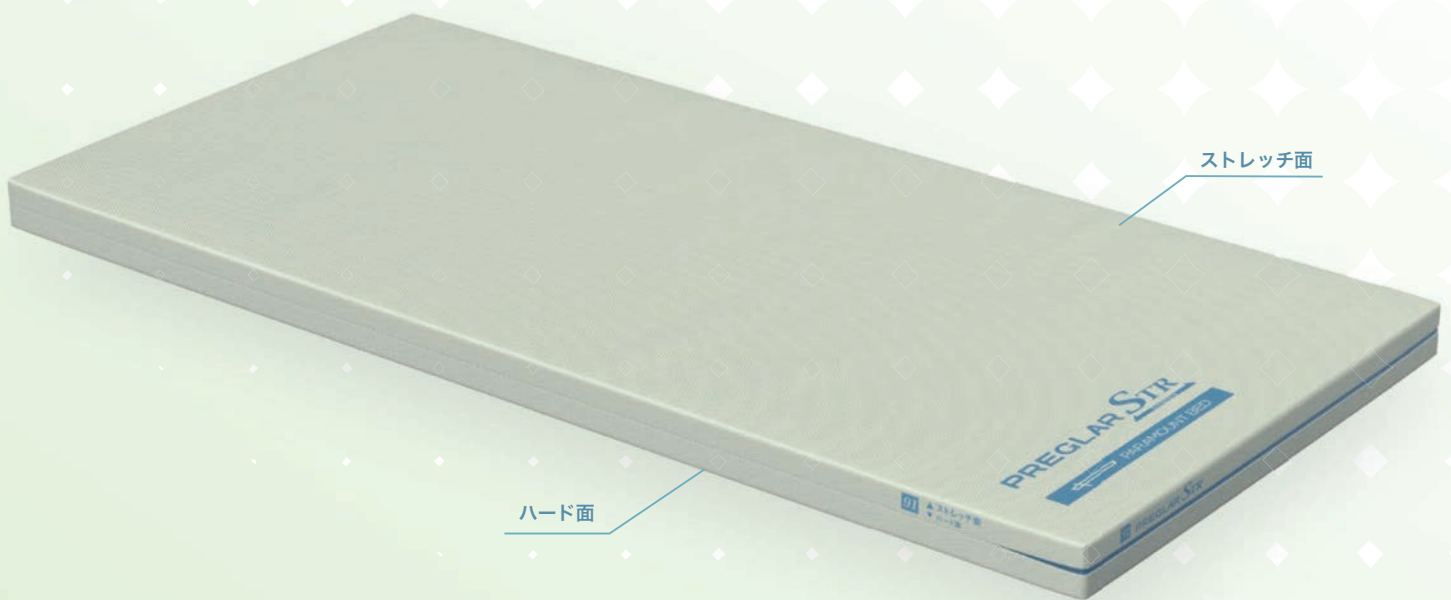

ストレッチ面

ソフトな寝心地と体のずれにくい背あげを


ストレッチ面を上にして使用すると、独自のCuttingによる立体的な伸縮で、よりソフトな感触で体に馴染むように工夫されています。また、背あげをするときには、下層になるハード面に加えたCuttingが開くことで、マットレスが伸び、体に加わる圧迫感やずれ力を軽減するとともに、足側への体のずれ落ちを抑えます。

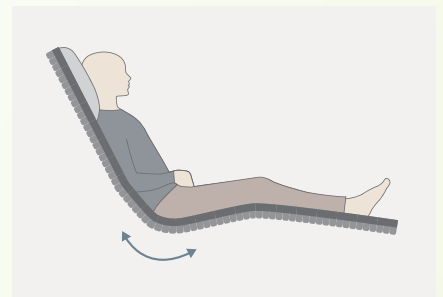

ハード面

しっかりしたクッション性で姿勢の安定性を


ハード面を上にして使用すると、ストレッチ面より体の沈み込みが少ない、しっかりとしたクッション性になります。体を動かすときや端座位をとるときなどに体を支えやすく、姿勢も安定しやすくなります。

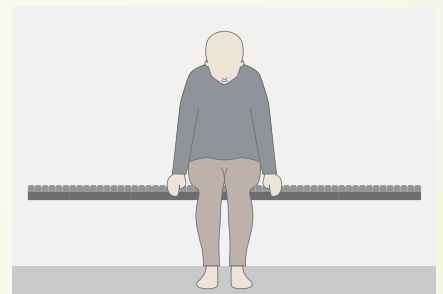

ストレッチ面を上にして使用すると

ソフトな感触で体に馴染む

ストレッチ面には、やわらかめのクッション材にオーゼティック構造のカッティングを施しています。体の形状や動きに応じ、立体的に伸縮し、よりソフトな感触で体に馴染むように工夫されています。

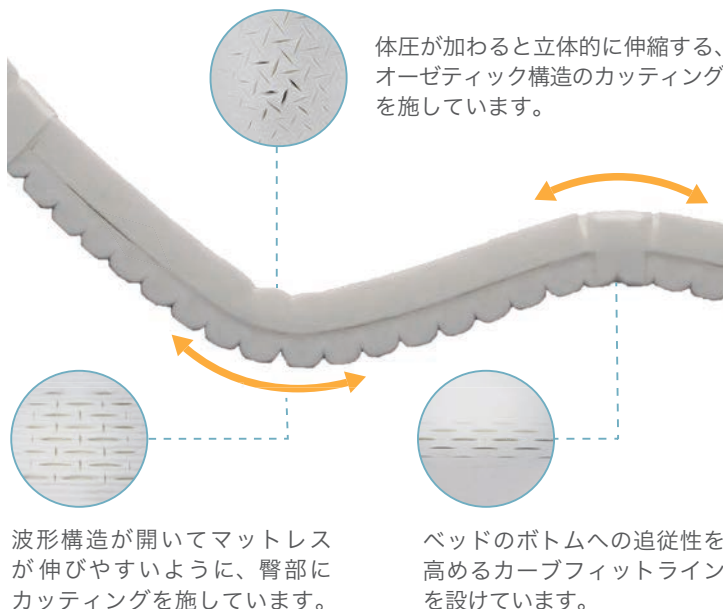


ベッドの背あげに合わせてマットレスが伸びる

ベッドの背あげに合わせてマットレスが伸びることで、背あげに伴う胸部や腹部の圧迫感、背部や臀部に加わるずれ力を軽減します。また、体が足側にずり落ちるのを抑え、安定した姿勢で起きあがれるように配慮しています。

ハード面を上にして使用すると

姿勢の安定性を高める

ハード面には成形条件を変えた、かためのクッション材を使用しています。ストレッチ面と比較して、より体の沈み込みが少ないため、体を動かすときや端座位をとるときなどに、体を支えやすく姿勢が安定しやすくなります。

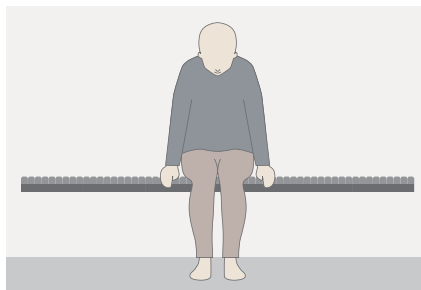

プレグラースTRマットレスレギュラー（通気タイプ）

製品コード	寸法 (cm)	重量 (kg)	TAISコード	希望小売価格
KE-511T	(幅)91×(長)191×(厚)8	8.5	00170-001656	¥60,500(税抜¥55,000)
KE-513T	(幅)83×(長)191×(厚)8	7.5	00170-001658	¥60,500(税抜¥55,000)
KE-517T	(幅)99×(長)191×(厚)8	9.0	00170-001660	¥72,600(税抜¥66,000)

プレグラースTRマットレスミニ（通気タイプ）

製品コード	寸法 (cm)	重量 (kg)	TAISコード	希望小売価格
KE-512T	(幅)91×(長)180×(厚)8	7.5	00170-001657	¥60,500(税抜¥55,000)
KE-514T	(幅)83×(長)180×(厚)8	7.0	00170-001659	¥60,500(税抜¥55,000)

材質：クッション材/ポリエステル100%、側地/ポリエステル100% ※マットレスは非課税のベッドとセットで購入する場合に限り、非課税となります。

パラマウントベッド株式会社

ホームページ URL www.paramount.co.jp

製品の
お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-03-3648**
■土・日・祝日も受付いたします。 受付時間：9:00～17:00(年始1/1～1/3は休業いたします)

〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 TEL(03)3648-1111(代)

東京支店 (03)3648-1171 (代) 名古屋支店 (052)963-0600 (代)
 札幌支店 (011)271-1181 (代) 大阪支店 (06)6443-8791 (代)
 仙台支店 (022)239-5211 (代) 高松営業所 (087)881-8900 (代)
 さいたま支店 (048)878-0100 (代) 広島支店 (082)293-1311 (代)
 横浜支店 (042)795-8800 (代) 福岡支店 (092)461-1131 (代)

製品のお求め、ご相談は……



安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。