



PARAMOUNT BED

そこに、あなたが
いるのがうれしい。

安楽に座れる。立ちあがりをサポートする。
パラマウントベッドの電動リフトアップチェア「リフミア」は、
ベッドから出て自分らしい時間を過ごすお手伝いをします。



リフミア
Lifmia
電動リフトアップチェア

POINT 1

長時間、安楽に過ごすために

くつろげる座り姿勢を


座ったとき上体を預けやすいように、背もたれは115°傾斜させています。また、腕を動かしやすいように、背もたれの高さは肩甲骨の下までとしています。

姿勢が安定しやすい座面を

お尻がずれにくく姿勢が安定しやすいように、座面を12°後傾させています。前座高は40.5cm、高齢者に配慮した少し低めの設計です。

ゆとりのある座面幅を

窮屈さを感じにくくリラックスできるように、また、姿勢の自由度を高められるように、座幅は少し広めの47cmとしています。

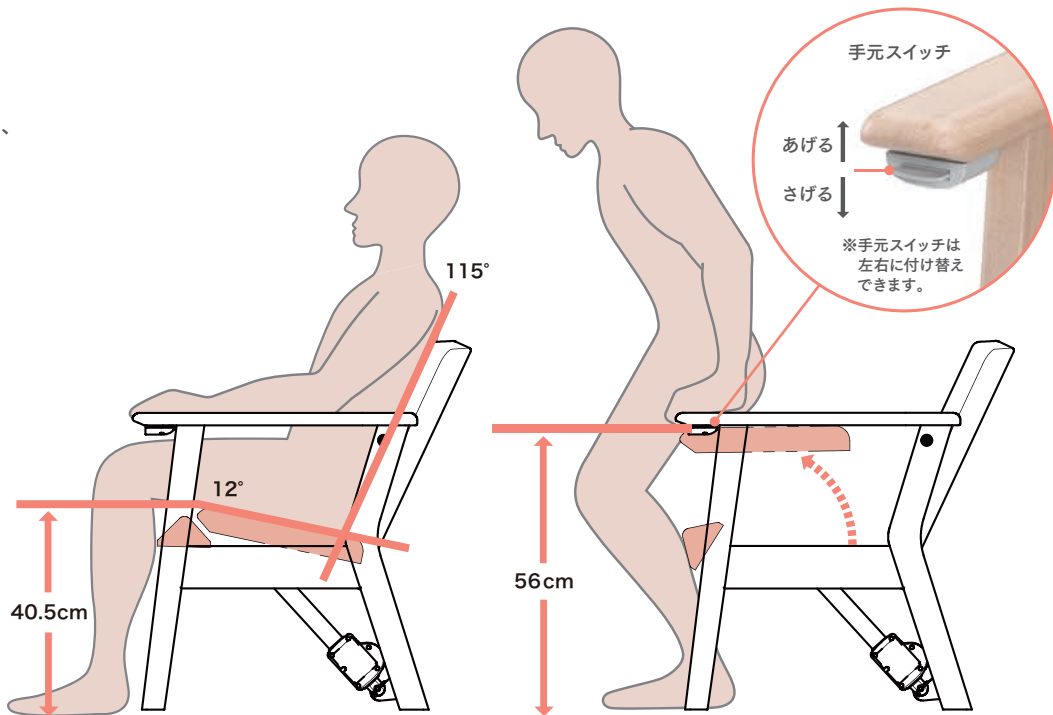

POINT 2

負担が少なく、安全に、立ちあがるために

操作が簡単な高さ調節機能を

肘掛けに手を置いたまま高さ調節のスイッチを操作できます。座面は56cmまで上昇して立ちあがりをサポートします。上昇したときの座面の角度はほぼ水平で、滑り落ちの予防に配慮しています。また、足を引いて立ちあがりやすくなるように、足元に空間を設けています。

Lifmia



仕様

製品名		電動リフトアップチェア
製品コード		KD-863
希望小売価格		オープン価格
TAISコード		00170-001664
寸法	幅	60.4cm
	奥行	68.8 cm
	高さ	74.5 cm
製品質量		20.5kg
主な材質	駆動部	スチール製：電着塗装（一部樹脂成型品）
	フレーム	天然木（ブナ材）：セラミック塗装
	手元スイッチ	ABS
	シート	側地：PVC クッション：ウレタンフォーム
電源		AC100V、50/60Hz
消費電力		130.5W
最大使用者体重		100kg
上昇時間		20秒（最低座面高から最高座面高までの所要時間）
動作保証条件（温度／湿度）		5～45℃／20℃～90％RH
動作範囲	座面角度	-12～1°（動作量13°）
	座面高	40.5～56.0 cm（動作量15.5 cm）（ゆかから座面までの高さ）

パラマウントベッド株式会社

ホームページ URL www.paramount.co.jp

製品の お問い合わせは **お客様相談室 フリーダイヤル 0120-03-3648**

※土・日・祝日も受付いたします。 受付時間：9:00～17:00（年始1/1～1/3は休業いたします）

〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 TEL(03)3648-1111(代)

東京支店 (03)3648-1171 (代) 名古屋支店 (052)963-0600 (代)
 札幌支店 (011)271-1181 (代) 大阪支店 (06)6443-8791 (代)
 仙台支店 (022)239-5211 (代) 高松営業所 (087)881-8900 (代)
 さいたま支店 (048)878-0100 (代) 広島支店 (082)293-1311 (代)
 横浜支店 (042)795-8800 (代) 福岡支店 (092)461-1131 (代)

製品のお求め、ご相談は……



安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。