



PARAMOUNT BED

体位変換器
BANANAFIT
バナナフィット スモールフロータイプ



差し込み、抜き取りがしやすく使いやすい。
「小さな体位変換」用クッション新登場!

「小さな体位変換」が簡単に実施できます。



差し込む



抜き取る



入れ替える



差し込む



抜き取る



入れ替える



差し込む

すぐに、正しく使える

クッションの上面に使用方法がプリントされています。使用方法が読める向きに持つとそのまま差し込みます。



差し込みやすい

カバーに滑りやすい素材を採用、3方向に傾斜をつけた形状により差し込みやすく、身体にフィットしやすいように配慮しています。



抜き取る

抜き取りやすい

クッションを引き出しやすいように取っ手がついています。



シートがずれにくい

上面にシートキーパーを設けています。本体部とシートキーパーの間が滑りやすく、厚みのある本体部を先に取り出すことでシートのずれを抑えられるように工夫されています。




シートキーパー 取っ手

入れ替える

次の作業を判断しやすい

特に体位制限のない場合は、左右交互に入れ替えるだけなので、左にあれば次は右に、右にあれば次は左に、作業内容が容易に判断できます。

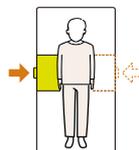

清拭消毒にも対応

カバーは耐薬品性が高く、次亜塩素酸ナトリウム(1%)を使った清拭消毒に対応しています。また、汚れが付きにくく、拭き取りもしやすい撥水加工を施しています。

使い方動画



バナナフィットSFタイプを使用した体位変換動画をご覧いただけます。

製品コード TAISコード 価格
KE-P117S 00170-001763 ¥18,700(税抜¥17,000)

○材質:カバー/ポリエステル71%・ポリウレタン29%(難燃仕様)、
詰め物/ウレタンフォーム(難燃仕様)
○寸法:幅28×長さ50×最大厚さ4cm(質量)0.25kg



パラマウントベッド株式会社

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(大代) www.paramount.co.jp
 東京支店 ☎(03)3648-1171(代) 札幌支店 ☎(011)271-1181(代) 仙台支店 ☎(022)239-5211(代)
 さいたま支店 ☎(048)878-0100(代) 横浜支店 ☎(042)795-8800(代) 名古屋支店 ☎(052)963-0600(代)
 大阪支店 ☎(06)6443-8791(代) 高松営業所 ☎(087)881-8900(代) 広島支店 ☎(082)293-1311(代)
 福岡支店 ☎(092)461-1131(代)



安全に関するご注意
 製品を正しく安全にお使いいただくため、
 ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。



ミックス
 紙 | 責任ある森林
 管理を支えています
FSC® C190744

●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
 ●記載した価格は希望小売価格です。各販売店の販売価格を制限するものではありません。

F24-C00893