



介護用ベッドと一緒に使う  
スマートフォンアプリ

ダウンロード  
無料!!



# ベッド操作アプリ

\\ このアプリでできること //

**ベッド操作** スマートフォンでベッドを操作できます



選べる操作画面



**呼出通知** ベッドからの呼出通知をスマートフォンで受信できます



呼出ボタンを押します。

表示パネル付き  
手元スイッチ



スマートフォンに通知が届きます。



天面ボタン

画面ボタン1

画面ボタン2

液晶タッチパネル付き手元スイッチの場合  
天面ボタンと2つの画面ボタンに、呼出メッ  
セージとメロディを割り当てることができ、使用  
シーンに合わせた使い方ができます。

ダウンロードはこちら

専用  
ホームページ



App Store  
からダウンロード



Google Play  
で手に入れよう



※Apple、Appleのロゴは、米国もしくはそ  
の他の国や地域におけるApple Inc.の  
商標です。App Storeは、Apple Inc.  
のサービスマークです。  
※Google PlayおよびGoogle Playロゴ  
は、Google LLCの商標です。  
※QRコードは株式会社デンソーウェブ  
の登録商標です。

## 音声や入力スイッチで操作ができます。

iOS/  
iPadOS  
のみ対応

### 音声操作

登録した言葉を順番に話すことでベッドを操作できます。



動かす場所は?

頭

動かす方向は?

上げて

頭を上げる?

はい



### 入力スイッチ操作

iOSの「スイッチコントロール」機能を利用し、接続した入力スイッチを操作してアプリ内のボタンを押すことでベッドを操作できます。



入力スイッチ



※この操作には入力スイッチやスイッチインターフェースが別途必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。

## 安全のために

必ずベッドが見える位置で操作してください。予期せぬ事故が発生する恐れがあります。

### ● ベッドの動作時間の設定

安全に少しずつベッドを動かすことができるよう、1回の操作でベッドが動く時間を設定できます(3秒、4秒など)。

時間で止まる



### ● ベッドの操作範囲の設定

意図しない角度や高さにならないよう、「頭」「足」の角度や「高さ」の動く範囲を設定できます。

角度で止まる



高さで止まる

## 呼出通知が届く範囲

- 呼出通知は、BLE (Bluetooth Low Energy) の無線が届く範囲の中で受け取ることができます。
- 無線が届く範囲はアプリの設定画面で確認ができます。



注記

呼出通知機能は、ベッド使用者がご家族や介護者を呼び出すための補助的な機能です。本機能は無線通信を使用しているため、状況によっては呼出通知が正常に受信されない可能性があり、緊急時の通知を保証するものではありません。

## 仕様

・ OSバージョン、動作確認端末／アプリ専用ホームページをご覧ください。

(表紙の専用ホームページQRコードを読み取ってください)

※一部のスマートフォンでは正しく動作しない場合があります。

・ 対応ベッド／楽匠フィットシリーズ・楽匠プラスシリーズ・クオラONEシリーズ・楽匠ウィングシリーズ

・ 登録台数／ベッド1台に対して、スマートフォンは3台まで登録できます。また、1台のスマートフォンに複数のベッドを登録することはできません。

※アプリのご利用にはインターネットに接続できる環境が必要です。 ※アプリのダウンロードとご利用には別途通信料がかかります。 ※ Bluetooth および Bluetooth ロゴは、米国 Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。本文中における ® は省略しています。 ※仕様変更により、内容やイラストが実際のアプリ画面と一致しない場合があります。



アプリに関する  
お問い合わせは

お客様相談室／フリーダイヤル **0120-03-3648**

受付時間：9:00-17:00 土・日・祝日も受付いたします。(年始1/1～1/3は休業いたします)