

# 取扱説明書

7F06750000A0

保証書付

# アジャストテーブル

KQ-090

## まえがき

このたびは、アジャストテーブルをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この「取扱説明書」には、アジャストテーブルを安全にお使いいただくための注意事項や使用方法などを記載しています。

- 正しく安全にお使いいただくために、必ずこの「取扱説明書」をお読みください。
- アジャストテーブルをお使いになる方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

## 使用目的

このアジャストテーブルは、ベッド上で食事や軽作業をするために使用するものです。

## 各部の名称

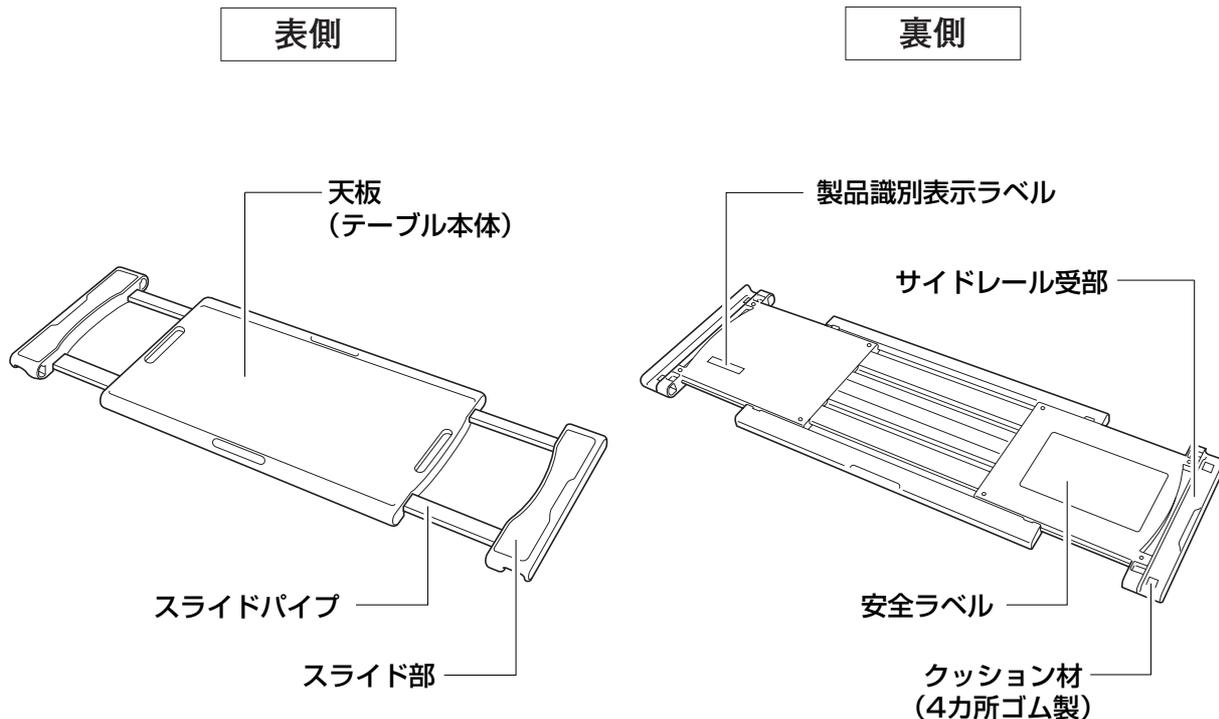

### 安全ラベルについて

- 注意事項の中で、特に注意していただきたい項目をラベルにしてアジャストテーブル裏面に貼ってあります。はがしたり傷つけたりしないでください。
- 安全ラベルが傷ついたり、はがれてしまった場合には販売店から新しい安全ラベルを取り寄せ、貼り直してください。

# 安全に使用するための注意事項



●この表示を無視して誤った取扱いをすると、生命にかかわるけがを負う可能性が想定される内容を示しています。

## ■テーブル以外の用途に使用しないでください

●思わぬけがや破損の原因となります。

## ■アジャストテーブルに手をついたり、寄り掛かったりしないでください

●アジャストテーブルが不意に動いて転倒したり、アジャストテーブルの落下によりけがをするおそれがあります。

## ■アジャストテーブルの上に乗らないでください

●転落してけがをするおそれがあります。特にお子様にはご注意ください。

## ■ベッドの背あげ・膝あげを行う場合は、アジャストテーブルをベッドから外してください

●アジャストテーブルとベッドの間などにはさまれて、けがをするおそれがあります。



●この表示を無視して誤った取扱いをすると、人がけがを負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## ■お客様による修理・改造はしないでください

●思わぬけがや故障の原因となります。

## ■15kg以上のものをのせたり、力をかけたりしないでください

●けがや変形・破損のおそれがあります。

## ■スプレータイプの殺虫剤を、アジャストテーブルに直接噴射しないでください

●殺虫剤に含まれる溶剤によってアジャストテーブルの樹脂部品が破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

## ■弊社が指定する適合品以外の製品とは組合せないでください

●アジャストテーブルと組合せるサイドレールおよびベッドは、弊社が指定する適合品をお使いください。指定以外の製品と組合せると、サイドレールやベッドに負担をかけたり、アジャストテーブルが不安定になって落下するなど、けがや破損の原因となります。

## ■天板の上に、加熱したなべ・湯わかしなどを直接のせないでください

●変形や変色などの原因となります。

## ■熱器具の近くや直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください

●変質や変形などの原因となります。

## ■アジャストテーブルを持つときは、スライド部に注意してください


●スライド部が不意に伸びた場合、アジャストテーブルが足の上にぶつかるなど、けがをするおそれがあります。

## ■アジャストテーブルをご使用の際は、サイドレールの上栈にしっかりとはめてください

●アジャストテーブルがしっかりとハマっていないと、アジャストテーブルが落下してけがをするおそれがあります。

## ■アジャストテーブルはサイドレールの使用範囲内で使用してください

●アジャストテーブルは、下図で示された範囲内(サイドレールの上栈の直線部分)で使用してください。この範囲からはみ出して使うと、アジャストテーブルが落下してけがをするおそれがあります。

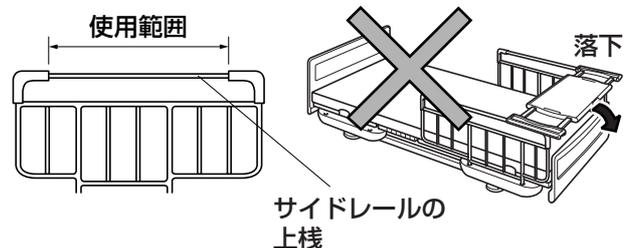


## ■テーブル幅を調整するときは、スライド部に指や手を入れないでください

●思わぬけがの原因となります。

## ■落としたり、投げたりしないでください

●けがや破損の原因となります。

## 使用方法

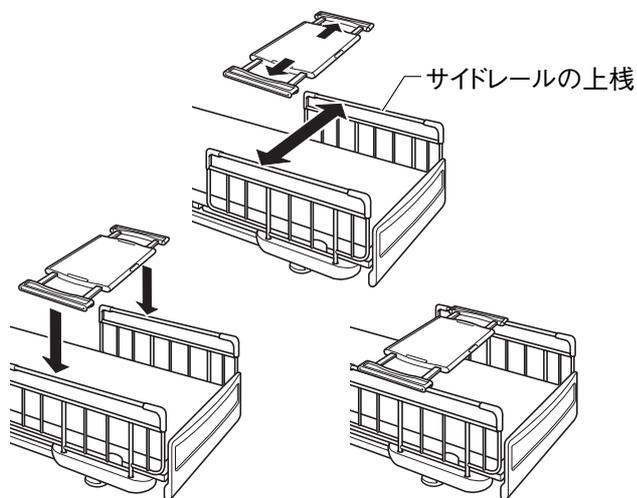

① サイドレール上栈の取付幅に合わせて両サイドのスライド部を引出してください。



● スライド部の引出し量は、左右均等にしてください。

② サイドレールの上栈に、クッション材（4カ所）がすべての状態でアジャストテーブルをはめてください。

※ サイドレールの取付けについては、サイドレールまたはベッドの取扱説明書をご覧ください。



● 折りたたみベッドサイドレールをご使用の場合は、サイドレールのロックが確実にかかっていることを確認してください。ロックがかかっていないと、サイドレールが不意に折りたたまれ、アジャストテーブルが落下してけがをするおそれがあります。

アジャストテーブルを使用しないときはサイドレールから外し、両サイドのスライド部を押し込み、安全な場所に保管してください。

なお、アジャストテーブル用ラックKF-099（別売）を使用しますと、最大で4枚のアジャストテーブルを収納することができます。



● ソフトガードサイドレール、ソフトカバー付ベッドサイドレール、スイングアーム介助バーには使用できません。

## お手入れ・長期保管について



- スライド部を最大に広げた状態にすると、各部の清拭がしやすくなります。
- 清拭する場合は、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよくしぼって拭き、その後水で浸した布をよくしぼって残った洗剤分を拭きとってください。最後に乾いた布で拭きとってください。
- クレゾールやシンナー、ベンジン、ガソリンなどは使用しないでください。変色・変質させるおそれがあります。
- 長期間ご使用にならない場合は、直射日光を避け、保管してください。

## 仕様

品名	アジャストテーブル	
品番	KQ-090	
本体色	ベージュ	
本体寸法	幅 (mm)	700~1062
	奥行 (mm)	320
	高さ (mm)	30
サイドレール受部(芯~芯)寸法(mm)	650~1012	
本体質量 (kg)	2.6	
最大使用荷重 (kg)	15	
材質	テーブル本体	ポリプロピレン (PP)
	スライド部	ABS樹脂
	スライドパイプ	アルミ、アルマイト仕上げ

# アフターサービスについて

## 1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## 2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店、または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンターまでご連絡ください。

### ■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号(裏側に貼付：1ページ「各部の名称」参照) ●お買い上げ日
- 破損または異常の内容(できるだけ詳しく) ●施設名、お名前、ご住所および電話番号

### ■消耗部品について

クッション材は消耗部品です。(1ページ「各部の名称」参照)

### ■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

### ■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

## 3. 部品の最低保有年数は

弊社では、製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間を製造打ち切り後6年としております。

## 4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

コールセンター ☎0120-54-8639

受付時間 平日9:00~17:20 (土・日・祝日・夏季休業・年末年始休業を除く)

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する、弊社100%出資の会社です。

## 保証書

品名/品番 アジャストテーブル / KQ-090		保証期間	お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前	販売店				
	〒 ( ) ご住所		☎ ( )			

### 【保証規定】

- 1.保証期間内(お買い上げの日より1年間)に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 2.次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
  - (1) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
  - (2) 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
  - (3) お買い上げ後の移動、設置、落下、あるいは輸送による故障および損傷
  - (4) 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
  - (5) 保証書のご提示がない場合
  - (6) 本保証書の保証期間および販売店名の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
- 3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
  - This warranty is valid only in Japan.
- 4.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	東京営業部	☎(03)3648-1171(代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11		☎(011)271-1181(代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3		☎(022)239-5211(代)
さいたま支店	〒338-0001	さいたま市中央区上落合9丁目4番7号		☎(048)852-0707(代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間1715番地1		☎(042)795-8800(代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号		☎(052)963-0600(代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号		☎(06)6443-8791(代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号		☎(082)293-1311(代)
高松支店	〒761-8031	高松市郷東町223番1		☎(087)881-8800(代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号		☎(092)461-1131(代)