

取扱説明書

7K00209800A2

保証書付

KF-813,KF-814

オーバーベッドテーブル

まえがき

このたびは、オーバーベッドテーブルをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この「取扱説明書」には、オーバーベッドテーブルを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- オーバーベッドテーブルをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- オーバーベッドテーブルを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

このオーバーベッドテーブルは、ベッド上で食事や軽作業をする際に使用することを目的として作られています。

各部の名称

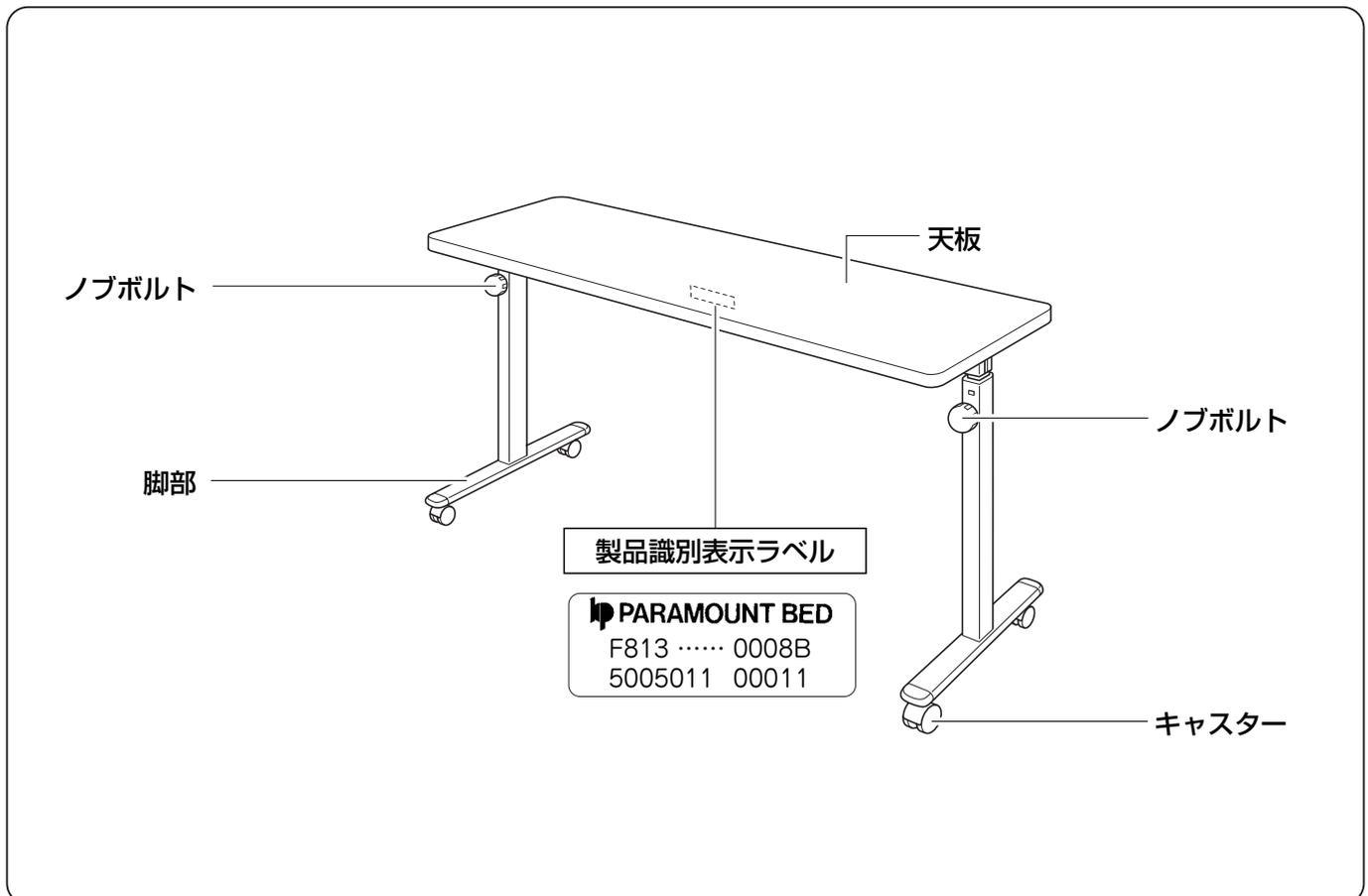

安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、生命にかかわるけがを負う可能性が想定される内容を示しています。

■テーブル以外の用途に使用しないでください



●歩行器や手すりなどの目的で使用しないでください。転倒してけがをしたり、オーバーベッドテーブルが破損・変形するおそれがあります。

■オーバーベッドテーブルに寄り掛からないでください




●転倒してけがをしたり、オーバーベッドテーブルが破損・変形するおそれがあります。

■オーバーベッドテーブルの上に乗らないでください



●転落・転倒して、けがをするおそれがあります。特にお子様にはご注意ください。

■ベッドの操作を行う場合は、オーバーベッドテーブルをベッドから外してください

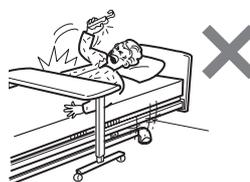

●オーバーベッドテーブルとベッドの間などにはさまれて、けがをするおそれがあります。

■滑りやすいゆか面では使用しないでください

●ほこりや水分などの浮いたゆか面や滑りやすい材質のゆか面では、オーバーベッドテーブルを使用しないでください。オーバーベッドテーブルが動きやすくなり、転倒してけがをするおそれがあります。

安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人がけがを負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。


■お客様による修理・改造はしないでください



分解禁止


- 思わぬけがや故障の原因となります。

■ものを載せた状態でオーバーベッドテーブルの移動・高さ調節はしないでください

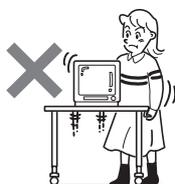

- ものが落下して、けがをするおそれがあります。

■30kg以上のものを載せないでください

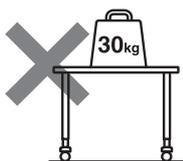

- けがや故障、破損・変形の原因となります。

■スプレータイプの殺虫剤をオーバーベッドテーブルに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によってオーバーベッドテーブルの天板や他の樹脂部分が破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

■熱器具の近くや直射日光の当たる場所では使用しないでください

- 変質・変形・発火などの原因となります。

■段差のある路面での移動は避けてください

- 故障の原因となります。やむを得ない場合はオーバーベッドテーブルを、できるだけゆっくりと動かして移動させてください。

■天板に粘着力の強いテープなどを貼り付けないようにしてください

- 表面のはがれ・破損の原因となります。

■天板の上に、加熱したなべ・湯わかしなどを、直接載せないでください

- 変形・変色の原因となります。

■天板に飲み物などの水分をこぼしたり、水分を含んだものを放置しないでください

- 変色・変質・変形の原因となります。濡れたらすぐに拭き取ってください。

■使用するときには支柱が固定されていることを確認してください


- スライドパイプのくぼみに、ノブボルト先端がしっかり固定されていることを必ず確認してください。ノブボルトがしっかり固定されていないと天板が落下し、けがをするおそれがあります。

■天板の高さ調節は必ず手で支えながら行ってください


- 天板を支えないでノブボルトをゆるめると、天板の落下により指をはさむなど、けがをするおそれがあります。

開梱と部品の確認

●開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。
万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

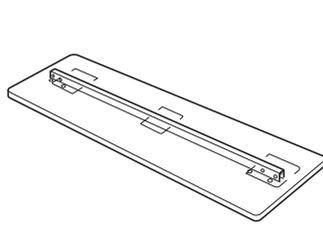

天板×1枚

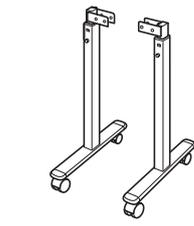

脚部×2本
(スライドパイプ付)



取扱説明書×1部

使用工具



スパナ(対辺13mm)×2

※付属されていません。
お客様でご用意ください。



ノブボルト×2個



ナット×4個



M8ボルト×4本



座金×4個


組立方法




ちゅう
注 意

●ボルトは確実に締付け、ゆるみがないことを確認してください。ボルトがゆるむと脚部が倒れ、転倒するなどして、けがをするおそれがあります。

①ノブボルトでスライドパイプを脚部に固定し、テープをはがしてください。

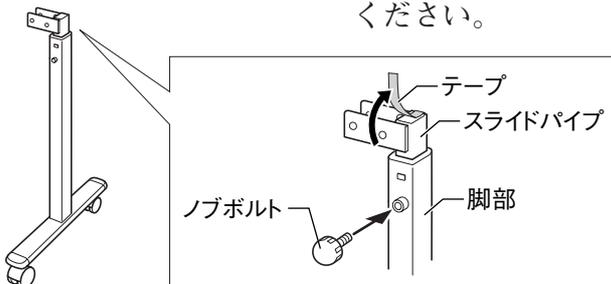


②天板を裏返して水平なゆかに置き、図のようにボルト・ナット類を仮止めしてください。

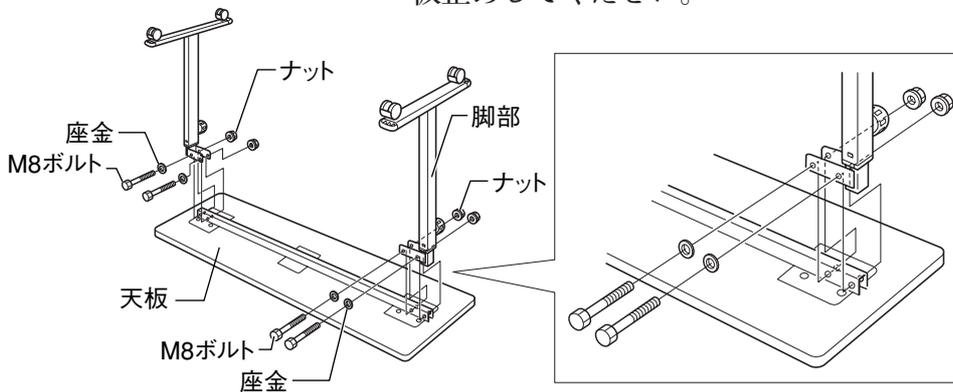

●電動工具を使用する場合、組立時の推奨締付トルクは15～25N・mです。

③すべてのボルト・ナットを工具でしっかりと締付けてください。

使用方法

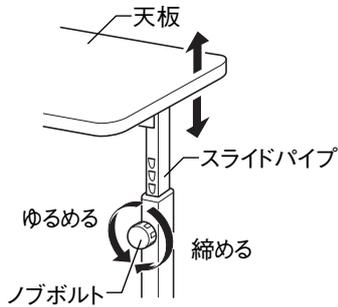


■テーブルの高さ調節

- ①必ず天板を支えながら、片側のノブボルトをゆるめてください。天板を上下させ、お好みの高さに調節し、ノブボルトをしっかりと締付けてください。
- ②調節したスライドパイプ側の目盛シールで、位置の数字を確認してください。
- ③反対側も同様に目盛シールの数字が同じになるよう高さ調節を行ってください。

⚠ 注意

- テーブルの高さ調節をする際は、必ず天板を支えながら行ってください。天板を支えずにノブボルトをゆるめると急に天板が落下し、けがをするおそれがあります。
- スライドパイプのくぼみに、ノブボルト先端がしっかり固定されていることを必ず確認してください。ノブボルトがしっかり固定されていないと天板が落下し、けがをするおそれがあります。
- 高さ調節の際は、必ず両脚部の高さをあわせてください。

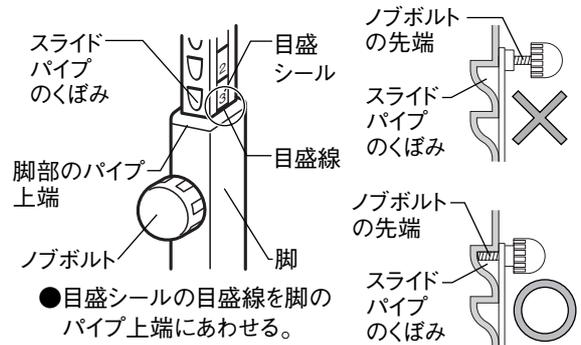

●目盛シールの目盛線を脚のパイプ上端にあわせる。

お手入れ・長期保管について



- 清拭する場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、その後水でひたした布をよくしぼって残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で拭き取ってください。
※揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質させるおそれがあります。



- オゾン殺菌器、オートクレーブなどには対応できません。
- 洗剤、消毒剤を用いたのち、水拭きを怠ると樹脂の部分が割れるおそれがあります。

- 本取扱説明書と組立部品を袋などに入れて、本体と一緒に保管してください。
- 高温・多湿・ほこりの多い場所を避けてください。

仕様

品名	オーバーベッドテーブル	
品番	KF-813	KF-814
全幅	1210mm	1130mm
奥行	400mm	
高さ	630～955mm (13段階調節)	
製品質量	約16kg	約15kg
材質	天板：メラミン樹脂化粧板張り(心材：パーティクルボード) スライドパイプ・脚部：スチール	
最大使用荷重(耐荷重)	30kg	
キャスター	φ40mm樹脂製双輪キャスター	

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げ販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンターまでご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（天板裏側の金具側面に貼付：表紙「各部の名称」参照）
- お買い上げ日 ●故障または異常の内容（できるだけ詳しく） ●施設名、お名前、ご住所および電話番号

■消耗部品について

キャストは消耗部品です。

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。

ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後6年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

コールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日9：00～17：20（土・日・祝日・夏季休業・年末年始休業を除く）

【パラテクノ株式会社について】弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する、弊社100%出資の会社です。

保証書

品名/品番 オーバークラウドテーブル / KF-813,814		保証期間	*お買い上げ日		
お客様様	お名前	*販売店	年	月	日より1年間
	〒 () ご住所		☎ ()		

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、ラベル類などの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

【保証規定】

1.保証期間内（お買い上げの日より1年間）に正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。

2.次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。

- (1) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
- (2) 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
- (3) お買い上げ後の移動、設置、落下、あるいは輸送による故障および損傷

(4) 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷

(5) 保証書のご提示がない場合

(6) 本保証書の保証期間および販売店名の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合

3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

● This warranty is valid only in Japan.

4.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	東京営業部	☎(03)3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11		☎(011)271-1181 (代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3		☎(022)239-5211 (代)
さいたま支店	〒338-0001	さいたま市中央区上落合9丁目4番7号		☎(048)852-0707 (代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間1715番地1		☎(042)795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号		☎(052)963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号		☎(06)6443-8791 (代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号		☎(082)293-1311 (代)
高松支店	〒761-8031	高松市郷東町223番1		☎(087)881-8800 (代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号		☎(092)461-1131 (代)