

取扱説明書

7F06035100A1

KA-039
歩行補助器用かご

まえがき

このたびは、歩行補助器用かごをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、歩行補助器用かごを安全にお使いいただくための注意事項と取付方法などを記載しています。

- 歩行補助器用かごをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- 歩行補助器用かごを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

この歩行補助器用かごは、歩行補助器（KA-391・392）に取付けて、小物などを入れることを目的に作られています。

安全に使用するための注意事項

**注意**

- この表示を無視して誤った取扱をすると、人がけがを負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■弊社が指定する適合品以外の製品とは組合せないでください

- この歩行補助器用かごは、歩行補助器（KA-391・392）専用です。
弊社が指定する適合品以外の製品と組合せると、思わぬけがや破損の原因となります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。

■3kg以上のものを載せないでください

- 破損・変形の原因となります。

■火気に近づけないでください

- かごをストーブなどの熱器具へ近づけないでください。変質・変形・発火などの原因となります。

■スプレータイプの殺虫剤を歩行補助器用かごに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によって樹脂部分が破損・変色・溶解するおそれがあります。
また破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがありますので十分ご注意ください。


■歩行補助器用かごを持って歩行補助器を動かさないでください

- 歩行補助器用かごが不意に動き、転倒してけがをしたり、破損・変形するおそれがあります。

仕様


品名	歩行補助器用かご
品番	KA-039
寸法	全幅250×奥行170×高さ275mm
製品質量	0.4kg
本体色	グレー
材質	スチール製/PEコーティング処理
耐荷重	3kg

取付方法

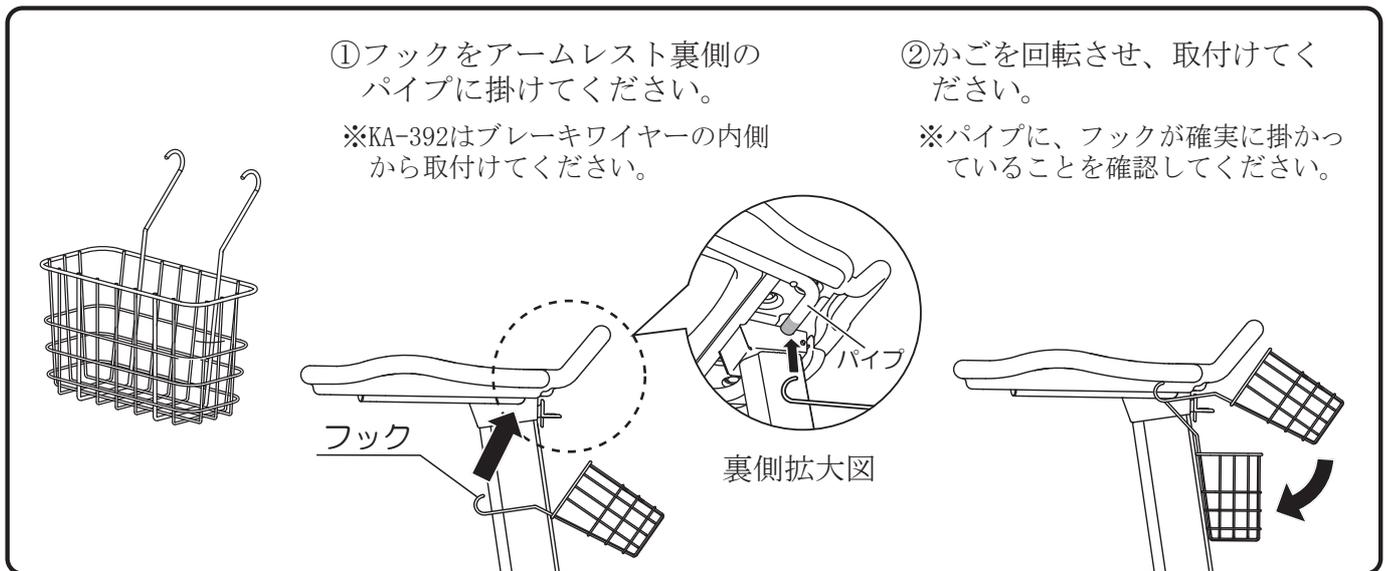

お手入れ・長期保管について

- 清拭する場合は、水で薄めた中性洗剤をひたした布をよくしぼって拭き、その後水でひたした布をよくしぼって残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で拭き取ってください。
- ※揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質させるおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度でご使用ください。

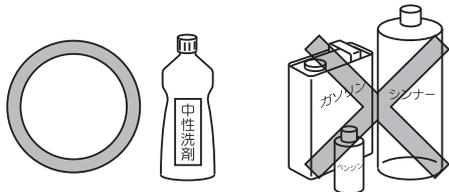

- 0.05～0.2%塩化ベンザルコニウム(オスバンなど)
- 0.05～0.2%塩化ベンゼトニウム(ハイアミンなど)
- 0.05%グルコン酸クロルヘキシジン(ヒビテンなど)



- オゾン殺菌器、オートクレーブなどには対応できません。

アフターサービスについて

- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

コールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間: 平日9:00～17:20(土・日・祝日・夏季休業・年末年始休業を除く)

※パラテクノ株式会社 … 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する、弊社100%出資の会社です。

本 社	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	東京営業部	☎(03) 3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11		☎(011) 271-1181 (代)
仙台支店	〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3		☎(022) 239-5211 (代)
さいたま支店	〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号		☎(048) 852-0707 (代)
横浜支店	〒194-0004 東京都町田市鶴間1715番地1		☎(042) 795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号		☎(052) 963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号		☎(06) 6443-8791 (代)
広島支店	〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号		☎(082) 293-1311 (代)
高松支店	〒761-8031 高松市郷東町223番1		☎(087) 881-8800 (代)
福岡支店	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号		☎(092) 461-1131 (代)