


## 取扱説明書

# KF-890 端座位保持テーブル

しっかり端座位  
**Sittan**  
端座位保持テーブル [しったん]

保証書付

7F07748700A2

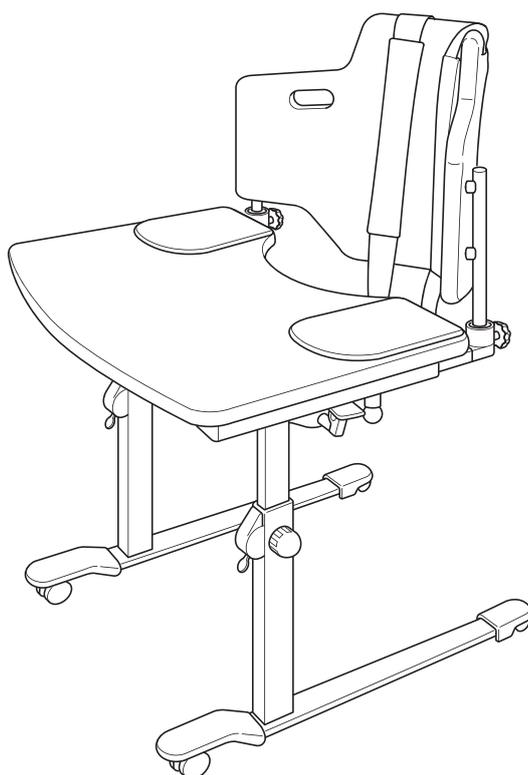

### まえがき

このたびは、端座位保持テーブル（以下、テーブル）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、テーブルを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- テーブルをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- テーブルを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

# もくじ

---

<b>1</b>	使用目的 / 各部の名称 .....	2
<b>2</b>	安全に使用するための注意事項 .....	3 ~ 5
<b>3</b>	開梱と部品の確認 .....	6
<b>4</b>	組立方法 .....	6
<b>5</b>	使用方法	
	1. テーブルの設置 .....	7 ~ 9
	2. 背面ユニットの設置 .....	10
	3. 設置後の確認 .....	11
	4. テーブルのたたみかたと収納 .....	12
<b>6</b>	仕様 .....	13
<b>7</b>	定期点検と日常のお手入れ .....	13
<b>8</b>	長期保管について .....	14
<b>9</b>	アフターサービスについて .....	14

# 1 使用目的 / 各部の名称

## ■使用目的


●この端座位保持テーブルは、自力座位が困難な方のベッドサイドでの端座位をサポートするために使用されることを目的に作られています。

※身体を拘束する為の器具ではありません。

## ■各部の名称

サポートパッド(別売:KF-80)

●腹部とテーブルとの接触をやわらげ、姿勢をやさしくサポートします。使用される方の正面に取り付けできます。

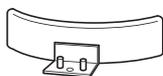

※取付ける際は必ずサポートパッドの取扱説明書をお読みください。

肘パッド

天板

製品識別表示ラベル  
(天板裏に貼付)

▶PARAMOUNT BED  
F890.....0009J  
1007001 00003


※端座位保持テーブルの品番は、製品識別表示ラベルに表示されています。  
F890→KF-890を示します。

高さ調節レバー

支柱

前輪キャスター  
(ストッパー付)

前

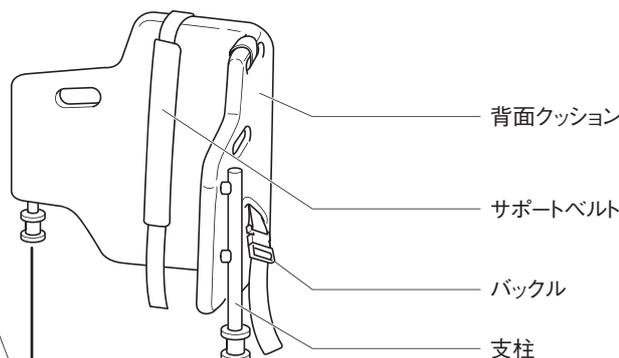

背面クッション

サポートベルト

バックル

支柱

後

背面固定ノブボルト

背面ユニット受

奥行調節パイプ

奥行調節レバー

折りたたみレバー

ノブボルト

後輪キャスター  
(ストッパーなし)

脚

## 2 安全に使用するための注意事項

■必ずご使用の前にこの「安全に使用するための注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度に応じて「△警告」と「△注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺 <sup>まひ</sup> など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### 〔安全ラベルについて〕

- 注意事項の中で、特に注意していただきたい項目をラベルにして天板の表・裏、支柱、背面ユニット受に貼ってあります。はがしたり傷つけたりしないでください。
- 安全ラベルが傷ついたり、はがれてしまった場合には販売店から新しい安全ラベルを取寄せ、貼り直してください。

**警告**

3F07793500A1

- ・専門家（医師や看護師など）の判断のもと使用してください。また必ず専門家が許可した者の監視のもとで使用してください。使用する方の容態悪化やけがのおそれがあります。
- ・テーブルの上に乗らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ・立ち上がる際の支えにしないでください。また、歩行器や手すりなどの目的で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ・ベッドと組合せて使用する場合は、ベッドを動作させないでください。けがや破損のおそれがあります。
- ・滑りやすい床面では使用しないでください。不意にテーブルが動き、転倒してけがをすることがあります。
- ・使用する際は、キャスターをロックしてください。転倒してけがをすることがあります。
- ・背面ユニットに手をついたり、外部から寄りかかったりしないでください。転倒してけがをすることがあります。


---

**注意**

- ・テーブル面には30kg以上のものを置かないでください。破損するおそれがあります。
- ・キャスター周りのすき間などに足をさまさないようにしてください。けがをすることがあります。
- ・テーブル面に水分、および水分を含んだものを放置しないでください。変質・変形の原因になります。

ご購入や製品のお問い合わせ  
03-3648-1171

パラマウントベッド株式会社

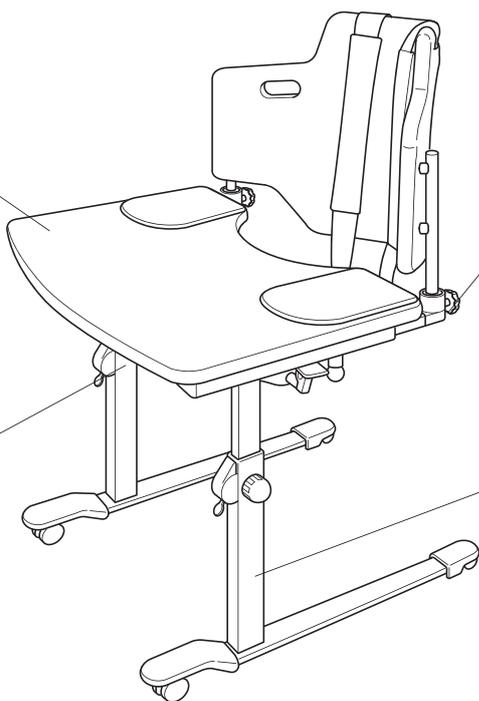

**注意**


指ばさみ注意  
ノブの固定確認

外形寸法	品質表示	
幅	: 680mm	
高さ ( 甲板 )	: 550mm (550~800mm)	
奥行	: 767mm	
甲板の表面材	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)	
表面加工	支柱 : めっき (クロム)	
	脚 : メラミン樹脂塗装	
取扱い上の注意	●直射日光又は熱を避けてください。 ●加熱したなべ、湯沸かしなどを直接置かないでください。	
表示者	パラマウントベッド株式会社 TEL (03) 3648-1171	

**注意**

・テーブル面には30kg以上のものを置かないでください。破損する恐れがあります

**高さ調整方法**

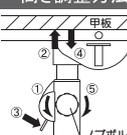

■高さを上げる場合  
①ノブをゆるめる。  
②甲板を持ち上げて調節。  
③ノブを締める。

■高さを下げる場合  
①ノブをゆるめる。  
②甲板を持ち上げた状態で、  
③高さ調節レバーを押す。  
④甲板を下げて調節。  
⑤ノブを締める。

3K01670200A0



■**専門家（医師や看護師など）の判断のもと使用してください。また必ず専門家が許可した者の監視のもと使用してください**

●使用する方の容態悪化やけがのおそれがあります。

■**目的以外の用途に使用しないでください**

●歩行器や手すりなどの目的で使用しないでください。転倒してけがをしたり、テーブルが破損・変形するおそれがあります。

■**テーブル使用時は、キャスターをロックしてください**

●転倒してけがをするおそれがあります。

■**テーブルを固定する際は、必ず左右のストッパーを固定してください**

●片側のみを固定するとテーブルが不安定になり、転倒してけがをするおそれがあります。

■**テーブルをベッドに設置しているときは、ベッドの操作をしないでください**

●背あげ・高さ調節などベッドの操作をすると、ベッドとテーブルの間にはさまれて、けがや破損のおそれがあります。

●ベッドの背・膝あげや高さ調節などを行う場合はテーブルをベッドから離してください。

■**滑りやすいゆかでは使用しないでください**

●ほこりや水分などの浮いたゆかや滑りやすい材質のゆかでは、テーブルを使用しないでください。テーブルが動きやすくなり、転倒してけがをするおそれがあります。

■**テーブルの上に乗らないでください**

●転落・転倒してけがをするおそれがあります。

■**テーブル本体・背面ユニットに手をついたり、外側から寄り掛かったりしないでください**

●転倒してけがをしたり、テーブル・背面ユニットが破損・変形するおそれがあります。

■**脚の上に乗らないでください**

●転倒してけがをしたり、脚が破損・変形するおそれがあります。

■**お客様による修理・改造はしないでください**

●思わぬけがや故障の原因となります。

■**熱器具（ストーブなど）の近くや直射日光の当たる場所では使用しないでください**

●変質・変形・発火などの原因となります。

■**ベッドに設置する際は、コード類（電源コードなど）をはさまないようにしてください。**

●コード類を傷つけると、漏電や火災のおそれがあります。特に電源コードはテーブルを入れる側とは反対側に配線するようにしてください。

■**テーブルをベッドに設置した状態で、テーブルの高さ調節はしないでください。**

●はさまれて、けがをするおそれがあります。

●高さ調節の際は、テーブルをベッドから離してください。

■**ものを載せた状態でテーブルの移動や高さ調節はしないでください。**

●ものが落下して、けがをするおそれがあります。

## 2 安全に使用するための注意事項



### ■段差のある場所での移動は避けてください

- 故障・破損・変形の原因となります。やむを得ない場合は、テーブルをできるだけゆっくりと動かして移動させてください。

### ■テーブルの高さ調節は必ず天板を手で支えながら行ってください

- 天板を支えずに調節すると、不意に天板が落下して身体の一部がはさまれるなどして、けがをするおそれがあります。

### ■天板の上に 30kg を超えるものを載せないでください

- 故障・破損・変形の原因となります。また、破損・変形によりけがをするおそれがあります。

### ■使用するときにはノブボルトが固定されていることを確認してください

- ノブボルトがしっかり固定されていることを確認してから使用してください。ノブボルトがしっかり固定されていないと天板が落下し、けがをするおそれがあります。

### ■足先をはさまないように注意してください

- 前輪キャスターと脚（水平のパイプ）の間などに、足や指をはさまれないようにしてください。けがをするおそれがあります。

### ■スプレータイプの殺虫剤をテーブルに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によってテーブルの天板や他の樹脂部分が破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

### ■天板の上に、加熱したなべ・湯わかしなどを直接載せないでください

- 変形・変色の原因となります。

### ■天板に飲み物などの水分をこぼしたり、水分を含んだものを放置しないでください


- 変色・変質・変形の原因となります。濡れたらすぐに拭き取ってください。

### ■天板に粘着力の強いテープなどを貼り付けないようにしてください


- 表面のはがれ・破損の原因となります。

### 3 開梱と部品の確認


■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

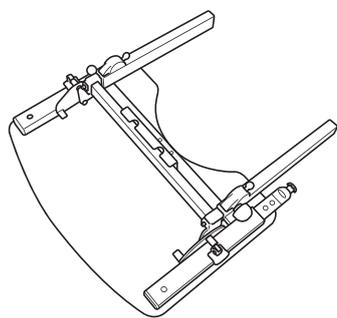

本体(1台)

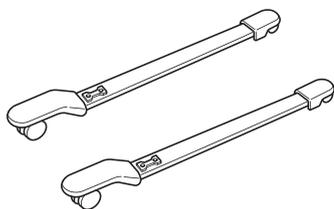


脚(2本)

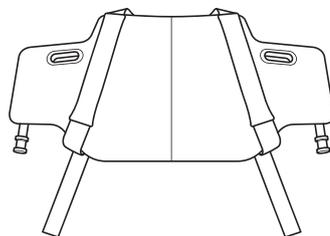

背面ユニット(1台)



六角レンチ(1本)  
(対辺5mm)

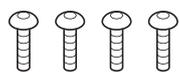


ボルト(4本)




ワッシャー(4個)




肘パッド(2枚)

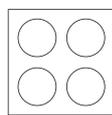

粘着シール(4枚)

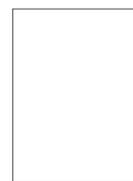


粘着シール説明書×1部

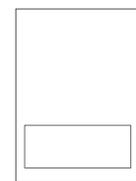

取扱説明書×1部

### 4 組立方法

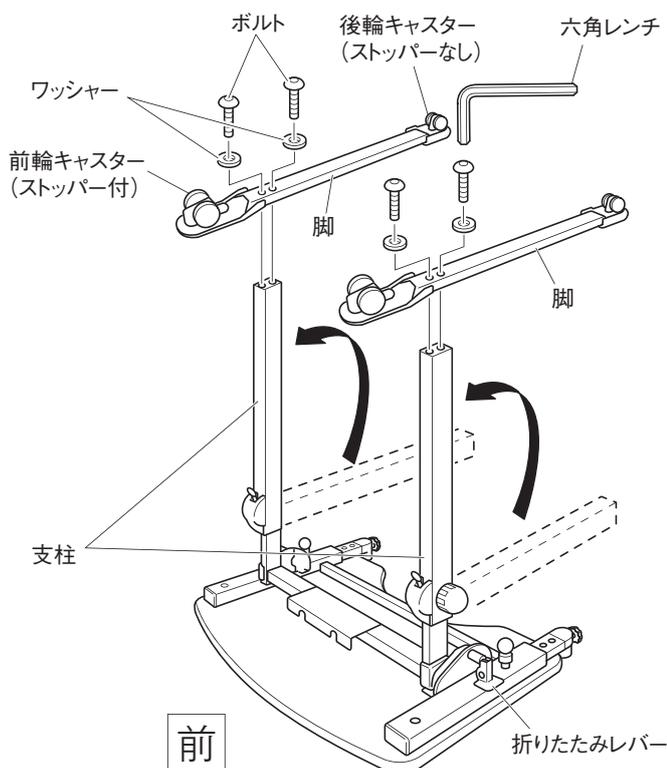

- ①左右両側の折りたたみレバーを引き、天板と支柱が垂直になるように調節してください。
- ②天板を裏返し、水平なゆかに置いてください。
- ③左図を参照して、脚の前輪キャスター（ストップバー付）が前側になるようにしてください。
- ④支柱と脚の穴位置をあわせ、ボルトにワッシャーを通して仮止めし、付属の六角レンチでしっかりと締付けて固定してください。（4ヶ所）



●脚と支柱を固定する際の推奨締付トルクは、7N・mです。

## 5 使用方法



- テーブルをベッドに設置しているときは、ベッドの操作をしないでください。背あげ・高さ調節などベッドの操作をすると、ベッドとテーブルの間にはさまれて、けがをするおそれがあります。
- 安定した端座位を保持できないマットレスは使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。



- 安全のため、設置は介助者 2 人（使用する方を支える方とテーブルを設置する方）以上で行ってください。


### 手順

■ 以下の手順で使用してください。


1. テーブルの設置
2. 背面ユニットの設置
3. 設置後の確認
4. テーブルのたたみかたと収納



### 1. テーブルの設置

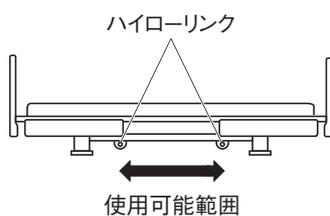

- 設置の際には、ベッドのハイローリンクとの接触にご注意ください。破損の原因となります。

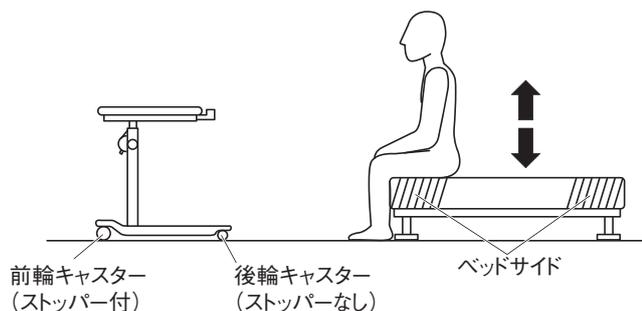


- ① 介助する方がご使用になる方を支えながら、ベッドサイドに深く座らせてください。高さ調節ができるベッドの場合は、足の裏全体がゆかにつき無理のない姿勢（膝の角度が約 90°）になるように、ベッドの高さを調節してください。足の裏全体がゆかにつかない場合は、足台などを使用してください。

② テーブルを設置する前に、テーブルの高さを決めてください。テーブルの高さは使用する方が端座位をとったときに、約 90° に曲げた肘の高さを目安にあわせてください。

< 高さをあげる場合 >

- ① 左右のノブボルトをゆるめてください。
- ② 天板を持ち上げて、お好みの高さに調節してください。
- ③ 左右のノブボルトをしっかりと締付けて固定してください。

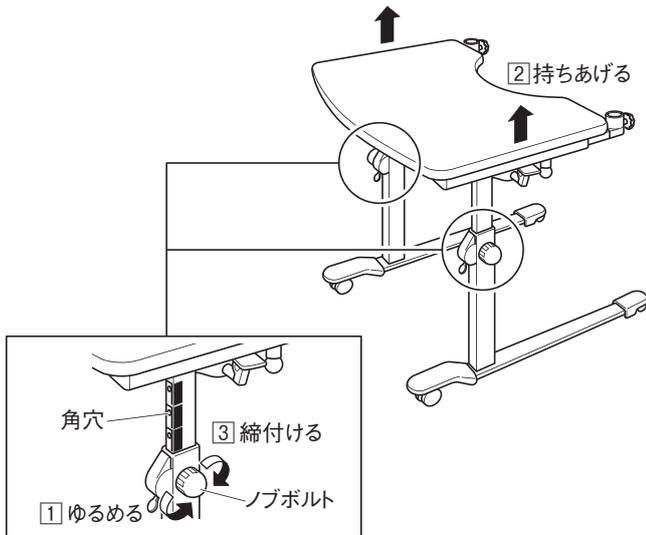


< 高さをさげる場合 >




● 操作は片側ずつ行ってください。

- ① 片側のノブボルトをゆるめてください。
- ② 天板を少し持ちあげた状態で、高さ調節レバーを押します。
- ③ ゆっくりと天板をさげてお好みの高さで高さ調節レバーを離してください。
- ④ ノブボルトをしっかりと締付けて固定してください。
- ⑤ 反対側も同様に同じ高さまでさげてください。

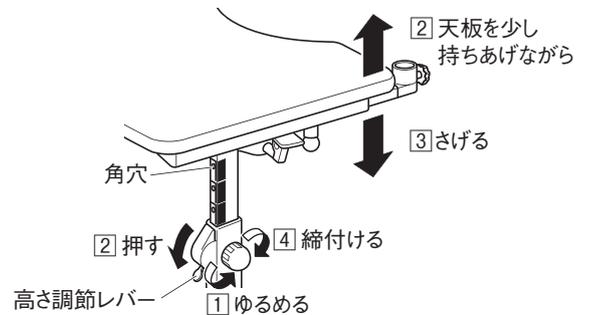

- 左右の支柱が同じ高さになるように目盛をあわせてください。
- 高さ調節の際に、身体などをはさまないように注意してください。

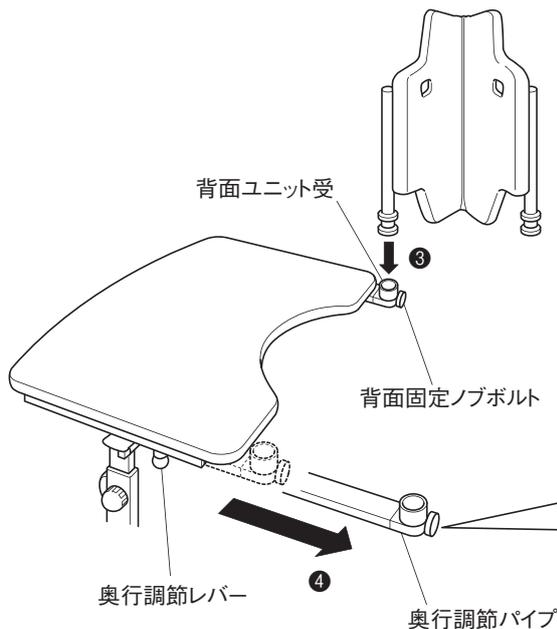


- ③ 片方の背面ユニット受に背面ユニットを挿し、背面固定ノブボルトを確実に締付けてください。  
※背面ユニットが動いて周りのものにぶつからないように気をつけてください。

- ④ 反対側の奥行調節パイプを引き出してください。


< 奥行調節方法 >

- 奥行調節レバーを下に引きながら、奥行調節パイプを引き出してください。

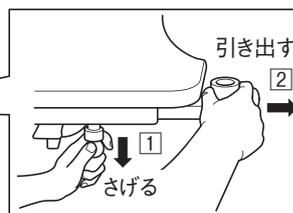

● 奥行調節の際は、奥行調節パイプと天板の間に手や指などをはさまれないようにしてください。けがをするおそれがあります。

## 5 使用方法

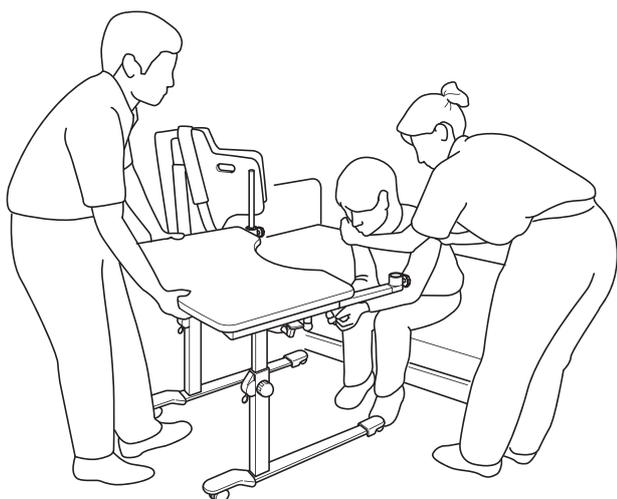

⑤ 使用する方の前にテーブルを設置してください。

※サイドレールなどがあり、テーブルを設置しづらい場合は、サイドレールなどを取外してください。



**注意**

- 腹部とテーブルの間に適度なすき間を空けてください。すき間がないと腹部を圧迫するおそれがあります。



⑥ 使用する方の両手をテーブルの上に置いてください。

※肘パッドは使用する方の必要に応じて裏面（黒）を下に向けて、肘の下に敷いてください。



- テーブルの高さがあわない場合は、8ページを参照して再度高さを調節してください。その際、背面ユニットを一度外してから行ってください。



⑦ 前輪キャスターのストッパーをロックしてください。前輪キャスターが内側に入ってロックしづらい場合は、左図のように外に出た状態にしてからロックしてください。




**警告**


- ゆかの状態に注意してください。ゆかの状態によっては、前輪キャスターのストッパーをロックしても滑りやすくなり、転倒してけがをするおそれがあります。

## 2. 背面ユニットの設置


① 背面ユニットを背面ユニット受に挿してください。

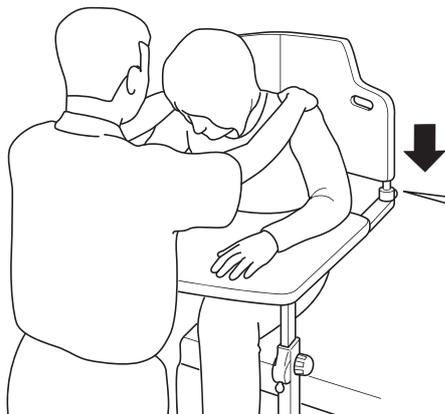


② 左右の背面固定ノブボルトを最後まで確実に締付けてください。

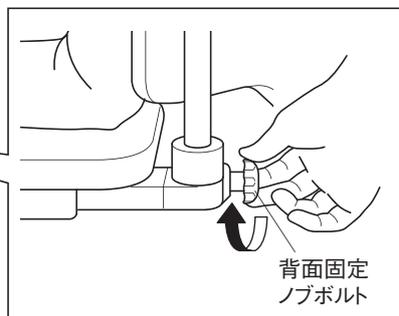


③ 背面ユニットを軽く持ちあげ、背面ユニット受から外れないことを確認してください。

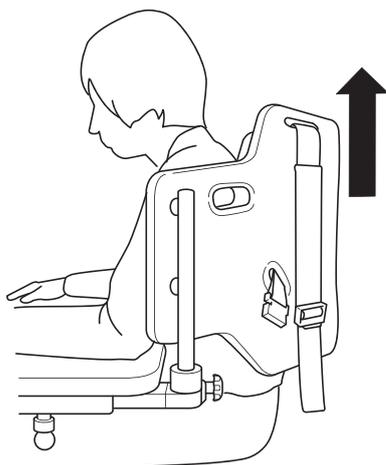

④ 8 ページの奥行調節方法を参照して、使用する方の体型にあわせて左右の奥行を調節してください。

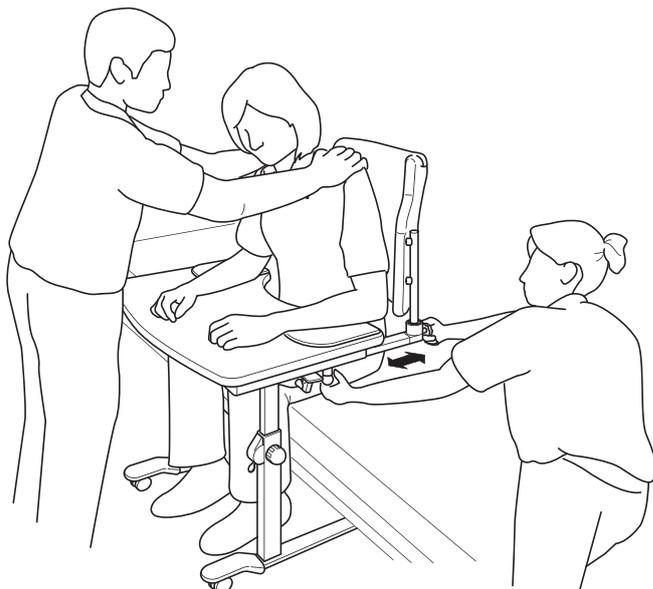

● 必要な方にはサポートベルトをしっかりとバックルに固定し、ゆるみ・圧迫のないよう適度に調節してください。

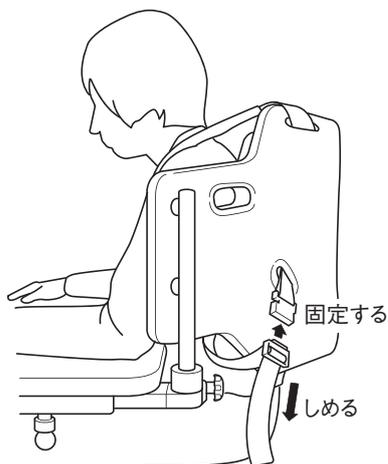

### ⚠ 警告

● サポートベルトを使用する際は、胸部でクロスさせないでください。クロスして使用すると、身体がずり落ちた場合に圧迫され、けがをすることがあります。



● 取外す際は、逆の手順で行ってください。

## 5 使用方法

### 3. 設置後の確認



■設置後は下記の点を確認してください。

#### テーブルについて

- 前輪キャスターのストッパーはロックされていますか？
- ノブボルト・背面固定ノブボルトは確実に固定されていますか？

#### 姿勢について

- 深く腰掛けていますか？  
※浅く腰掛けていると、ずり落ちてけがをするおそれがあります。
- 足の裏全体がゆかにつき、膝が約90°になっていますか？
- 肘が約90°で上体を支えられていますか？  
※高さが使用者にあっていることを確認してください。
- テーブルと腹部の間は適度なすき間が保たれていますか？  
※すき間が空き過ぎていると、ずり落ちてけがをするおそれがあります。深く腰掛けた状態で、テーブルと腹部の間に適度なすき間が保てない場合はテーブルの設置位置を変えるか、適度なすき間が保てるベッドを使用してください。



- 使用中は左右の折りたたみレバーに触れないでください。



ちゅう い  
**注意**

- 背面固定ノブボルトは必ず固定してください。固定しないと、不意に背面ユニットが抜けて、けがをするおそれがあります。


## 4. テーブルのたたみかたと収納

### 注意

- 天板をたたむ際や背面ユニットを折りたたむ際は、手や指などをはさまれないようにしてください。けがをするおそれがあります。
- テーブルを移動する際は、前輪キャスターのストッパーを解除してから移動してください。ゆかなどを傷つけるおそれがあります。
- 天板を持ってテーブルを移動してください。天板以外を持って移動すると、転倒してけがをするおそれがあります。

### たたみかた

■天板は、90°（垂直）にたたむことができます。

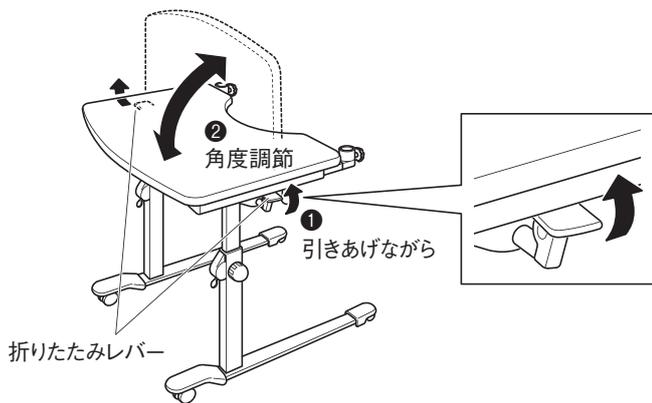

①左右両方の折りたたみレバーを引きあげながら、90°（垂直）にたたんでください。

②折りたたみレバーを離すと天板が固定されます。




●必ず天板が固定されたことを確認してください。


※天板を水平にする際は、同様の手順で行ってください。

### 収納のしかた


①背面ユニットを背面ユニット受から取外してください。8 ページを参照して奥行調節パイプを一番短い位置へ調節してください。

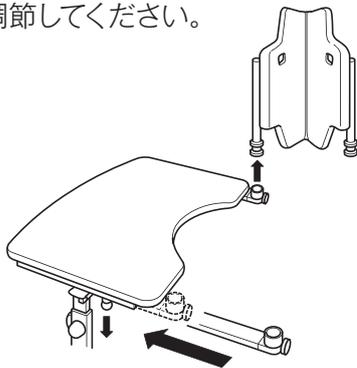


②背面ユニットを折り、肘パッドを背面ユニットの間に、入れベルトを周囲にクロスさせてバックルで固定してください。ベルト端を引っ張り、背面ユニットが開かないようにしてください。

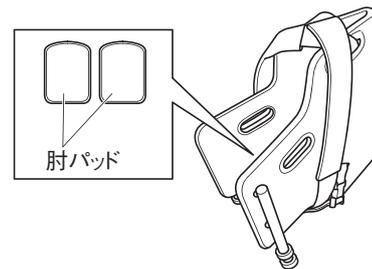

③天板を垂直にたたみ、収納金具の欠き部分に②の背面ユニットの支柱をあわせて掛けてください。

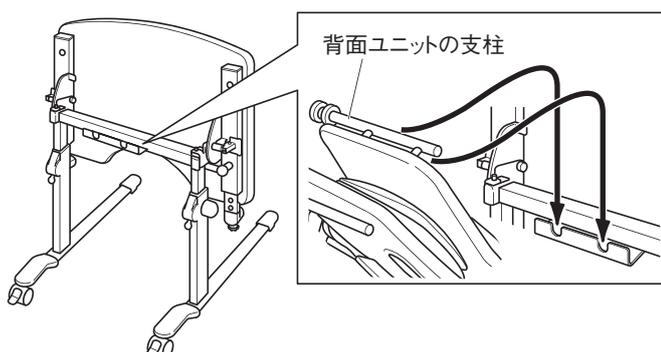

<完成図>

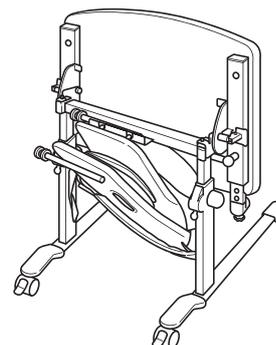

※複数台ある場合はスタッキングが可能です。

## 6 仕様

品名		端座位保持テーブル	
品番		KF-890	
寸法	テーブル部	幅×奥行	68cm × 77cm (天板寸法 68cm × 48cm)
		天板高さ	55cm ~ 80cm (2.5cm × 11 段階調節目盛 0 ~ 10)
		天板角度	0° (水平 / 使用時)・90° (垂直 / たたみ時)
	背面ユニット 含む	奥行	77cm ~ 95cm (8 段階調節)
		高さ	91cm ~ 116cm
		キャスター	前輪：Φ 5cm (ストッパー付) 後輪：Φ 3cm
製品質量		約 21kg	
テーブル耐荷重		30kgf (294N)	
材質	テーブル本体		スチール製
	天板		合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)
	背面ユニット		合板 (芯材)、ウレタンフォーム入りビニールレザー (側地)

## 7 定期点検と日常のお手入れ

### 1. 定期点検

■安全にご使用いただくために、1年に1回は定期的に点検してください。使用の頻度や環境により製品は摩耗・劣化します。定期的に各部のゆるみ、可動部の動作、破損の有無などを点検してください。

■異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、パラテクノコールセンター（14 ページ参照）までお問い合わせください。

### 2. 日常のお手入れ

●洗剤で清拭する場合は、下記の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

●消毒剤を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度でご使用ください。

※各消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

- 0.05 ~ 0.2% 塩化ベンザルコニウム (オスバンなど)
- 0.05 ~ 0.2% 塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)



- 揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質するおそれがあります。
- 洗剤、消毒剤で清拭した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。
- 肘パッドの裏面（黒）にほこりなどの汚れが付着し粘着力が落ちてきた場合は、水でひたした後よくしぼった布で裏面（黒）を軽く拭いてください。



- 漂白剤を使用しないでください。ツヤ変化や色変わりが生じるおそれがあります。
- オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

## 8 長期保管について

■長期にわたりテーブルをご使用にならないときは、下記の点にご注意ください。

1. テーブルの上には何も載せないでください。
2. 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。  
温度－10～50℃、湿度30～90%RHの環境で保管してください。
3. 水平な場所でキャスターのロックをすべてかけて保管してください。
4. 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

## 9 アフターサービスについて

### 1. 保証書

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入が無い場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

### 2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター(下記参照)までご連絡ください。

#### ■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号(2ページ「使用目的/各部の名称」参照)
- お買い上げ日 ●破損または異常の内容(できるだけ詳しく) ●施設名、お名前、ご住所および電話番号

#### ■消耗部品について

- キャスター・肘パッド・粘着シールなどは消耗部品です。

#### 保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

### 3. 部品の最低保有年数は

弊社ではこの製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間を製造打ち切り後6年としております。

### 4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：20(祝日・夏季休業・年末年始休業を除く)

#### 【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する、弊社100%出資の会社です。

#### <パラマウントベッド株式会社>

本社 ☎136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号 東京営業部	☎(03)3648-1171(代)	名古屋支店 ☎461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
札幌支店 ☎060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)	大阪支店 ☎550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
仙台支店 ☎984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)	広島支店 ☎733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
さいたま支店 ☎338-0001	さいたま市中央区上落合9丁目4番7号	☎(048)852-0707(代)	福岡支店 ☎812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)
横浜支店 ☎194-0004	東京都町田市鶴間1715番地1	☎(042)795-8800(代)			

# 保証書

PARAMOUNT BED

品名	端座位保持テーブル	品番	KF-890
保証期間	1年間		
★ お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前		
	ご住所	〒□□□□ - □□□□ ☎ ( )	
★ 販売店	店名		
	住所	☎ ( )	

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。

この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## 保証規定

- 保証期間内(お買い上げの日より1年間)に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
  - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
  - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
  - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
  - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
  - 保証書のご提示がない場合
  - 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
  - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
  - This warranty is valid only in Japan.

修理実施日	修理内容	担当者

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の基において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書中の「アフターサービスについて」をご覧ください。

パラマウントベッド株式会社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号