


取扱説明書

KF-850 リハビリテーブル

保証書付

7K00197800A2

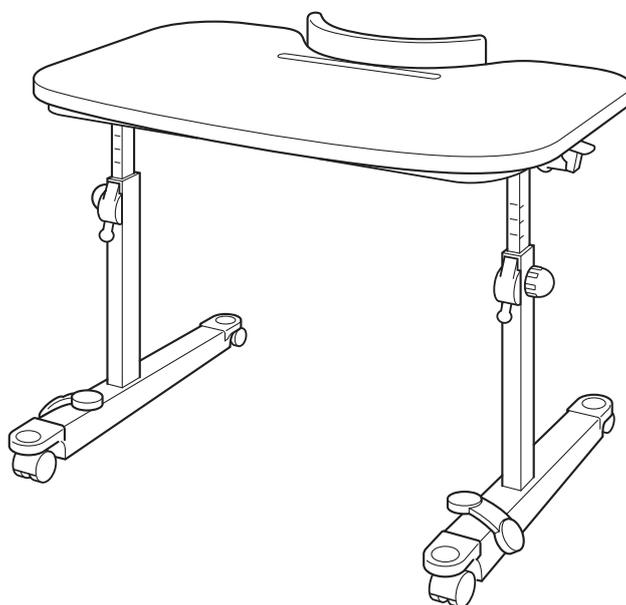

まえがき

このたびは、リハビリテーブル（以下、テーブル）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、テーブルを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- テーブルをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- テーブルを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

もくじ


1 使用目的 / 各部の名称	1
2 安全に使用するための注意事項	2 ~ 4
3 開梱と部品の確認	5
4 組立方法	5
5 使用方法	6 ~ 7
6 定期点検と日常のお手入れ	8
7 長期保管について	9
8 仕様	9
9 アフターサービスについて	10

1 使用目的 / 各部の名称

■使用目的

- このリハビリテーブルは、ベッドでの端座位や車いすでの座位姿勢の補助および食事や軽作業をする際に使用されることを目的に作られています。

■各部の名称

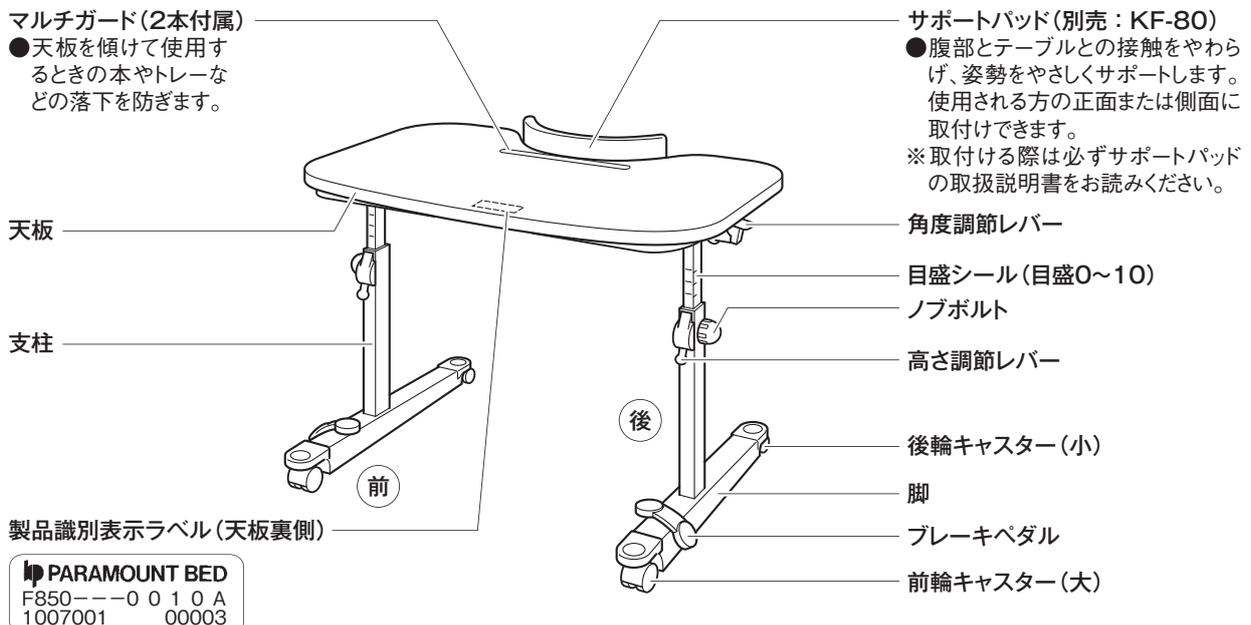

※リハビリテーブルの品番は製品識別表示ラベルに表示されます。
F850→KF-850を示します。

2 安全に使用するための注意事項

■必ずご使用の前にこの「安全に使用するための注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。


●ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度に応じて「△警告」と「△注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺 ^{まひ} など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

〔安全ラベル貼付位置〕

- 注意事項の中で、特に注意していただきたい項目をラベルにして天板の裏、支柱に貼ってあります。はがしたり傷つけたりしないでください。
- 安全ラベルが傷ついたり、はがれてしまった場合には、販売店から新しい安全ラベルを取寄せ、貼り直してください。

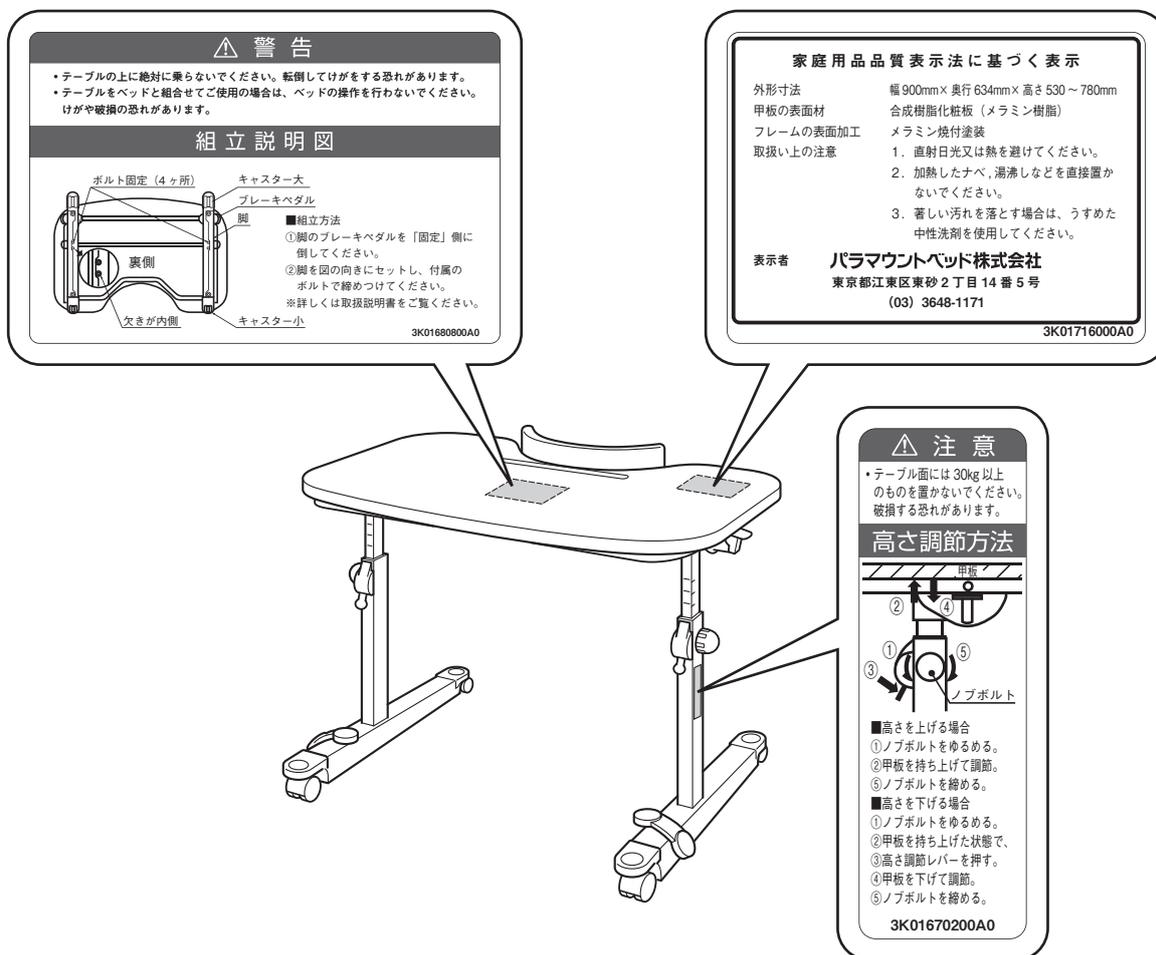

2 安全に使用するための注意事項



■目的以外の用途に使用しないでください

- 歩行器や手すりなどの目的で使用しないでください。転倒してけがをしたり、テーブルが破損・変形するおそれがあります。

■テーブルを固定する際は、必ず左右のブレーキペダルを固定してください

- 片側のみを固定するとテーブルが不安定になり、転倒してけがをするおそれがあります。

■テーブルをベッドに設置しているときはベッドの操作をしないでください

- 背あげ・高さ調節などのベッド操作をするとベッドとテーブルの間にはさまれてけがをしたり、テーブルやベッドが破損・変形するおそれがあります。
- ベッドの背・膝あげや高さ調節などを行う場合はテーブルをベッドから離してください。

■滑りやすいゆかでは使用しないでください

- ほこりや水分などの浮いたゆかでは、テーブルを使用しないでください。テーブルが動きやすくなり、転倒してけがをするおそれがあります。

■テーブルの上に乗らないでください

- 転落・転倒して、けがをするおそれがあります。

■テーブルに寄り掛からないでください

- 転倒してけがをしたり、テーブルが破損・変形するおそれがあります。

■天板をつかんだ状態で後ろに倒れるような姿勢をとらないでください

- 転倒してけがをするおそれがあります。

■脚の上に乗らないでください

- 転倒してけがをしたり、脚が破損・変形するおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや故障の原因となります。

■熱器具(ストーブなど)の近くや直射日光の当たる場所では使用しないでください

- 変質・変形・発火などの原因となります。

■ベッドに設置する際は、コード類(電源コードなど)をはさまないようにしてください

- コード類を傷つけると、漏電や火災のおそれがあります。特に電源コードはテーブルを入れる側とは反対側に配線するようにしてください。

■テーブルをベッドに設置した状態で、テーブルの高さ調節はしないでください

- はさまれて、けがをするおそれがあります。
- 高さ調節の際は、テーブルをベッドから離してください。

■ものを載せた状態でテーブルの移動や高さ・角度調節はしないでください

- ものが落下して、けがをするおそれがあります。

 **注意**

■**段差のある場所での移動は避けてください**

- 故障の原因となります。やむを得ない場合はテーブルをできるだけゆっくりと動かして移動させてください。

■**天板に粘着力の強いテープなどを貼り付けないようにしてください**

- 表面のはがれ・破損の原因となります。

■**テーブルの高さ調節は必ず天板を手で支えながら行ってください**

- 天板を支えずに調節すると、不意に天板が落下して指などがはさまれて、けがをするおそれがあります。

■**30kg を超えるものを載せないでください**

- 故障・破損・変形の原因となります。また、破損・変形により、けがをするおそれがあります。

■**使用するときにはノブボルトが固定されていることを確認してください**

- ノブボルトがしっかりと固定されていることを確認してから使用してください。ノブボルトがしっかりと固定されていないと天板が落下し、けがをするおそれがあります。

■**足先をはさまないように注意してください**

- 前輪キャスターと脚（水平のパイプ）の間などに、足や指をはさまれないようにしてください。けがをするおそれがあります。

■**スプレータイプの殺虫剤をテーブルに直接噴射しないでください**

- 殺虫剤に含まれる溶剤によってテーブルの天板や他の樹脂部分が破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

■**天板の上に、加熱したなべ・湯わかしなどを直接載せないでください**


- 変形・変色の原因となります。

■**天板に、飲み物などの水分をこぼしたり、水分を含んだものを放置しないでください**


- 変色・変質・変形の原因となります。濡れたらすぐに拭き取ってください。

3 開梱と部品の確認


■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

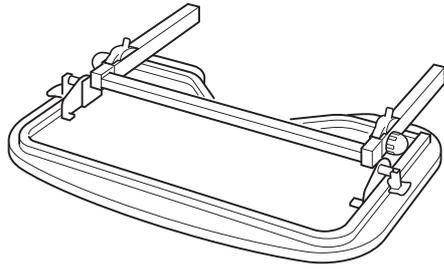


本体(1台)

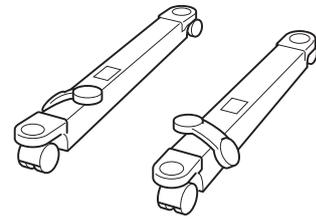

脚右(1本) 脚左(1本)

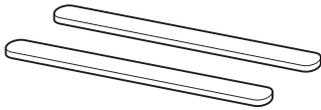

マルチガード(2本)

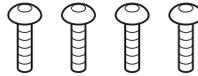


ボルト(4本)



六角レンチ(1本)
(対辺5mm)




ワッシャー(4個)

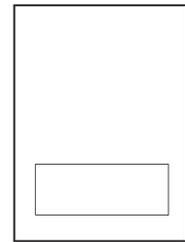

取扱説明書(1部)

4 組立方法

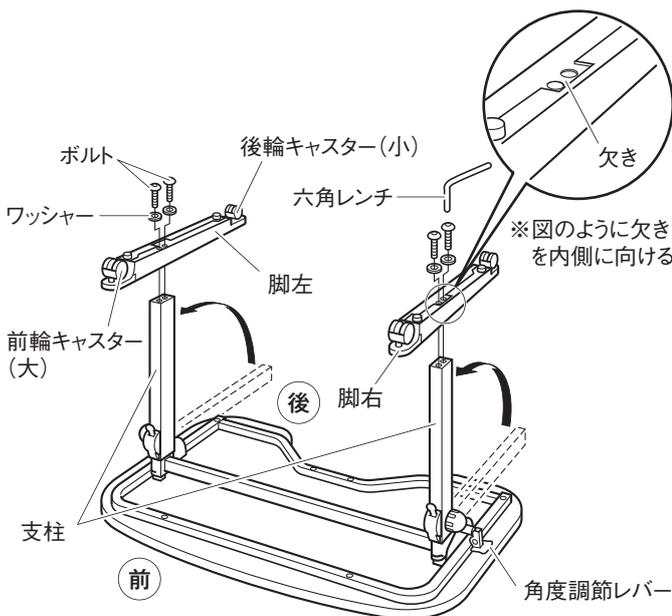


- ①左右両側の角度調節レバーを引き、天板と支柱が垂直になるように調節してください。
- ②天板を裏返し、水平なゆかに置いてください。
- ③脚のブレーキペダルを「ロック」側へ倒してください。
- ④左図のように、前輪キャスター(大)が前側に向き、脚裏側の金具の欠きが内側に向くようにして脚を支柱に差込んでください。
- ⑤支柱と脚の穴位置をあわせ、ボルトにワッシャーを通して仮止めしてください。(4ヶ所)
- ⑥付属の六角レンチでしっかりと締付けてください。



●脚と支柱を固定する際の推奨締付トルクは7N・mです。

5 使用方法


テーブルの設置

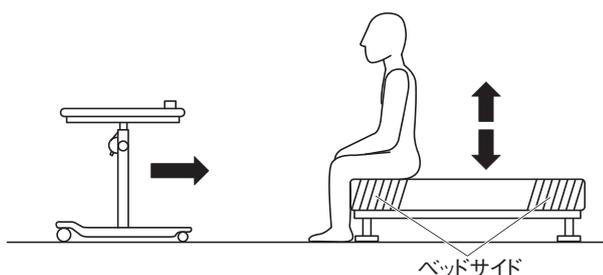

- ご使用になる方をベッドサイドまたは車いすなどに座らせてください。高さ調節ができるベッドの場合は、足の裏全体がゆかにつき無理のない姿勢になるように、ベッドの高さを調節してください。




- テーブルをベッドに設置しているときは、ベッドの操作をしないでください。背あげ・高さ調節などベッドの操作をすると、ベッドとテーブルの間にはさまれてけがをしたり、テーブルやベッドが破損・変形するおそれがあります。ベッドの背・膝あげや高さ調節などを行う場合はテーブルをベッドから離してください。

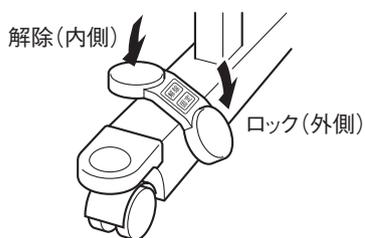

- テーブルの使用する位置が決まりましたら、左右のブレーキペダルを踏んでロックしてください。



- ゆかの状態に注意してください。ゆかの状態によっては、ロックをしても滑りやすくなり、転倒してけがをするおそれがあります。

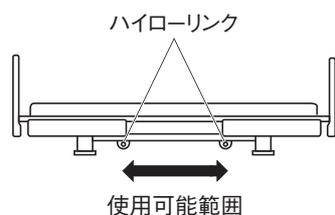

- 設置の際には、ベッドのハイローリンクとの接触にご注意ください。破損の原因となります。


5 使用方法

テーブル高さの調節方法

■テーブルを設置する前に、テーブルの高さを決めてください。テーブルの高さは使用する方が端座位をとったときに、約90°に曲げた肘の高さを目安にあわせてください。

<高さをあげる場合>

- ①左右のノブボルトをゆるめてください。
- ②天板を持ち上げて、お好みの高さに調節してください。
- ③左右のノブボルトをしっかり締付けて固定してください。

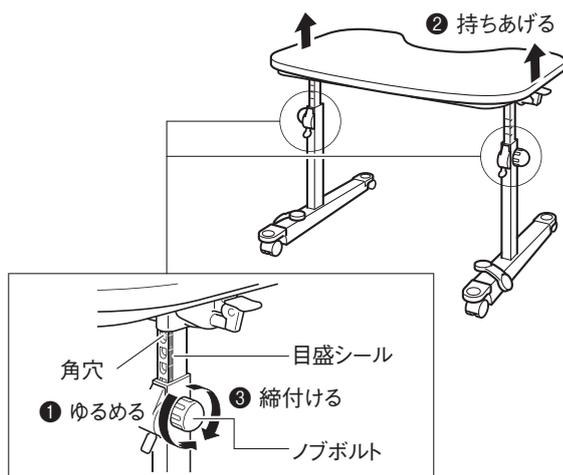


<高さをさげる場合>




●操作は片側ずつ行ってください。

- ①片側のノブボルトをゆるめてください。
- ②天板を少し持ちあげた状態で、高さ調節レバーを押します。
- ③ゆっくりと天板をさげてお好みの高さで高さ調節レバーを離してください。
- ④ノブボルトをしっかり締付けて固定してください。
- ⑤反対側も同様に同じ高さまでさげてください。

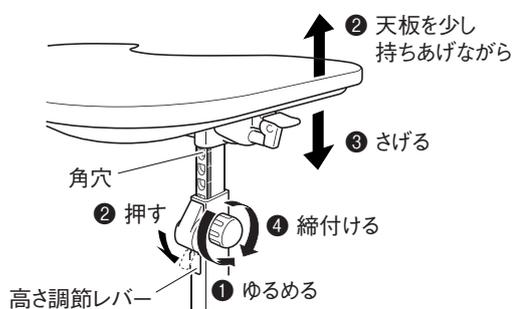

- 左右の支柱が同じ高さになるように目盛をあわせてください。
- 高さ調節の際に、身体などをはさまないように注意してください。

テーブル角度の調節（4段階）

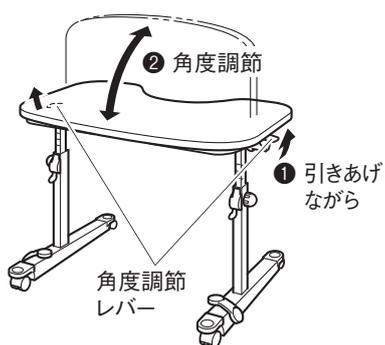


■天板の角度を4段階(0°・15°・30°・90°)に調節できます。

- ①左右の角度調節レバーを引きあげながら、お好みの角度に調節してください。
- ②角度調節レバーを離すと天板が固定されます。



●必ず天板が固定されたことを確認してから使用してください。

マルチガードの取付け

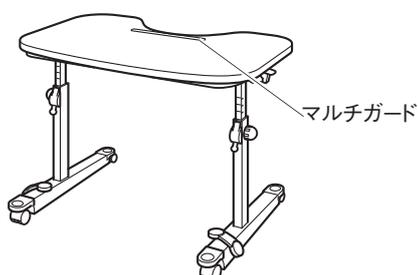

●必要に応じて、マルチガード裏側の両面テープのはく離紙をはがし、マルチガードをお好みの位置に貼付けてください。



●貼付け部分のほこり・油分・水分をよく拭き取り、しっかり押さえて貼付けてください。

6 定期点検と日常のお手入れ

1. 定期点検

■安全にご使用いただくために、1年に1回は定期的に点検してください。使用の頻度や環境により製品は摩耗・劣化します。定期的に各部のゆるみ、可動部の動作、破損の有無などを点検してください。

■異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、パラテクノコールセンター（10ページ参照）までお問い合わせください。

2. 日常のお手入れ

■洗剤で清拭する場合は、下記の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

■消毒剤を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度でご使用ください。

※各消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

- 0.05～0.2% 塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）
- 0.05～0.2% 塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）
- 0.05% グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど）
- 0.02～0.05% 次亜塩素酸ナトリウム（ミルトンなど）



●揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。

●消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質するおそれがあります。

●洗剤、消毒剤で清拭した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。



●漂白剤を使用しないでください。ツヤ変化や色変わりが生じるおそれがあります。

●オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

7 長期保管について

■長期にわたりテーブルをご使用にならないときは、下記の点にご注意ください。

1. テーブルの上には何も載せないでください。
2. 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
温度 - 10 ~ 50℃、湿度 30 ~ 90% RH の環境で保管してください。
3. 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

8 仕様

品 名	リハビリテーブル	
品 番	KF-850	
寸 法	幅×奥行	90cm × 63.4cm (天板：90cm × 60cm)
	天板高さ	53cm ~ 78cm (11段階調節 目盛0 ~ 10)
	天板角度	0° (水平)・15°・30°・90°
	キャスター	車輪径／前輪：双輪φ 5cm 後輪：双輪φ 3cm
製品質量	約 20kg	
最大使用荷重 (耐荷重)	294N (30kgf)	
材 質	天 板	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)
	本 体	スチール

9 アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入が無い場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター(下記参照)までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号(1ページ「使用目的/各部の名称」参照)
- お買い上げ日 ●破損または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 施設名、お名前、ご住所および電話番号

■消耗部品について

- キャスター、マルチガードは消耗部品です。

保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社ではこの製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間を製造打ち切り後6年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間:月曜日～金曜日9:00～17:20(祝日・夏季休業・年末年始休業を除く)

【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する、弊社100%出資の会社です。

<パラマウントベッド株式会社>

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	東京営業部	☎(03)3648-1171(代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11		☎(011)271-1181(代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3		☎(022)239-5211(代)
さいたま支店	〒338-0001	さいたま市中央区上落合9丁目4番7号		☎(048)852-0707(代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間1715番地1		☎(042)795-8800(代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号		☎(052)963-0600(代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号		☎(06)6443-8791(代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号		☎(082)293-1311(代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号		☎(092)461-1131(代)

保証書

PARAMOUNT BED

品名	リハビリテーブル	品番	KF-850
保証期間	1年間		
★お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前		
	ご住所	〒□□□□ - □□□□ ☎ ()	
★販売店	店名		
	住所	☎ ()	

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。

この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証規定

- 保証期間内(お買い上げの日より1年間)に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
 - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.

修理実施日	修理内容	担当者

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の基において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書中の「アフターサービスについて」をご覧ください。

パラマウントベッド株式会社

〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号