

## A037-1

## ジョイントセット

## まえがき

このたびは、ジョイントセット（以下、ジョイント）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この「取扱説明書」には、ジョイントを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- ジョイントをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- ジョイントを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」およびサイドサポートの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

## 使用目的

■このジョイントは、サイドサポート（KA-037AR,AL,BR,BL）に取付けて、取付け高さをあげることが目的に作られています。

## 開梱と部品の確認


開梱後、右記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。



ジョイント(太) × 1



ジョイント(細) × 1

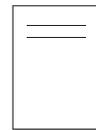

取扱説明書 × 1

## 仕様

品名	ジョイントセット	製品質量 (g)	(太) 約 90、(細) 約 60
品番	A037-1	材質	スチール
寸法 (mm)	(太) 長さ約 60 × 直径約 19、(細) 長さ約 60 × 直径約 17	適合品	KA-037AR,AL,BR,BL

## 安全に使用するための注意事項

**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺<sup>まひ</sup>など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

## ■ジョイントはサイドサポートに確実に固定してください

- サイドサポートやジョイントが不意に抜けて、思わぬけがをするおそれがあります。

## ■このジョイントはサイドサポート（KA-037AR,AL,BR,BL）以外と組合せて使用しないでください

- このジョイントはサイドサポート（KA-037AR,AL, BR, BL）専用です。他の製品と組合せると、サイドサポートやジョイントを確実に固定することができず、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたりサイドサポートやジョイントが破損するおそれがあります。

## ■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。

## ■差込パイプの太さに合ったジョイントを取付けてください

- サイドサポートが正しく取付けられず、思わぬけがや破損の原因となります。

# 安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## ■火気に近づけないでください

- ジョイントの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形などの原因となります。


## ■複数のジョイントを連結して使用しないでください

- ベッドやサイドサポート、ジョイントの破損・変形の原因となります。

## ■ジョイントを取付けるときに、工具は使用しないでください

- サイドサポート、ジョイントの破損・変形の原因となります。

## 使用方法

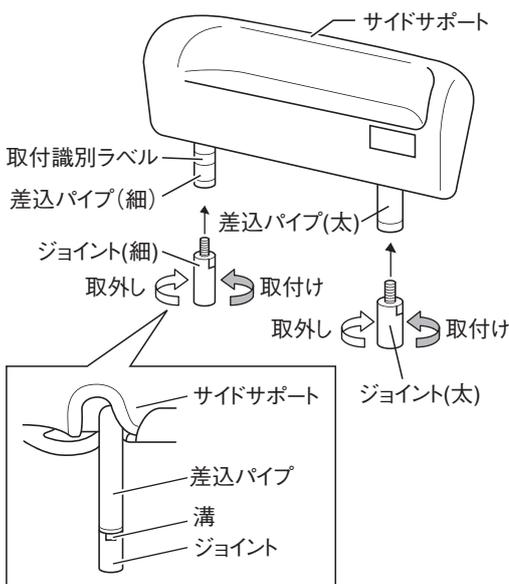

- サイドサポートの差込パイプとジョイントには太・細があります。差込パイプの太さに合ったジョイントを取付けてください。

### 【取付方法】

- ①サイドサポートの差込パイプ下部に、ジョイントを手で図の取付方向に回し、取付けてください。
- ②差込パイプとジョイントのすき間がなくなるまで締付けてください。

### 【取外方法】

- ①ジョイントを図の取外方向に回し、取外してください。手で回らないときは、ジョイント上部の溝にスパナをはめて、図の取外方向に回してください。その際、ジョイント(太)には対辺17mmのスパナを、ジョイント(細)には対辺13mmのスパナを使用してください。
- ※スパナはお客様でご用意ください。



- ジョイントを取付けたサイドサポートのベッドへの取付方法については、サイドサポートの取扱説明書を参照してください。

## 日常のお手入れ・長期保管について

### ■日常のお手入れ

- 清拭する場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、その後水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で残った水分を拭き取ってください。
- ※揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリンなど)やクレゾールは使用しないでください。変色・変質させるおそれがあります。

### ●消毒剤を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度でご使用ください。

0.05 ~ 0.2%	塩化ベンザルコニウム (オスバンなど)
0.05 ~ 0.2%	塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)
0.05%	グルコン酸クロルヘキシジン (ヒピテンなど)



- オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

### ■長期保管について

- 高温・多湿・低温・乾燥・直射日光のあたる場所・ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- 取扱説明書を紛失しないよう、ジョイントと一緒に保管してください。

## <パラマウントベッド株式会社>

本社	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 東京営業部	☎(03)3648-1171(代)	名古屋支店	〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
札幌支店	〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)	大阪支店	〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
仙台支店	〒984-0015 仙台市若林区御町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)	広島支店	〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
さいたま支店	〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号	☎(048)852-0707(代)	福岡支店	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)
横浜支店	〒194-0004 東京都町田市鶴間1715番地1	☎(042)795-8800(代)			