

KQ-027A

保証書付

# ハイトスペーサー (在宅ケアベッド楽匠Sシリーズ、ワイドアウラベッド KQ-159 用)

## まえがき

このたびは、ハイトスペーサーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、ハイトスペーサーを安全にお使いいただくための注意事項と取付方法などを記載しています。


- ハイトスペーサーをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」および楽匠Sシリーズ・ワイドアウラベッド KQ-159 の「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取付方法を理解してください。
- ベッドで療養する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」および、楽匠Sシリーズ・ワイドアウラベッド KQ-159 の「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

## 使用目的

- この製品はベッドに取付けることにより、ベッドの高さを高くしたり、ベッド下のスペースを利用するオプションを使用できるようにすることを目的に作られています。

## 開梱と部品の確認

- 開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

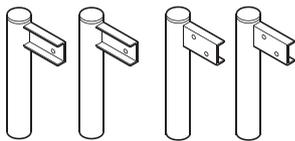


ハイトスペーサー(左右 各2本)



六角穴付ボルト(8本)



スプリングワッシャー(8個)

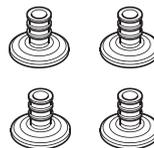

脚座(4個)




取扱説明書  
(1部)



六角レンチ(1本)

## 各部の名称


ハイトスペーサー(延長脚)

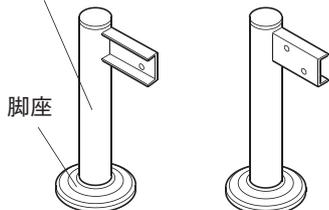

脚座

※ハイトスペーサーには左右があります。取付けの際にご確認ください。

### ■取付状態

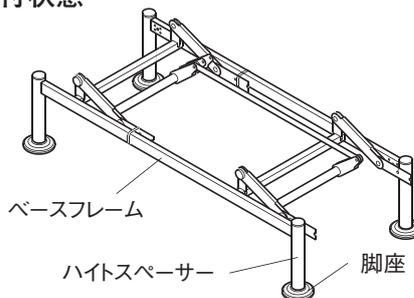

ベースフレーム

ハイトスペーサー

脚座

※このハイトスペーサーを使用することによりベッドの高さは以下のようになります。

- 楽匠Sシリーズ  
ベッドの高さが約17cm高くなります。  
(最低ボトム高さ※1:約37cm)

- ワイドアウラベッドKQ-159  
ベッドの高さが約10cm高くなります。  
(最低ボトム高さ※1:約40cm)

※イラストはワイドアウラベッドKQ-159に取付けた場合です。

※1)最低ボトム高さは、ゆかからボトム上面までの高さを示しています。

## 安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

### ■スプリングワッシャーをはめた六角穴付ボルトでハイトスペーサーを確実に締付けて固定してください

- ハイトスペーサーが外れ、ベッドが傾いたり落下し、転落・転倒してけがをしたり、ベッドが破損・変形してけがをするおそれがあります。

### ■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。

### ■弊社が指定する適合品以外の製品とは組合せないでください

- このハイトスペーサーは楽匠Sシリーズ(KQ-9\*\*\*)・ワイドアウラベッド KQ-159 専用です。指定以外の製品や他社製品と組み合わせると、思わぬけがや破損の原因となります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### ■ハイトスペーサーを取付けた状態でベッドを引きずらないでください

- ゆかを傷つけたり、ベッドおよびハイトスペーサーが破損する原因となります。

### ■スプレータイプの殺虫剤をハイトスペーサー直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によってハイトスペーサーが破損・変色・溶解などするおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

## 適合品

### ■適合するベッドは以下の通りです。

・楽匠 S シリーズ (KQ-9\*\*\*) ・ワイドアウラベッド (KQ-159)

### ■楽匠 S シリーズと、このハイトスペーサー（延長脚）の組合せは JIS 認証を取得しています。


## 取付方法



- 組立てられているベッドにハイトスペーサーを取付けるときはベッドを分解し、ベッドに取付けられている脚座を外してベースフレームのみの状態にしてから作業を行ってください。ベッドを分解せずに取付けを行うと、思わぬけがや破損の原因となります。（ベッドの分解方法は、ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの分解方法」を参照してください）

- 取付けの際は、手や指などをはさまないように注意してください。けがをするおそれがあります。

### 1. ハイトスペーサーの取付け

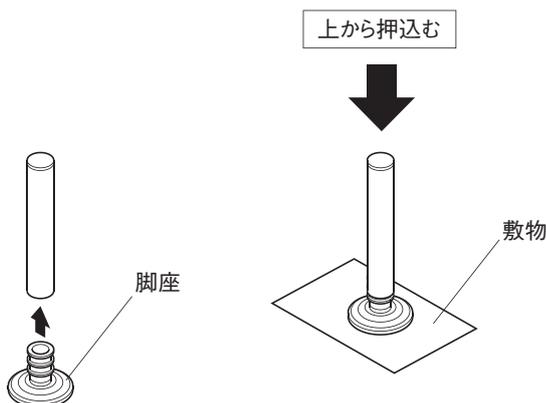


- ①取付け前にベッド本体の取扱説明書の「設置について」に従い、ベッドの配置を決めてください。
- ②ハイトスペーサーに脚座を差込み、上から手で強く押込んで取付けてください。固い場合は、木ハンマーなどで軽くたたいてください。



- ハイトスペーサーに脚座を押込む際には、ゆか材を保護するため脚座の下に敷物を敷いてください。

# 取付方法

※イラストはワイドアウラベッドKQ-159で説明しています。

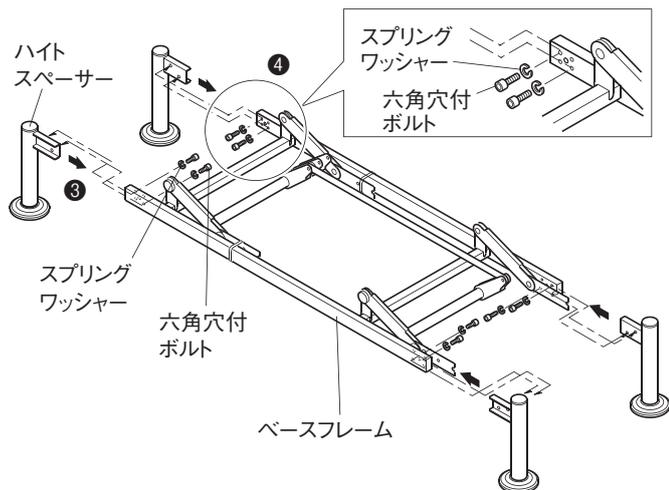

③ ベースフレームの先端に、ハイトスペーサーを奥まで確実に差込んでください。(4ヶ所)




● ハイトスペーサーには左右があります。差込部の平らな面を内側にしてください。


④ ベースフレームの穴とハイトスペーサーの穴(各2ヶ所)をあわせ、ベースフレームの内側から、スプリングワッシャーをはめた六角穴付ボルトを付属の六角レンチで締付けてください。(1ヶ所に付き2本)



● 確実に固定するため、最後に六角レンチの長い方を持ってしっかり締付けてください。

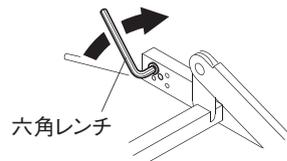

## 2. 取付後の確認

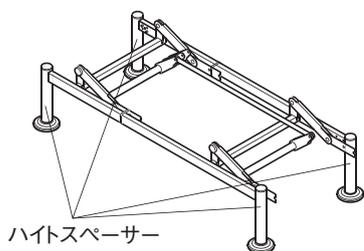


- ① ハイトスペーサーが図のように4ヶ所に取付いていることを確認してください。
- ② 脚座とハイトスペーサーの間にすき間がないこと、六角穴付ボルト(8本)が確実に固定されていることを確認してください。

※以降のベッドの組立方法については、ベッド本体の「取扱説明書」を参照してください。

# 取外方法



● ハイトスペーサーを取外すときは、ベッドを分解しベースフレームのみの状態にしてから作業を行ってください。ベッドを分解せずに取外しを行うと、思わぬけがや破損の原因となります。(ベッドの分解方法は、ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの分解方法」を参照してください)

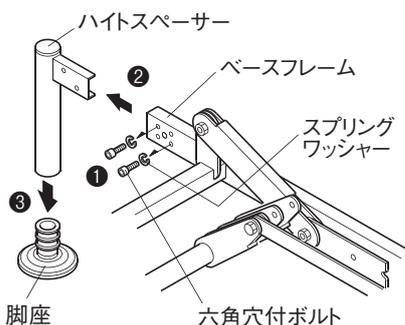

- ① ハイトスペーサーとベースフレームを固定している六角穴付ボルトを付属の六角レンチで外してください。
- ② ベースフレームを支えながらハイトスペーサーを抜いてください。
- ③ ハイトスペーサーから脚座を抜いてください。



● 取外した以下の部品は袋などに入れて紛失しないように大切に保管してください。

ハイトスペーサー (4本)	脚座 (4個)
六角穴付ボルト (8本)	スプリングワッシャー (8個)

## 仕様

品名		ハイトスペーサー
品番		KQ-027A
寸法		長さ 130mm × 幅 100mm × 高さ 247mm
製品質量 (1個あたり)		約 500g
材質	ハイトスペーサー	スチール
	脚座	ポリプロピレン
適合品		楽匠 S シリーズ (KQ-9*** シリーズ)、ワイドアウラベッド KQ-159

# お手入れ・長期保管について

## ■日常のお手入れ

- 清拭する場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、その後水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で拭き取ってください。
- ※揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリンなど)やクレゾールは使用しないでください。変色・変質させるおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度でご使用ください。
  - 80% 消毒用エタノール
  - 0.05 ~ 0.2% 塩化ベンザルコニウム (オスバンなど)
  - 0.05 ~ 0.2% 塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)
  - 0.05% グルコン酸クロルヘキシジン (ヒビテンなど)
  - 0.02 ~ 0.05% 次亜塩素ナトリウム (ミルトンなど)



- オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。



ちゅうい

## 注意

●洗剤、消毒剤で清拭した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂部分が割れるおそれがあります。

## ■長期保管する場合

- 本体と一緒に本取扱説明書を袋などに入れ、直射日光を避け、保管してください。
- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。温度 -10 ~ 50°C、湿度 30 ~ 90% RH の環境で保管してください。
- ベッドに取付けたまま保管する場合は、再使用時に六角穴付ボルトがゆるんでいないことを確認してください。ゆるみがある場合は、六角レンチで六角穴付ボルトを確実に固定してから使用してください。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2. 修理を依頼されるとき

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンターまでご連絡ください。

### ■連絡していただきたい内容

- 品名、品番(下記保証書を参照) ●お買い上げ日 ●破損または異常の内容(できるだけ詳しく) ●お名前、ご住所および電話番号

### ■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

### ■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

## 3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

## 4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639 受付時間:平日 9:00 ~ 17:20 (土・日・祝日・夏季休業・年末年始休業を除く)

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する、弊社100%出資の会社です。

## 保 証 書

品名 / 品番	ハイトスパーサー / KQ-027A	保証期間	★お買い上げ日
お名前		★ 販売店	年 月 日より1年間
ご住所	〒 ( )		☎ ( )

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので必ずご確認ください。  
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書、ラベル類などの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### 【保証規定】

- 保証期間内(お買い上げの日より1年間)に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
  - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
  - 弊社が指定する適用品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
  - お買い上げ後の移動、設置、落下、あるいは輸送による故障および損傷
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
  - This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## ＜パラマウントベッド株式会社＞

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 東京営業部 ☎(03)3648-1171(代)  
 札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)  
 仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区郡町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代)  
 さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号 ☎(048)852-0707(代)  
 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間1715番地1 ☎(042)795-8800(代)

名古屋支店 〒461-0001 名古屋市中区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)  
 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)  
 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)  
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)