

KD-485

保証書付

## アルミ製折りたたみチェア

## まえがき

このたびは、アルミ製折りたたみチェア（以下、チェア）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この「取扱説明書」には、チェアを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- チェアをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- チェアを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

## 使用目的


■この製品は、付き添いの方などがいすとして使用することを目的に作られています。

## 開梱と部品の確認


■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。※安全ラベルは取外さないでください。



取扱説明書(1部)

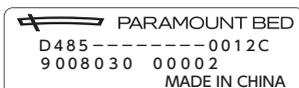

※チェアの品番は、製品識別表示ラベルに記載されています。  
※製品識別表示ラベル上は、D485と表示されています。  
例) D485→KD-485を示します。

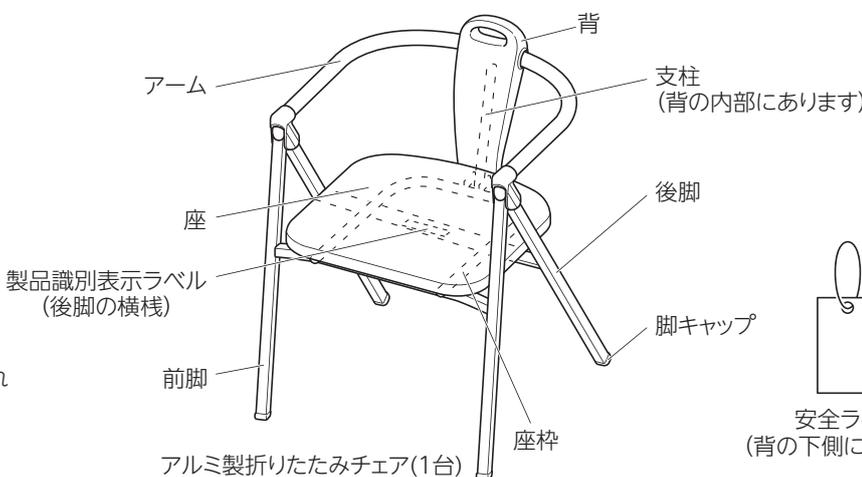安全ラベル  
(背の下側にあります)

## 仕様

品名		アルミ製折りたたみチェア	
品番		KD-485	
寸法 (cm)	使用時	幅約 49.1 × 奥行約 51.3 × 高さ約 67 座面の高さ約 41	
	折りたたみ時	幅約 49.1 × 奥行約 13 × 高さ約 108.3	
製品質量 (kg)		約 4.5	
材質		前脚・後脚・アーム：アルミ製（アルマイト仕上げ） 支柱・座枠：鋼管（カチオン電着塗装） 背：発泡ウレタン / 脚キャップ：ポリエチレン 座（クッション材：ウレタンフォーム、張り材：ポリ塩化ビニル）	

## 安全に使用するための注意事項



けい  
こく  
警 告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺<sup>まひ</sup>など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

### ■最大使用者体重を超える方は使わないでください

- 最大使用者体重は100kgです。この体重を超える方が使用すると、破損・転倒などによるけがのおそれがあります。

### ■前脚を浮かす座り方はしないでください

- 転倒して、けがをするおそれがあります。

### ■座に浅く腰かけたり、逆向きに腰かけないでください

- 転落・転倒して、けがをするおそれがあります。

### ■チェアの上に立ったり、踏み台がわりにしないでください

- 転落・転倒して、けがをするおそれがあります。

### ■2人以上で腰かけないでください

- 破損や転倒などによりけがをするおそれがあります。

### ■背やアームの上に腰かけたり、背面からもたれかかたりしないでください

- 転落・転倒して、けがをするおそれがあります。

### ■折りたたむときや持ち運ぶときは、前脚・後脚・アームなどのすき間に注意してください

- 手をはさむなどして、けがをするおそれがあります。

### ■ねじがゆるんだり、異常を発見した場合は使用を中止してください

- 思わぬ破損などによりけがをするおそれがあります。お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（裏表紙参照）まで修理をご依頼ください。

### ■火気に近づけないでください

- チェアの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形・発火などの原因となります。

### ■チェアに座ったまま移動しないでください

- ゆかに傷をつけたり、チェアが破損・変形して、けがをするおそれがあります。

### ■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや故障の原因となります。

### ■傾斜および段差のない平坦なところでご使用ください

- 不安定な状態で使用すると、破損・変形して、けがをするおそれがあります。



ちゅう  
い  
注 意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### ■直射日光のあたる場所などでの使用は避けてください


- 変色や変質・変形などの原因となります。

### ■スプレータイプの殺虫剤をチェアに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によって、チェアの樹脂部品が破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがありますので十分ご注意ください。

### ■立てかけるときは座面を外側にし、チェアがすべらない角度で立てかけてください

- チェアが倒れ、思わぬけがや破損の原因となります。

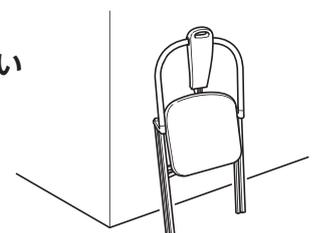

# 使用方法


## ■使用するとき

- チェアの後脚を足でおさえ、背を支えながらアームを前方に押し出してください。



## ■折りたたむとき

- チェアの後脚を足でおさえ、アームを支えながら背を引きあげてください。

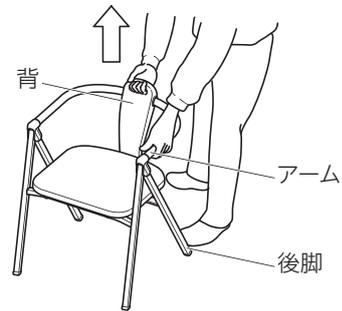

# 定期点検・日常のお手入れ

## < 定期点検 >

- 安全にご使用いただくために、1年に1回は定期的に点検してください。使用の頻度や環境により製品は摩耗・劣化します。定期的に各部のゆるみ、可動部の動作、破損の有無などを点検してください。
- 異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、パラテクノコールセンター（裏表紙参照）までお問い合わせください。

## < 日常のお手入れ >

### 【汚れを落とす場合】

- 下記の手順で行ってください。
  - ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
  - ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
  - ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

### 【消毒する場合】

- 必ず下記の薬品を指定の濃度で各消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。
  - 0.05～0.2% 塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）
  - 0.05～0.2% 塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）
  - 0.05% グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど）
  - 0.02～0.05% 次亜塩素酸ナトリウム（ミルトンなど）
- チェアの回転部分の動きが悪くなった場合は、回転部分に潤滑剤を注入してください。



- 揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。破損・変質するおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質するおそれがあります。
- 中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂や座部分が割れるおそれがあります。



- オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

# 長期保管について

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所での保管は避けてください。温度-10～50℃、湿度30～90%RHの環境で保管してください。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

## 2. 修理を依頼されるとき

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

### ■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（後脚の横棧に貼付：表紙「開梱と部品の確認」参照）
- お買い上げ日 ●破損または異常の内容（できるだけ詳しく） ●施設名、お名前、ご住所および電話番号

### ■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは下記の保証書をご覧ください。

### ■保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

## 3. 部品の最低保有年数は

弊社では、このチェアの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

## 4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：9：00～17：20（夏季休業・年末年始休業を除く）

### 【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

## 保証書

品名 / 品番 アルミ製折りたたみチェア / KD-485		保証期間	*お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前 〒 ( )	*販売店 (店名・住所) ☎ ( )				
	ご住所					

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。  
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。  
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

### 【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
  - 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
    - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
    - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
    - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
    - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
  - 保証書のご提示がない場合  
(6) 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合  
(7) 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
● This warranty is valid only in Japan.

## <パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 東京営業部 ☎(03)3648-1171(代)  
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)  
仙台支店 〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番65号 花京院プラザ4階 ☎(022)217-7311(代)  
さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号 ☎(048)852-0707(代)  
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間1715番地1 ☎(042)795-8800(代)

名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)  
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)  
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)  
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)