

取扱説明書

7F06071900A2

保証書付

KE-200・200Q

テストール～衝撃緩和マット～

まえがき


このたびは、**テストール**をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、**テストール**を安全にお使いいただくための注意事項と使用方法を記載しています。

- **テストール**をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- **テストール**をお使いになる方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

- **テストール～衝撃緩和マット～**は、ベッドサイドに設置し、寝ている方がベッドから転落した際に受ける衝撃の緩和を目的に作られています。
※けがを防止することを保証するものではありません。

各部の名称

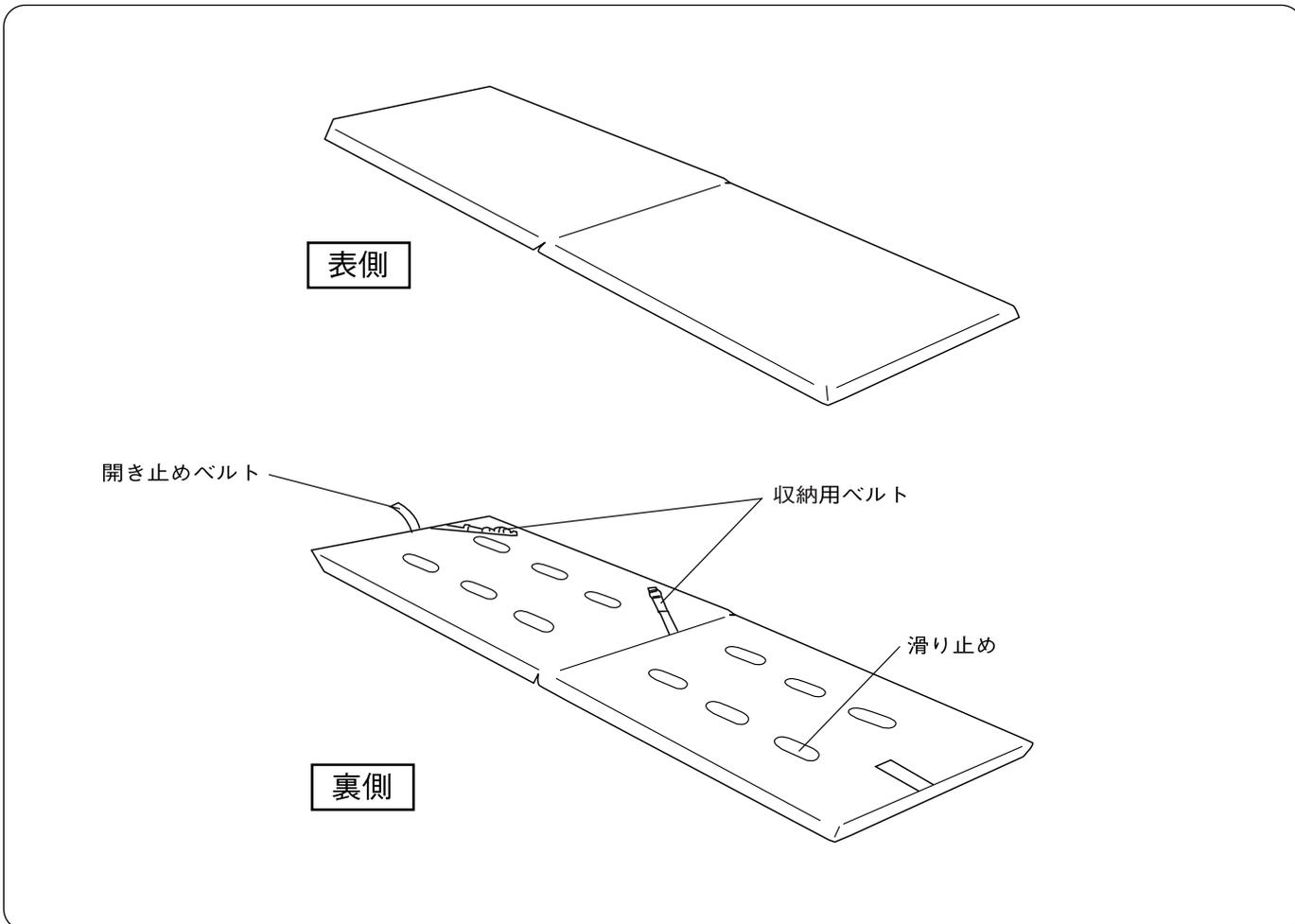

安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重症（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■設置位置を必ず守ってください

- 決められた設置位置から外れていますと、万一ベッドから転落した際、ゆかに直接衝突するおそれがあります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■テストールの上を歩く際は注意してください

- テストールは柔らかい素材で作られています。テストールの上を歩く際は転倒しないよう十分に注意してください。

■滑り止めが劣化した場合は、速やかに交換してください

- 滑り止めが劣化すると、裏面が滑りやすくなり、思わぬけがをするおそれがあります。速やかに交換してください。交換に関しましては、販売店またはパラテクノコールセンター（巻末の「アフターサービスについて」参照）までお問い合わせください。

■火気に近づけないでください

- ストーブなどの熱器具の近くでの使用は避けてください。変形・変質・発火などの原因となります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや故障の原因となります。


仕様

品名	テストール～衝撃緩和マット～	
品番	KE-200	KE-200Q
寸法 (cm)	長さ約180×幅約65×厚さ約4	
製品質量	約3.7kg	
材質	側地	ポリ塩化ビニル（難燃加工）
	詰め物	ウレタンフォーム（2層構造、難燃加工）
付加機能	側地裏面側に滑り止め加工	

使用方法


■ベッドサイドへの設置

- ベッドサイドのゆかの上に、裏側を下にして下図の様に敷いてください。

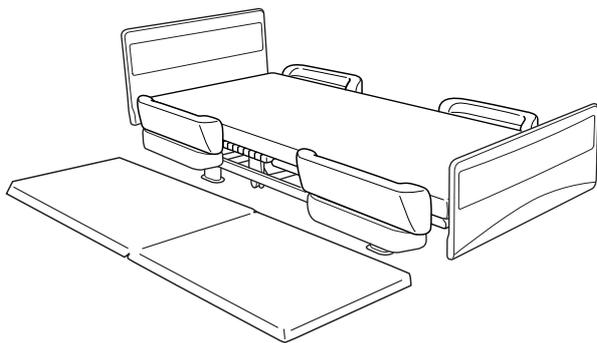

設置位置について


テストールとベッドの間にすき間をあけないように設置してください。

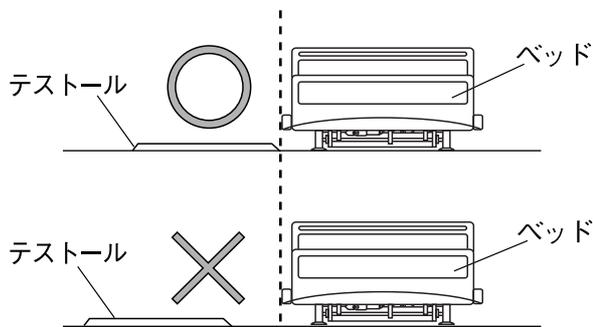


■ベッドへの収納

- 使用しないときは、折りたたんでベッドのヘッドボード部に収納できます。

- ①折りたたんで、開き止めベルト（面ファスナーが付いています。）で固定してください。

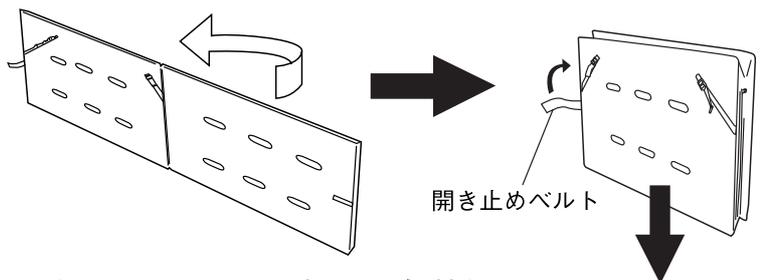


- ②78cm～91cm幅のベッドのヘッドボードのコーナー部に、収納用ベルトを掛けて収納してください。

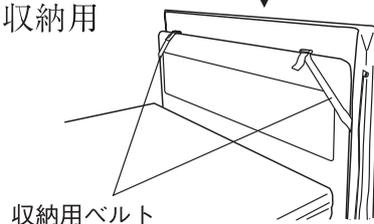

- ヘッドボードの形状・幅・高さによっては収納できない場合があります。詳しくは販売店または弊社までお問い合わせください。
- 衝撃の緩和を目的としており、けがを防止することを保証するものではありません。
- 安全のため、使用時はベッドの高さを最低にしてください。

お手入れ

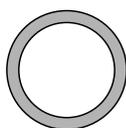

- 日常のお手入れは掃除機等でほこりを取除いてください。
- 揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリン等）では拭かないでください。
- 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、乾いた布で拭き取ってください。



- オゾン殺菌器、オートクレーブなどには対応していません。

アフターサービスについて

1.保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げ販売店またはパラテクノコールセンターまでご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番（下記の保証書を参照） ●お買い上げ日
- 破損または異常の内容（できるだけ詳しく） ●施設名、お名前、ご住所および電話番号

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。

ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3.部品の最低保有年数は

弊社では、製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後6年としております。

4.アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げ販売店、またはパラテクノコールセンターにお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639
受付時間:9:00~17:20(夏季休業・年末年始休業を除く)

【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

保 証 書

品名	テストール～衝撃緩和マット～	保証期間	★お買い上げ日 年 月 日より1年間		
品番	KE-200、KE-200Q				
お客様	お名前	★販売店	☎ ()		
	〒 〇〇〇〇-〇〇〇〇 ご住所				

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、ラベル類などの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
 - 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
 - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
● This warranty is valid only in Japan.

本 社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 東京営業部 ☎(03) 3648-1171 (代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011) 271-1181 (代)
仙台支店 〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番65号 花京院プラザ4階 ☎(022) 217-7311 (代)
さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号 ☎(048) 852-0707 (代)
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間1715番地1 ☎(042) 795-8800 (代)
名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052) 963-0600 (代)
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06) 6443-8791 (代)
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082) 293-1311 (代)
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092) 461-1131 (代)