

KS-15TA/16T/17T/19T

クリアカバー

まえがき




このたびは、クリアカバー（以下、カバー）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この「取扱説明書」には、カバーを安全にお使いいただくための注意事項と取付方法などを記載しています。

- カバーをご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」およびカバーを取付けるベッドサイドレールの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取付方法を理解してください。
- カバーを取付けたベッドサイドレールと組合せたベッドで療養する方ばかりでなく、付添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

- この製品は、ベッドサイドレール差込みタイプ（以下、サイドレール）の内部のすき間の一部を覆うことにより、手・足などがサイドレールのすき間からベッドの外に出ることを予防しつつ、視認性を確保することを目的に作られています。
- ベッドをご使用になられる方の心身の状態や利用環境に応じてご使用ください。

各部の名称と部品の確認

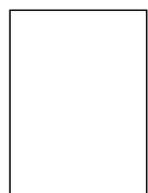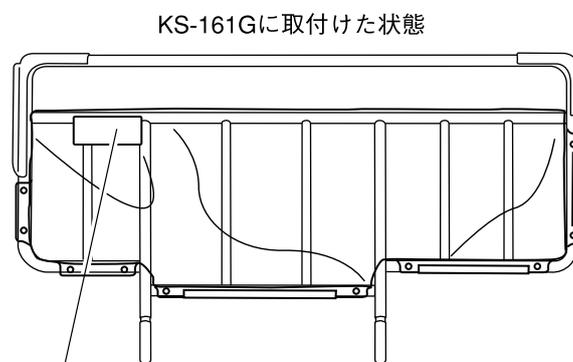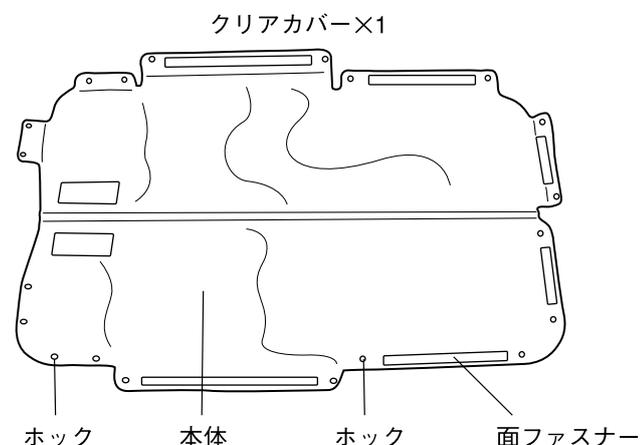

取扱説明書×1

品質表示/安全ラベル

 PARAMOUNT BED	
	●クリアカバーとサイドレールの間や、クリアカバーで覆われていないすき間から手や足などを出さないでください。けがをするおそれがあります。
	●ホックと面ファスナーは完全にこておした状態で使用してください。完全に固定した状態でない場合、身体の一部がすき間に入り、ぬげなくなるなどしてけがをしたり、クリアカバーが破損するおそれがあります。
	●火気や先の尖ったものを近づけないでください。変質・変形などの原因になります。
品質表示	品名：クリアカバー KS-1 T (ロットNo.) 材質：軟質塩化ビニル
パラマウントベッド株式会社 東京都江東区東砂2丁目14番5号 3F07989600A1	


※反対側にも貼付してあります。(合計2ヶ所)

安全に使用するための注意事項




この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷(骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など)を負う可能性が想定される内容を示しています。

■サイドレールと他のオプションやボード、あがっているボトムなどとのすき間(↓)に身体の一部(特に頭や首)が入らないように注意してください

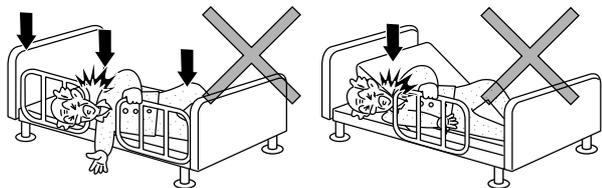

- すき間に入ると抜けなくなり、けがをするおそれがあります。
- 特に、予測できない行動をとられる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

■カバーとサイドレールの間やカバーで覆われていないすき間から手や足などを出さないでください

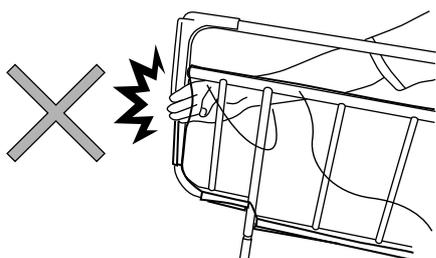

- すき間にはさまれたり、抜けなくなるなどしてけがをするおそれがあります。
- カバーがずれたり外れたときは、正しい位置に付け直してください。
- 使用する方の状態や必要に応じて、別売りのソフトカバーをお使いください。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。

■乳幼児やお子様には使用しないでください

- サイドレールとボードや他のオプションなどのすき間にはさまれてけがをしたり、転落するおそれがあります。

■クリアカバーと組合せて使用するサイドレールは弊社が指定する適合品をご使用ください

- 指定以外の製品や他社製品と組合せて使用すると、カバーが正しく取付けられず、意図せぬすき間が発生して、身体の一部がはさまれてけがをしたり、カバーが破損するおそれがあります。適合品については、仕様欄の「適合品」を参照してください。

■カバーは正しい向き・位置で取付けてください

- 誤った向きや位置で取付けて使用すると、サイドレールのすき間に頭や手・足などが入り、はさまれてけがをするおそれがあります。

■カバーやサイドレールに火気を近づけないでください

- カバーやサイドレールの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形・発火などの原因となります。

■ご使用前にカバーとサイドレールの取扱説明書をよくお読みください

- 誤った使いかたをすると、思わぬけがをするおそれがあります。

■ホックと面ファスナーは完全に固定した状態で使用してください

- 完全に固定した状態でないと、身体の一部がすき間に入って抜けなくなるなどしてけがをしたり、カバーが破損するおそれがあります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷(打撲・すり傷・切り傷など)を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■カバーに先のとがったものを接触させないでください

- カバーに穴があいたり、破損するおそれがあります。

■カバーに破損が見つかった場合は、使用を中止してください

- 思わぬけがをするおそれがあります。破損が見つかった場合は、ただちに使用を中止してください。

■ベッドを操作する際は、ベッドのボトム・寝具にカバーが引っ掛からないようにしてください

- カバーやサイドレール・ベッドが破損するおそれがあります。

■スプレータイプの殺虫剤をカバーに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によって破損・変色・溶解するおそれがあります。また破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがありますので十分ご注意ください。

■カバー端部（エッジ）に注意してください

- カバー端部（エッジ）で皮膚を切るおそれがあります。
- 特に、皮膚の弱い方は十分注意してください。


■直射日光の当たる場所での使用は避けてください

- カバーが硬化・劣化・変色するおそれがあります。

■カバーへの色移りに注意してください


- 新聞紙や印刷物、ビニール製品や染料を使用しているものと長時間接触すると、変色や色移り、変質の原因となります。
- 色移りしたカバーは、拭き取ることができませんので注意してください。

取付方法 (KS-16T/17T/19T)

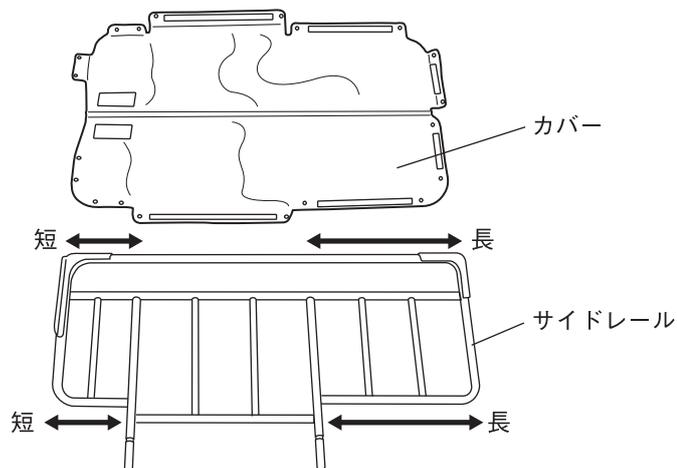


①左図のように、サイドレールとカバーの向きをあわせてください。




②カバーをサイドレール上部のすき間から通して、被せてください。

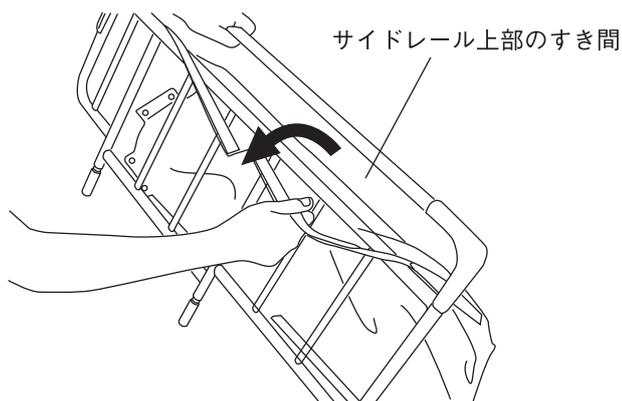

●必ずサイドレール上部のすき間からカバーを通してください。

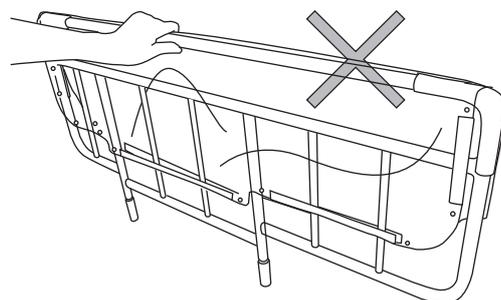


③左図1～5の順に、ホックを留め、その後面ファスナーを貼りあわせてください。

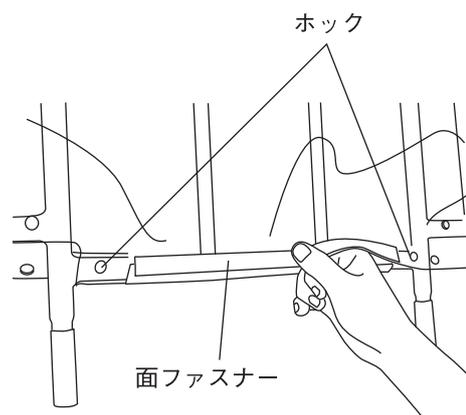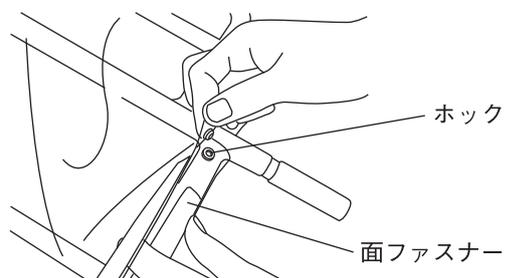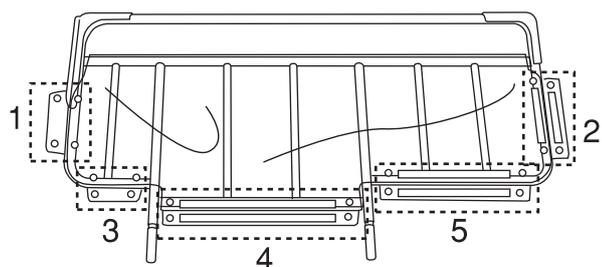


④1～5すべてのホックと面ファスナーが確実に固定されていることを確認してください。

〈完成図〉

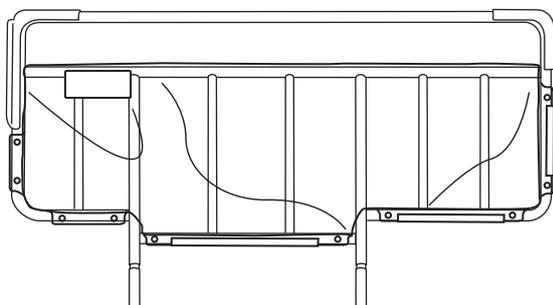


※取外しは、取付方法と逆の手順で行ってください。

取付方法 (KS-15TA)

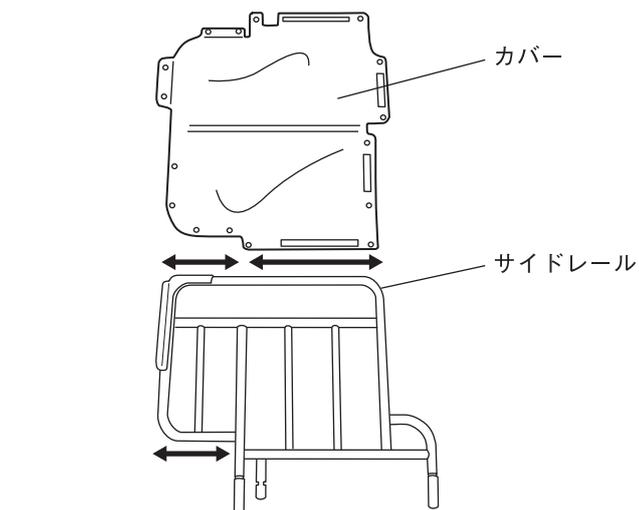


①左図のように、サイドレールとカバーの向きをあわせてください。

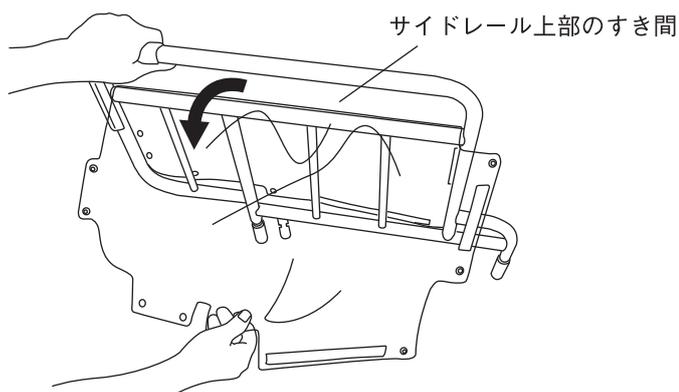




②カバーをサイドレール上部のすき間から通して、被せてください。




●必ずサイドレール上部のすき間からカバーを通してください。

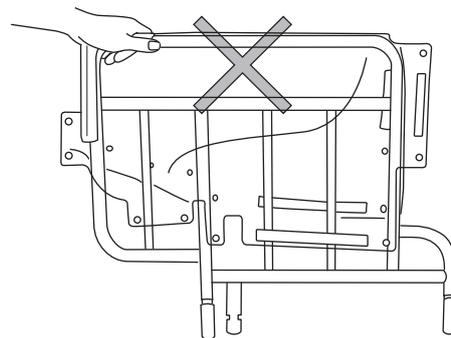

③左図 1～5 の順にホックを留め、その後、面ファスナーを貼りあわせてください。

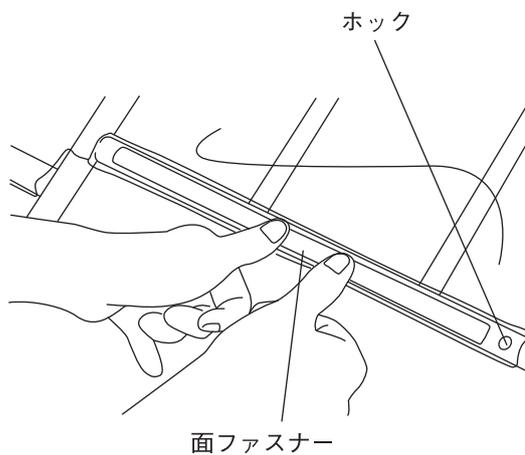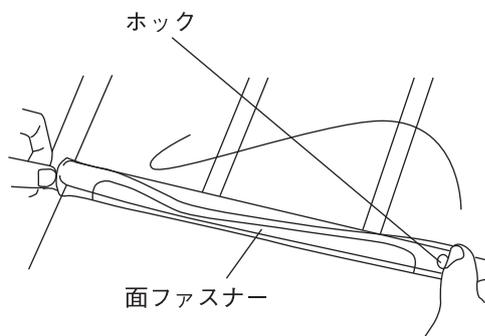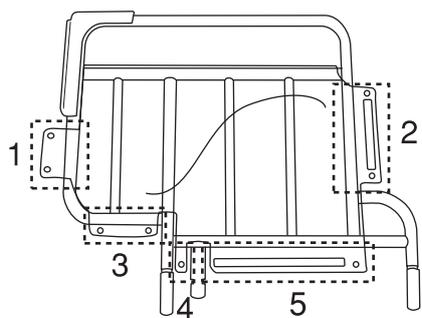

〈完成図〉

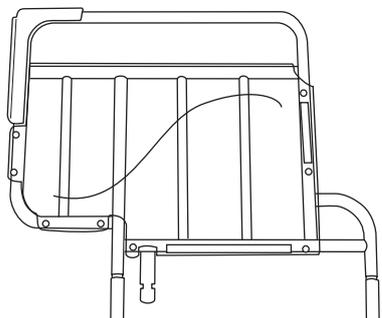

④ 1～5 すべてのホックと面ファスナーが確実に固定されていることを確認してください。

※取外しは、取付方法と逆の手順で行ってください。

お手入れ・長期保管について・廃棄について

【お手入れ】

■汚れを落とす場合

- 下記①～③の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

■消毒する場合

- 必ず下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

- 0.05～0.2% 塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）
- 0.05～0.2% 塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）
- 0.05% グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど）




- 揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。

- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質のおそれがあります。

- 洗剤で清拭した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないとカバーが劣化するおそれがあります。

- カバーへの色移りに注意してください。新聞紙や印刷物、ビニール製品や染料を使用しているものを長時間接触すると、変色や色移り、変質の原因となります。色移りしたカバーは、拭き取ることができませんので注意してください。

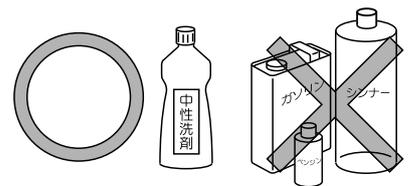

【長期保管について】

- 高温・多湿・低温・乾燥・直射日光のあたる場所・ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- 折りたたんで保管するとシワになるおそれがあります。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

【廃棄について】

- 廃棄の際は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および各自治体の規制に従ってください。

仕 様

品 名		クリアカバー			
品 番		KS-15TA	KS-16T	KS-17T	KS-19T
寸 法	長 さ (cm)	約56.5	約103	約103	約89.5
	高 さ (cm)	約65	約65	約78	約65
製 品 質 量 (kg)		約0.4	約0.7	約0.9	約0.6
材 質		軟質塩化ビニル			
適 合 品	KS-15*シリーズ: KS-151G KS-151Q	KS-16*シリーズ: KS-161G/161Q/166 KS-12*シリーズ: KS-126BG/126CG/ 126MG/126WG/ 126B/126C/126M/126W	KS-17*シリーズ: KS-171G/171Q/176 KS-14*シリーズ: KS-146BG/146CG/ 146MG/146WG/ 146B/146C/146M/146W	KS-19*シリーズ: KS-191H KS-191G KS-191Q	
	※仕様変更などにより、この取扱説明書の記述と一部異なる場合があります。適合品に記載のない製品との組合せやご不明な点はお買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。				

〈パラマウントベッド株式会社〉

本 社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	東京営業部	☎ (03) 3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11		☎ (011) 271-1181 (代)
仙台支店	〒980-0013	仙台市青葉区花京院2丁目1番65号	花京院プラザ4階	☎ (022) 217-7311 (代)
さいたま支店	〒338-0001	さいたま市中央区上落合9丁目4番7号		☎ (048) 852-0707 (代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間1715番地1		☎ (042) 795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号		☎ (052) 963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号		☎ (06) 6443-8791 (代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号		☎ (082) 293-1311 (代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号		☎ (092) 461-1131 (代)

