


楽匠Zシリーズベッド[KQ-7***]専用 脚座ゴムシート KQ-P70K

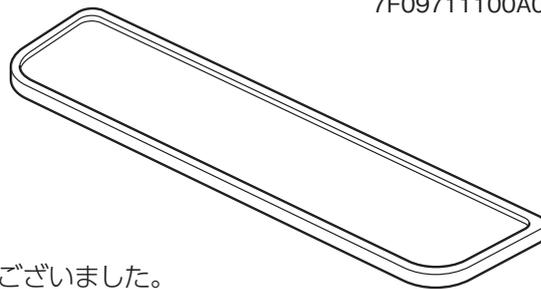

まえがき

このたびは、脚座ゴムシートをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、脚座ゴムシートを安全にお使いいただくための注意事項と使いかたなどを記載しています。

- 脚座ゴムシートをご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」およびベッド本体、の「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- 脚座ゴムシートを使用する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的について

この脚座ゴムシートは、ベッド本体のすべり止め、脚座によるゆかの傷つきを予防することを目的に作られています。

1 安全に使用するための注意事項

ご使用の前に、必ずこの「安全に使用するための注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

脚座ゴムシートと組合せて使用するベッドは、弊社が指定する適合品をご使用ください

指定以外の製品や他社製品と組合せて使用すると、思わぬけがをするおそれがあります。

お客様による修理・改造はしないでください

思わぬけがや破損の原因となります。

火気に近づけないでください

脚座ゴムシートの近くでストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形・発火するおそれがあります。

塩化ビニル系のゆか材での使用は避けてください

ゆか材に脚座ゴムシートの色が移り、ゆか材が変色するおそれがあります。

スプレータイプの殺虫剤を脚座ゴムシートに直接噴射しないでください

殺虫剤に含まれる溶剤によって、脚座ゴムシートが破損するおそれがあります。また、破損した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

2 使いかた

- ① 使用する前に、脚座ゴムシートの表面・裏面を拭いてください。


警告

- 脚座ゴムシートの表面・裏面を拭いてください。そのまま使用すると、ベッドに寄り掛かったり乗り降りするときにベッドが滑って、思わぬけがをするおそれがあります。

- ② ベッドのフレームを持って、脚座の下に脚座ゴムシートを差し込み、脚座が脚座ゴムシートの縁に乗りあげないように位置をあわせてください。(4ヶ所)




- 手や足がはさまれないように、十分に注意して作業を行ってください。
- 脚座ゴムシートは、必ず表面を上側にして置いてください。

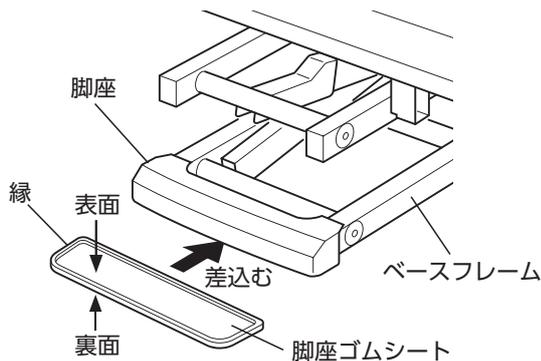

警告

- 脚座ゴムシートが確実に設置され、ベッドが安定していることを確認してください。安定しない状態で使用すると、思わぬけがや破損の原因となります。

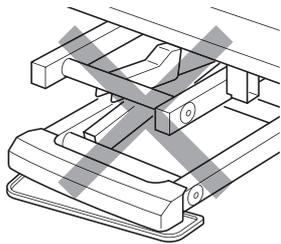

3 日常のお手入れ・長期保管について

1. 日常のお手入れについて

汚れの落としかた

- ① 水で薄めた中性洗剤にひたした布を、よくしぼって拭いてください。
- ② 水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③ 乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

注意

- 揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリンなど)やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。



オゾン殺菌器、オートクレーブ殺菌器などには対応できません。

2. 長期保管について

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。温度 - 10 ~ 50℃、湿度 30 ~ 90% RH の環境で保管してください。
- 取扱説明書は紛失しないように、大切に保管してください。

4 仕様

品名	脚座ゴムシート(4枚セット)
品番	KQ-P70K
寸法(cm)	約28×約5.7×約0.6
製品質量(g)	1枚当り 約80
材質	ゴム(EPDM)
適合品	楽匠Zシリーズ[KQ-7***]

アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

<パラマウントベッド 株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 東京営業部 ☎(03)3648-1171 (代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181 (代)
仙台支店 〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番65号 花京院プラザ4階 ☎(022)217-7311 (代)
さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号 ☎(048)852-0707 (代)
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間1715番地1 ☎(042)795-8800 (代)

名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600 (代)
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791 (代)
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311 (代)
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131 (代)

13.07

製版：株式会社 ハル