

KQ-P90V

保証書付

IVポールホルダー

まえがき


このたびは、IV ポールホルダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、IV ポールホルダーを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- IV ポールホルダーをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」、在宅ケアベッド楽匠Sシリーズ(KQ-9 ** 0、9 ** 1:別売)・KQ-60000シリーズ(KQ-6 **** *:別売)(以下、ベッド)の「取扱説明書」およびIV ポール(KC-56:別売 以下、IV ポール)の「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- IV ポールホルダーと組合せたベッドで療養する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」、ベッドの「取扱説明書」およびIV ポールの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。
特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

■このIV ポールホルダーは、ベッドの樹脂製ボードに取付けてIV ポールを使用することを目的に作られています。

各部の名称と部品の確認

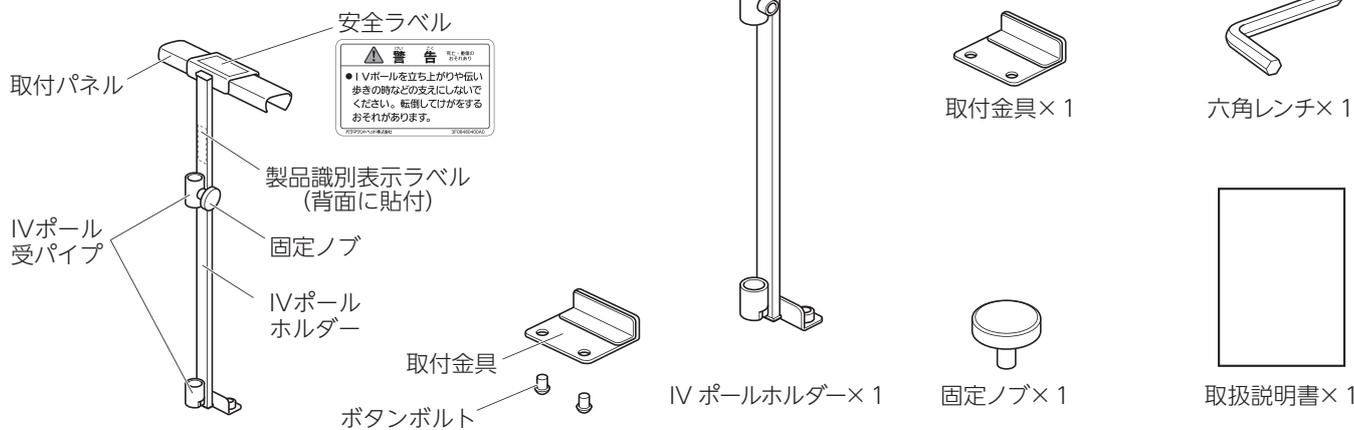

仕様

品名		IV ポールホルダー
品番		KQ-P90V
主要寸法 (奥行×幅×高さ) (cm)	IV ポールホルダー	9.4 × 7.5 × 52.1
	取付金具	6.3 × 7.5 × 2.3
	取付パネル	5 × 20 × 2.6
製品質量		0.8 kg
材質	IV ポールホルダー	スチール
	取付金具	スチール
	取付パネル	ABS 樹脂
	固定ノブ	スチール、ポリプロピレン
	ボタンボルト	スチール
適合品	ベッド	楽匠Sシリーズ (KQ-9 ** 0、9 ** 1)・KQ-60000シリーズ (KQ-6 **** *)
	IV ポール	IV ポール (KC-56)

安全に使用するための注意事項



けい 告
こく 告


この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ IV ポールホルダーと組合せて使用するベッドなどは弊社が指定する適合品をご使用ください

- 指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたり、IV ポールホルダーが破損したりするおそれがあります。
 - ・ IV ポールホルダーは、ベッドの樹脂製ボードに取付けてください。
 - ・ IV ポールホルダーには、IV ポールを取付けてください。

■ IV ポールを立ち上がりや伝い歩きするときなどの支えにしないでください

- IV ポールが抜けたり破損したりした場合に、転倒してけがをするおそれがあります。

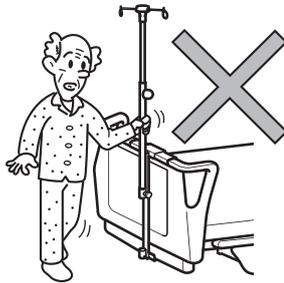

■ IV ポールホルダーや IV ポールの凸部に衣類などが絡まないように注意してください

- 衣類などが引っ張られるなどして、けがをするおそれがあります。

■ IV ポールホルダーに IV ポールを取付ける際は、ベッドのボードストッパーのロックがかかっていることを確認してください


- ボードが不意に外れ、けがをするおそれがあります。

■ IV ポールのフックに最大積載質量（各フック 1kg）を超えるものをつりさげないでください

- IV ポールのフックが破損して落下し、けがをするおそれがあります。
- IV ポールホルダーや IV ポールに大きな力がかかり、破損・変形するおそれがあります。

■ IV ポールを使用しないときは IV ポールホルダーをベッドから取外してください

- IV ポール受パイプに不意に手指などが入り、けがをするおそれがあります。
- 凸部に衣服などが引っ掛かるなどして、けがをするおそれがあります。

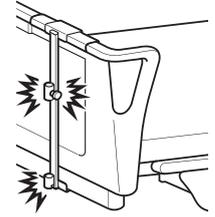

■ IV ポールの広げたフック部分に注意してください

- ベッドをご使用の方や介護される方の顔や目に当って、けがをするおそれがあります。

■ IV ポールホルダーに足をかけたり、乗ったりしないでください

- 転落・転倒してけがをしたり、ベッドや IV ポールホルダーが破損・変形したりするおそれがあります。

■ 火気に近づけないでください

- IV ポールホルダーやベッドの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形・火災などの原因となります。

■ お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。

■ ベッドを移動する際は、IV ポールを持たないでください

- IV ポールホルダーや IV ポールが破損して、けがをするおそれがあります。
- IV ポールに大きな力がかかり、破損・変形するおそれがあります。

■ 破損したら使用を中止してください

- IV ポールが適切に固定できず、けがをするおそれがあります。破損した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（裏表紙参照）まで修理をご依頼ください。



ちゅう い
注 意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。


■ ベッドの高さ調節のとき、周りの家具備品、部屋の構造物などと当たらないように注意してください

- 高さ調節機能付きのベッドは高さ調節で、上下に最大 45cm 動きます。高さ調節でベッドや IV ポール、IV ポールホルダーが周りの家具備品、部屋の構造物などと当たらないことを確認してください。ベッドや IV ポール、IV ポールホルダー、家具備品、構造物が破損・変形するおそれがあります。

■ スプレータイプの殺虫剤を IV ポールホルダーに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によって IV ポールホルダーが破損するおそれがあります。また、破損した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

取付方法

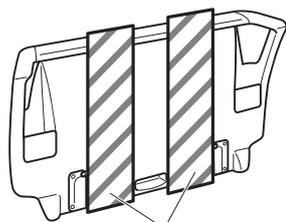

IVポールホルダーの取付ができる範囲

- IV ポールホルダーは、ベッドのヘッドボード、フットボードのどちらにも取付けが可能です。
- IV ポールホルダーの取付けができる範囲は左図の斜線部分となります。

※お使いになる方の状況や、環境にあわせて、IV ポールホルダーの取付け位置をお決めください。

- ① ボードの上部に取付パネルを取付けてください。
※ KQ-9**1シリーズ・KQ-6**2* (木目パネル付の樹脂製ボード) に取付ける場合は取付パネルは必要ありません。




- 取付パネルには向きがあります。向きに注意して取付けてください。




- ② IV ポールホルダーの上側の金具をしっかりとボード上部に引っ掛けてください。



- ③ 取付金具をボードの内側に引っ掛けて、IV ポールホルダーと穴の位置をあわせてください。ボタンボルトを取付金具の下側から差込んで、付属の六角レンチでしっかりと締付けてください。(2ヶ所)

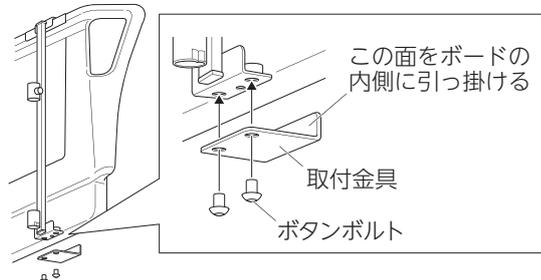

- ④ 固定ノブをIV ポールホルダーのナット部に取付けてください。(IV ポールを差込んだあと、IV ポールを固定するための固定ノブです。最後まで締付ける必要はありません)

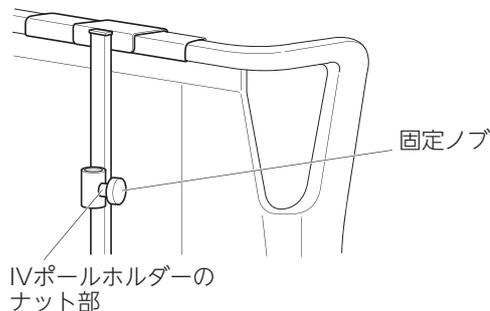


- ボタンボルトを締付けた後、取付金具がしっかりと固定されていることを確認してください。また、IV ポールホルダーにがたつきがないことを確認してください。

使用方法



警告

- IV ポールを取付ける際は、ベッドのボードストッパーのロックがかかっていることを確認してください。ボードが不意に外れ、けがをするおそれがあります。

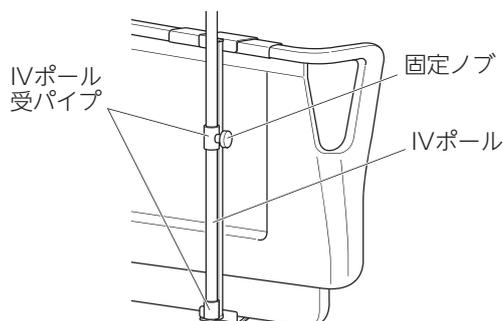

- ① 固定ノブを反時計回りに回し、ゆるめてください。
- ② 上下2ヶ所のIV ポール受パイプに、IV ポールを差込んでください。
- ③ 固定ノブを時計回りに回し、しっかりと締付けてください。



- 固定ノブを締付けた後、IV ポールが確実に取付けられ、がたつきがないことを確認してください。

日常のお手入れ・長期保管について

■日常のお手入れ

- 清拭する場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、その後水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で残った水分を拭き取ってください。
- 消毒剤を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度でご使用ください。

76.9 ~ 81.4%	消毒用エタノール
0.05 ~ 0.2%	塩化ベンザルコニウム (オスバンなど)
0.05 ~ 0.2%	塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)
0.05%	グルコン酸クロロヘキシジン (ヒビテンなど)
0.02 ~ 0.05%	次亜塩素酸ナトリウム (ミルトンなど)



●オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。



注意

- 揮発性のもの (シンナー、ベンジン、ガソリンなど) やクレゾールは使用しないでください。変色・変質させるおそれがあります。
- 中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂部分が割れるおそれがあります。

■長期保管する場合

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。温度 -10 ~ 50℃、湿度 30 ~ 90% RH の環境で保管してください。
- 取扱説明書を紛失しないよう、大切に保管してください。

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター (下記参照) までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番 (下記保証書を参照)
- お買い上げ日
- 破損または異常の内容 (できるだけ詳しく)
- お名前、ご住所および電話番号

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639 受付時間: 平日 8:00~19:00 / 土・日・祝日 9:00~17:20 (年始は休業いたします)

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

保証書

品名 / 品番	IV ポールホルダー / KQ-P90V	保証期間	*お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前	*販売店 (店名・住所)	☎	()		
	〒 ()					
	ご住所					

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証規定】

- 保証期間内 (お買い上げの日より1年間) に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - (1) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - (2) 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - (3) お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.
- (4) 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
- (5) 保証書のご提示がない場合
- (6) 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
- (7) 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合

<パラマウントベッド 株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代)
 東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代)
 札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)
 仙台支店 〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番65号 花京院プラザ4階 ☎(022)217-7311(代)
 さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号 ☎(048)852-0707(代)
 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間1715番地1 ☎(042)795-8800(代)
 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)