

プレグラーマットレス

まえがき

このたびは、プレグラーマットレス(以下、マットレス)をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、マットレスを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- マットレスをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- マットレスを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷(骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など)を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 身体がはさまれないように注意してください

- マットレスとベッド・サイドレール・スイングアーム介助バーなどのすき間に身体がはさまれて、けがをしたり圧迫されて窒息したりするおそれがあります。



■ マットレスと組合せて使用するベッドなどは弊社が指定する適合品をご使用ください

- 指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたりマットレスが破損したりするおそれがあります。適合品については、仕様(裏表紙)を参照してください。
- 組合せて使用するベッドなどの取扱説明書に従って正しくご使用ください。

■ 人が乗った状態のまま移動させないでください

- このマットレスを移動させる際は、人や重いものが乗っていない状態で移動させてください。マットレスの上に人や重いものが乗ったまま移動させると、人が転落してけがをしたり、詰め物や側地が破損したりするおそれがあります。

■ マットレスの上に敷布団や2枚以上重ねたマットレスパッドなど厚手の敷物を敷かないでください

- 敷布団やマットレスパッドなどがずれて転落・転倒し、けがをするおそれがあります。

■ 火気に近づけないでください

- マットレスの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変形・変質・発火などの原因となります。

■ マットレスの上で立ちあがったり、飛び跳ねたりしないでください

- 転落・転倒してけがをしたり、マットレスが破損したりするおそれがあります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷(打撲・すり傷・切り傷など)を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ マットレスを折りたたんだり、丸めたりしないでください

- 破損・変形の原因となります。

使用方法(マットレスの設置)

●このマットレスはベッドの上に直接敷いてお使いください。



- このマットレスを設置する際は、ベッド上に障害物が無いことを確認してください。
- このマットレスは2枚以上重ねて使用しないでください。
- このマットレスは頭側・足側・表裏の区別がありません。定期的に裏返したり、頭側・足側の向きを変えたりしてご使用ください。

日常のお手入れ

側地の洗浄



●側地を外すときおよび
取外した後は、側地や詰め物が破損しないように注意して取扱ってください。

- ①側地のファスナーを開け、詰め物を完全に取出してください。
- ②右図の絵表示に従ってください。



中性洗剤使用

- ・洗濯機で弱い洗濯処理ができます
- ・洗濯の液温は40℃が限度です
- ・中性洗剤を使用してください(蛍光増白剤を含む洗剤は使用しないでください)



・漂白処理はできません



- ・洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができます
- ・排気温度は60℃が限界です(低温乾燥)



・日陰でのつり干し乾燥がよいです



あて布使用

- ・底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができます
- ・あて布を使用してください



・ドライクリーニング処理はできません



・普通操作のウェットクリーニング処理ができます

長期保管について

■長期にわたり、マットレスをご使用にならないときは、下記の点にご注意ください。

- マットレス以外のものを重ねて載せないでください。
 - 高温・多湿・ほこりの多い場所・直射日光を避けてください。
- ※詰め物や側地が変色する場合がありますが、製品の性能に問題はありません。

仕様

品名		プレグラーマットレス							
品番		KE-551,551Q	KE-5511Q	KE-553,553Q	KE-5531Q	KE-555	KE-557Q	KE-552B	KE-554B
ボトム幅		91cm用		83cm用		78cm用	99cm用	80cm用	70cm用
寸法 (cm)	幅	91	91	83	83	78	99	80	70
	長さ	191	180	191	180	191	191	164	131
	高さ	8	8	8	8	8	8	8	8
製品質量(kg)		7	6.6	6.5	6.1	6.1	7.6	5.1	3.8
材質	側地	ポリエステル100% (抗菌・防カビ・難燃)							
	詰め物	ポリエステル100%							
適合品		KA-85000シリーズ、KA-60000シリーズ、メーティスPROシリーズ、メーティスシリーズ、ウッドイーノドージェシリーズ、スタンダードベッド、KA-5000シリーズ、KA-4000シリーズ、アルフォーネシリーズ、カリストエールシリーズ、KA-7900シリーズ、KA-4351(ドミトリーベッド)、小児ベッド、KRシリーズ、KR+シリーズ、アルデコラシリーズ、FeeZシリーズ、ベーシックベッド、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズ、楽匠FeeZシリーズ、アウラ電動ベッド、KQ-50000シリーズ、KQ-60000シリーズ、INTIME1000シリーズ							
※マットレスは適合するベッドの幅・長さにあわせてものをご使用ください		※上記に記載されていないベッドとの適合につきましては、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。							

アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間：平日 8：00～19：00 / 土・日・祝日 9：00～17：20 (年始は休業いたします)

【パラテクノ株式会社について】弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

<パラマウントベッド株式会社>

本社	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(代)	横浜支店	〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)
東京支店	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)	名古屋支店	〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
札幌支店	〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)	大阪支店	〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
仙台支店	〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番65号 花京院プラザ4階	☎(022)217-7311(代)	広島支店	〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
さいたま支店	〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号	☎(048)852-0707(代)	福岡支店	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)