

クレーターマットレス

まえがき

このたびは、クレーターマットレス(以下、マットレス)をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この「取扱説明書」には、マットレスを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- マットレスをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- マットレスを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

■ クレーターマットレスはご家庭や医療施設、高齢者施設で療養される際に、身体にかかる圧力を分散させることを目的に作られています。

各部の名称と部品の確認

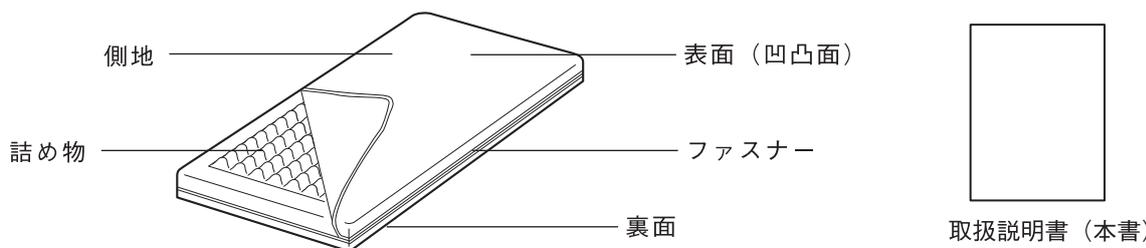


安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷(骨折・圧迫・麻痺など)を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 身体がはさまれないように注意してください

- マットレスとベッド・サイドレール・スイングアーム介助バーなどのすき間に身体がはさまれて、けがをしたり圧迫されて窒息したりするおそれがあります。

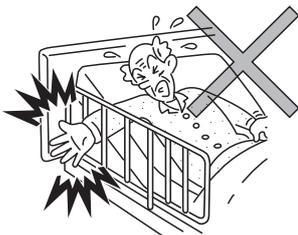

■ チューブ(ドレーン)などがはさまれないように注意してください

- マットレスとベッド・サイドレール・スイングアーム介助バーなどのすき間にチューブ(ドレーン)などがはさまると、チューブ(ドレーン)などが抜れたり、つぶれたりするおそれがあります。

安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷(骨折・圧迫・^{まひ}麻痺など)を負う可能性が想定される内容を示しています。

■マットレスの上に敷布団や2枚以上重ねたマットレスパッドなど厚手の敷物を敷かないでください

- 敷布団やマットレスパッドなどがずれて転落・転倒し、けがをするおそれがあります。

■サイドレール使用時もベッドからの転落に十分注意してください

- サイドレールの上から身を乗り出して転落し、けがをするおそれがあります。

■うつぶせ寝はしないでください

- 長時間うつぶせ寝をすると窒息するおそれがあります。

■火気に近づけないでください

- マットレスの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変形・変質・発火などの原因となります。

■マットレスの上で立ちあがったり、飛び跳ねたりしないでください

- 転落・転倒してけがをしたり、マットレスが破損したりするおそれがあります。

■人が乗った状態のまま移動させないでください

- このマットレスを移動させる際は、人や重いものが乗っていない状態で移動させてください。マットレスの上に人や重いものが乗ったまま移動させると、人が転落してけがをしたり、詰め物や側地が破損したりするおそれがあります。

■マットレスと組合せて使用するベッドなどは弊社が指定する適合品をご使用ください

- 指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたりマットレスが破損したりするおそれがあります。適合品については、仕様(裏表紙)を参照してください。
- 組合せて使用するベッドなどの取扱説明書に従って正しくご使用ください。

■マットレスはベッドの幅・長さにあわせたものをご使用ください

- ベッドの幅や長さにあわないマットレスを使用すると意図せぬすき間が発生し、はさまれてけがをするおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷(打撲・すり傷・切り傷など)を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■体圧分散機能を確保するために、以下の点に注意してください

- 床ずれ予防は専門家にご相談ください。このマットレスだけでは床ずれは予防できません。全身的な管理(栄養状態の管理、基礎疾患の管理、マットレス上での姿勢・体位の管理)が必要です。床ずれ予防を行うにあたっては医師、看護師、介護相談員などの専門家にご相談ください。
- このマットレスは、総合的な床ずれケアのためのひとつの道具です。体位変換を不要にするものではありません。このマットレスの使用と並行して、体位変換などのケアを行ってください。
- このマットレスの上に体圧分散を妨げるような厚手の敷物を敷かないでください。効果的に体圧を分散できません。

■ファスナーが開いた状態では使用しないでください

- 側地や詰め物が破損するおそれがあります。
- 開いているファスナーから液体や異物が浸入すると、詰め物が劣化するおそれがあります。

■オートクレーブ滅菌器、オゾン殺菌器などは使用しないでください

- マットレスが変質・破損・劣化するおそれがあります。

■氷まくらや保冷剤などの冷却作用のあるものはマットレスに直接載せないでください

- マットレスに急激な温度変化を与えると、内部で結露が起こることがあります。結露により、側地や詰め物が劣化するおそれがあります。

■マットレスを折りたたんだり、丸めたりしないでください

- 破損・変形の原因となります。

■ファスナートップに注意してください

- 手や足などをすりむくなどして、けがをするおそれがあります。

使用方法




- マットレスの上に敷布団や2枚以上重ねたマットレスパッドなど厚手の敷物を敷かないでください。敷布団やマットレスパッドなどがずれて転落・転倒して、けがをするおそれがあります。
- 電気毛布などの電気機器をマットレス上で使用する場合、ベッドのキャスターや可動部にコード類（電源コードなど）をはさまないように設置してください。コード類が破損し、感電・火災のおそれがあります。



- 電気毛布や電気あんかなどを使用する場合は、温度設定にご注意ください。50℃を超える温度で使用すると、詰め物が劣化する原因となります。
- 詰め物や側地を交換するときや側地を洗浄するとき以外は、側地を取外さないでください。側地や詰め物が破損するおそれがあります。
- マットレスの上に体圧分散を妨げるような厚手の敷物を敷かないでください。効果的に体圧を分散できません。
- 背あげた状態で使用する場合は、時間を制限してください。背あげた状態で長時間使用すると、側地や詰め物の劣化が早まるおそれがあります。
- 側地に血液・尿・汗・皮脂などの汚れを付着させたままにしないでください。側地が劣化したり、においやしみが残ったりするおそれがあります。
- マットレスに先のとがったものを近づけないでください。また、衣類のポケットにもものを入れた状態で使用しないでください。マットレスが破損するおそれがあります。
- 使用時または搬送時に、過度の荷重や衝撃を加えないでください。マットレスが破損する原因となります。

取付方法

1. マットレスの設置

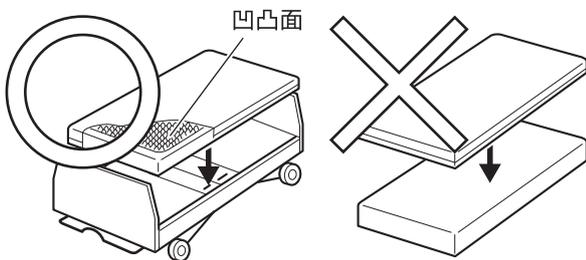


- このマットレスは、一般マットレスの代わりに使用する体圧分散マットレスです。ベッドの上に直接敷いてお使いください。



- マットレスを設置する際は、ベッド上に障害物がないことを確認してください。
- このマットレスは2枚以上重ねて使用しないでください。
- このマットレスには表・裏があります。必ず凹凸面が表になるように設置してください。
- このマットレスは頭側・足側の区別がありません。定期的に頭側・足側の向きを変えてご使用ください。マットレスを平均的に使うことにより、長持ちさせることができます。
- におい(ウレタン臭など)が気になる場合は、風通しの良い日陰にマットレスを1日程度放置しておくことで、においはかなり低減します。

2. ベッドメイクの仕方

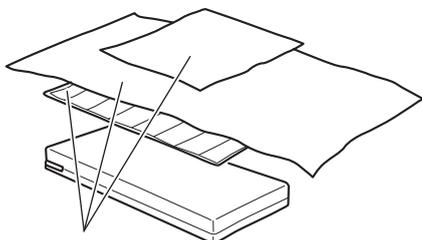

必要に応じてタオル、シーツ、マットレスパッドなどを使用してください。

- 左図を参照して、マットレス天面と側面をシーツで覆ってください。
- 汗を多くかけられる方が使用する場合は、空調管理を十分に行うとともに、必要に応じて体位変換などを行ってください。また、マットレスパッドなどを使用し、シーツやマットレスパッドなどの洗濯・交換およびマットレス本体の日常のお手入れ(裏表紙参照)を頻繁に行ってください。

日常のお手入れ

側地の洗浄



●側地を外するときおよび取外した後は、側地や詰め物が破損しないように注意して取扱ってください。

- ①側地のファスナーを開け、詰め物を完全に取出してください。
- ②下図の絵表示に従ってください。



- 洗濯機で弱い洗濯処理ができます
- 洗濯の液温は40°Cが限度です
- 中性洗剤を使用してください

中性洗剤使用



- 漂白処理はできません



- 洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができます
- 排気温度は60°Cが限界です(低温乾燥)



- 日陰でのつり干し乾燥がよいです



- 底面温度110°Cを限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができます



- ドライクリーニング処理はできません



- 普通操作のウェットクリーニング処理ができます

長期保管について

■長期にわたり、マットレスをご使用にならないときは、下記の点にご注意ください。

- マットレス以外のものを重ねて載せないでください。
- 高温・多湿・ほこりの多い場所・直射日光を避けてください。
- ※詰め物や側地が変色する場合がありますが、製品の性能に問題はありません。

廃棄方法について

■マットレスを破棄する際は、「ウレタンフォームマットレス」として、各市町村の指示に従い正しく廃棄してください。

仕様

品名		クレーターマットレス	
品番		KE-761	KE-763
ボトム幅		91cm用	83cm用
寸法 (cm)	幅	91	83
	長さ	191	191
	厚さ	9	9
製品質量 (kg)		7	6.5
材質	側地	ポリエステル100% (難燃加工)	
	詰め物	ウレタンフォーム (難燃加工)	
耐熱温度		ポリエステル・ウレタンフォーム：60°C	
適合品		KA-85000シリーズ、KA-60000シリーズ、メーティスPROシリーズ、メーティスシリーズ、ウッディーノドージェシリーズ、スタンダードベッド、KA-5000シリーズ、KA-4000シリーズ、カリストエールシリーズ、KA-7900シリーズ、KA-4351 (ドミトリーベッド)、小児ベッド、KRシリーズ、KR+シリーズ、アルデコラシリーズ、FeeZシリーズ、ベーシックベッド、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズ、楽匠FeeZシリーズ、アウラ電動ベッド、KQ-50000シリーズ、KQ-60000シリーズ、INTIME1000シリーズ	
※マットレスは適合するベッドの幅・長さにあわせてものをご使用ください		※上記に記載されていないベッドとの適合につきましては、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。	

アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間：平日 8：00～19：00 / 土・日・祝日 9：00～17：20 (年始は休業いたします)

【パラテクノ株式会社について】弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

<パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂 2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代) 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間 5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂 2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代) 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉 1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南 2条西 13丁目318番地 11 ☎(011)271-1181(代) 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀 2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
仙台支店 〒980-0013 仙台市青葉区花京院 2丁目1番65号 花京院プラザ4階 ☎(022)217-7311(代) 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町 3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合 9丁目4番7号 ☎(048)852-0707(代) 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)