

KA-037AR,037AL,037BR,037BL

保証書付

サイドサポート (オプション取付穴差込式)

まえがき

このたびは、サイドサポートをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、サイドサポートを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- サイドサポートをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- サイドサポートと組合せたベッドで療養する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。


使用目的

■このサイドサポートは、ベッドサイドに取付けて、寝具の落下を予防することやベッドで寝ている方の安心感を高めることを目的に作られています。また、ベッドサイドレールを使用する場合と比較して、寝ている方のベッドでの解放感を高める効果が期待できます。


各部の名称と部品の確認

開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

■KA-037AR,037BR

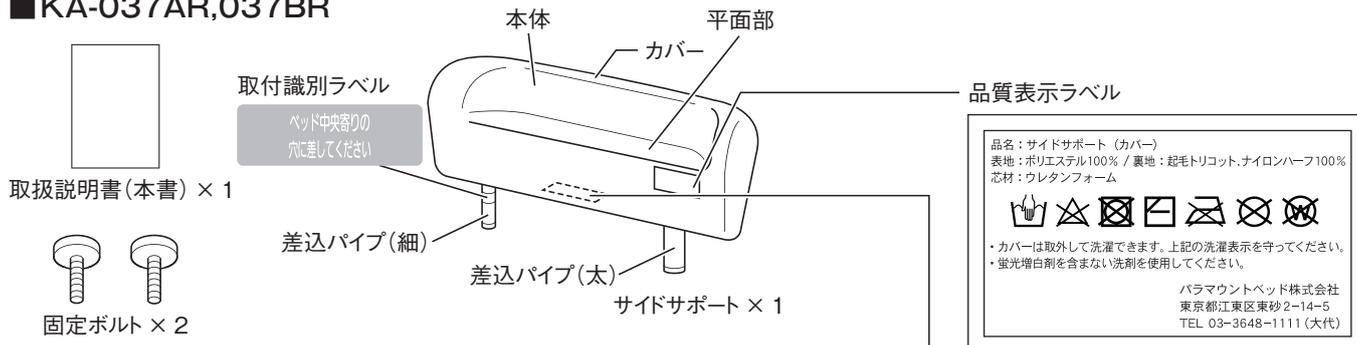


■KA-037AL,037BL

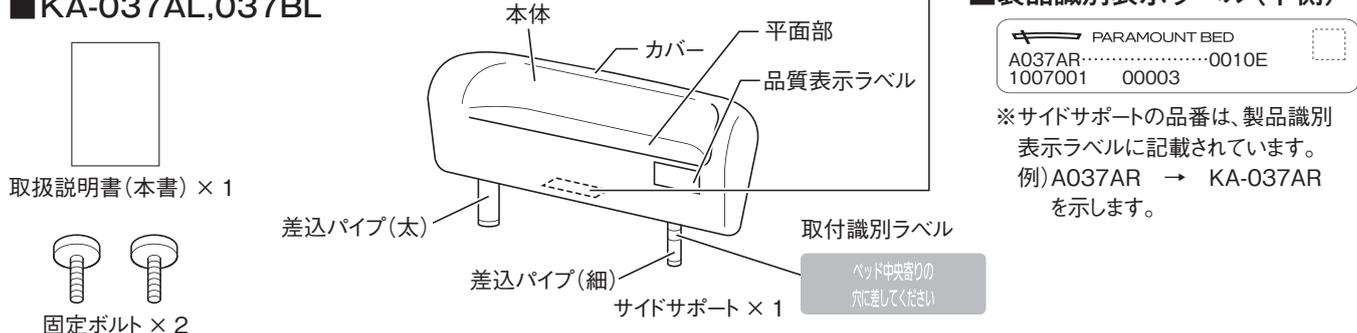

特長

拘束感からの解放

ベッドサイドレールを使用する場合に比べ、解放感が得られます。

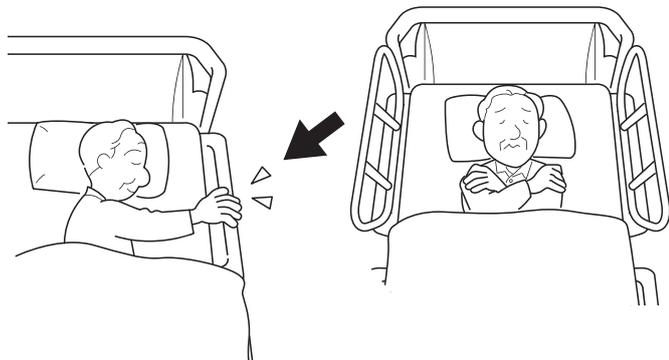


ベッド端の認識性の向上 ※1

ベッド端を認識しやすい形状になっていますので、安心してお休みいただけます。




転落時の衝撃低減 ※1

万一ベッドから転落した場合、ベッドサイドレールを乗り越えた場合に比べて低い位置から転落するため、衝撃が少なくすみます。さらに、衝撃緩和マット「テストール」(別売)と組み合わせることにより、安全性を向上させることができます。

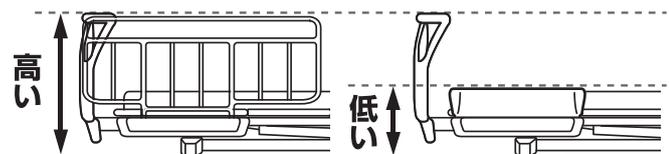

ぶつけた際の衝撃緩和

ベッド側面がクッションで保護されるので、寝返りなどの不意な動作で身体がぶつかった場合の衝撃を緩和します。

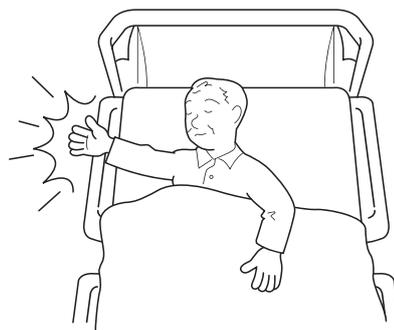


スムーズな立ち上がり

端座位※2をとる際には、取外さずそのまま足をおろすことができます。



ベッド上スペースの拡大 ※1

左右スペースが拡大することにより、寝返りスペースをより広く確保することができます。

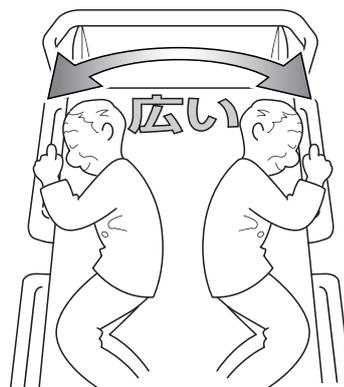

※1 ベッドがフラット（背あげ・膝あげ：0°）な状態で最大の効果が得られるもので、背あげ・膝あげを行った場合には効果を発揮することができません。

※2 端座位とは、図のようにベッドから足をおろした状態で座った姿勢のことです。

安全に使用するための注意事項



けい
こく
警 告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■サイドサポートと他のオプションやボード、あがっているボトムなどとのすき間に身体の一部（特に頭や首）が入らないように注意してください

- すき間に入ると抜けなくなり、けがをするおそれがあります。
- すき間に入った状態でベッドを操作すると、はさまれてけがをするおそれがあります。
- 特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

■サイドサポートとマットレスのすき間に身体の一部（特に頭や首）が入らないように注意してください

- すき間に入ると抜けなくなり、けがをするおそれがあります。
- 特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

■サイドサポートを踏み台代わりにしないでください

- サイドサポートの上に立ちあがらないでください。転落・転倒して、けがをするおそれがあります。特にお子様にはご注意ください。

■サイドサポート使用時もベッドからの転落に十分注意してください

- サイドサポートはベッドからの転落を完全に予防できるものではありません。サイドサポートを乗り越えて転落し、けがをするおそれがあります。ベッドからの転落予防としてお使いになる場合は、ベッドサイドレールをお使いください。
- サイドサポート同士のすき間、サイドサポートと他のオプションやボードとのすき間から転落して、けがをするおそれがあります。
- ベッドの背や足をあげた状態で使用される場合、転落予防としての効果を発揮することができません。
- 特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

■サイドサポートに腰掛けたり、てすり代わりにしたりしないでください

- 転落・転倒して、けがをするおそれがあります。サイドサポートはベッド端の認識性の向上や寝具の落下予防、ベッドで寝ている方の安心感、解放感の寄与を目的としています。立ちあがり時など、支えとしてお使いになる場合はスイングアーム介助バーをお使いください。

■乳幼児やお子様には使用しないでください

- すき間にはさまれたり、転落したりして、けがをするおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 意図せぬすき間が発生して、身体の一部がはさまれてけがをしたり、サイドサポートが破損したりするおそれがあります。

■サイドサポートと組合せて使用するベッドなどは弊社が指定する適合品をご使用ください

- 指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたり、サイドサポートが破損したりするおそれがあります。適合ベッドについては6ページの「仕様」を、マットレスとの組合せについては5ページの「マットレスとの組合せ」をご覧ください。記載されていないベッドおよびマットレスとの適合については、直接弊社までお問い合わせください。

■差込パイプを2ヶ所ともベッドのオプション取付穴に差込んでください

- 1ヶ所だけを差込んで使用すると、サイドサポートが変形し、けがをするおそれがあります。

■サイドサポートに火気や先のとがったものを近づけないでください

- サイドサポートが破損したり、変質・変形・発火する原因となったりします。破損・変形した場合は使用を中止してください。

■サイドサポートは正しい向きで取付けてください

- 誤った向きで取付けると、確実に差込むことができず、サイドサポートが不意に外れるなどして、けがをするおそれがあります。正しい向きでの取付けかたについては、「使用方法」（3～4ページ）を参照してください。

安全に使用するための注意事項

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・ ^{まひ} 麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
---	--

■固定ボルトが確実に締付けられていることを確認してください

- 固定しなかったり固定が不十分だったりした場合、サイドサポートが不意に抜けて、思わぬけがをするおそれがあります。
- 使用の頻度や環境により固定ボルトがゆるむことがありますので、定期的に固定ボルトのゆるみを点検してください。

■ボトムやマットレスとサイドサポートの間にコード類をはさまないでください

- コード類が破損し、感電・火災のおそれがあります。

■マットレスとの組合せに注意してください

- 組合せるマットレスによっては、サイドサポートの高さが足りず、転落してけがをするおそれがあります。
 - オーバーレイを使用する場合は、マットレスとの合計の厚さに注意してください。転落してけがをするおそれがあります。
 - 組合せについては、5ページの「マットレスとの組合せ」を参照してください。
- ※組合せによっては、ジョイントセット（A037-1:別売）が必要な場合があります。

 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
---	--

■スプレータイプの殺虫剤をサイドサポートに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によってカバーや樹脂・ゴム部分が破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

■サイドサポートを持ってベッドを動かさないでください

- サイドサポートに大きな力がかかり、破損・変形するおそれがあります。

■滅菌器や洗浄機を使用しないでください

- 滅菌器や洗浄機をご使用になると、破損・変形のおそれがあります。


使用方法

 警告	<ul style="list-style-type: none">●サイドサポートを取付ける際は、オプション取付穴に異物が入っていないことを確認してください。異物が入っていると確実に取付けることができず、ベッドから転落したり、意図せぬすき間が発生して、身体の一部がはさまれたりしてけがをするおそれがあります。特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。●サイドサポートは正しい向きで取付けてください。誤った向きで取付けると、確実に差込むことができず、サイドサポートが不意に外れるなどして、けがをするおそれがあります。●固定ボルトが確実に固定されていることを確認してください。固定しなかったり固定が不十分だったりした場合、サイドサポートが不意に抜けて、思わぬけがをするおそれがあります。また、使用の頻度や環境により固定ボルトがゆるむことがありますので、定期的に固定ボルトのゆるみを点検してください。
---	--


使用方法

■取付けかた

- サイドサポートには差込パイプ（太）（細）の左右が異なるKA-037AR・AL（もしくはKA-037BR・BL）があります。取付識別ラベルがベッド中央側になるように、下図に従って取付けてください。
- サイドサポートは、ベッド1台に最大4本（KA-037AR/BR：2本、KA-037AL/BL：2本）取付けできます。

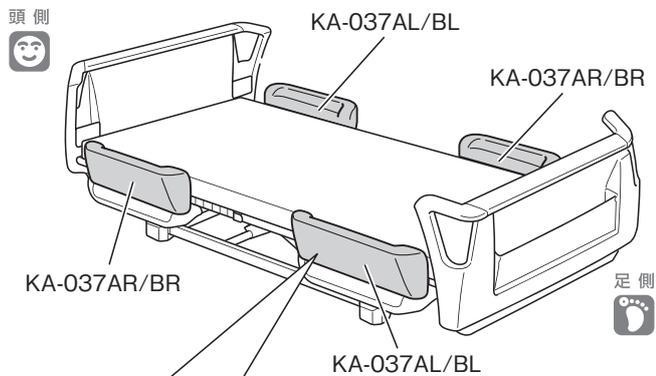

- 転落を完全に予防できるものではありませんので、特に就寝時にはベッドの高さを最も低い位置に設定してご使用ください。万一の落下に備え、衝撃緩和マット「テストール」（別売）との併用をおすすめします。

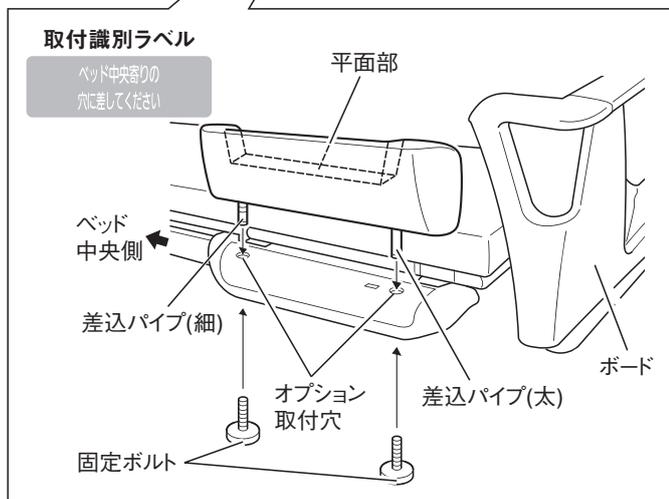

- ①平面部を内側にして、差込パイプ（2本）をベッドのオプション取付穴に差込んでください。その際、取付識別ラベルがベッド中央側になるように注意してください。
- ②オプション取付穴の下側から固定ボルトを差込み、手でしっかりと締付けてください。




- 固定ボルトを締付ける際は、ベッドの高さをあげてから行ってください。

※取外しは、取付けと逆の手順で行ってください。

■取付け高さをあげる場合



- ジョイントセットを取付ける際は、差込パイプの太さに合ったジョイントセットを取付けてください。取付け間違えると、確実に差込むことができずサイドサポートが不意に外れるなどして、けがをするおそれがあります。
- ジョイントセットを取付けた場合も、サイドサポートを使用する前に固定ボルトが確実に締付けられていることを確認してください。

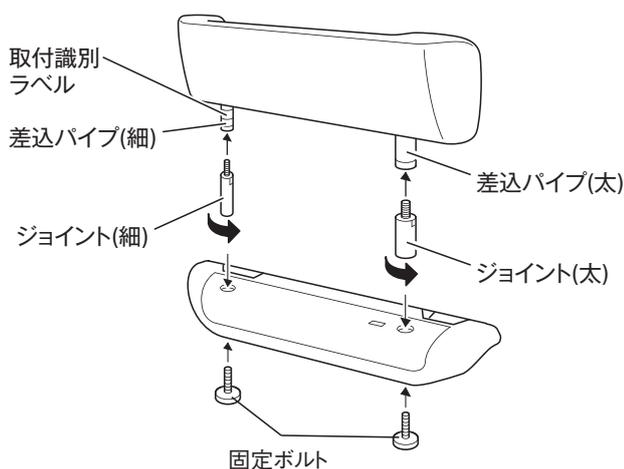

- ①ジョイントセット（別売：A037-1）を差込パイプの端部に取付けてから、ベッドに取付けてください。取付け高さが4.5cm高くなります。
- ②オプション取付穴の下側から固定ボルトを差込み、手でしっかりと締付けてください。



- 固定ボルトを締付ける際は、ベッドの高さをあげてから行ってください。

※取付けの際には、ジョイントセットに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。

カバー取付方法

■お手入れなどによりカバーを取外した場合は、下記の手順でカバーを取付けてください。

- ① 本体とカバーの向きをあわせて、カバーを本体上側からかぶせ、下側で面ファスナー（2ヶ所）とホック（4ヶ所）のオス・メスをあわせて固定してください。
- ② 本体平面部とカバーの形状をしっかりとあわせ、全体の形を整えてください。

マットレスとの組合せ

■組合せるマットレスによっては、別売のジョイントセット（A037-1）が必要な場合や、使用できない場合があります。詳しくは下記の表を確認してください。

【マットレスとの組合せ】

ベッド	マットレス	プレグラール	プレグラールスーパー	ポケットコイルスプリング	クレーター	ストレッチスリム	エバーリーフ7	エバーリーフ	コンフォケア	エバーフィット	ストレッチフィット	エバーフロート※4
メーティスPROシリーズ		●※1	●※1	●※1	●※1	●	●	●※1	●※1	●※1	●※1	—
メーティスシリーズ		●※1	●※1	●※1	●※1	●	●	●※1	●※1	●※1	●※1	—
アルデコラシリーズ ※2		●※1	●※1	●※1	●※1	●	●	●※1	●※1	●※1	●※1	—
KA-5000シリーズ ※2		●※1	●※1	●※1	●※1	●	●	●※1	●※1	●※1	●※1	—
カリステールシリーズ		●	●	●※1	●※1	●	●	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1
KA-30000シリーズ		●	●	●※1	●※1	●	●	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1
KRシリーズ		●	●	●※1	●	●	●	●	●	●※1	●	●※1
KR+シリーズ ※3		●	●	●※1	●	●	●	●	●	●※1	●	●※1
KA-7900シリーズ		●	●	●※1	●	●	●	●	●	●※1	●	●※1
FeeZシリーズ		●	●	●※1	●	●	●	●	●	●※1	●	●※1
楽匠Zシリーズ		●	●	●※1	●	●	●	●	●	●※1	●	●※1
楽匠Sシリーズ		●	●	●※1	●	●	●	●	●	●※1	●	●※1
楽匠FeeZシリーズ		●	●	●※1	●	●	●	●	●	●※1	●	●※1
KQ-50000シリーズ		●	●	●※1	●※1	●	●	●※1	●	●※1	●※1	●※1
KQ-60000シリーズ		●	●	●※1	●※1	●	●	●※1	●	●※1	●※1	●※1

ベッド	マットレス	エバーリーフシャイン	アクアフロート	ストレッチグライド	マキシーフロート	パラフロート※5	アキュマックス	エアマットレスこちあ	エアマットレスこちあ結起slim	エアマットレスこちあ風香	エアマットレスこちあ結起3D	ファータ
メーティスPROシリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
メーティスシリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
アルデコラシリーズ ※2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
KA-5000シリーズ ※2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
カリステールシリーズ		●※1	●※1	●※1	—	—	—	—	—	—	—	●
KA-30000シリーズ		●※1	●※1	●※1	—	—	—	—	—	—	—	●
KRシリーズ		●※1	●※1	●※1	—	—	●※1	●※1	●※1	●※1	—	●
KR+シリーズ ※3		●※1	●※1	●※1	—	—	●※1	●※1	●※1	●※1	—	●
KA-7900シリーズ		●※1	●※1	●※1	—	—	●※1	●※1	●※1	●※1	—	●
FeeZシリーズ		●※1	●※1	●※1	—	—	●※1	●※1	●※1	●※1	—	●
楽匠Zシリーズ		●※1	●※1	●※1	—	●※1	—	●※1	●※1	●※1	—	●
楽匠Sシリーズ		●※1	●※1	●※1	—	●※1	—	●※1	●※1	●※1	—	●
楽匠FeeZシリーズ		●※1	●※1	●※1	—	●※1	—	●※1	●※1	●※1	—	●
KQ-50000シリーズ		●※1	●※1	●※1	—	●※1	—	●※1	●※1	●※1	—	●
KQ-60000シリーズ		●※1	●※1	●※1	—	●※1	—	●※1	●※1	●※1	—	●

●適合 —適合外

※1 ジョイントセットA037-1が必要

※2 (KA-53*5**, KA-53*61*, KA-55*5**のみ)

※3 (KR-8***5*のみ)

※4 (KE-583A, KE-581Aのみ)

※5 パラフロートは在宅ベッド専用です。

【オーバーレイ使用時のマットレスとの組合せ】

ベッド	マットレス	プレグラール	プレグラールスーパー	クレーター	ストレッチスリム	エバーリーフ7	エバーリーフ	コンフォケア	エバーフィット	ストレッチフィット	ファータ
メーティスPROシリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メーティスシリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルデコラシリーズ ※2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KA-5000シリーズ ※2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カリステールシリーズ		—	—	—	●※1	●※1	—	—	—	—	●※1
KA-30000シリーズ		—	—	—	●※1	●※1	—	—	—	—	●※1
KRシリーズ		●※1	●※1	—	●※1	●※1	—	●※1	—	—	●※1
KR+シリーズ ※3		●※1	●※1	—	●※1	●※1	—	●※1	—	—	●※1
KA-7900シリーズ		●※1	●※1	—	●※1	●※1	—	—	—	—	●※1
FeeZシリーズ		●※1	●※1	—	●※1	●※1	—	—	—	—	●※1
楽匠Zシリーズ		●※1	●※1	—	●※1	●※1	—	—	—	—	●※1
楽匠Sシリーズ		●※1	●※1	—	●※1	●※1	—	—	—	—	●※1
楽匠FeeZシリーズ		●※1	●※1	—	●※1	●※1	—	—	—	—	●※1
KQ-50000シリーズ		●※1	●※1	—	●※1	●※1	—	—	—	—	●※2
KQ-60000シリーズ		●※1	●※1	—	●※1	●※1	—	—	—	—	●※2

●適合 —適合外

※1 ジョイントセットA037-1が必要

※2 (KA-53*5**, KA-53*61*, KA-55*5**のみ)

※3 (KR-8***5*のみ)

日常のお手入れ・長期保管について

■日常のお手入れ

<カバーのお手入れ>

■下図の絵表示に従ってください。(品質表示ラベルにも同様の記載がされています)




- 手洗いによる洗濯処理ができます
- 洗濯の液温は 40℃が限度です
- 中性洗剤を使用してください(蛍光増白剤を含む洗剤は使用しないでください)



- 漂白処理はできません



- アイロン仕上げ処理はできません

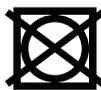

- 洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができません



- ドライクリーニング処理はできません



- 日陰での平干し乾燥がよいです



- ウェットクリーニング処理はできません

●十分に乾くまで使用しないでください。

<本体のお手入れ>

●清拭する場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、その後水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

●消毒剤を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度でご使用ください。

- ※各消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。
- 76.9~81.4% 消毒用エタノール
- 0.05~0.2% 塩化ベンザルコニウム(オスバンなど)
- 0.05~0.2% 塩化ベンゼトニウム(ハイアミンなど)
- 0.05% グルコン酸クロルヘキシジン(ヒビテンなど)



注意

- 揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリンなど)やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質のおそれがあります。
- 中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。



●オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

■長期保管について

- 高温・多湿・低温・乾燥・直射日光のあたる場所・ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- カバーの芯材が変色する場合がありますが、製品の性能に問題はありません。
- カバーおよび固定ボルトは本体に取付けた状態で保管してください。
- 取扱説明書を紛失しないように、大切に保管してください。

仕様

品名		サイドサポート			
品番		KA-037AR	KA-037AL	KA-037BR	KA-037BL
カバー色		ベージュ		ブラウン	
寸法 (cm)		長さ63×幅12×高さ28.5			
製品質量 (kg)		1.5			
材質	カバー	表地: ポリエステル100%、裏地: ナイロンハーフ100%、芯材: ウレタンフォーム(難燃加工)			
	本体	ポリプロピレン			
	差込パイプ	スチール			
適合品※	ベッド	楽匠Zシリーズ (KQ-7***、KQ-7***S)、楽匠Sシリーズ (KQ-9***)、楽匠FeeZシリーズ (KQ-78**、KQ-77**)、KQ-50000シリーズ (KQ-5****)、KQ-60000シリーズ (KQ-6****)			
	病院・施設向け	メーティスPROシリーズ(KA-76****、KA-75****、KA-74****)、メーティスシリーズ(KA-9***1*)、カリストーアールシリーズ/KA-30000シリーズ(KA-3***1*、KA-3***2*)、KA-5000シリーズ/アルデコラシリーズ(KA-53*5**、KA-53*61*、KA-55*5**)、KA-7900シリーズ(KA-79**)、KRシリーズ(KR-8***1*、KR-8***4*)、KR+シリーズ(KR-8***5*)、FeeZシリーズ(KA-78***、KA-77***)			

※仕様変更などにより、この取扱説明書の記述と一部異なる場合があります。適合品に記載のない製品との組合せやご不明な点はお買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（本体下側に貼付：表紙「各部の名称と部品の確認」参照）
- お買い上げ日
- 破損または異常の内容（できるだけ詳しく）
- 施設名、お名前、ご住所および電話番号

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは下記の保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日8:00～19:00／土・日・祝日9:00～17:20（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

保証書

品名 / 品番	サイドサポート / KA-037AR, 037AL 037BR, 037BL	保証期間	★お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前 〒 () ご住所	★販売店	☎ ()			

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、ラベル類などの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
 - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.

<パラマウントベッド 株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(大代)
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171 (代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181 (代)
仙台支店 〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番65号 花京院プラザ4階 ☎(022)217-7311 (代)
さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号 ☎(048)852-0707 (代)

横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)