

取扱説明書

7F10572600A1

KS-30C

ソフトカバー

まえがき

このたびは、ソフトカバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この「取扱説明書」には、ソフトカバーを安全にお使いいただくための注意事項と取付方法などを記載しています。

- ソフトカバーをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」およびサイドグリップの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- ソフトカバーを取付けたサイドグリップと組合せたベッドで療養する方ばかりでなく、付添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

- このソフトカバーは、サイドグリップ(KS-030AG・KS-030A)の内部のすき間の一部を覆うものです。サイドグリップをご使用になれる方の心身の状態や利用環境に応じてご使用ください。

各部の名称と部品の確認

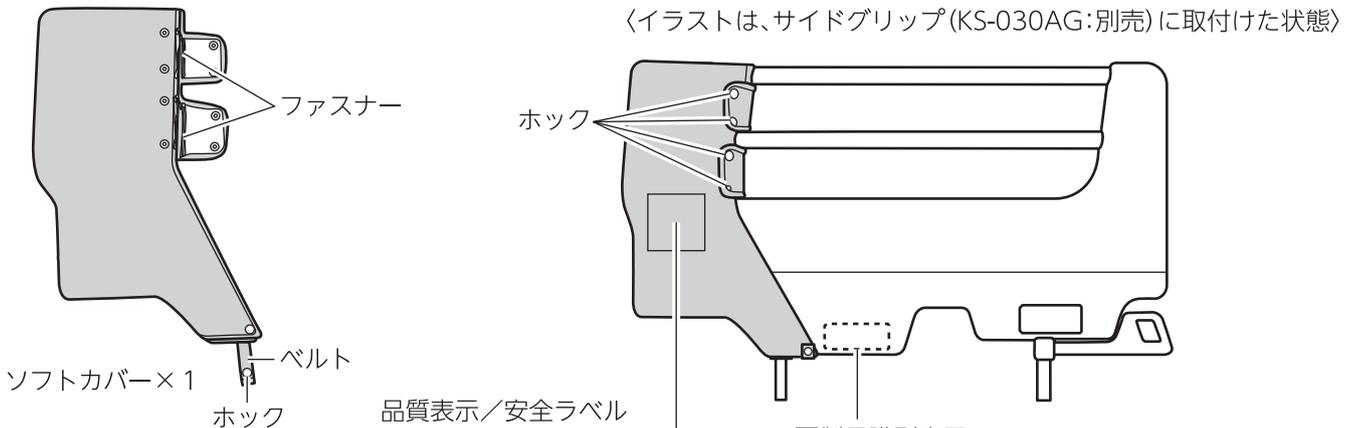

品質表示/安全ラベル


品質表示	
品名/品番	ソフトカバー/KS-30C
適合機種	KS-030AG/A
繊維の組成	表地 ポリエステル100% 裏地 ナイロン100%
クッション材	ウレタンフォーム
使用上の注意	製品に異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。 洗濯時には蛍光増白剤を含まない洗剤を使用してください。
表示者	パラマウントベッド株式会社 東京都江東区東砂2丁目14番5号
警告	
●弊社が指定する適合品以外の製品とは組合わせないでください 指定以外の製品と組合わせると、原因せぬすき間が発生するおそれがあります。	
●ソフトカバー使用時も、すき間に注意してください 身体の一部(特に顔や首)がはさまれると、けがをするおそれがあります。	
●ご使用前にソフトカバーとサイドグリップの取扱説明書をよくお読みください 誤った使い方をすると、思わぬけがをするおそれがあります。	
●ソフトカバーに火気や温度の高いもの、先のとがったものを接近・接触させないでください ソフトカバーが発火・破損し、けがをするおそれがあります。	
●ベッドへの固定を確認してご使用ください サイドグリップが動き、転倒してけがをするおそれがあります。	

製品識別表示ラベル

 PARAMOUNT BED

S030AG-----0016B
N9008030 00002
201602

- ※サイドグリップの品番は、製品識別表示ラベルに記載されています。
- ※製品識別表示ラベル上は、S030AG・S030Aと表示されています。
例) S030AG→KS-030AGを示します。

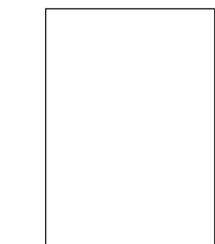

取扱説明書(本書)×1

安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷(骨折・圧迫・^{まひ}麻痺など)を負う可能性が想定される内容を示しています。

■弊社が指定する適合品以外の製品とは組合せないでください

- 本製品はKS-030AG・KS-030A専用です。他の製品と組合せて使用すると、ソフトカバーが正しく取付けられずに意図せぬすき間が発生して、身体の一部がはさまれてけがをしたり、ソフトカバーが破損したりするおそれがあります。品番の詳細については、表紙の「各部の名称と部品の確認」を参照してください。

■他のソフトカバーとは組合せないでください

- 他のソフトカバーと組合せて使用すると、ソフトカバーが正しく取付けられずに意図せぬすき間が発生して、身体の一部がはさまれてけがをしたり、ソフトカバーが破損したりするおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 意図せぬすき間が発生して、身体の一部がはさまれてけがをしたり、ソフトカバーが破損したりするおそれがあります。

■ソフトカバー使用時もすき間に注意してください

- サイドグリップのすき間や、サイドグリップとベッドのボードなどとのすき間に身体の一部がはさまれて、けがをするおそれがあります。

■ご使用前にソフトカバーとサイドグリップの取扱説明書をよくお読みください

- 誤った使いかたをすると、思わぬけがをするおそれがあります。

■ソフトカバーに火気を近づけないでください

- ソフトカバーが変質・変形・発火するおそれがあります。

■ファスナーを完全に閉めた状態で使用してください

- ソフトカバーが外れ、思わぬけがや破損の原因となります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷(打撲・すり傷・切り傷など)を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ソフトカバーは正しい向き・位置で取付けてください

- 誤った向きや位置で取付けて使用すると、けがや破損の原因となります。

■ホックを固定した状態で使用してください

- ソフトカバーが外れたりファスナーが身体などに接触したりして、思わぬけがや破損の原因となります。

■ソフトカバーに先のとがったものを接触させないでください

- ソフトカバーに穴があいたり、破損したりするおそれがあります。


■ソフトカバーにほつれや破れが見つかった場合は、使用を中止してください

- 思わぬけがをするおそれがあります。


取付方法




- ファスナーの引手を蓋で覆う際は、右図を参照して引手を返してください。ファスナーが開くのを予防することができます。
- 開梱時など、ウレタンフォームの臭いが気になる場合は、日陰で1日程度干してからお使いください。

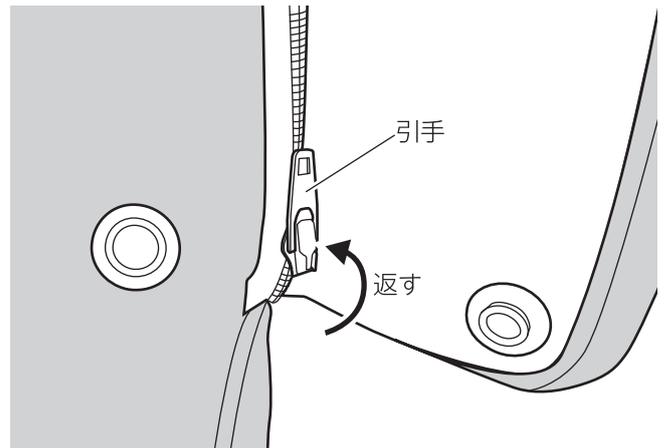


- ①ソフトカバーをグリップ側から奥までしっかりと被せてください。

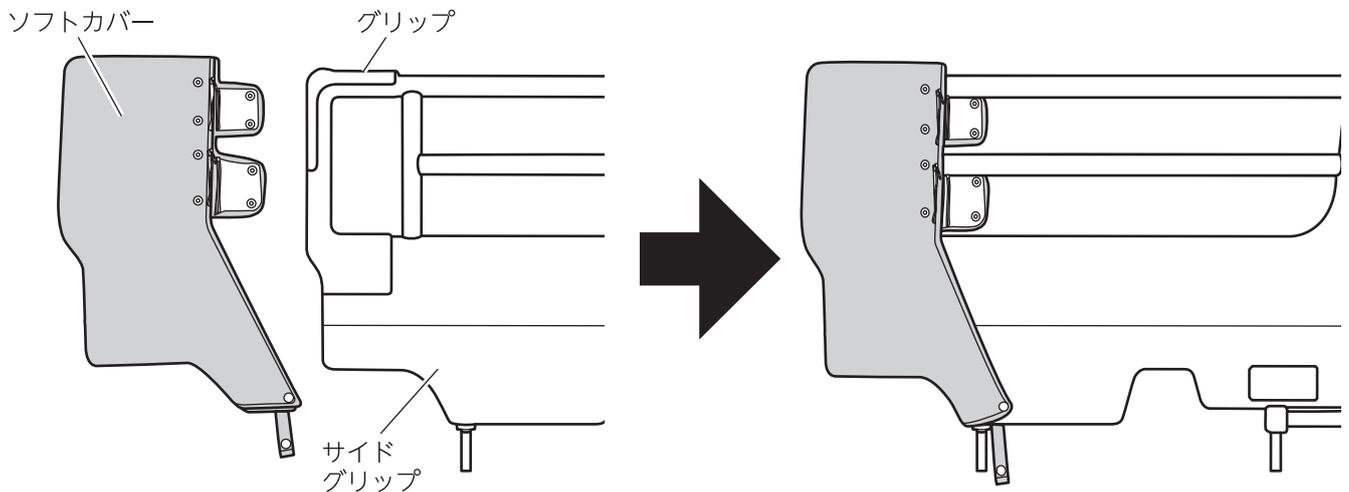

- ②上下2ヶ所のファスナーを完全に閉め、ファスナーの引手を上向きに戻してください。

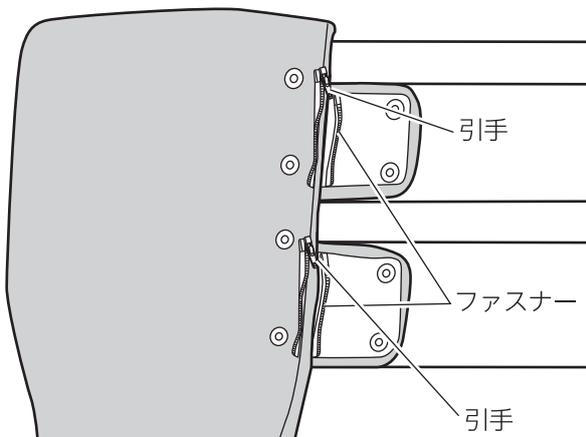


- ③蓋を折り返して、上下各2ヶ所のホックを確実に固定してください。

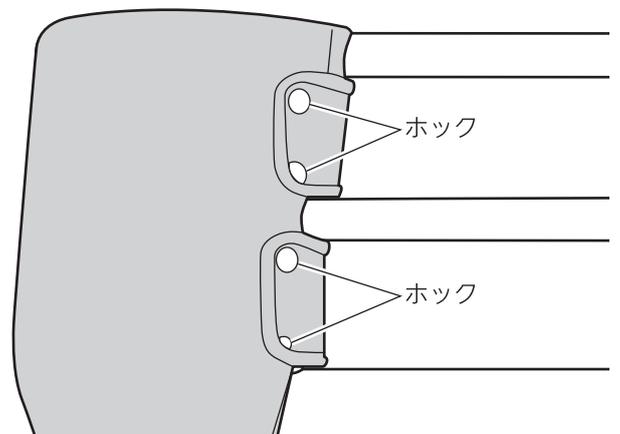

↓ 次ページに続く

取付方法

- ④固定軸に対し図の位置でベルトを回し、ホックを確実に固定してください。
 ※ソフトカバーの下端がサイドグリップの樹脂カバーよりも下に飛び出さないように調整してください

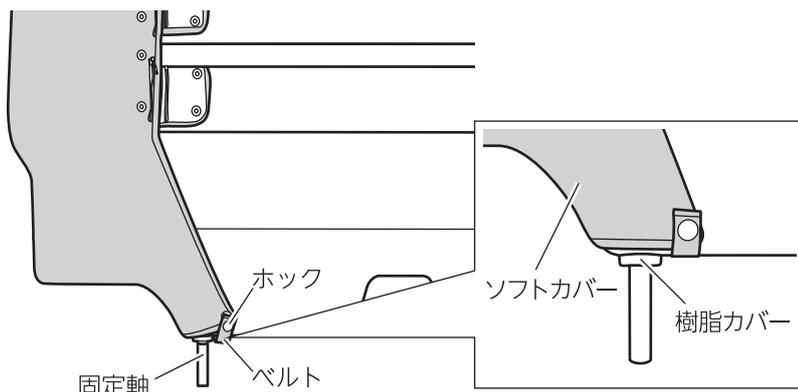

●取外しは、取付方法と逆の手順で行ってください。

お手入れ(カバーの洗いかた)・長期保管について

■お手入れは、下図の絵表示に従ってください。(品質表示／安全ラベルにも同様の記載がされています)



- ・手洗いによる洗濯処理ができます
- ・洗濯の液温は40℃が限度です
- ・中性洗剤を使用してください(蛍光増白剤を含む洗剤は使用しないでください)



- ・漂白処理はできません



- ・洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができません



- ・日陰での平干し乾燥がよいです



- ・アイロン仕上げ処理はできません



- ・ドライクリーニング処理はできません



- ・ウェットクリーニング処理はできません

- 揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリンなど)は使わないでください。

- 十分に乾くまで使用しないでください。



●オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

■長期保管について

- 高温・多湿・低温・乾燥・直射日光のあたる場所・ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- 芯材が変色する場合がありますが、製品の性能に問題はありません。
- 折りたたんで保管するとシワになるおそれがあります。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

仕 様

品 名		ソフトカバー
品 番		KS-30C
寸 法(cm)		長さ28×高さ46×幅6(取付時・ベルト部除く)
製 品 質 量(g)		130
主 な 材 質	生 地	表:ポリエステル100%(起毛トリコット) 裏:ナイロンハーフ100%
	芯 材	ウレタンフォーム
そ の 他		難燃加工
適 合 品		KS-030AG・KS-030A ※仕様変更などにより、この取扱説明書の記述と一部異なる場合があります。適合品に記載のない製品との組合せやご不明な点はご購入の販売店または直接弊社までお問い合わせください。

<パラマウントベッド株式会社>

本 社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(大代) 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
 東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代) 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市中区東1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
 札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代) 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
 仙台支店 〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番65号 花京院プラザ4階 ☎(022)217-7311(代) 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
 さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号 ☎(048)852-0707(代) 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)