

取扱説明書

手すり


KQ-9532L

KQ-9532H

レッツバー

保証書付

7F11624900A0

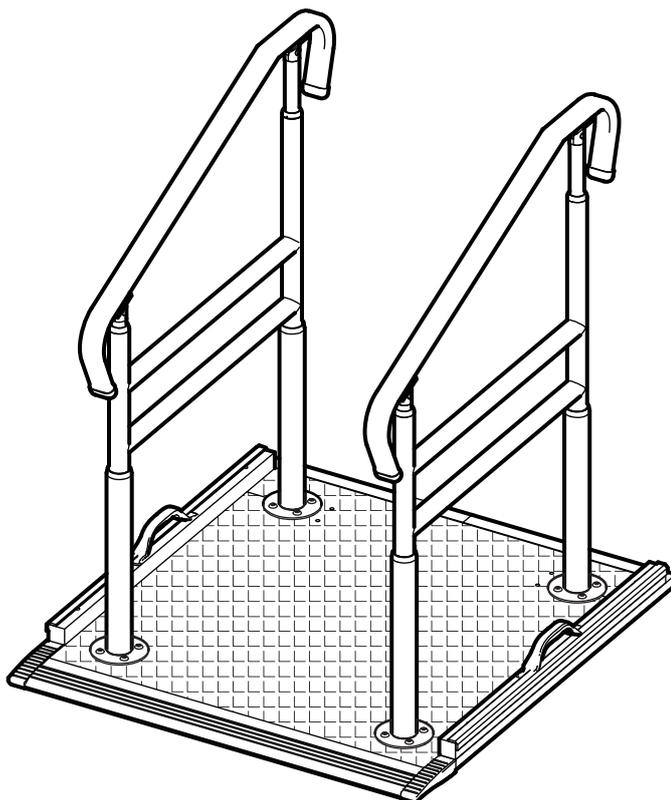

### まえがき

このたびは、手すり レッツバー（以下、手すり）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この「取扱説明書」には手すりを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しております。

- 手すりをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- 手すりを使用する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。


# もくじ

|                    |     |                        |    |
|--------------------|-----|------------------------|----|
| <b>1</b> 使用目的      | 1   | <b>7</b> 点検            | 10 |
| <b>2</b> 各部の名称     | 1   | <b>8</b> 仕様            | 11 |
| <b>3</b> 部品の確認     | 1・2 | <b>9</b> 適合オプション       | 12 |
| <b>4</b> 安全上の注意    | 2~4 | <b>10</b> 日常のお手入れ・廃棄   | 13 |
| <b>5</b> 設置・保管上の注意 | 5   | <b>11</b> アフターサービスについて | 14 |
| <b>6</b> 組立方法      | 6~9 |                        |    |

## 1 使用目的

手すりは、掃出し窓、ベランダ、土間などに置くことで、段差の上り下りを補助することを目的に作られています。


## 2 各部の名称

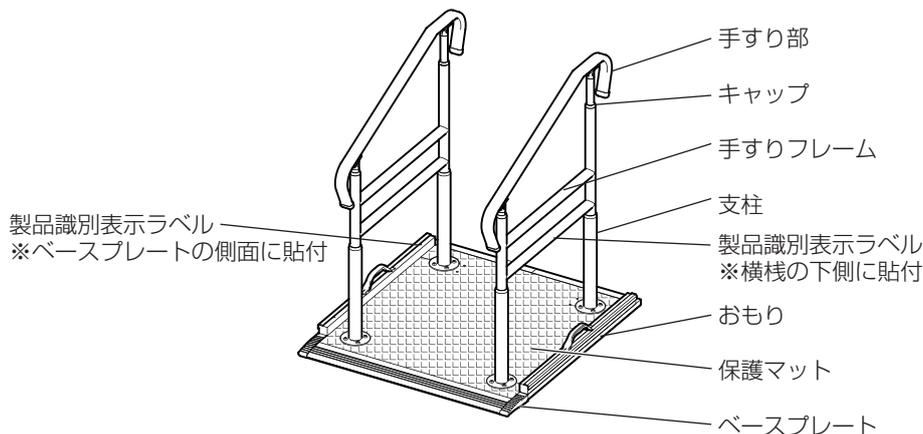

## 3 部品の確認

■ 開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。


### <手すり>

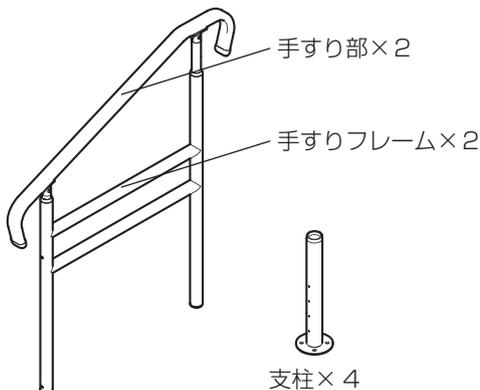

※ 手すり部が手すりフレームに差込まれた状態で梱包されています。固定されていないので、取扱いに注意してください。


| 品番         | Q9532L           | Q9532H            |
|------------|------------------|-------------------|
| 製品質量 (kg)  | 14.8             | 15.6              |
| 梱包重量 (kg)  | 18.1             | 19.3              |
| 梱包サイズ (cm) | 98.5 × 88 × 11.5 | 116.5 × 89 × 11.5 |

### <組立付属部品>

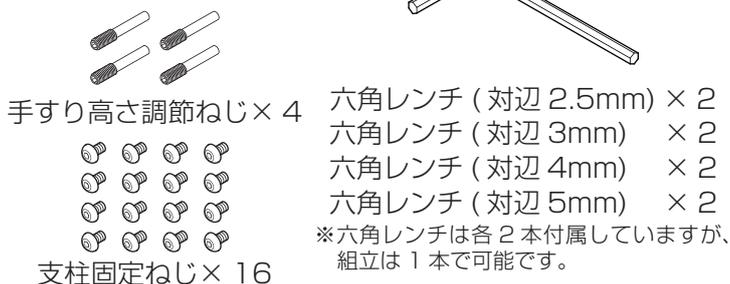


※六角レンチは各2本付属していますが、組立は1本で可能です。

<ベースプレート>

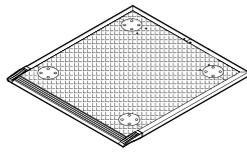

ベースプレート×1

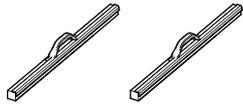


おもり×2



取扱説明書(本書)×1

|            |                  |
|------------|------------------|
| 品番         | Q953B            |
| 製品質量 (kg)  | 21.6             |
| 梱包重量 (kg)  | 24.3             |
| 梱包サイズ (cm) | 100 × 90.5 × 5.5 |

<組立付属部品>

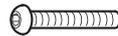

おもり固定ねじ×4



六角レンチ  
(対辺4mm)×1

## 4 安全上の注意<必ずお守りください>

■必ずご使用の前にこの「安全上の注意」をお読みいただき、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度に応じて「警告」と「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <br><b>警告</b><br><small>けい こく</small> | この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺 <sup>まひ</sup> など）を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| <br><b>注意</b><br><small>ちゅう い</small> | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。       |

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### 〔安全ラベルについて〕

- 注意事項の中で、手すりをお使いになる方に特に注意していただきたい項目をラベルにして、手すりフレームに貼ってあります。はがしたり、傷つけたりしないでください。
- 安全ラベルが傷ついたり、はがれたりした場合には、販売店から新しい安全ラベルを取り寄せ、貼り直してください。

### 安全ラベル

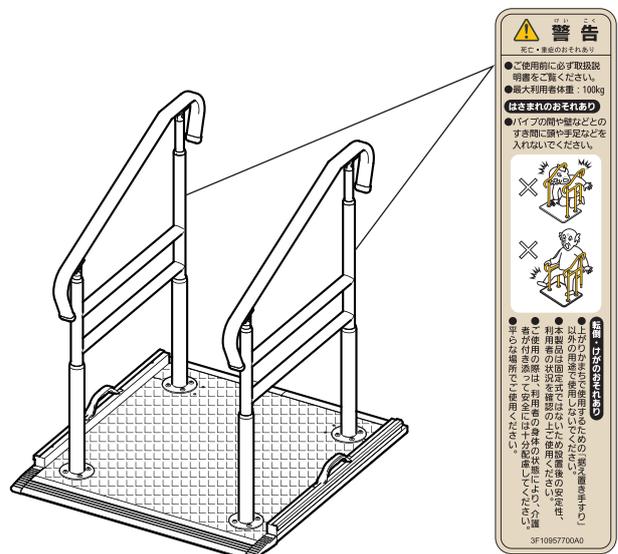

## 4 安全上の注意<必ずお守りください>



### 使用目的について

#### 目的以外の用途に使用しないでください

転倒してけがをしたり、手すり破損・変形したりするおそれがあります。

#### 手すりに直接取付けて使用するステップ台などは、弊社が指定する適合品を使用してください

指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたり、手すり破損・変形したりするおそれがあります。

### ご使用される方について

#### 最大利用者体重を超える方は使用しないでください

この製品の最大利用者体重は 100kg です。この体重を超える方が使用すると、破損・変形などによりけがをするおそれがあります。

#### 予測できない行動をとると思われる方（認知症の方など）や、自力で危険な状態から回避することができない方は使用しないでください

ご使用される方の心身の状態や使用環境により、手すりのすき間に身体の一部を入れ、けがをするおそれがあります。自力で危険な状態から回避できない方につきましては、ご使用を控えてください。

#### 本製品は 1 人用です。2 人以上同時に使用しないでください

転倒してけがをしたり、手すり破損・変形したりするおそれがあります。

#### ご使用の際は、使用者の状態により介助者が付き添うなど、安全に十分配慮してください

- 転倒して、けがをするおそれがあります。
- 適切な使用ができなくなった場合は、直ちに使用を中止し、医師や介護士、ケアマネジャーなどの専門家に相談し、適切な処置を受けてください。

### すき間について

#### 手すりのすき間や手すりと壁などとのすき間に、頭や手足などを入れないでください

- すき間に入ると抜けなくなり、けがをするおそれがあります。
- 特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

#### 手すりとステップ台 (KQ-9533L・H: 別売) とのすき間に足などを入れないでください

- 転倒して、けがをするおそれがあります。
- すき間に入ると抜けなくなり、けがをするおそれがあります。

#### ベースプレートと地面の間につま先など身体の一部をはさまないように注意してください

- 圧迫され、けがをするおそれがあります。
- 手すりを引き抜く方向や水平方向に力を加えると、ベースプレートが持ちあがる場合がありますので、特に注意してください。



## 転落・転倒について

### ■ 手すりを引き抜く方向や水平方向に力を加えないでください

本製品は固定式ではありませんので、手すりが倒れたり不安定になったりして、転倒してけがをしたり、手すりが破損・変形したりするおそれがあります。

### ■ ベースプレートと地面との段差に注意してください

つまづいて転倒し、けがをするおそれがあります。

### ■ 片手すりを使用する場合は、下記に注意してください

- 手すりのない側への転落・転倒に注意してください。けがをするおそれがあります。
- 手すりがない側のベースプレートやおもりと、地面との段差に注意してください。つまづいて転倒し、けがをするおそれがあります。

### ■ 手すりが濡れている場合や、手足や靴底が濡れている場合は滑りやすいので注意してください

転倒して、けがをするおそれがあります。

### ■ ベースプレート上が歩行に不安定な状態（砂利・積雪・凍結など）のまま使用しないでください

転倒して、けがをするおそれがあります。

### ■ 子供の遊具として使用したり、手すりの上に乗ったり、ぶらさがったり、腰かけたりしないでください

転落・転倒して、けがをするおそれがあります。

### ■ 車いすから立ちあがる際の支えとして、使用しないでください

転落・転倒して、けがをするおそれがあります。

## 点検・修理について

### ■ 手すりは定期的に点検してください

使用の頻度や環境により、製品は摩耗・劣化します。定期的にかたつきや各部のゆるみ、破損の有無などを点検してください。摩耗・劣化した状態で使い続けると、思わぬけがをするおそれがあります。

### ■ 手すりが破損した場合は直ちに使用を中止してください

けがをするおそれがあります。破損した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（14 ページ参照）まで修理をご依頼ください。

### ■ お客様による修理・改造はしないでください

思わぬけがや破損の原因となります。



### ■ スプレータイプの殺虫剤を手すりに直接噴射しないでください

殺虫剤に含まれる溶剤によって、手すりが破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

## 5 設置・保管上の注意<必ずお守りください>



### ■ 手すりは段差やスロープがない水平で丈夫な場所に設置してください

手すりが倒れたり不安定になったりして、転倒してけがをしたり、手すりが破損・変形したりするおそれがあります。

### ■ 設置後は、各部にゆるみがなく確実に固定されていること、手すりが安定していることを確認した上でご使用ください

手すりが倒れたり不安定になったりして、転倒してけがをしたり、手すりが破損・変形したりするおそれがあります。

### ■ 思わぬ事故や破損・変形の原因となりますので、次のような場所への設置は避けてください

- 砂利や土などの柔らかい地面
- 斜面やスロープ、凹凸などのある水平ではない地面
- 地面からベースプレートの一部がはみ出す場所
- 煙・塩分・イオウ分・腐食性物質などの多い場所
- 振動や衝撃のある場所
- 常に水がかかる場所



### ■ 長期保管の際は、以下の項目に注意してください

- 直射日光の当たる場所や、高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。手すりの樹脂部品が変形・変色するおそれがあります。  
※ 温度 -10 ~ 50℃、湿度 30 ~ 90% R H の環境で保管してください。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

### ■ 日差しが強いときには手すりの表面温度を確認してください

やけどなど、けがをするおそれがあります。

### ■ 移動させる場合は2人以上で行い、ベースプレートもしくは支柱を持ってください


- 手すり部や手すりフレームを持って移動させると、ベースプレートが落下してけがをしたり、手すりが破損・変形したりするおそれがあります。
- 外溝などを傷つけるおそれがあります。

## 6 組立方法

### ①支柱の仮止め

支柱の取付位置・向きを確認（下図参照）し、付属の支柱固定ねじを利用して、支柱をベースプレートに仮止めしてください。

（支柱1本につき4ヶ所）

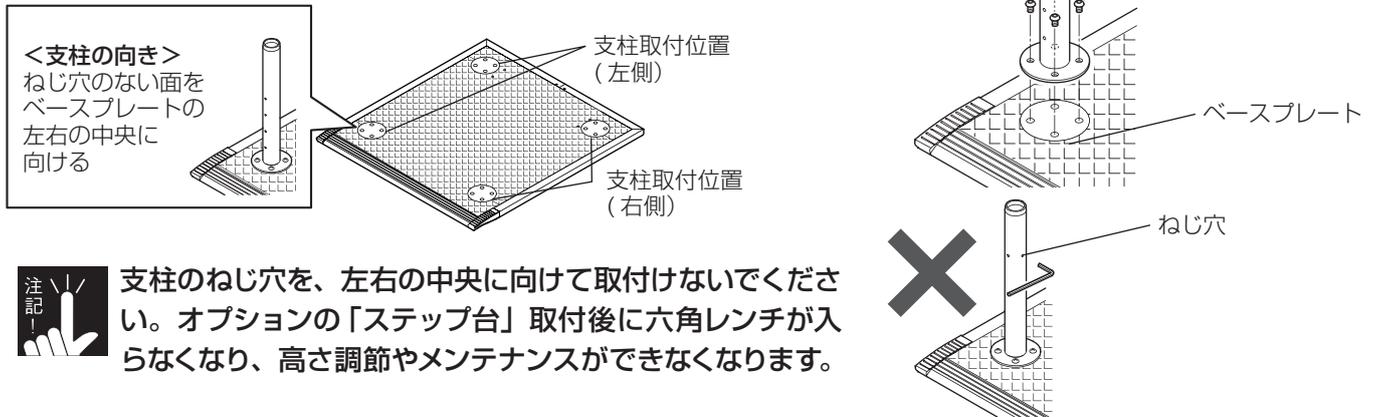

**<支柱の向き>**  
ねじ穴のない面をベースプレートの左右の中央に向ける

支柱取付位置 (左側)

支柱取付位置 (右側)

支柱  
六角レンチ (対辺5mm)  
支柱固定ねじ

ベースプレート

ねじ穴



支柱のねじ穴を、左右の中央に向けて取付けないでください。オプションの「ステップ台」取付後に六角レンチが入らなくなり、高さ調節やメンテナンスができなくなります。


### ②手すりの高さ調節 (全体)

手すりの高さは、0cm/+5cm/+10cm/+15cm/+20cmの5段階で位置決めができます。

- 六角レンチ (対辺3mm) を使用して、支柱高さ調節ねじ (支柱1本につき1ヶ所) を取外してください。
- 手すりの高さを決め、上記で取外した支柱高さ調節ねじをねじ穴に取付けて、六角レンチ (対辺3mm) でしっかりと締付けて固定してください。※すべての支柱を同じ高さに調節してください。



0cm のときは、支柱高さ調節ねじを使用しません。袋などに入れて、大切に保管してください。

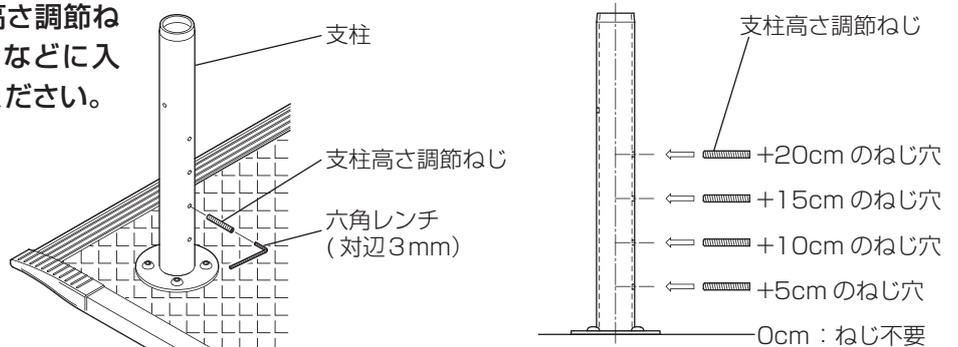

支柱

支柱高さ調節ねじ

六角レンチ (対辺3mm)

支柱高さ調節ねじ

+20cm のねじ穴

+15cm のねじ穴

+10cm のねじ穴

+5cm のねじ穴


0cm : ねじ不要

## 注意

支柱高さ調節ねじは、支柱の内側 (奥) に当たるまでしっかりと締付けてください。足などが支柱高さ調節ねじにぶつかり、けがをするおそれがあります。

### ③手すりフレームの取付け

- 六角レンチ (対辺3mm) を使用して、支柱についている手すり固定ねじ (支柱1本につき2ヶ所) をゆるめてください。
- 支柱高さ調節ねじまたは支柱底面に当たるまで、手すりフレームを支柱に差込んでください。

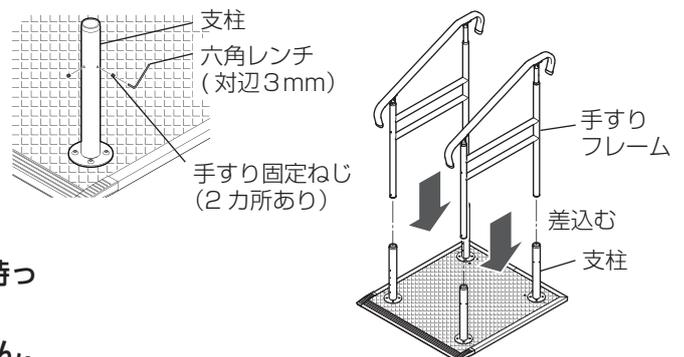

支柱  
六角レンチ (対辺3mm)

手すり固定ねじ (2カ所あり)

手すりフレーム

差込む

支柱



手すりフレームを取付ける際は、パイプ部を持ってください。

手すり部は手すりフレームに固定されていません。


## 6 組立方法

### ④高さ調節（手すり）



出入口側の手すり高さを調節します。地面側の手すりは一番低い高さで固定してください。

1. 下図④⑤の箇所のヒンジ固定ねじとスライド固定ねじを、六角レンチ（対辺 4mm と 2.5mm）でゆるめてください。  
手すりの高さが調節できるようになります。
2. 地面側の手すりを一番低い高さに固定します。手すりの一番上の目盛線をキャップにあわせて、⑤の箇所に、付属の手すり高さ調節ねじを取付けて、六角レンチ（対辺 2.5mm）で締付けてください。
3. 地面側の手すりをスライドさせながら、出入口側の手すり高さを上下に調節してください。
4. 出入口側の手すりの目盛線をキャップにあわせ、④の箇所に、付属の手すり高さ調節ねじを取付けて、六角レンチ（対辺 2.5mm）で締付けて固定ください。
5. ④⑤の箇所のヒンジ固定ねじとスライド固定ねじを六角レンチ（対辺 4mm と 2.5mm）で締付けて、手すりの高さを固定してください。
6. 両手すりの場合は、もう一方の手すりも同様に調節してください。

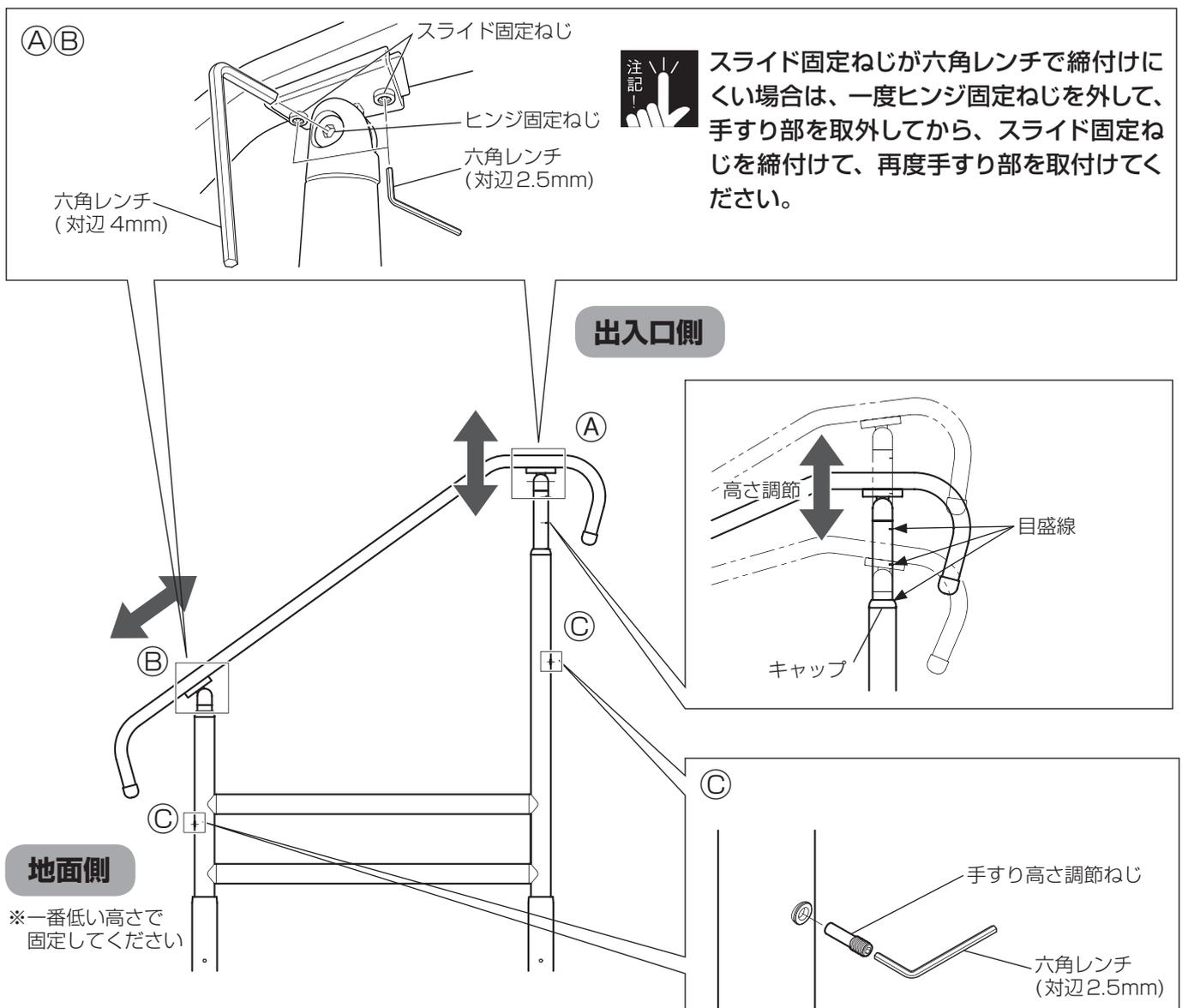


### ⑤手すりフレームの固定

③-1 でゆるめた手すり固定ねじを六角レンチ（対辺 3mm）でしっかりと締付けて、手すりフレームと支柱を固定してください。

（支柱 1 本につき 2 ヶ所）




手すり固定ねじは、2 ヶ所を均等に締付けてください。

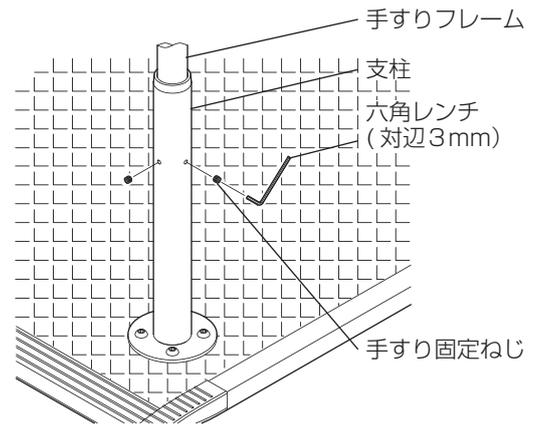

### ⑥支柱の固定

①で仮止めした支柱固定ねじを六角レンチ（対辺 5mm）でしっかりと締付けて、支柱をベースプレートに固定ください。


（支柱 1 本につき 4 ヶ所）

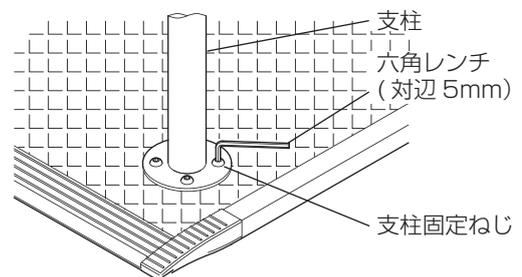

### ⑦マット用栓の貼り付け※片手すりの場合のみ

保護マットには手すりを取付ける箇所に穴が開いています。手すりを取付けない方の穴に、マット用栓<sup>\*</sup>を貼り付け、2つの穴をふさいでください。

※ マット用栓は別売です。マット用栓のお取り寄せにつきましては、パラテクノコールセンター（14 ページ参照）までお問い合わせください。

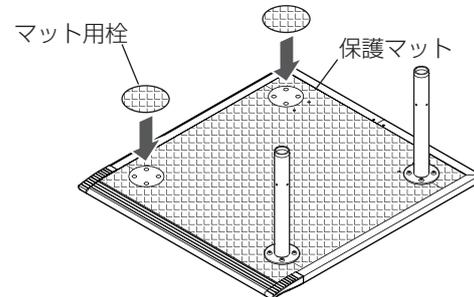


### ⑧おもりの取付け

付属のおもり固定ねじで、おもりをベースプレートに取付け、六角レンチ（対辺 4mm）でしっかりと締付けて、固定してください。

（左右 4 ヶ所）



手すりフレームを片側のみ取付ける場合でも、おもりは必ず左右 2 ヶ所に取付けてください。

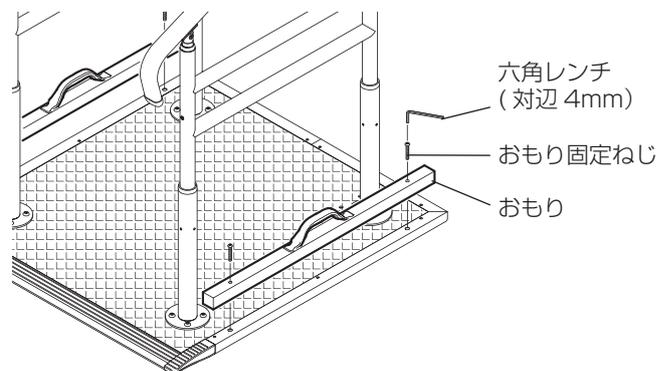


## 6 組立方法

### ⑨ ベースプレートのがたつき修正

製品設置後にベースプレートのがたつきが発生する場合は、保護マットをめくり、ベースプレート後方の左右2ヶ所に付いているアジャスターねじを六角レンチ（対辺4mm）で調整してください。



地面がやわらかく、アジャスターねじでがたつきが修正できない場合は、製品の下に板状の固い鉄板などを敷いてください。

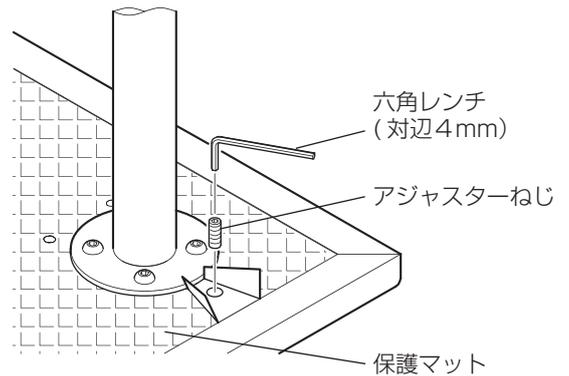

### ⑩ 安全の確認

製品がしっかりと固定されていることを、確認してからご使用ください。



手すりを片側のみに取付けた場合は、使用しなかった手すりフレーム・支柱・組立付属部品を大切に保管してください。

### ■ 分解方法

分解するときは、組立方法と逆の手順で行ってください。


## 7 点検

- 手すりは組立て後に点検をしてください。また、定期的に点検をしてください。使用頻度や環境により製品は摩耗・劣化します。定期的に下記のチェックシートに記載されている点検項目をチェックして、異常がないことを確認してください。異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、パラテクノコールセンター(14 ページ参照)までお問い合わせください。

### チェックシート


#### ①保護マットの確認

- ・すれやたるみはありませんか？
  - はい
  - いいえ→パラテクノコールセンター(14 ページ参照)へ連絡
- ・保護マットの穴は支柱もしくはマット用栓でふさがれていますか？(手すりを片側のみに取付けた場合のみ)
  - はい
  - いいえ→8 ページ

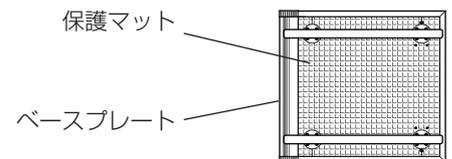

#### ②おもりの確認

- ・おもりがベースプレートの左右2ヶ所に取り付けられていますか？
- ・おもり固定ねじ(4本)は確実に固定されていますか？
  - ない
  - ある→8 ページ

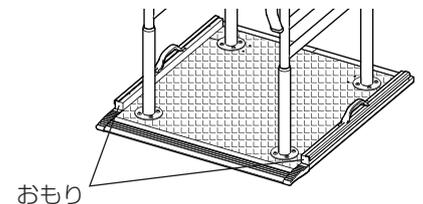


#### ③ベースプレートの確認

- ・ベースプレートにがたつきはありませんか？
  - ない
  - ある→9 ページ

#### ④手すりの取付け状態の確認

- ・手すり部の目盛線はキャップにありますか？
- ・手すりにいちじるしいがたつきがないですか？
- ・手すり部を上から押したとき、容易に動きませんか？
  - はい
  - いいえ→6～8 ページ

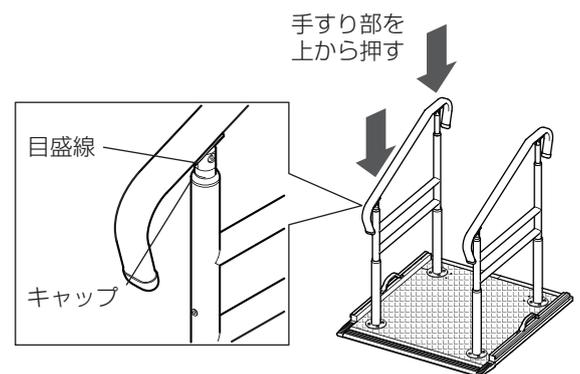

#### ⑤手すりの傷や変形



- ・手すりやベースプレート、締結部のねじ頭に傷や変形はありませんか？
  - ない
  - ある→パラテクノコールセンター(14 ページ参照)へ連絡

#### ⑥ラベルのはがれ

- ・ラベルがはがれたり、文字が見えなくなったりしていませんか？
  - いいえ
  - はい(はがれている・文字が見えない)→パラテクノコールセンター(14 ページ参照)へ連絡

## 8 仕様

| 品名           |         | 手すり レッツバー   |  |
|--------------|---------|---|--|
| 品番           |         | KQ-9532L  | KQ-9532H   |
| 対応段差高さ (cm)  |         | 3 ~ 36<br>(ロータイプ)                                     | 36 ~ 54<br>(ハイタイプ)                                     |
| 手すり本数 (本)    |         | 2   |  |
| 寸法 (cm)      | a       | 88 ~ 126<br>(支柱 :5cm 間隔、5 段階)<br>(手すり :4.5cm 間隔、5 段階) | 106 ~ 144<br>(支柱 :5cm 間隔、5 段階)<br>(手すり :4.5cm 間隔、5 段階) |
|              | b       | 70 ~ 90<br>(支柱 :5cm 間隔、5 段階)                          |  |
|              | c       | 51.5  |  |
|              | d       | 83.5  | 84   |
|              | e       | 87  |  |
|              | f       | 80  |  |
| 製品質量 (kg)    |         | 36.4  | 37.2   |
| 主な材質         | 手すり部    | 皮膜 : PVC 樹脂、芯材 : スチール                                 |  |
|              | 手すりフレーム | ステンレス   |  |
|              | 支柱      | ステンレス   |  |
|              | ベースプレート | 表面 : FRP<br>芯材 : 発泡材、ステンレス<br>フチ部 : アルミ、合成ゴム          |  |
|              | おもり     | スチール、合成ゴム   |  |
|              | 保護マット   | PVC   |  |
| 最大利用者体重 (kg) |         | 100   |  |
| ユニットの<br>組合せ | 手すり     | Q9532L  | Q9532H   |
|              | ベースプレート | Q953B   |  |

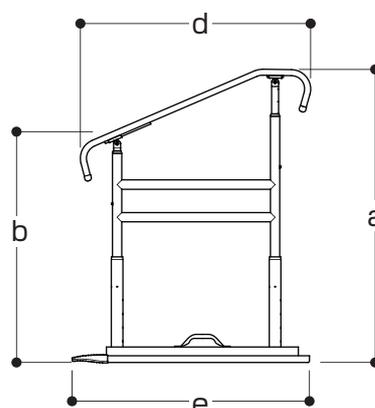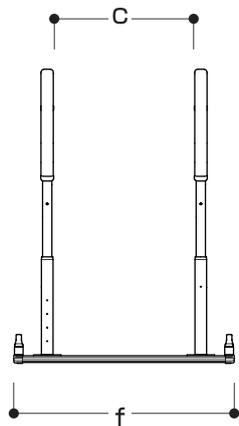

## 9 適合オプション



- オプションは正しい組合せを確認した上でご使用ください。誤った組合せで使用すると、思わぬけがや故障の原因となります。
- ここに記載されているオプション以外は使用しないでください。意図せぬすき間の発生や、製品の破損・変形などにより、けがをするおそれがあります。
- オプションを使用するときは、オプションの取扱説明書をお読みください。思わぬけがをするおそれがあります。

### 1. ステップ台 (KQ-9533L・KQ-9533H)

- 設置面から出入口までの段差が大きい場合に、手すりと併用することで、段差の上り下りを補助することができます。

#### ステップ台適合表

| 手すり   | KQ-9532L | KQ-9532H |
|-------|----------|----------|
| ステップ台 | KQ-9533L | KQ-9533H |


ステップ台の品番は、ダンボール箱・製品識別表示ラベルに記載されています。

※製品識別表示ラベル上は、Q9533L、Q9533Hと表示されています。


・KQ-9533L→Q9533Lです。

・KQ-9533H→Q9533LとQ9533Hのセットコードです。

#### < KQ-9533L >

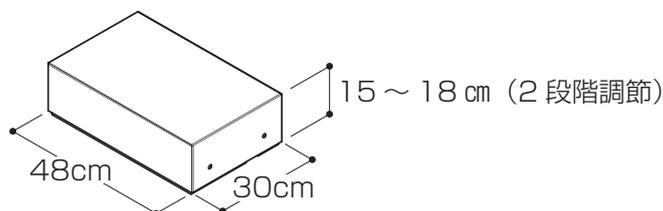

#### < KQ-9533H >

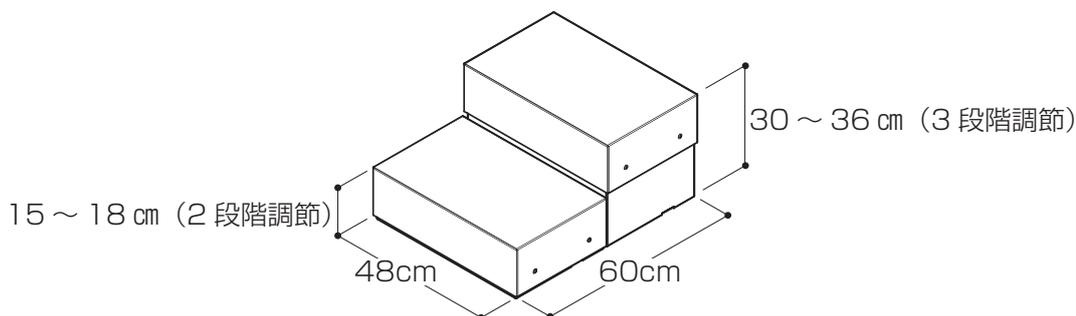


### 2. アジャスター (KQ-9534)

- 設置面が不安定でベースプレートと地面に大きなすき間ができる場合にご使用ください。

#### アジャスター適合表

| 手すり    | KQ-9532L・KQ-9532H |
|--------|-------------------|
| アジャスター | KQ-9534           |

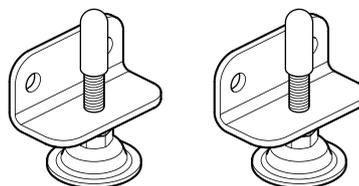

## 10 日常のお手入れ・廃棄

### ■ 汚れを落とす場合

下記①～③の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布を、よくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

### ■ 消毒する場合

必ず下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

| 消毒剤                   | 指定の濃度      |
|-----------------------|------------|
| 消毒用エタノール              | 76.9～81.4% |
| 塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）    | 0.05～0.2%  |
| 塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）    | 0.05～0.2%  |
| グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど） | 0.05%      |
| 次亜塩素酸ナトリウム（ミルトンなど）    | 0.02～0.05% |



オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

### 注意

- 酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤、揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。
- クレンザー、磨き粉などの粗い粒子を含んだ洗剤や、研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシなどは使用しないでください。傷をつけるおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質のおそれがあります。



### ■ 廃棄

廃棄の際は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および各自治体の規則に従ってください。

# 11 アフターサービスについて

## 1. 保証書

保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

販売店・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

## 2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター(下記参照)までご連絡ください。

### ■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（貼付位置は1ページ：「各部の名称」参照）
- お買い上げ日 ●破損または異常の内容（できるだけ詳しく）
- お名前、ご住所および電話番号

### ■消耗部品について

- 保護マットは消耗部品です。

#### 保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

## 3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

## 4. アフターサービスについてご不明な場合は

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間：平日8:00～19:00 / 土・日・祝日9:00～17:20（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

### <パラマウントベッド 株式会社>

|        |           |                       |                    |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------|
| 本社     | 〒136-8670 | 東京都江東区東砂2丁目14番5号      | ☎(03)3648-1111(大代) |
| 東京支店   | 〒136-8670 | 東京都江東区東砂2丁目14番5号      | ☎(03)3648-1171(代)  |
| 札幌支店   | 〒060-0062 | 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 | ☎(011)271-1181(代)  |
| 仙台支店   | 〒980-0015 | 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3      | ☎(022)239-5211(代)  |
| さいたま支店 | 〒338-0001 | さいたま市中央区上落合9丁目4番7号    | ☎(048)852-0707(代)  |
| 横浜支店   | 〒194-0004 | 東京都町田市鶴間5丁目3番33号      | ☎(042)795-8800(代)  |
| 名古屋支店  | 〒461-0001 | 名古屋市東区泉1丁目20番17号      | ☎(052)963-0600(代)  |
| 大阪支店   | 〒550-0001 | 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号      | ☎(06)6443-8791(代)  |
| 広島支店   | 〒733-0011 | 広島市西区横川町3丁目8番5号       | ☎(082)293-1311(代)  |
| 福岡支店   | 〒812-0013 | 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号   | ☎(092)461-1131(代)  |

# 保証書

|         |       |                    |                      |
|---------|-------|--------------------|----------------------|
| 品名      | 手すり   | 品番                 | KQ-9532L<br>KQ-9532H |
| 保証期間    | 1年間   |                    |                      |
| ★お買い上げ日 | 年 月 日 |                    |                      |
| お客様     | お名前   |                    |                      |
|         | ご住所   | 〒□□□□ - □□□□ ☎ ( ) |                      |
| ★販売店    | 店名    |                    |                      |
|         | 住所    | ☎ ( )              |                      |

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。  
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## 保証規定

- 保証期間内(お買い上げの日より1年間)に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
  - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
  - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
  - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
  - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
  - 保証書のご提示がない場合
  - 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
  - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
  - This warranty is valid only in Japan.

| 修理実施日 | 修理内容 | 担当者 |
|-------|------|-----|
|       |      |     |
|       |      |     |
|       |      |     |

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の基において無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。  
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書中の「アフターサービスについて」をご覧ください。

パラマウントベッド株式会社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号