

取扱説明書

KQ-9533L/KQ-9533H ステップ台 手すりレツバー専用

保証書付
7F11626700A0

まえがき

このたびは、ステップ台をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」にはステップ台を安全にお使いいただくための注意事項と組立方法などを記載しております。


- ステップ台をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」および手すりレツバー（KQ-9532L・KQ-9532H：別売 以下、手すり）の「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- ステップ台を使用する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

ステップ台は、手すりに取付けることで、段差の上り下りを補助することを目的に作られています。

各部の名称


※ KQ-9533L は1段用のみ、KQ-9533H は1段用と2段用のセットとなります。

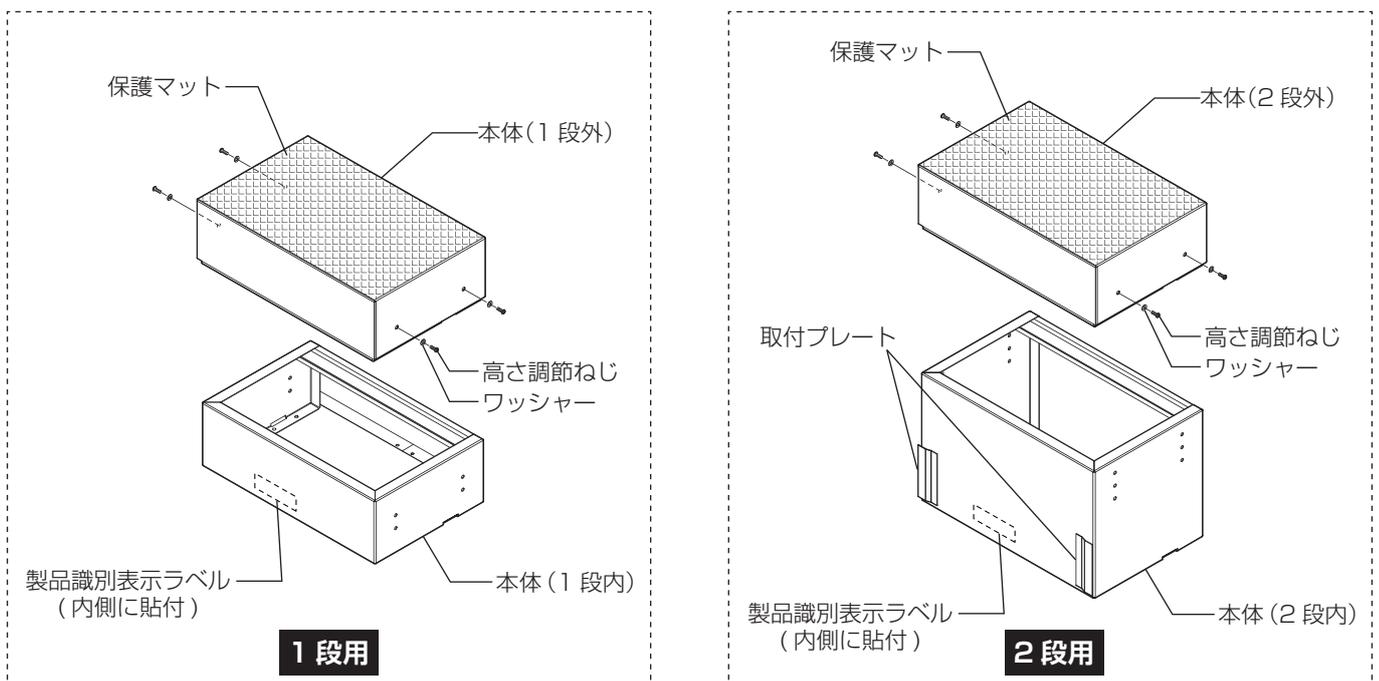

部品の確認

■ 開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

KQ-9533L (1 段)

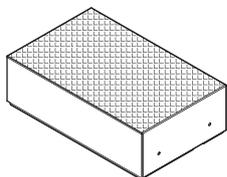

本体 (1 段) × 1



取扱説明書 (本書) × 1

※本体 (1 段内) と本体 (1 段外) とが固定された状態で梱包されています。

品番	Q9533L
製品質量 (kg)	6.7
梱包重量 (kg)	7.5
梱包サイズ (cm)	51 × 33 × 18.5

<組立付属部品>




固定ねじ × 4



六角レンチ (対辺 4mm) × 1

KQ-9533H (2 段)

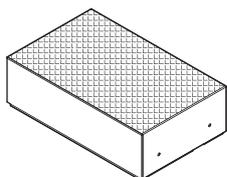

本体 (1 段) × 1



取扱説明書 (本書) × 1

※本体 (1 段内) と本体 (1 段外) とが固定された状態で梱包されています。

品番	Q9533L
製品質量 (kg)	6.7
梱包重量 (kg)	7.5
梱包サイズ (cm)	51 × 33 × 18.5


<組立付属部品>



固定ねじ × 4



六角レンチ (対辺 4mm) × 1

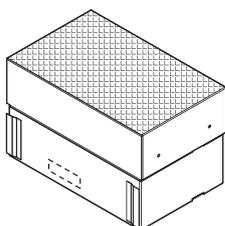

本体 (2 段) × 1

※本体 (2 段内) と本体 (2 段外) とが固定された状態で梱包されています。

品番	Q9533H
製品質量 (kg)	9.1
梱包重量 (kg)	10.2
梱包サイズ (cm)	51 × 33 × 33.5

安全上の注意<必ずお守りください>



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・^{まひ}麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

使用目的について

■ 目的以外の用途に使用しないでください

転落・転倒してけがをしたり、ステップ台が破損・変形したりするおそれがあります。

■ ステップ台と組合せて使用する手すりは、弊社が指定する適合品を使用してください

指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたり、ステップ台が破損・変形したりするおそれがあります。

ご使用される方について

■ 最大利用者体重を超える方は使用しないでください

この製品の最大利用者体重は 100kg です。この体重を超える方が使用すると、破損・変形などによりけがをすることがあります。

■ ご使用の際は、使用者の状態により介助者が付き添うなど、安全に十分配慮してください

- 転落・転倒して、けがをすることがあります。
- ご使用に適さなくなった場合は、直ちに使用を中止し、医師や介護士、ケアマネジャーなどの専門家に相談し、適切な処置を受けてください。

■ 本製品は 1 人用です。2 人以上同時に使用しないでください

転落・転倒してけがをしたり、ステップ台が破損・変形したりするおそれがあります。

すき間・転落・転倒について

■ ステップ台と手すりなどとのすき間に足などを入れないでください

- 転落・転倒して、けがをすることがあります。
- すき間に入ると抜けなくなり、けがをすることがあります。

■ ステップ台上が歩行に不安定な状態（砂利・積雪・凍結など）のまま使用しないでください

転落・転倒して、けがをすることがあります。

■ ステップ台が濡れている場合や、足や靴底が濡れている場合は滑りやすいので注意してください

転落・転倒して、けがをすることがあります。

安全上の注意<必ずお守りください>

点検・修理について

■ ステップ台は定期的に点検してください

使用の頻度や環境により、製品は摩耗・劣化します。定期的にかたつきや各部のゆるみ、破損の有無などを点検してください。摩耗・劣化した状態で使い続けると、思わぬけがをするおそれがあります。

■ ステップ台が破損した場合は直ちに使用を中止してください

けがをするおそれがあります。破損した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（裏表紙参照）まで修理をご依頼ください。

■ お客様による修理・改造はしないでください

思わぬけがや破損の原因となります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ スプレータイプの殺虫剤をステップ台に直接噴射しないでください

殺虫剤に含まれる溶剤によって、ステップ台が破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

設置・保管上の注意<必ずお守りください>



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 設置後は、各部にゆるみがなく確実に固定されていること、ステップ台が安定していることを確認した上でご使用ください

ステップ台が倒れたり不安定になったりして、転落・転倒してけがをしたり、ステップ台が破損・変形したりするおそれがあります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ 長期保管の際は、以下の項目に注意してください

- 直射日光の当たる場所や、高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
※ 温度 -10 ~ 50℃、湿度 30 ~ 90% R H の環境で保管してください。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。


組立方法

① 本体（1段用）・本体（2段用）の分解（共通）

本体（1段内）と本体（1段外）に取付けられている、高さ調節ねじとワッシャーを六角レンチ（対辺 4mm）で取外し（4ヶ所）、本体（1段内）と本体（1段外）を分解してください。

※ KQ-9533H の場合は本体（2段用）も、同じ手順で本体（2段内）と本体（2段外）に分解してください。

※ イラストは本体（1段内・外）で説明しています。

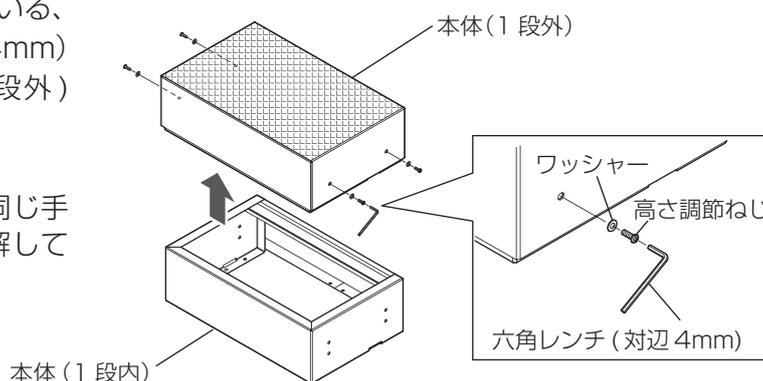


② 本体（1段内）・本体（2段内）のベースプレートへの取付け（共通）

図を参照して取付け向きに注意しながら、①で分解した本体（1段内）の穴とベースプレートの穴位置をあわせ、付属の固定ねじを利用して六角レンチ（対辺 4mm）で締付けて、本体（1段内）をベースプレートに固定してください。（4ヶ所）


※ KQ-9533H の場合は本体（2段内）を同じ手順で取付けてください。

※ イラストは本体（1段内・外）で説明しています。

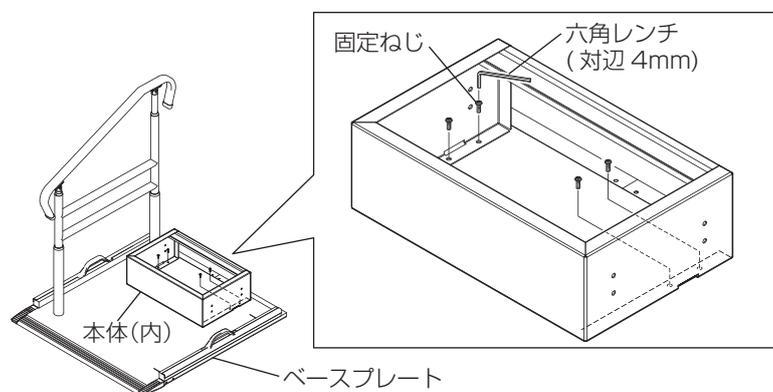

③ 本体（1段内）の本体（2段内）への取付け（KQ-9533Hのみ）

①で分解した本体（1段内）を図を参照して、②で取付けた本体（2段内）の取付プレートの溝に差込んでください。

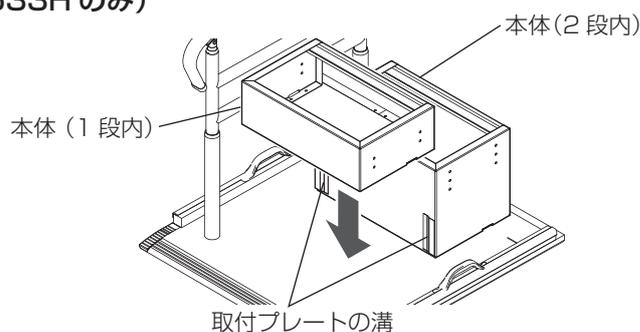


④ 本体（1段外）・本体（2段外）の取付けと高さ調節

ステップ台の高さを決め、本体（1段内）と本体（1段外）の穴位置をあわせて、①で取外した高さ調節ねじとワッシャーを利用して、六角レンチ（対辺 4mm）で締付けて固定してください。（4ヶ所）

※ KQ-9533H の場合は本体（2段内）にも本体（2段外）を同じ手順で取付けてください。

※ イラストは本体（1段内・外）で説明しています。

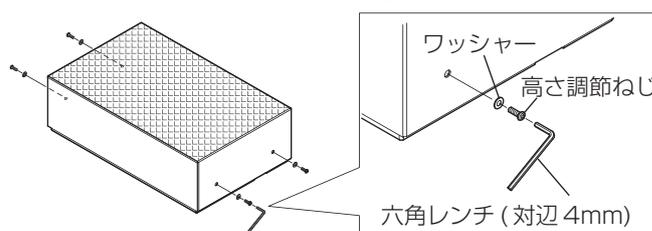

■ 分解方法

分解するときは、組立方法と逆の手順で行ってください。

点検

●ステップ台は組立て後に点検をし、また定期的に点検をしてください。使用頻度や環境により製品は摩耗・劣化します。定期的に下記のチェックシートに記載されている点検項目をチェックして、異常がないことを確認してください。異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、パラテクノコールセンター（裏表紙参照）までお問い合わせください。

チェックシート

①ステップ台の確認


- ・本体にがたつきはありませんか？
 - ない
 - ある→4 ページ参照
- ・保護マットにずれやたるみはありませんか？
 - ない
 - ある→パラテクノコールセンター（裏表紙参照）へ連絡

②ステップ台の傷や変形


- ・本体・保護マットや締結部のねじ頭に傷や変形はありませんか？
 - ない
 - ある→パラテクノコールセンター（裏表紙参照）へ連絡

仕様

<KQ-9533L>

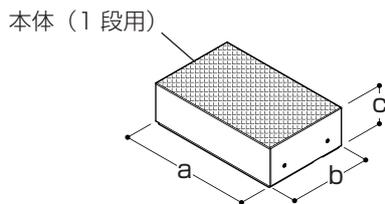

<KQ-9533H>

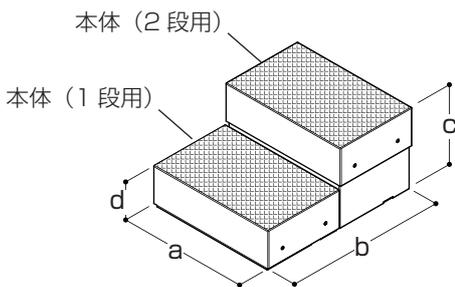

品名		ステップ台	
品番		KQ-9533L	KQ-9533H
ステップ段数		1 段	2 段
適合品		KQ-9532L	KQ-9532H
寸法 (cm)	a	48	
	b	30	60
	c	15 ~ 18 (2 段階調節)	30 ~ 36 (3 段階調節)
	d	—	15 ~ 18 (2 段階調節)
製品質量 (kg)		6.7	15.8
主な材質	本体	ステンレス	
	保護マット	PVC	
最大利用者体重 (kg)		100	
ユニットの 組合せ	本体 (1 段用)	Q9533L	
	本体 (2 段用)	—	Q9533H

日常のお手入れ・廃棄

■ 汚れを落としかた

下記①～③の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布を、よくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

■ 消毒のしかた

下記の消毒剤を、指定の濃度、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

消毒剤	指定の濃度
消毒用エタノール	76.9～81.4%
塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）	0.05～0.2%
塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）	0.05～0.2%
グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど）	0.05%
次亜塩素酸ナトリウム（ミルトンなど）	0.02～0.05%



オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

注意

- 酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤、揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。
- クレンザー、磨き粉などの粗い粒子を含んだ洗剤や、研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシなどは使用しないでください。傷をつけるおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質のおそれがあります。



■ 廃棄

廃棄の際は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および各自治体の規則に従ってください。

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

販売店・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター(下記参照)までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号(貼付位置は表紙:「各部の名称」参照) ●お買い上げ日
- 破損または異常の内容(できるだけ詳しく) ●お名前、ご住所および電話番号

■消耗部品について

- 保護マットは消耗部品です。

保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合は

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間: 平日8:00~19:00 / 土・日・祝日9:00~17:20 (年始は休業いたします)

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

保証書

品名/品番	ステップ台/ KQ-9533L・KQ-9533H	保証期間	*お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前	*販売店 (店名・住所)				
	〒 ()					
	ご住所		☎ ()			

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書、ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証規定】

- 保証期間内(お買い上げ日より1年間)に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 本保証書の保証期間および販売店名の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.

<パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(大代)
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西1丁目3番18番地11 ☎(011)271-1181(代)
仙台支店 〒980-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代)
さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号 ☎(048)852-0707(代)

横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)