


取扱説明書

エバープラウドマットレス (通気タイプ)

7F11150500A1

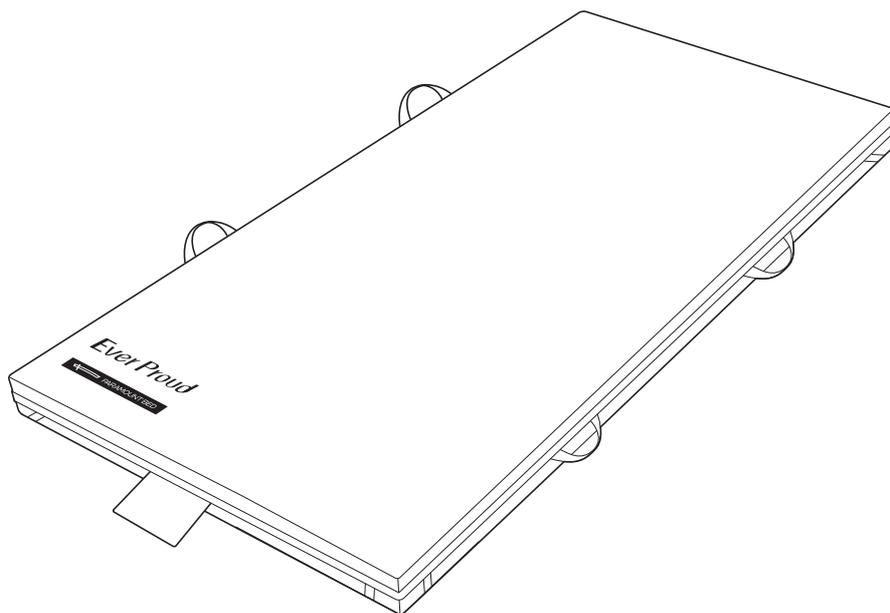

まえがき

このたびは、エバープラウドマットレス (以下、マットレス) をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、マットレスを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- マットレスをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- マットレスを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。
特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

おことわり


本文中に記載の名称を以下のように略しております。

- ベッド用グリップ (スイングアーム介助バー/サイドグリップ) → ベッド用グリップ


使用目的

■エバープラウドマットレス（通気タイプ）は、両面で硬さが異なるリバーシブル仕様になっております。エクストラソフト面は ソフト面より優れた体圧分散性能を備えており、ご家庭や医療施設・高齢者施設などで療養される際に、身体にかかる圧力を分散させることを目的に作られております。また、ソフト面は適度な体圧分散性能を備えております。使用する方の状態や体型・好み・環境などにあわせて各面を使い分けることができます。

各部の名称と部品の確認

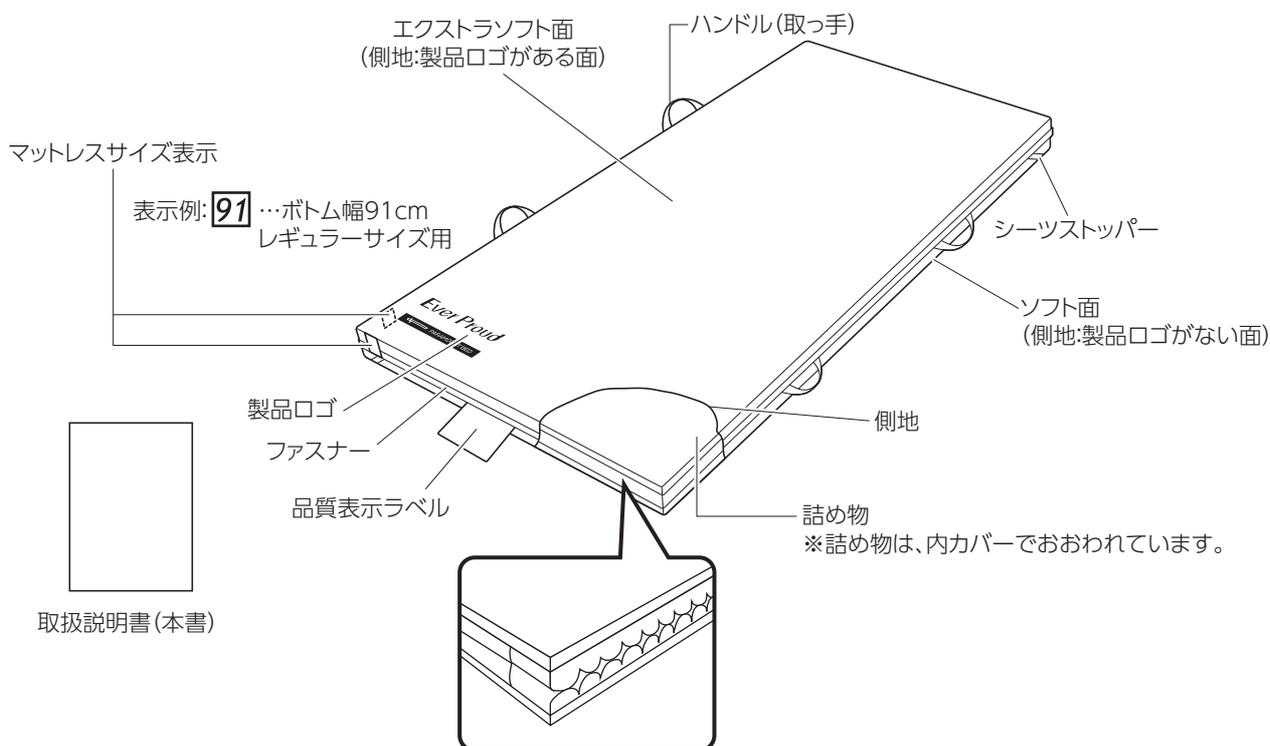

※ このマットレスにはエクストラソフト面とソフト面があります。面の向きが品質表示ラベルに記載されています。

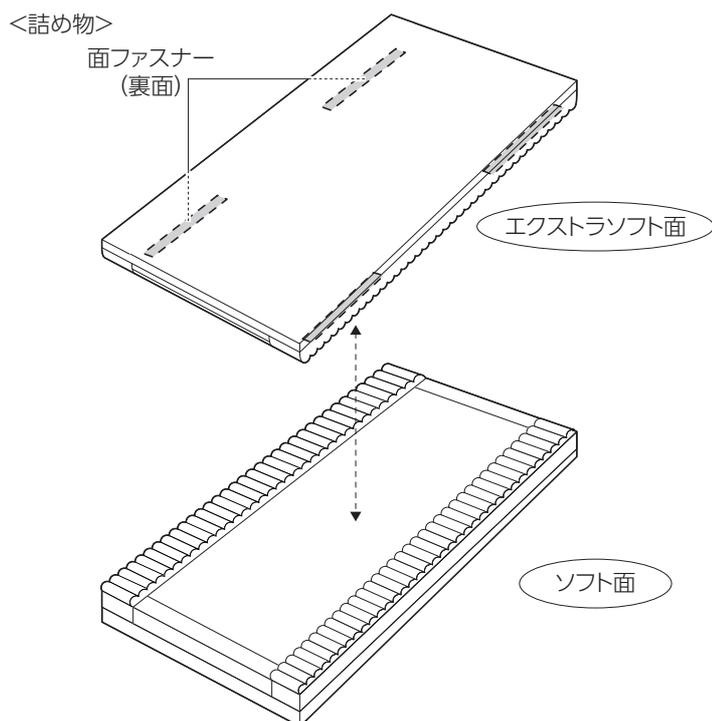

●イラストは説明のために分解しています。使用時はエクストラソフト面の面ファスナーをソフト面に貼り合せて使用してください。


安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■身体がはさまれないように注意してください

- マットレスとベッド・サイドレール・ベッド用グリップなどのすき間に身体をはさまれて、けがをしたり圧迫されて窒息したりするおそれがあります。

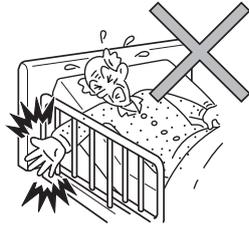

■チューブ（ドレーン）などがはさまれないように注意してください

- マットレスとベッド・サイドレール・ベッド用グリップなどのすき間にチューブ（ドレーン）などがはさまれると、チューブ（ドレーン）などが抜れたり、つぶれたりするおそれがあります。

■滑り落ちないように注意してください

- ベッドの端に座る場合は、看護・介護する方や付き添いの方などが身体を支えてあげるか、スイングアーム介助バーなどを持たせて滑り落ちないようにしてください。

■マットレスの上に敷布団や2枚以上重ねたマットレスパッドなど厚手の敷物を敷かないでください

- 敷布団やマットレスパッドなどがずれて転落・転倒し、けがをするおそれがあります。

■サイドレール使用時もベッドからの転落に十分注意してください

- サイドレールの上から身を乗り出して転落し、けがをするおそれがあります。
- このマットレスは、他のマットレスに比べて厚みがあるため、相対的にサイドレールが低くなり、サイドレールを乗り越えやすくなるのでご注意ください。

■うつぶせ寝はしないでください

- 長時間うつぶせ寝をすると窒息するおそれがあります。

■乳幼児やお子様には使用しないでください

- マットレスとベッド・サイドレール・ベッド用グリップなどのすき間に身体がはさまれて、けがをしたり、圧迫されて窒息したりするおそれがあります。

■側地や詰め物が汚れた状態では使用しないでください

- 汚物や血液などの汚れは感染症を引き起こす原因となる場合があります。
- 汚物や血液などが付着したままだと詰め物にも染み込み、感染症などを引き起こす原因となります場合があります。汚物や血液などが付着した場合は、直ちに拭き取ってください。
- 側地や詰め物が汚れた場合は、「日常のお手入れ」（5～6ページ参照）に従ってお手入れしてください。

■火気に近づけないでください

- マットレスの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変形・変質・発火などの原因となります。

■人が乗った状態のまま移動させないでください

- このマットレスを移動させる際は、人や重いものが乗っていない状態で移動させてください。マットレスの上に人や重いものが乗ったまま移動させると、人が転落してけがをしたり、詰め物や側地、ハンドル（取っ手）が破損したりするおそれがあります。

■マットレスの上で立ちあがったり、飛び跳ねたりしないでください

- 転落・転倒してけがをしたり、マットレスが破損したりするおそれがあります。

■マットレスと組合せて使用するベッドなどは弊社が指定する適合品をご使用ください

- 指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたりマットレスが破損したりするおそれがあります。適合品については、仕様（裏表紙）を参照してください。
- 組合せて使用するベッドなどの取扱説明書に従って正しく使用してください。

■マットレスはベッドの幅・長さにあわせたものをご使用ください

- ベッドの幅や長さにあわないマットレスを使用すると意図せぬすき間が発生し、はさまれてけがをするおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。

安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■体圧分散機能を確保するために、以下の点に注意してください

- 床ずれ予防は専門家にご相談ください。このマットレスだけでは床ずれは予防できません。全身的な管理（栄養状態の管理、基礎疾患の管理、マットレス上での姿勢・体位の管理）が必要です。床ずれ予防を行うにあたっては医師、看護師、介護相談員などの専門家にご相談ください。
- このマットレスは、総合的な床ずれケアのためのひとつの道具です。体位変換を不要にするものではありません。このマットレスの使用と並行して、体位変換などのケアを行ってください。
- このマットレスの上に体圧分散を妨げるような厚手の敷物を敷かないでください。効果的に体圧を分散できません。

■ハンドル（取っ手）をむき出しにしないでください

- ベッドメイクする際に、ハンドル（取っ手）がむき出しにならないようマットレス側面をシーツで覆ってください。ハンドル（取っ手）がむき出しだと、手や足などを引っ掛けてけがをすることがあります。また、背あげのときにサイドレールなどに引っ掛かって、破損する原因となります。

■氷まくらや保冷剤などの冷却作用のあるものはマットレスに直接載せないでください

- マットレスに急激な温度変化を与えると、内部で結露が起こることがあります。結露により、側地や詰め物が劣化することがあります。

■水などをこぼさないでください

- マットレスが濡れた状態で長時間放置すると、カビやダニの発生原因となります。誤ってこぼしてしまった場合には、すぐに乾いた布でよく拭き取り、乾燥させてから使用してください。

■オートクレーブ滅菌器、オゾン殺菌器などは使用しないでください

- マットレスが変質・破損・劣化することがあります。

■側地や詰め物などを強く引っ張ったり握ったりしないでください

- 側地や詰め物などが破損することがあります。

■マットレスを設置・移動などする際は、側地に付いているハンドル（取っ手）を2ヶ所持ってください

- ハンドル（取っ手）以外の部分を持つと、側地や詰め物などが破損することがあります。

■マットレスを折りたたんだり、丸めたりしないでください


- 破損・変形の原因となります。

■ファスナートップに注意してください

- 手や足などをすりむくなどして、けがをすることがあります。

■ファスナートップはファスナー隠しの奥まで入れ、ファスナーが開いた状態では使用しないでください

- 側地や詰め物が破損することがあります。

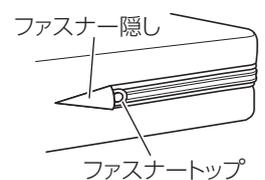

■側地が皮脂などで汚れた状態では使用しないでください

- 側地の表面が劣化することがあります。

■マットレスは定期的に点検してください

- 使用の頻度や環境によりマットレスは劣化します。定期的に側地の破損、詰め物のへたり（へこみ・硬さの変化）の有無などを確認してください。

	点検項目	確認方法
側地	破損していないこと	目視
詰め物	へたりがないこと	目視・触感
	不自然なふくらみがないこと	目視
	エクストラソフト面とソフト面がずれていないこと	目視・触感

- 側地が破損した場合は、側地を交換してください。交換方法などについては、パラテクノコールセンター（裏表紙参照）までお問い合わせください。

- 詰め物にへたりがあると、体圧分散効果や寝心地が変化することがありますので、マットレスごとまたはエクストラソフト面・ソフト面の交換をおすすめします。エクストラソフト面・ソフト面の交換方法は、パラテクノコールセンター（裏表紙参照）までお問い合わせください。

- 不自然なふくらみがある場合は、パラテクノコールセンター（裏表紙参照）までお問い合わせください。

- エクストラソフト面とソフト面がずれている場合は、1 ページの<詰め物>のイラストを参照してエクストラソフト面とソフト面の端部を合せ、エクストラソフト面の面ファスナーをソフト面に貼り合せてください。

使用方法



けい こく
警告

- マットレスの上に敷布団や2枚以上重ねたマットレスパッドなど厚手の敷物を敷かないでください。敷布団やマットレスパッドなどがずれて転落・転倒し、けがをするおそれがあります。
- 電気毛布などの電気機器をマットレス上で使用する場合、ベッドのキャスターや可動部にコード類（電源コードなど）をはさまないように設置してください。コード類が破損し、感電・火災のおそれがあります。





ちゅう い
注意

- 電気毛布や電気あんななどを使用する場合は、温度設定にご注意ください。50℃を超える温度で使用すると、詰め物が劣化する原因となります。
- ハンドル（取っ手）をむき出しにしないでください。ハンドル（取っ手）がむき出しだと、手や足などを引っ掛けてけがをするおそれがあります。また、背あげのときにサイドレールなどに引っ掛かって破損する原因となります。
- 詰め物や側地を交換・洗淨するとき以外は、側地を取外さないでください。側地や詰め物が破損するおそれがあります。
- ファスナートップはファスナー隠しの奥まで入れ、ファスナーが開いた状態では使用しないでください。側地や詰め物が破損するおそれがあります。
- マットレスの上に体圧分散を妨げるような厚手の敷物を敷かないでください。効果的に体圧を分散できません。
- 背あげした状態で使用する場合は、時間を制限してください。背あげした状態で長時間使用すると、側地や詰め物の劣化が早まるおそれがあります。
- 側地に血液・尿・汗・皮脂などの汚れを付着させたままにしないでください。側地が劣化したりにおいやすみが残ったりするおそれがあります。
- マットレスに先のとがったものを近づけないでください。また、衣類のポケットにもものを入れた状態で使用しないでください。マットレスが破損するおそれがあります。
- 使用時または搬送時に、過度の荷重や衝撃を加えないでください。マットレスが破損する原因となります。

1. マットレスの設置



品質表示ラベル

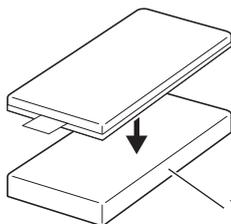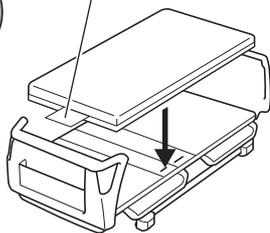

マットレス

■ このマットレスは、エクストラソフト面とソフト面で硬さが異なるリバーシブル仕様です。用途にあわせて各面を使い分けることができます。ベッドの上に直接敷いてお使いください。



- マットレスを設置する際は、ベッド上に障害物がないことを確認してください。
- このマットレスは2枚以上重ねて使用しないでください。
- におい（ウレタン臭など）が気になる場合は、風通しの良い日陰にマットレスを1日程度放置しておくことで、においはかなり低減します。
- 頭側・足側はありませんので、適宜反転させてご使用ください。

使用方法

2. ベッドメイクの仕方




けい こと
警告

●シーツストッパーは使用する面の下部になるように設置してください。正しく設置しないとシーツが外れやすくなり、使用する方がずり落ちて、けがをするおそれがあります。



●シーツストッパーはシーツ掛け以外の目的で使用しないでください。

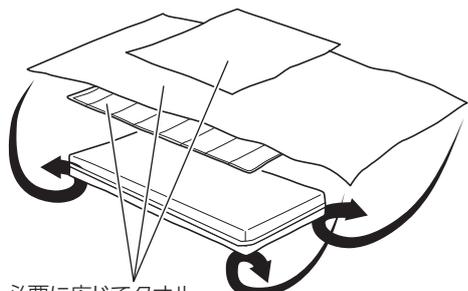

必要に応じてタオル、シーツ、マットレスパッドなどを使用してください。


- 左図を参照して、マットレスの使用面と側面をシーツで覆ってください。
- 下図の手順①～③を参照して、マットレスの裏面四隅にあるシーツストッパーにシーツの端を外側から内側に通してベッドメイクしてください。
- 汗を多くかけられる方が使用する場合は、空調管理を十分に行うとともに、必要に応じて体位変換などを行ってください。また、マットレスパッドなどを使用し、シーツやマットレスパッドなどの洗濯・交換およびマットレス本体の日常のお手入れ（5～6ページ参照）を頻繁に行ってください。

手順①



シーツストッパーにシーツの端を差込んでください。

手順②

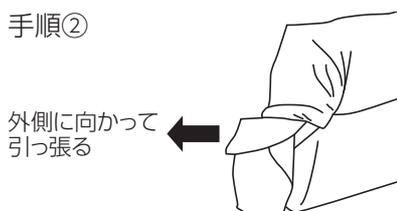

シーツの端を内側から外側に向かって緩まないように、しっかりと引っ張ってください。

手順③

ベッドのボトムとマットレスの間にシーツの端をはさみ込んでください。

日常のお手入れ

■マットレスが汚れたり、使用される方が替わったりする際など、マットレスの洗浄を行う場合は、下記の手順でお手入れしてください。



ちゅう い
注意

- マットレスが濡れた場合は、十分乾燥させてから使用してください。
- マットレス洗浄機を使用する場合は、詰め物に側地を取付けた状態で洗浄してください。側地を外して洗浄すると、詰め物が破損するおそれがあります。
- マットレス洗浄機は、メーカーおよび機種により洗浄条件が大幅に異なります。ドラム径など機器の構造や性能の違いなど、洗浄条件の違いにより、マットレスが破損・変形するおそれがあります。洗浄後、マットレスが破損・変形している場合は、同一条件での洗浄はおやめください。
- オートクレーブ滅菌器やオゾン殺菌器などは使用しないでください。マットレスが破損・変質するおそれがあります。



- 内カバーを外さないでください。
- エクストラソフト面とソフト面を分離しないでください。

日常のお手入れ

マットレス洗淨機を使用する場合

- ① 中性洗剤を使用して洗淨してください。
※湯温は40℃以下にしてください。
- ② 洗剤がなくなるまですすいでください。
- ③ 脱水機を使用する場合は、回転数を190rpm以下にしてください。
- ④ 完全に乾燥させてください。乾燥温度は80℃を推奨します。
※天日干しはしないでください。
※完全に乾燥させないとカビ発生の原因となります。
※洗淨工程手順表以外での洗淨条件についてはお問い合わせください。

洗淨工程手順表（洗淨の一例）

工程	時間(分)	温度	rpm
1. 本洗	7	40℃	4～21
↓			
2. 排水	1	—	30
↓			
3. 中速脱水	1	—	184
↓			
4. すすぎ	5	常温	4～21
↓			
5. 排水	1	—	30
↓			
6. すすぎ	3	常温	4～21
↓			
7. 排水	1	—	30
↓			
8. 中速脱水	12	—	184
↓			
9. 乾燥	—	80℃	—

側地の洗淨



- 側地を取外すときおよび取外した後は、側地や詰め物が破損しないように注意して取扱ってください。
- 内カバーを取外さないでください。

- ① 側地のファスナーを完全に開け、詰め物を取り出してください。
- ② 下図の絵表示に従ってください。
(品質表示ラベルにも同様の記載がされています)



- ・洗濯機で弱い洗濯処理ができます
- ・洗濯の液温は40℃が限度です



- ・塩素系及び酸素系漂白剤による漂白処理ができます



- ・洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができます
- ・排気温度は60℃が限界です（低温乾燥）



- ・日陰でのつり干し乾燥がよいです



- ・低面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができます
- ・あて布を使用してください



- ・ドライクリーニング処理はできません



- ・普通操作のウェットクリーニング処理ができます



- 側地にアイロンをかける場合は、詰め物から側地を取外してください。
- お手入れ後は、1ページ「各部の名称と部品の確認」のイラストを参照して、以下の項目に注意してください。
 - ・お手入れ後、詰め物に側地を取付ける際は、詰め物の取扱いに気をつけながら、品質表示ラベルに記載されている面の向きとエクストラソフト面・ソフト面があうように取付けてください。
 - ・エクストラソフト面とソフト面がずれている場合は、<詰め物>のイラストを参照してエクストラソフト面とソフト面の端部を合せ、エクストラソフト面の面ファスナーをソフト面に貼り合せてください。

詰め物の手洗い

- ① 側地のファスナーを完全に開け、詰め物を取り出してください。
- ② 中性洗剤を使用して洗淨してください。
※湯温は40℃以下にしてください。
- ③ 洗剤がなくなるまですすいでください。
- ④ 水気を切ってください。
- ⑤ 陰干しして完全に乾燥させてください。
※天日干しはしないでください。
※完全に乾燥させないとカビ発生の原因となります。

長期保管について

■長期にわたり、マットレスをご使用にならないときは、下記の点にご注意ください。

- マットレス以外のものを重ねて載せないでください。
- 高温・多湿・ほこりの多い場所・直射日光を避けてください。
※ 詰め物や側地が変色する場合がありますが、製品の性能に問題はありません。
※ におい（ウレタン臭など）が気になる場合は、風通しの良い日陰にマットレスを1日程度放置しておくことで、においはかなり低減します。

廃棄方法について

■マットレスを廃棄する際は、「ウレタンフォームマットレス」として、各市町村の指示に従い正しく廃棄してください。

仕様

品名		エバープラウドマットレス（通気タイプ）	
		ボトム幅91cm用	ボトム幅83cm用
レギュラー	品番	KE-621T・KE-621TQ	KE-623T・KE-623TQ
	寸法 (cm)	幅：91 長さ：191 厚さ：13	幅：83 長さ：191 厚さ：13
	製品質量 (kg)	10	9
ミニ	品番	KE-622TQ	KE-624TQ
	寸法 (cm)	幅：91 長さ：180 厚さ：13	幅：83 長さ：180 厚さ：13
	製品質量 (kg)	9.5	8.5
材質	側地	エクストラソフト面 ポリエステル100%（抗菌・防カビ・難燃・消臭）	
		ソフト面 ポリエステル100%（抗菌・防カビ・難燃）	
	内カバー	ポリエステル100%	
	詰め物	ポリウレタン・ポリエステル（難燃）	
耐熱温度		側地：80℃・詰め物：80℃	
使用環境		温度：50℃以下・湿度：90%RH以下	
保管環境		温度：50℃以下・湿度：90%RH以下	
適合品		KA-85000シリーズ、KA-60000シリーズ、メーティスPROシリーズ、メーティスシリーズ、ウッディー／ドージェシリーズ、スタンダードベッド、KA-5000シリーズ、KA-4000シリーズ、カリストエールシリーズ、KA-7900シリーズ、KA-4351（ドミトリーベッド）、KRシリーズ、KR+シリーズ、アルデコラシリーズ、FeeZシリーズ、ベーシックベッド、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズ、楽匠FeeZシリーズ、アウラ電動ベッド、KQ-50000シリーズ、KQ-60000シリーズ、レントシリーズ、INTIME1000シリーズ	
※ マットレスに適合するベッドの幅・長さにあわせたものをご使用ください。		※ 上記に記載されていないベッドとの適合につきましては、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。	

アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間：平日 8:00～19:00 / 土・日・祝日 9:00～17:20（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

<パラマウントベッド株式会社>

本社	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(大代)	横浜支店	〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)
東京支店	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)	名古屋支店	〒461-0001 名古屋市中区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
札幌支店	〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)	大阪支店	〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
仙台支店	〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)	広島支店	〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
さいたま支店	〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号	☎(048)852-0707(代)	福岡支店	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)