

## 取扱説明書

RB-ZA83P.RB-ZA91P.RB-ZA99P

# ポケットコイルマットレス

### まえがき

このたびは、ポケットコイルマットレス(以下、マットレス)をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、マットレスを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

●**マットレスをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。**

●**マットレスを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護される方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。**

●この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。

●お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。

●動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。

●ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

### おことわり

本文中に記載の名称を以下のように略しております。


●**ベッド用グリップ(スイングアーム介助バー/サイドグリップ) → ベッド用グリップ**

## 使用目的・特長

■このマットレスは、ご家庭や医療施設・高齢者施設などで療養用に使用されることを目的に作られています。

■硬鋼材のコイルスプリングを1つずつ不織布で包み込んであるので、荷重や身体の動きにあわせて個別にコイルが反応します。1ヶ所の振動や揺れがマットレス全体に伝わるハンモック現象を軽減し、自然な姿勢を保つことができます。

## 各部の名称と部品の確認

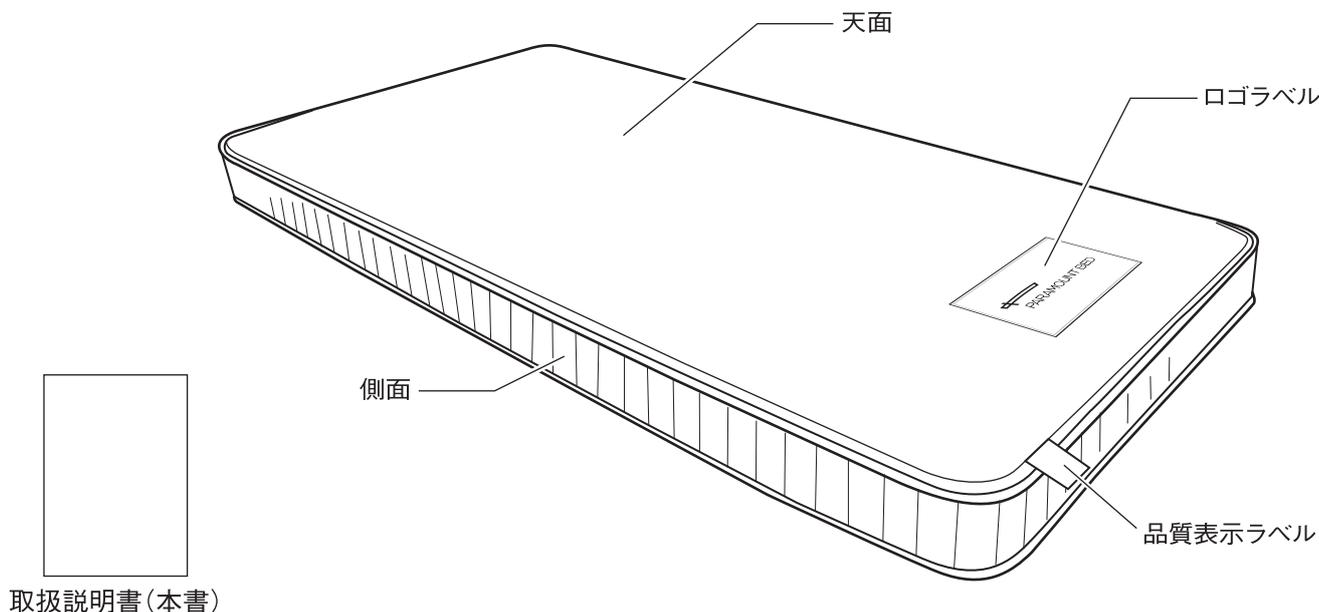


## 安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

### ■身体がはさまれないようご注意ください

- マットレスとベッド・サイドレール・ベッド用グリップなどのすき間に身体がはさまれて、けがをしたり圧迫されて窒息したりするおそれがあります。

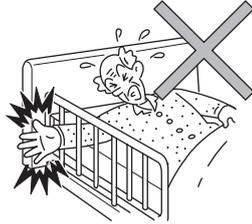

### ■チューブ(ドレーン)などがはさまれないように注意してください

- マットレスとベッド・サイドレール・ベッド用グリップなどのすき間にチューブ(ドレーン)などがはさまれると、チューブ(ドレーン)などが抜けたり、つぶれたりするおそれがあります。

### ■滑り落ちないように注意してください

- ベッドの端に座る場合は、看護・介護する方や付き添いの方などが身体を支えてあげるか、ベッド用グリップなどを持たせて滑り落ちないようにしてください。

### ■マットレスの上に敷布団や2枚以上重ねたマットレスパッドなど厚手の敷物を敷かないでください

- 敷布団やマットレスパッドなどがずれて転落・転倒し、けがをするおそれがあります。

### ■サイドレール使用時もベッドからの転落に十分注意してください

- サイドレールの上から身を乗り出して転落し、けがをするおそれがあります。

### ■うつぶせ寝はしないでください

- 長時間うつぶせ寝をすると窒息するおそれがあります。

### ■乳幼児には使用しないでください

- マットレスとベッド・サイドレール・ベッド用グリップなどのすき間に身体をはさまれて、けがをしたり、圧迫されて窒息したりするおそれがあります。

### ■マットレスが汚れた状態や破損した状態では使用しないでください

- 汚物や血液などの汚れは感染症を引き起こす原因となる場合があります。
- マットレスが破損した状態で使用すると汚物や血液などが内部に染み込み、感染症などを引き起こす原因となる場合があります。

### ■火気に近づけないでください

- マットレスの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変形・変質・発火などの原因となります。

### ■人が乗った状態のまま移動させないでください

- このマットレスを移動させる際は、人や重いものが乗っていない状態で移動させてください。マットレスの上に人や重いものが乗ったまま移動させると、人が転落してけがをしたり、マットレスが破損したりするおそれがあります。

### ■マットレスの上で立ちあがったり、飛び跳ねたりしないでください

- 転落・転倒してけがをしたり、マットレスが破損したりするおそれがあります。

### ■マットレスと組合せて使用するベッドなどは弊社が指定する適合品をご使用ください

- 指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたりマットレスが破損したりするおそれがあります。適合品については、仕様(裏表紙)を参照してください。
- 組合せて使用するベッドなどの取扱説明書に従って正しく使用してください。

### ■マットレスはベッドの幅・長さにあわせたものをご使用ください

- ベッドの幅や長さにあわないマットレスを使用すると意図せぬすき間が発生し、はさまれてけがをするおそれがあります。

### ■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### ■氷まくらや保冷剤などの冷却作用のあるものはマットレスに直接載せないでください

- マットレスに急激な温度変化を与えると、内部で結露が起こることがあります。結露により、マットレスが劣化するおそれがあります。

### ■マットレス洗浄機やオートクレーブ滅菌器、オゾン殺菌器、洗濯機などは使用しないでください

- マットレスや洗浄・殺菌設備が変質・破損・劣化するおそれがあります。

### ■マットレスを無理に折り曲げないでください

- 破損・変形の原因となります。

### ■マットレスを強く引っ張ったり握ったりしないでください

- 破損するおそれがあります。

### ■マットレスをソファ代わりに使用しないでください

- クッション性が低下するおそれがあります。

### ■マットレスは定期的に点検してください

- 使用の頻度や環境によりマットレスは劣化します。定期的に側地の破損やへたりがいないか確認してください。

# 使用方法




- マットレスの上に敷布団や2枚以上重ねたマットレスパッドなど厚手の敷物を敷かないでください。敷布団やマットレスパッドなどがずれて転落・転倒し、けがをす  
るおそれがあります。
- 電気毛布などの電気機器をマットレス上で使用する場合、ベッドのキャスターや可動部にコード類（電源コードなど）をはさまないように設置してください。コード類が破損し、感電・火災のおそれがあります。



- 電気毛布や電気あんかなどを使用する場合は、温度設定にご注意ください。50℃を超える温度で使用すると、マットレスが劣化する原因となります。
- 背あげた状態で使用の場合は、時間を制限してください。背あげた状態で長時間使用すると、マットレスの劣化が早まる可能性があります。

## 1. マットレスの設置

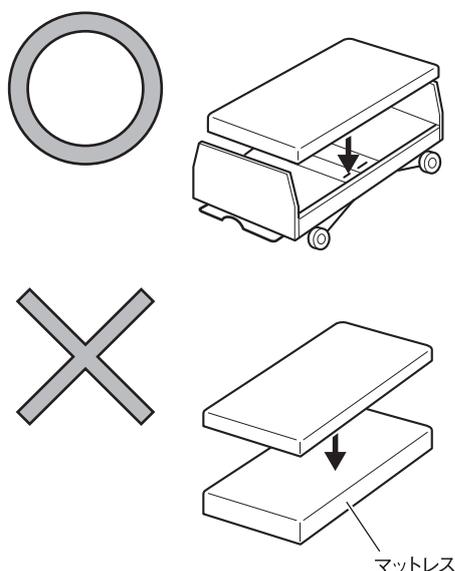


■ このマットレスは、ベッドの上に直接敷いてお使いください。



- マットレスを設置する際は、ベッド上に障害物がないことを確認してください。
- このマットレスは2枚以上重ねて使用しないでください。
- このマットレスには頭側・足側・天面・底面の区別がありません。定期的に裏返したり、頭側・足側の向きを変えてご使用ください。マットレスを平均的に使用することで、長持ちさせることができます。

## 2. ベッドメイクの仕方

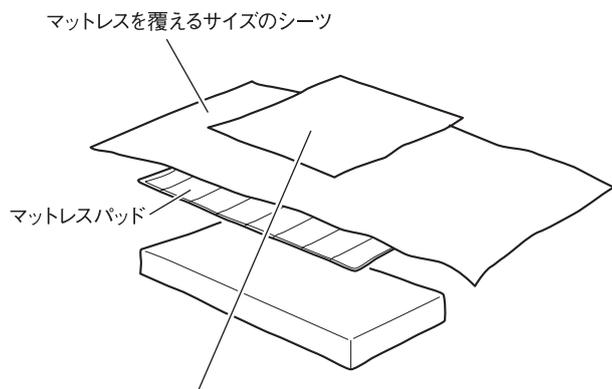

必要に応じてタオル、防水シートなどを使用してください。

■ 左図を参照して、マットレス天面と側面をシートで覆ってください。また、必ずマットレスパッドを使用してください。

■ 汗を多くかけられる方が使用する場合は、空調管理を十分行うとともに、必要に応じて体位変換などを行ってください。また、シートやマットレスパッドなどの洗濯・交換およびマットレス本体の日常のお手入れ（裏表紙参照）を頻繁に行ってください。



- 失禁のおそれのある方が使用する場合は、防水シートなどを敷いてください。失禁により排泄物がマットレス内部に染み込み、コイルスプリングが錆びるなどマットレスが劣化するおそれがあります。

## 日常のお手入れ

■水に浸した布をよくしぼって、汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布で拭きあげてください。



- マットレス洗淨機やオートクレーブ滅菌器・オゾン殺菌器・洗濯機などは使用しないでください。マットレスや洗淨・殺菌設備などが変質・破損・劣化するおそれがあります。
- マットレス内部には詰め物が入っています。詰め物を傷めるおそれがありますので、ほこりはらう際は、マットレスを叩かずに電気掃除機や洋服ブラシを使用してください。
- 揮発性のもの(シンナー・ベンジン・ガソリンなど)や消毒剤・漂白剤は使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。

## 長期保管について

■長期にわたり、マットレスをご使用にならないときは、下記の点にご注意ください。

- 保管時は平置きにし、マットレス以外のものを重ねて載せないでください。
  - 高温・多湿・ほこりの多い場所、直射日光を避けてください。
- ※におい(ウレタン臭など)が気になる場合は、風通しの良い日陰にマットレスを1日程度放置しておくことで、においはかなり低減します。

## 廃棄方法について

■マットレスを廃棄する際は、各市町村の指示に従い正しく廃棄してください。

## 仕様

品名		ポケットコイルマットレス		
品番		RB-ZA83P	RB-ZA91P	RB-ZA99P
寸法 (cm)	幅	83	91	99
	長さ	191		
	厚さ	13.5		
製品質量 (kg)		14	15	16
材質	側地	レーヨン 59% ポリエステル 41%		
	詰め物	ウレタンフォーム、わた(難燃)、不織布(抗菌) コイルスプリング: SWRH82B 硬鋼線 C種		
	コイル数	377	406	435
適合品		KA-85000シリーズ、KA-60000シリーズ、メーティスPROシリーズ、メーティスシリーズ、ウッディー/ドージェシリーズ、スタンダードベッド、KA-5000シリーズ、KA-4000シリーズ、エスパシアシリーズ、カリストエールシリーズ、KA-7900シリーズ、KA-4351(ドミトリーベッド)、KRシリーズ、KR+シリーズ、アルデコラシリーズ、FeeZシリーズ、ベーシックベッド、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズ、楽匠FeeZシリーズ、アウラ電動ベッド、KQ-50000シリーズ、KQ-60000シリーズ、INTIME1000シリーズ		
※マットレスに適合するベッドの幅・長さにあわせたものをご使用ください。		※上記に記載されていないベッドとの適合につきましては、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。		

## 商品に関するお問い合わせ

(パラマウントベッド株式会社)

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代)  
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代)  
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)  
仙台支店 〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番地65号 花京院プラザ4階 ☎(022)217-7311(代)  
さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号 ☎(048)852-0707(代)  
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)  
名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)  
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)  
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)  
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)