

取扱説明書

KQ-9503L/KQ-9503H

玄関台 玄関用手すりレッツバー専用

保証書付

7F11625900A1

まえがき

このたびは、玄関台をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には玄関台を安全にお使いいただくための注意事項と組立方法などを記載しております。

- 玄関台をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」および玄関用手すりレッツバー・レッツバー コンパクト (KQ-950*L・KQ-950*H・KQ-951*L・KQ-951*H:別売 以下、玄関用手すり) の「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- 玄関台を使用する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的


玄関台は、玄関用手すりに取付けることで、段差の上り下りを補助することを目的に作られています。

各部の名称と部品の確認


■ 開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

品番	Q9503L	Q9503H
類別	ロータイプ	ハイタイプ
製品質量 (kg)	4.2	4.7
梱包重量 (kg)	5.2	6
梱包サイズ (cm)	50 × 35 × 14	50 × 35 × 18


※本体と枠が固定された状態で梱包されています。

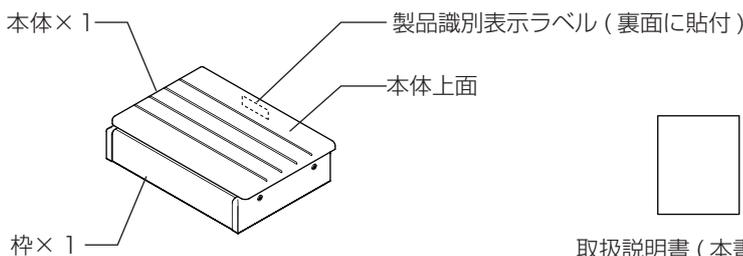

<組立付属部品>

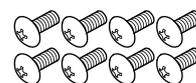

取付ねじ × 8

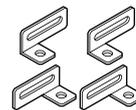


プレート (L) × 2

プレート (R) × 2

■使用工具

※ 付属されていません。
お客様でご用意ください

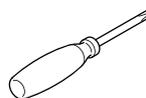

プラスドライバー (ビット2)

安全上の注意<必ずお守りください>



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

使用目的について

■ 目的以外の用途に使用しないでください

転落・転倒してけがをしたり、玄関台が破損・変形したりするおそれがあります。

■ 玄関台と組合せて使用する玄関用手すりは、弊社が指定する適合品を使用してください

指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたり、玄関台が破損・変形したりするおそれがあります。

ご使用される方について

■ 最大利用者体重を超える方は使用しないでください

この製品の最大利用者体重は 100kg です。この体重を超える方が使用すると、破損・変形などによりけがをすることがあります。

■ ご使用の際は、使用者の状態により介助者が付き添うなど、安全に十分配慮してください

- 転落・転倒して、けがをすることがあります。
- ご使用に適さなくなった場合は、直ちに使用をやめ、医師や介護士、ケアマネジャーなどの専門家に相談し、適切な処置を受けてください。

■ 本製品は 1 人用です。2 人以上同時に使用しないでください

転落・転倒してけがをしたり、玄関台が破損・変形したりするおそれがあります。

すき間・転落・転倒について

■ 玄関台と玄関用手すりなどとのすき間に足などを入れないでください

- 転落・転倒して、けがをすることがあります。
- すき間に入ると抜けなくなり、けがをすることがあります。

■ 玄関台が濡れている場合や、足や靴底が濡れている場合は使用しないでください

- 転落・転倒して、けがをすることがあります。
- 濡れている場合は、乾いた布などで拭き取ってください。

点検・修理について

■ 玄関台は定期的に点検してください

使用の頻度や環境により、製品は摩耗・劣化します。定期的にかたつきや各部のゆるみ、破損の有無などを点検してください。摩耗・劣化した状態で使い続けると、思わぬけがをするおそれがあります。

■ 玄関台が破損した場合は直ちに使用を中止してください

けがをするおそれがあります。破損した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（6 ページ参照）まで修理をご依頼ください。

■ お客様による修理・改造はしないでください

思わぬけがや破損の原因となります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ スプレータイプの殺虫剤を玄関台に直接噴射しないでください

殺虫剤に含まれる溶剤によって、玄関台が破損・変色するおそれがあります。また、破損した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

設置・保管上の注意<必ずお守りください>



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 設置後は、各部にゆるみがなく確実に固定されていること、玄関台が安定していることを確認した上でご使用ください

玄関台が倒れたり不安定になったりして、転落・転倒してけがをしたり、玄関台が破損・変形したりするおそれがあります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ 長期保管の際は、以下の項目に注意してください


- 直射日光の当たる場所や、高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
※ 温度 -10～50℃、湿度 30～90% R H の環境で保管してください。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

組立方法

① 玄関台の高さ調節

※ 高さを変更しない(初期設定のまま使用)場合は、本作業は不要です。②から開始してください。

1. 玄関台に元々付いている高さ調節ねじと平ワッシャーをプラスドライバー(ビット2)で取外してください。(4ヶ所)
2. 玄関台の高さを決め、本体と枠の穴位置をあわせて、1.で取外した高さ調節ねじと平ワッシャーを利用して、プラスドライバー(ビット2)で締付けて、再度固定してください。(4ヶ所)

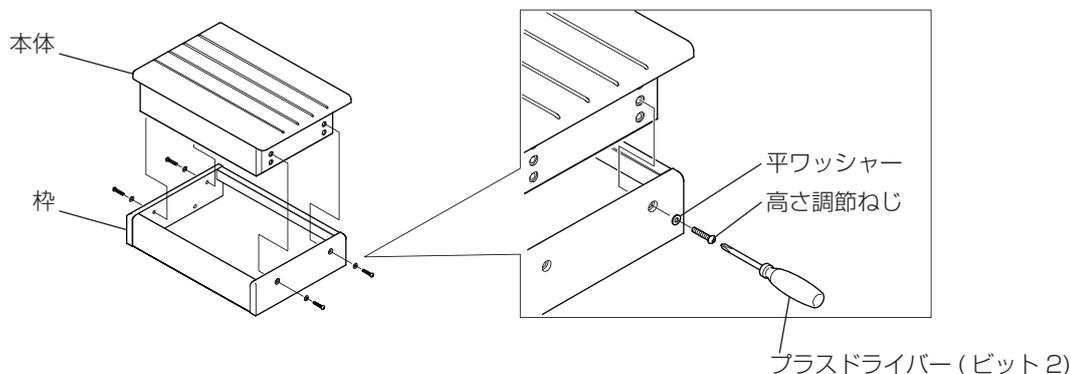


② プレートの仮止め

図のように、プレート(L)とプレート(R)を、付属の取付ねじを利用して、プラスドライバー(ビット2)で仮止めしてください。(4ヶ所)




取付ける玄関用手すりによって、プレート(L・R)の位置が違います。
下図を参照してプレートを仮止めしてください。

< KQ-950 * L・KQ-950 * H に取付ける場合 >

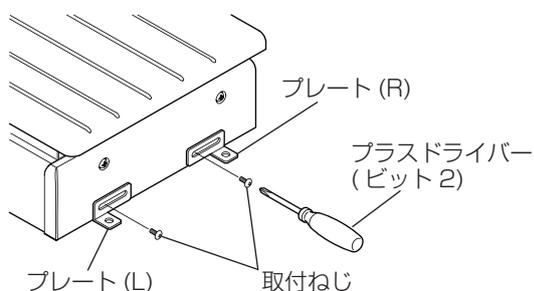


< KQ-951 * L・KQ-951 * H (コンパクト) に取付ける場合 >

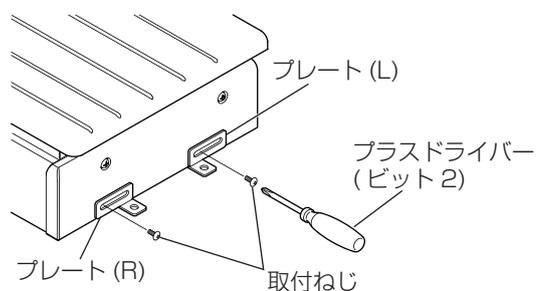


③ 玄関用手すりへの取付け

1. 図のように、プレート(L・R)の穴とベースプレートの穴をあわせて置いてください。
2. 付属の取付ねじを利用して、プラスドライバー(ビット2)で締付けて、図のように玄関台をベースプレートに固定してください。(4ヶ所)

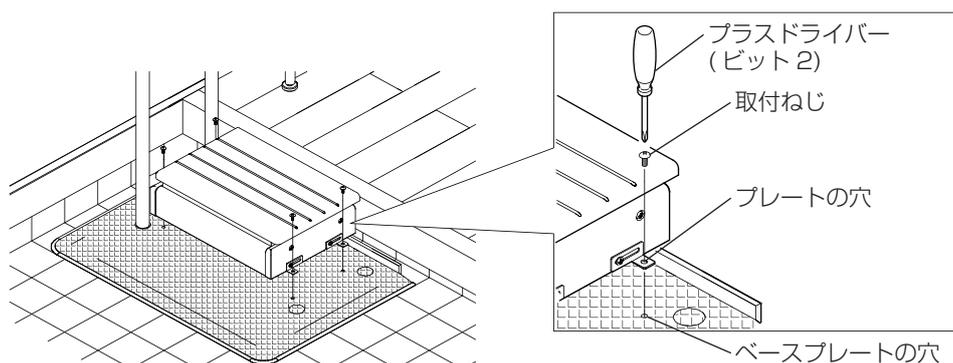

④ 玄関台の位置調節

玄関台と上がりかまちとの間にすき間がないように玄関台を動かし、②で仮止めした取付ねじを、プラスドライバー（ビット 2）で締付けて、玄関台をベースプレートに固定してください。

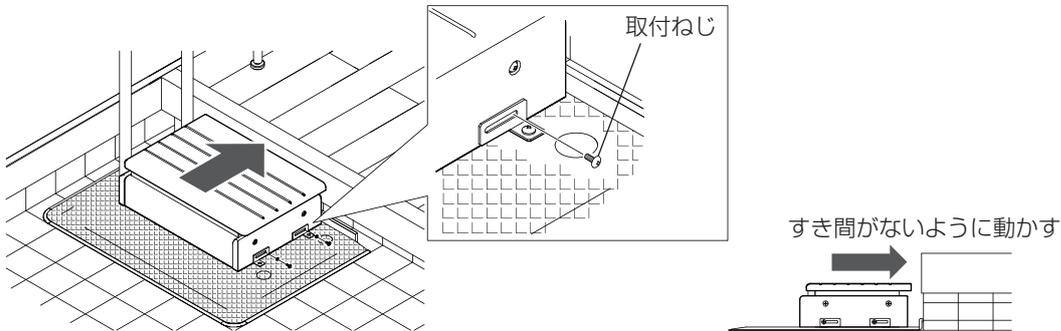

■ 分解方法

分解するときは、組立方法と逆の手順で行ってください。

点検

- 玄関台は組立て後に点検をしてください。また、定期的に点検をしてください。使用頻度や環境により製品は摩耗・劣化します。定期的に応じた下記のチェックシートに記載されている点検項目をチェックして、異常がないことを確認してください。異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、パラテクノコールセンター（6 ページ参照）までお問い合わせください。

チェックシート

① 玄関台の確認


- ・ 玄関台にがたつきはありませんか？
 - ない
 - ある → 3・4 ページ参照

② 玄関台の傷や変形


- ・ 本体・枠や締結部のねじ頭に傷や変形はありませんか？
 - ない
 - ある → パラテクノコールセンター（6 ページ参照）へ連絡
- ・ 本体上面にいちじるしい摩耗はありませんか？
※ 本体上面には滑り止め加工を施しています
 - ない
 - ある → パラテクノコールセンター（6 ページ参照）へ連絡

仕様

<KQ-9503L>

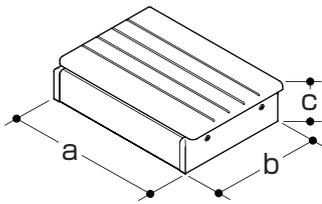

<KQ-9503H>

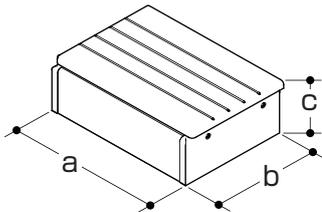

品名		玄関台	
品番	KQ-9503L	KQ-9503H	
類別	ロータイプ	ハイタイプ	
適合品	KQ-9501L KQ-9502L KQ-9511L※1 KQ-9512L	KQ-9501H KQ-9502H KQ-9511H※1 KQ-9512H	
寸法 (cm)	a	45	
	b	32	
	c	11 ~ 16 (3段階調節)	15 ~ 20 (3段階調節)
製品質量 (kg)	4.2	4.7	
主な材質	天然木		
最大利用者体重 (kg)	100		

※ 1) 中央に手すりを取付けた場合、玄関台は使用できません。

日常のお手入れ・廃棄

■ 汚れを落としかた

下記①～③の手順で行ってください。

- ① 水で薄めた中性洗剤にひたした布を、よくしぼって拭いてください。
- ② 水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③ 乾いた布で残った水分を拭き取ってください。



オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

⚠ 注意

- 酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤、揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと変色・変質するおそれがあります。
- クレンザー、磨き粉などの粗い粒子を含んだ洗剤や、研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシなどは使用しないでください。傷をつけるおそれがあります。



■ 廃棄

廃棄の際は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および各自治体の規則に従ってください。

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

販売店・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター(下記参照)までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（貼付位置は表紙：「各部の名称と部品の確認」参照）
- お買い上げ日 ●破損または異常の内容（できるだけ詳しく）
- お名前、ご住所および電話番号

保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合は

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間：平日8:00～19:00 / 土・日・祝日9:00～17:20（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

<パラマウントベッド 株式会社>

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)
仙台支店	〒980-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)
さいたま支店	〒338-0001	さいたま市中央区上落合9丁目4番7号	☎(048)852-0707(代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)

保証書

品名	玄関台	品番	KQ-9503L KQ-9503H
保証期間	1年間		
★ お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前		
	ご住所	〒□□□□ - □□□□ ☎ ()	
★ 販売店	店名		
	住所	☎ ()	

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証規定

- 保証期間内(お買い上げの日より1年間)に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - 弊社が指定する適用品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
 - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.

修理実施日	修理内容	担当者

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の基において無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書中の「アフターサービスについて」をご覧ください。

パラマウントベッド株式会社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号