

# KQ-39A キャスター

保証書付

## まえがき

このたびは、キャスターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、キャスターを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- キャスターをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」および適合するベッドの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- キャスターと組合せたベッドで療養する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」および適合するベッドの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

## 使用目的


■この製品は、ベッドに取付けることにより、部屋の中での配置換えや掃除をする際などに、ベッドの移動を補助することを目的に作られています。

※長い距離や段差・傾斜のあるゆか面などでの移動には適していません。


## 各部の名称と部品の確認

■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。

万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

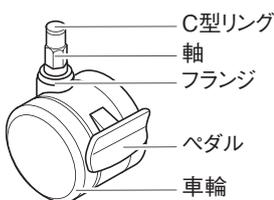

キャスター×4

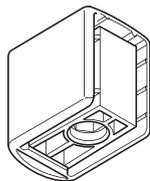


キャップ×4



取扱説明書×1

[取付状態]

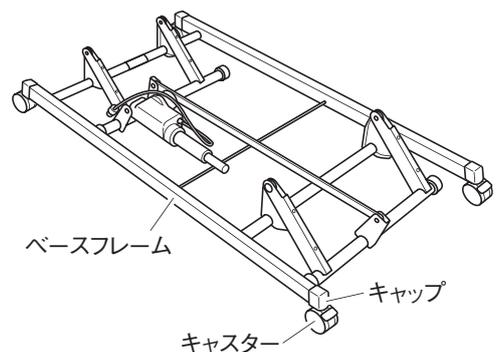

## 安全に使用するための注意事項



**けい  
こく  
警 告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺<sup>まひ</sup>など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

### ■ベッドを移動させるとき以外は4輪すべてのキャスターを固定状態にしてください

ベッドに乗り降りする際などに、ベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。

### ■キャスターは確実に取付けてください

キャスターが確実に取付けられていないと、キャスターの脱落などによりベッドがバランスを崩し、思わぬけがをするおそれがあります。

### ■ベッドを移動させる際は足元に注意してください

ベッドに足をぶつかけたり、キャスターなどに足がはさまれたりして、けがをするおそれがあります。

### ■お客様による修理・改造はしないでください

思わぬけがや破損の原因となります。

### ■キャスターを直接取付けて使用するベッドは弊社が指定する適合品をご使用ください

指定以外の製品や他社製品と組合せると、製品同士の接触や安定性の低下などにより、けがをしたり、ベッドやキャスターが破損・変形したりするおそれがあります。適合品については、下記の「適合品」を参照してください。



**ちゅう  
い  
注 意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### ■長い距離や段差・傾斜のある場所での移動は避けてください

破損の原因となります。

### ■最低高さ付近でのベッド移動はしないでください

ベッドの部品でゆかを傷つけることがあるため、ベッドを移動させる際には、5cm以上高さをあげてから行うようにしてください。

### ■以下の場合にはキャスターの下に敷物（脚座ゴムシート KQ-P732：別売など）をしてください

- すべりやすいゆか材（ビニル床シート・ビニル床タイル・フローリングなど）の上で使用すると、キャスターがすべりベッドが動いて、思わぬけがをするおそれがあります。
- ビニル系のゆか材の上で使用すると、ゆか材が変色するおそれがあります。

### ■ベッドを移動する際はヘッドボード・フットボードを持って移動してください

サイドレールなどを持つとサイドレールなどに大きな力がかかり、破損・変形するおそれがあります。

### ■スプレータイプの殺虫剤をキャスターに直接噴射しないでください

殺虫剤に含まれる溶剤によってキャスターが破損・変形するおそれがあります。また、破損した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

## 適合品


### ●適合するベッドは以下の通りです。

- ・楽匠シリーズ（延長フレームを取付けたベッドを除く）
- ・KQ-50000 シリーズ（KQ-5 \*\*\*\*）
- ・KQ-5000 シリーズ（KQ-5 \*\*\*）
- ・KQ-60000 シリーズ（KQ-6 \*\*\*\*）
- ・INTIME1000 シリーズ（RQ-1 \*\*\*\*\*）
- ・INTIME2000 シリーズ（RQ-2 \*\*\*\*\*）

### ●下記ベッドとこのキャスターの組合せは JIS 認証を取得しています。

- ・KQ-50000 シリーズ（KQ-5 \*\*\*\*）
- ・KQ-60000 シリーズ（KQ-6 \*\*\*\*）

# 使用方法

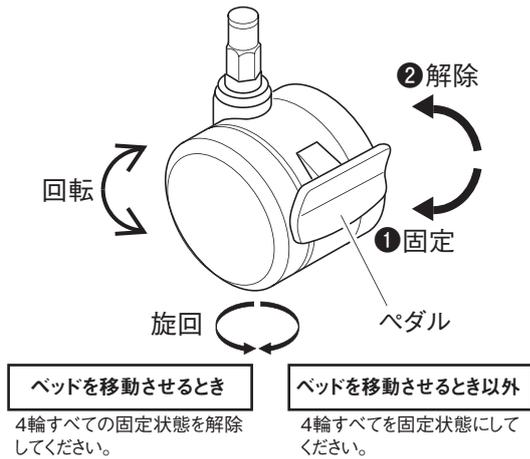

- ①ペダルを下側にすると回転・旋回ともにロックされた状態になります。固定状態にするとキャスターは回転・旋回しません。
- ②ペダルを上側にすると回転・旋回ともに固定状態が解除されます。固定状態を解除するとキャスターは回転・旋回します。



- 固定状態にすると、キャスターが回転・旋回しないことを確認してください。
- 固定状態を解除すると、キャスターがスムーズに回転・旋回することを確認してください。



**警告**

ベッドを移動させるとき以外は、4輪すべてのキャスターを固定状態にしてください。ベッドに乗り降りする際に、ベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。



**注意**


キャスターが固定された状態でベッドを無理に動かさないでください。ベッドやキャスターが故障したり、ゆか材を傷つけたりするおそれがあります。

# 取付方法



**注意**

組立てられているベッドにキャスターを取付けるときは、ベッドを分解し脚座を外してベースフレームのみの状態にしてから作業を行ってください。けがをするおそれがあります。  
※ベッドの分解方法は、ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの分解方法」を参照してください。

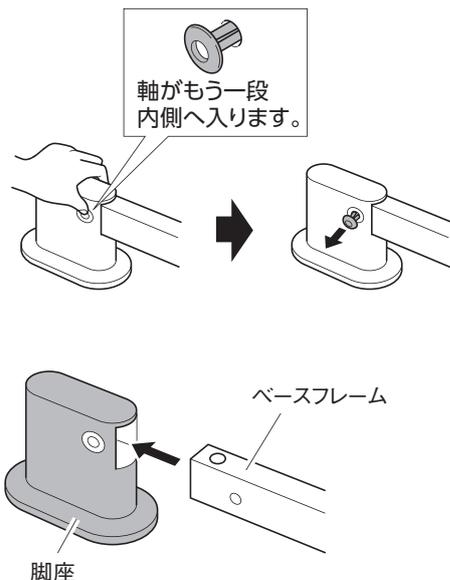

## 1. 脚座の取外し

- ①脚座を固定しているプッシュリベットの軸を「カチッ」と音がするまで、指で押込んで固定を解除してください。  
※指で押込めない場合は、押込み過ぎないように注意しながらドライバーなどで軽く押込んでください。
- ②プッシュリベットを脚座から取外してください。
- ③脚座をベースフレームから取外してください。(4ヶ所)




脚座とプッシュリベットは、紛失しないよう袋などに入れて保管してください。





※脚座を再度取付ける際は、プッシュリベットの軸を押し出してから使用してください。



# 取付方法

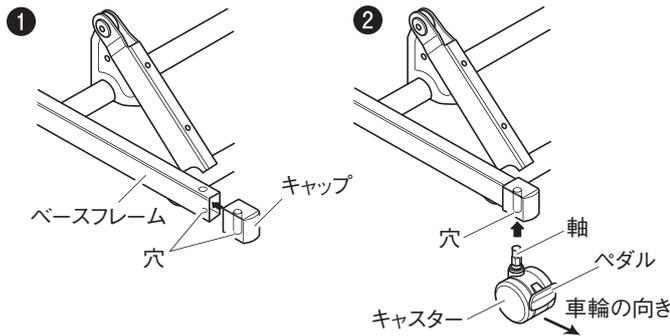

< 拡大図 >

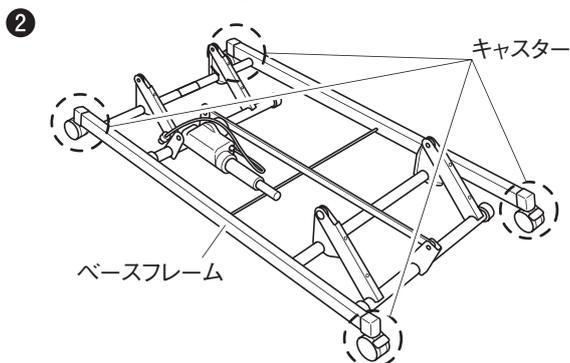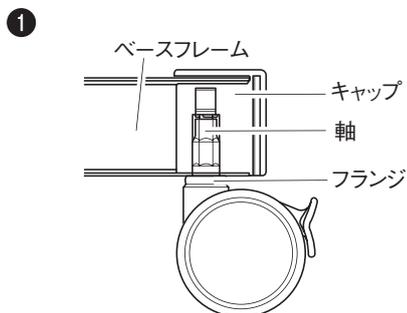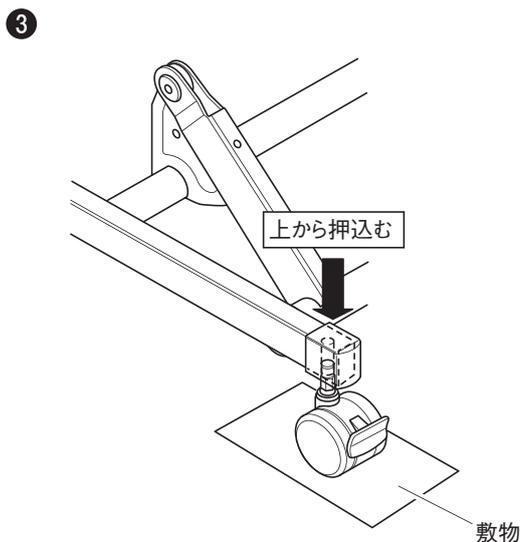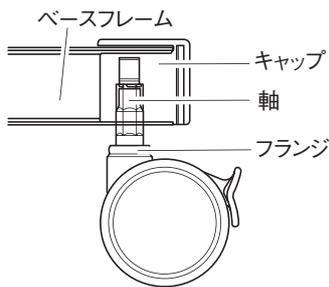

## 2. カスターの取付け

※次の①～③の作業を4ヶ所すべてについて行ってください。

① ベースフレームの先端に、キャップを穴のある側を下にして奥まで確実に差込んでください。

② カスターを図のようにペダルがベッドの外側にくるようにして、カスターの軸(六角部)をキャップの穴の途中まで差込んでください。



● カスターを穴に差込むときは、カスターが固定状態になっていることを確認してから作業を行ってください。

● カスターの軸(六角部)をキャップの穴に確実にあわせて、差込んでください。(拡大図参照)

● カスターはキャップと平行に車輪を外側に向けると取付けやすくなります。(拡大図参照)

③ 車輪をゆかに接地させ、ベースフレームの上面を手で押して、カスターの軸をキャップの中に完全に押込んでください。



**注意**

ベースフレーム上面を手で押してカスターを押込む際に、ベースフレームとカスターの間に指をはさまないように注意してください。

けがをするおそれがあります。



押込む際にはゆか材を保護するため、カスターの下に敷物を敷いてください。

## 3. 取付け後の確認

① 取付け後、フランジとベースフレーム下面が接することを確認してください。(4ヶ所)

② カスターが図のように4ヶ所に取付いていることを確認してください。



カスター4輪すべてが固定状態になっていることを確認してからベッドの組立てを行ってください。

## 取外方法



ベッドからキャスターを取外すときは、ベッドを分解し、ベースフレームのみの状態にしてから作業を行ってください。けがをするおそれがあります。  
 ※ベッドの分解方法は、ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの分解方法」を参照してください。

- ① ①図のようにキャップからキャスターを下側に引抜いてください。
- 注記!**
- キャスターを引抜く際に、手をゆかにぶつけないよう注意してください。
  - キャスターを引抜く際に、キャスターでゆかを傷つけないように注意してください。
- ② ②ベースフレームからキャップを引抜いてください。(4ヶ所)
- 注記!**
- ベースフレーム内側面の穴にドライバーなどを差込み、キャップを外側に押すようにすると引抜きやすくなります。
  - 取外したキャスターとキャップは紛失しないよう大切に保管してください。

## 仕様

品名		キャスター	
品番		KQ-39A	
主要寸法	キャスター (cm)	キャスター径：φ 6.5/ キャスター幅：6.2	
	キャップ (cm)	長さ 4.6 × 幅 3.2 × 高さ 4.4	
製品質量 (1個当り) (g)		キャスター：280/ キャップ：40	
材質	キャスター	車輪	熱可塑性エラストマー
		ペダル	ナイロン
		軸	スチール
	キャップ	ナイロン	

## お手入れ・長期保管について

### ■日常のお手入れ

- 汚れを落とす場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、その後水でひたした布をよくしぼって残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で残った水分を拭き取ってください。
- ※揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリンなど)やクレゾールは使用しないでください。変色・変質させるおそれがあります。
- キャスターへの注油や分解によるキャスター内部の清掃はしないでください。

### ■長期保管する場合

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。  
 温度 - 10 ~ 50℃、湿度 30 ~ 90% RH の環境で保管してください。
- 取扱説明書および組立付属部品を袋などに入れ、紛失しないよう、大切に保管してください。

## キャスターの交換について

- キャスターは消耗部品のため、長期間ご使用いただいた場合、摩耗、損傷などにより機能が低下するおそれがあります。下記の場合は製品の寿命ですので、使用を中止して新たな製品との交換を行ってください。
- キャスターのペダルを下側にしても、車輪が回転・旋回し、固定状態にならない場合。
- 車輪の劣化により、キャスターを固定状態にしてもベッドが動いてしまう場合。
- ベースフレームを持ちあげたときにキャスターがキャップから抜ける場合。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

## 2. 修理を依頼されるとき

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

### ■連絡していただきたい内容

- 品名、品番（下記の保証書を参照）
- お買い上げ日
- 破損または異常の内容（できるだけ詳しく）
- お名前、ご住所および電話番号

### ■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

### ■保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご希望により有償で修理いたします。

## 3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

## 4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日8:00～19:00/土・日・祝日9:00～17:20（年始は休業いたします）

## 【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

## 保証書

品名 / 品番		キヤスター / KQ-39A		保証期間	★お買い上げ日		
					年	月	日より1年間
お客様	お名前			★販売店 (店名・住所)			
	〒 ( ) ご住所				☎ ( )		

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。  
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。  
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

### 【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
  - 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
    - (1) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
    - (2) 弊社が指定する適用品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
    - (3) お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
    - (4) 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
  - (5) 保証書のご提示がない場合  
(6) 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合  
(7) 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
● This warranty is valid only in Japan.

## <パラマウントベッド 株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代)  
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代)  
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)  
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代)  
さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号 ☎(048)852-0707(代)

横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)  
名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)  
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)  
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)  
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)