

取扱説明書

7F12068000A0

KS-99CL

ソフトカバー

まえがき

このたびは、ソフトカバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この「取扱説明書」には、ソフトカバーを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- ソフトカバーをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」および適合するスイングアーム介助バーの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- ソフトカバーを取付けたスイングアーム介助バーと組み合わせたベッドで療養する方ばかりでなく、付添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。


使用目的

■ このソフトカバーは、スイングアーム介助バー（KS-099AH / KS-099A / KS-099B）の内部のすき間の一部を覆うものです。スイングアーム介助バーをご使用になられる方の心身の状態や利用環境に応じてご使用ください。

各部の名称と部品の確認

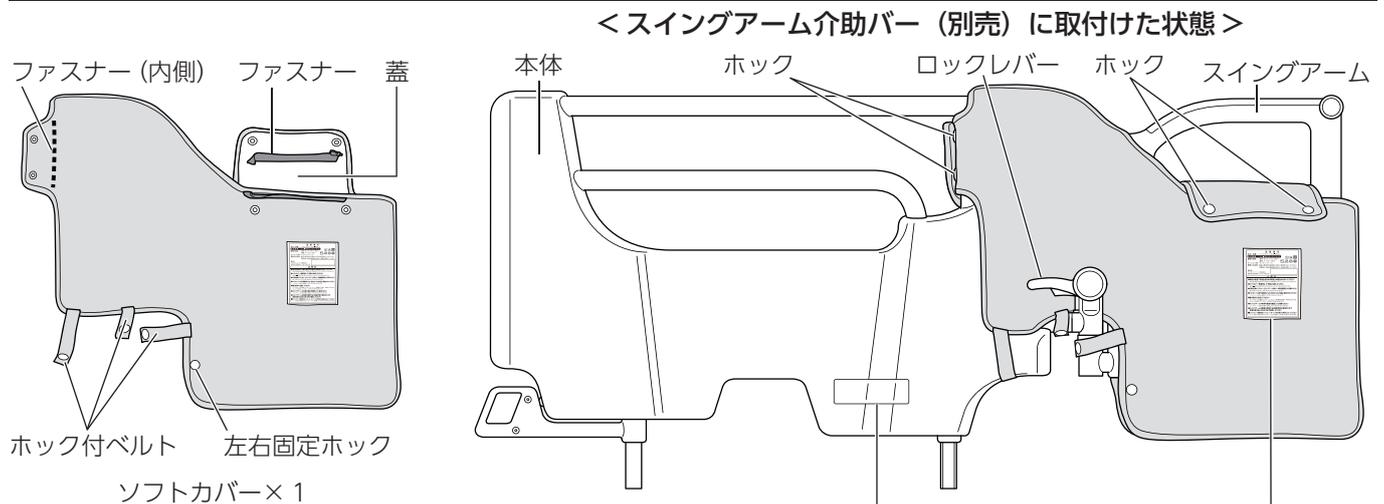

■ 製品識別表示ラベル

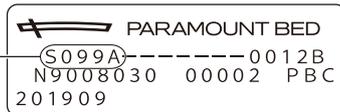


スイングアーム介助バーの品番は、製品識別表示ラベルに記載されています。

※ 製品識別表示ラベル上は、S099AH・S099A・S099B と表示されています。

例) S099A → KS-099A を示します。

■ 品質表示 / 安全ラベル

品名 / 品番	ソフトカバー KS-99CL
適合機種	KS-099AH / AG / A / B
繊維の組成	表地 ポリエステル 100% 裏地 ナイロン 100%
クッション材	ウレタンフォーム
使用上の注意	製品に異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。 ・洗濯時には蛍光増白剤を含まない洗剤を使用してください。
表示者	パラマウントベッド株式会社 東京都江東区東砂 2丁目14番5号
△ 警告	
● 弊社が指定する適合品以外の製品とは組み合わせないでください。 （他の商品と組み合わせた使用は、保証が適用されず、けがや故障の原因となります。）	
● ソフトカバー使用時は、すき間には注意してください。 （身体の一部が挟まりやすくなります。けがを予防してください。）	
● ご使用前にソフトカバーとスイングアーム介助バーの取付状態をよくお確かめください。 （取付が正しくないままの使用は、けがや故障の原因となります。）	
● ソフトカバーは高温や低温の多いものは、先の上記の仕様と相違なく、相違なくお取り扱いください。 （ソフトカバーが破損・変形し、けがを予防できません。）	
● 動く部分に注意してください。 （スイングアームや本体の動く部分には、ロックレバーを操作する際は、手や指などを挟まないように注意してください。けがを予防してください。）	
● スイングアームや本体の固定を確認してご使用ください。 （スイングアームや本体の固定が確認できず、使用中にずれや傾きが生じます。）	
● スイングアームは固定を解除すると解除状態が保持されます。 （角度を変えるとき以外は必ず固定してください。）	
● ソフトカバー使用時はロックレバーをベッドの内側から操作しないでください。 （アームが動かしやすくなるため、けがや故障の原因となります。）	

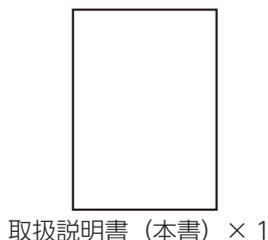

安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■弊社が指定する適合品以外の製品とは組合わせないでください

- 本製品はKS-099AH / KS-099A / KS-099B専用です。他の製品と組合わせて使用すると、ソフトカバーが正しく取付けられずに意図せぬすき間が発生して、身体の一部がはさまれてけがをしたり、ソフトカバーが破損したりするおそれがあります。適合品の品番の詳細については、表紙の「各部の名称と部品の確認」を参照してください。
- スイングアーム介助バーのスイングアームがしっかりと固定されず、転倒してけがをするおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 意図せぬすき間が発生して、身体の一部がはさまれてけがをしたり、ソフトカバーが破損したりするおそれがあります。

■ソフトカバーを取付けた場合、スイングアーム介助バーのロックレバーはベッドの内側から操作しないでください

- スイングアームが急に回転するなどしてベッドから転落し、けがをするおそれがあります。

■ソフトカバー使用時もすき間に注意してください

- スイングアーム介助バーのすき間や、スイングアーム介助バーとベッドのボードなどとのすき間に身体の一部がはさまれて、けがをするおそれがあります。

■スイングアーム介助バーのロックレバーをソフトカバーで覆った状態では使用しないでください

- ロックレバーの固定・解除の確認ができないため、スイングアームにつかまった際などにスイングアームが動き転倒したり、身体の一部がはさまれてけがをしたりするおそれがあります。

■ご使用前にソフトカバーと適合するスイングアーム介助バーの取扱説明書をよくお読みください

- 誤った使いかたをすると、思わぬけがをするおそれがあります。

■ソフトカバーに火気を近づけないでください

- ソフトカバーが変質・変形・発火するおそれがあります。

■ファスナーを完全に閉めた状態で使用してください

- ソフトカバーが外れ、思わぬけがや破損の原因となります。

■ソフトカバーは正しい向き・位置で取付けてください



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 誤った向きや位置で取付けて使用すると、けがや破損の原因となります。スイングアーム介助バーのロックレバーがベッドの外側から見えるように取付けてください。

■ファスナーやホックを固定した状態で使用してください

- ソフトカバーが外れたりファスナーが身体などに接触したりして、思わぬけがや破損の原因となります。

■ソフトカバーに先のとがったものを接触させないでください

- ソフトカバーに穴があいたり、破損したりするおそれがあります。


■ソフトカバーにほつれや破れが見つかった場合は、使用を中止してください

- 思わぬけがをするおそれがあります。



取付方法



- ファスナーの引手を蓋で覆う際は、右図を参照して引手を返してください。ファスナーが開くのを予防することができます。
- 開梱時など、ウレタンフォームの臭いが気になる場合は、日陰で1日程度干してからお使いください。

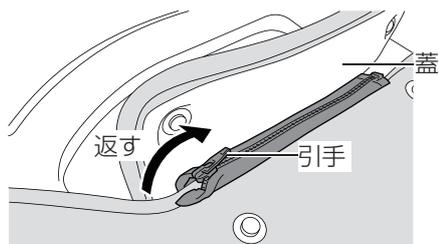



- ① ソフトカバー上側と横側のファスナーを開き、スイングアームがソフトカバーの奥まで入るようにしっかりと被せてください。
- ② ソフトカバー上側のファスナーを完全に閉め、ホック (2ヶ所) を確実にとめてください。

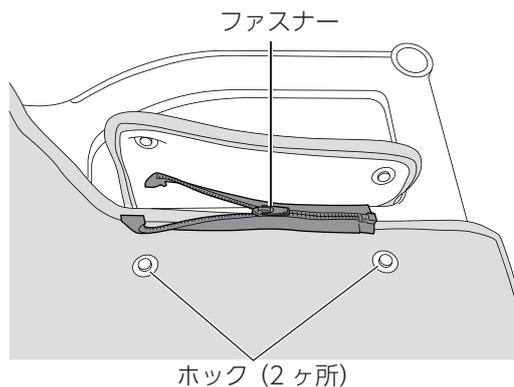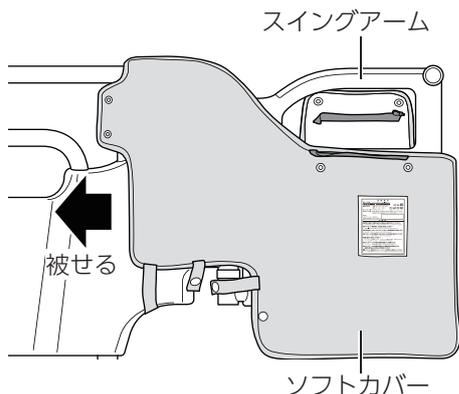


- ③ ロックレバーがベッドの外側から見えるように、ソフトカバー下側端部を内側に押し込み、左右固定ホックを確実にとめてください。
- ④ ソフトカバー横側のファスナーを完全に閉め、ホック (2ヶ所) を確実にとめてください。




- ベッドのどの位置に介助バーを取付けるかによって、押し込む側が異なりますので注意してください。

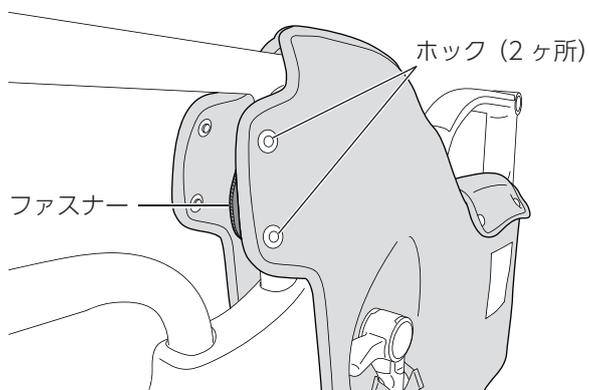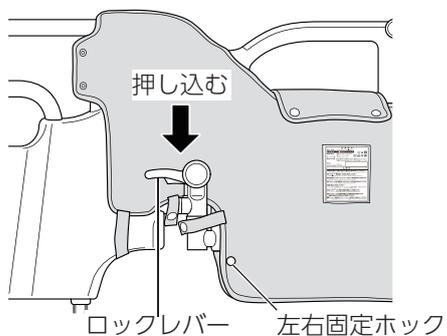

- ⑤ ソフトカバー下側にあるホック付ベルトでパイプと本体カバーを巻き込み、ホックをとめて確実に固定してください。(3ヶ所)

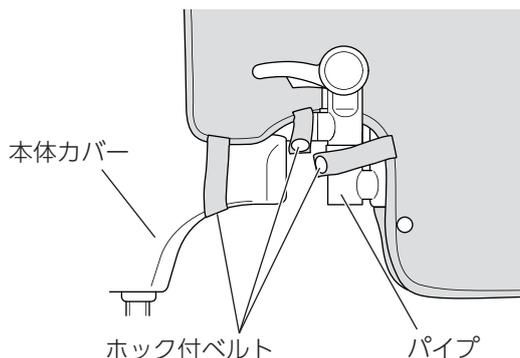

<完成図>

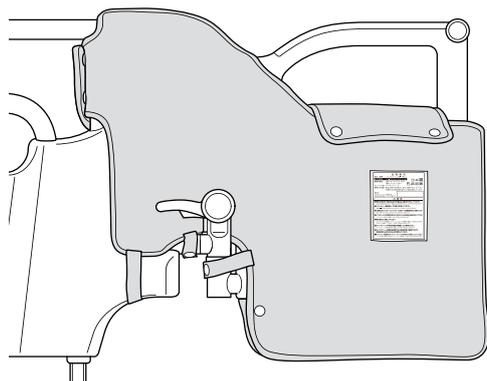

スイングアーム介助バーの使用方法について

■ このソフトカバーを取付けることにより、スイングアーム介助バーの使用方法が制限されます。以下の記載の項目に注意してください。

- スイングアーム介助バーのロックレバー操作は、ベッドの外側にいる方が行ってください。

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ● スイングアーム介助バーを使用する前に、ロックレバーがさがり、スイングアームが固定されていることを確認してください。スイングアームが急に回転するなどしてベッドから転落し、けがをするおそれがあります。 ● ソフトカバーを取付けた場合、スイングアーム介助バーのロックレバーはベッドの内側から操作しないでください。スイングアームが急に回転するなどしてベッドから転落し、けがをするおそれがあります。
--	---

- 注記**
- 取付後、ロックレバーのあげ・さがが行えること、スイングアームの固定の解除・角度調節・再固定がスムーズに行えること、スイングアームの角度調節によりホックが外れないことなどを確認してください。操作方法は適合するスイングアーム介助バーの取扱説明書をご確認ください。
 - 取外しは、取付方法と逆の手順で行ってください。

お手入れ（カバーの洗いかた）・長期保管について

■ お手入れは、下図の絵表示に従ってください。（品質表示／安全ラベルにも同様の記載がされています）

 <ul style="list-style-type: none"> ・手洗いによる洗濯処理ができます ・洗濯の液温は 40℃が限度です ・中性洗剤を使用してください（蛍光増白剤を含む洗剤は使用しないでください） 	 <ul style="list-style-type: none"> ・日陰での平干し乾燥がよいです
 <ul style="list-style-type: none"> ・漂白処理はできません 	 <ul style="list-style-type: none"> ・アイロン仕上げ処理はできません
 <ul style="list-style-type: none"> ・洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができません 	 <ul style="list-style-type: none"> ・ドライクリーニング処理はできません
	 <ul style="list-style-type: none"> ・ウェットクリーニング処理はできません

- 揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）は使わないでください。
- 十分に乾くまで使用しないでください。

- 注記**
- オゾン殺菌器、オートクレープ滅菌器、ベッド洗浄機などには対応できません。

■ 長期保管につて

- 高温・多湿・低温・乾燥・直射日光のあたる場所・ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- 芯材が変色する場合がありますが、製品の性能に問題はありません。
- 折りたたんで保管するとシワになるおそれがあります。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

仕 様

品 名	ソフトカバー	
品 番	KS-99CL	
寸 法 (cm)	長さ 56 × 高さ 50 × 幅 6.3 (蓋閉じた状態)	
製品質量 (g)	220	
材 質	生地	表：ポリエステル 100% (起毛トリコット) 裏：ナイロンハーフ 100%
	芯材	ウレタンフォーム
そ の 他	難燃加工	
適 合 品	スイングアーム介助バー (KS-099AH / KS-099A / KS-099B) ※ 適合品は、仕様の変更や組み合わせなどにより変わる場合があります。また、新製品や製品の販売終了により、適合品が記載されていない場合があります。適合品についてご不明な点は、販売店または直接弊社までお問い合わせください。	

< パラマウントベッド 株式会社 >

本 社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(大代) 横 浜 支 店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800 (代)
 東 京 支 店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171 (代) 名 古 屋 支 店 〒461-0001 名古屋市中区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600 (代)
 札 幌 支 店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181 (代) 大 阪 支 店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791 (代)
 仙 台 支 店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地3号 ☎(022)239-5211 (代) 広 島 支 店 〒733-0011 広島市西区横川1丁目8番5号 ☎(082)293-1311 (代)
 さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号 ☎(048)852-0707 (代) 福 岡 支 店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131 (代)