

IVポール

まえがき

このたびは、IVポールをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、IVポールを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- IVポールをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。


使用目的

■このIVポールは、点滴などを行う際に、ベッドや車いすなどに取付けて使用することを目的に作られています。

各部の名称と部品の確認

●開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

※イラストはKC-56で説明しています。

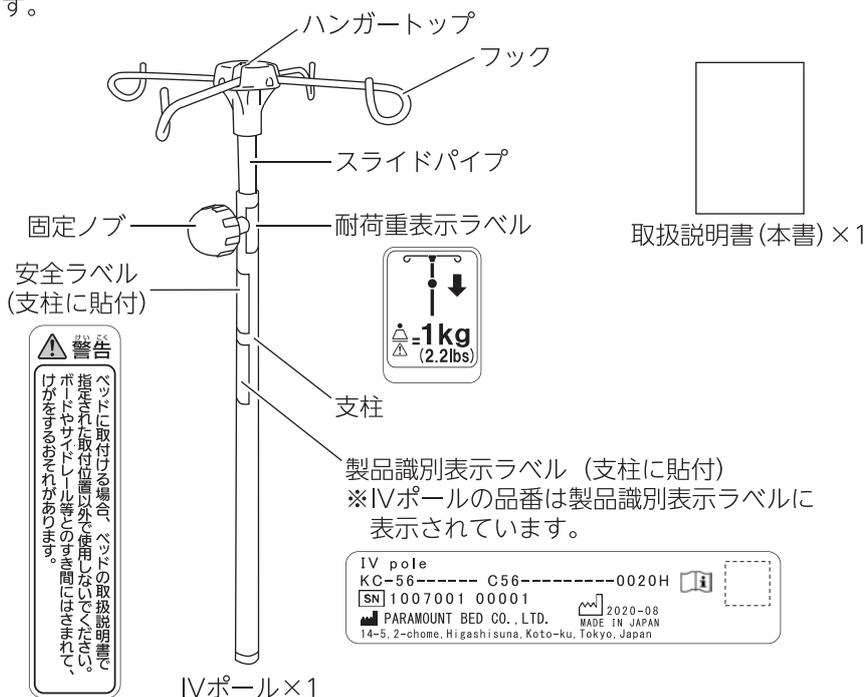

[安全ラベルについて]

- 注意事項の中で、IVポールをお使いになる方に特に注意していただきたい項目をラベルにして支柱に貼ってあります。はがしたり傷つけたりしないでください。
- 安全ラベルが傷ついたり、はがれたりした場合には販売店から新しい安全ラベルを取り寄せ、貼り直してください。

警告
 ベッドに取付ける場合、ベッドの取扱説明書で指された取付位置以外で取付しないでください。ホールドやサイドレール等とのすき間にはさまれて、けがをするおそれがあります。

安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷(骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など)を負う可能性が想定される内容を示しています。

■IVポールと組合せて使用する製品は弊社が指定する適合品をご使用ください

- 指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたり、IVポールが破損・変形したりするおそれがあります。適合品につきましては3・4ページの「適合品」を参照してください。
- 組合せて使用するベッドなどの取扱説明書に従って、正しく使用してください。

■ベッドに取付ける際は、ベッドの取扱説明書で指定された取付位置以外で使用しないでください

- ボードやサイドレールなどとのすき間にはさまれて、けがをするおそれがあります。

■IVポールはベッドのIVポール取付穴・オプション取付穴や車いすのIVポールホルダーなど、指定の取付位置にしっかり奥まで差込んでください

- 他の取付穴などに差込んだり、差込みが不十分だったりした状態で使用すると、IVポールが外れてけがをするおそれがあります。
- IVポールが破損するおそれがあります。

■使用前には、固定ノブが確実に締付けられていることを確認してください

- 締付けが不十分ですと、スライドパイプが不意に落下して、けがをしたり破損・変形したりするおそれがあります。

■固定ノブをゆるめるときは、スライドパイプ(支柱上部)をしっかり握ってください

- スライドパイプが不意に落下して、けがをするおそれがあります。

■IVポールを立ちあがるときなどの支えとして使用しないでください

- IVポールが抜けたり破損したりした場合に、転倒してけがをするおそれがあります。

■フックにもものを吊り下げた状態でスライドパイプの長さ調節をしないでください

- 固定ノブをゆるめると、スライドパイプが不意に落下して、けがをするおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損のおそれがあります。

■破損・変形した場合は使用を中止してください

- 破損・変形した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター(6ページ参照)まで修理をご依頼ください。IVポールの変形などによって、けがをするおそれがあります。

■熱器具(ストーブなど)の近くや直射日光の当たる場所では使用しないでください

- 変質・変形・発火の原因となります。

■スライドパイプの長さ調節は決められた範囲内で行ってください

- 引き出しすぎると、スライドパイプが外れてけがをしたり、IVポールが破損したりするおそれがあります。長さ調節は下記の範囲で行ってください。
KC-56：70cm以内 / KC-57：40cm以内



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷(骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など)を負う可能性が想定される内容を示しています。

■MRIなどの電磁場の強いところでは使用しないでください

- IVポールがMRI装置などに引き寄せられてけがをしたり、IVポールやMRI装置などが破損・変形したりするおそれがあります。

■フックに最大積載質量を超えるものを吊りさげないでください

- フック1本当たりの最大積載質量は1kgです。最大積載質量を超えるものを吊りさげると、フックが破損して落下し、けがをするおそれがあります。

■IVポールをベッドに取付けて使用するときは、ベッドのボードやサイドレールなどとIVポールのすき間に手や指などを入れないでください

- すき間にはさまれて、けがをするおそれがあります。

■輸液バッグなどをフックに確実に取付けてください

- 輸液バッグなどが不意に落下してけがをしたり、輸液バッグなどが破損したりするおそれがあります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷(打撲・すり傷・切り傷など)を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ベッドや車いすを移動する際はIVポールを持たないでください


- 破損・変形して、けがをするおそれがあります。

■スプレータイプの殺虫剤をIVポールに直接噴射しないでください


- 殺虫剤に含まれる溶剤によって、樹脂部分が破損・変形・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

使用方法

①上部のフックを開いてください。

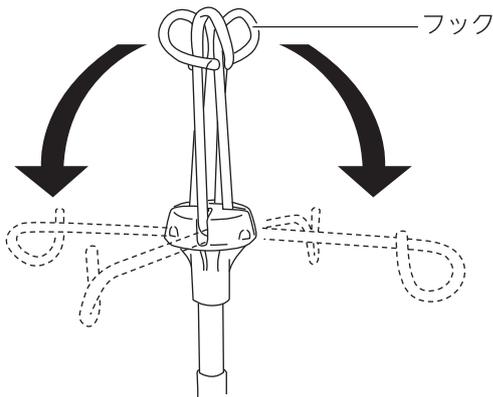


②固定ノブをゆるめスライドパイプを引き出し、フックを希望の高さにした後、固定ノブを確実に締付けてください。

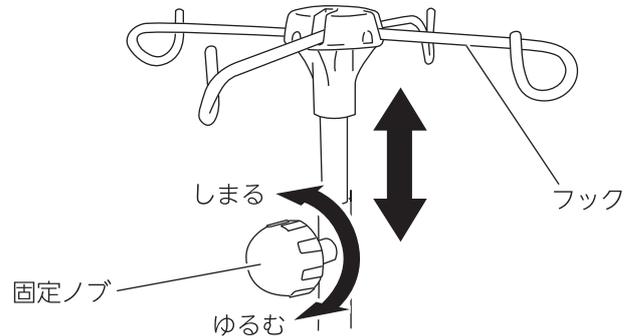

〈ベッドで使用する場合〉



- 取付けて使用するベッドの取扱説明書に記載された取付位置に差込んで使用してください。ご不明な場合は、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター(6ページ参照)までお問い合わせください。
- 適合するベッドにつきましては、下記の「適合品」を参照してください。

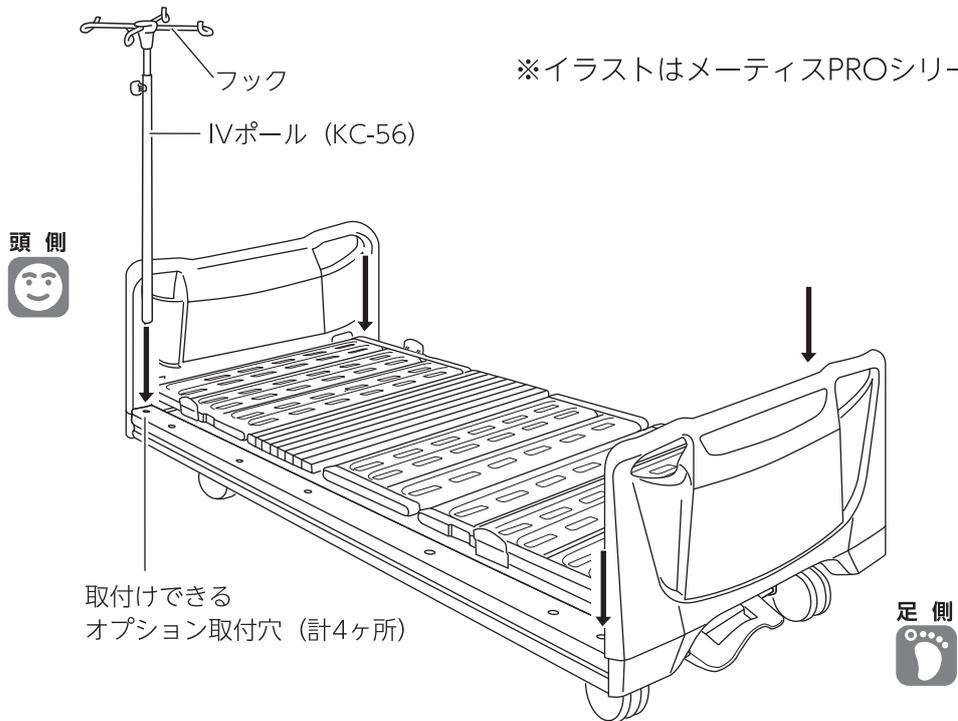

※イラストはメーティスPROシリーズで説明しています。


適合品	
IVポール	ベッド
KC-56	<p>KA-8950シリーズ, KA-8500シリーズ, KK-8000シリーズ, KA-6000シリーズ, メーティスPROシリーズ ウッディー/ドージェシリーズ, ベーシックベッド, KA-5000シリーズ, アルデコラシリーズ, KA-4000シリーズ KR+シリーズ^{※2}, SO-7001, エスパシアシリーズ, アルフォーネシリーズ(KA-8332/8332C/8392/8327/8337/8387/8397のみ) KB-252^{※3}, KB-665C/655C/654C^{※4}, KB-625C/624C^{※4}, 分娩用ベッドセレナス, L'za[エルザ]シリーズ^{※6} 楽匠Zシリーズ (KQ-7**0/7**1/7**0S/7**1S/7**6/7**7)^{※1}, 楽匠FeeZシリーズ (KQ-7**1)^{※5} KQ-60000シリーズ(KQ-6**0*/6**1*/6**2*)^{※5}, アリウスシリーズ ICU ベッド, アリウスシリーズベッド</p> <p>※1: IVポールホルダー (KQ-P70V) が必要です。 ※2: IVポールホルダー (KR-P81V) が必要です。 ※3: IVポールホルダー (KC-52) が必要です。 ※4: IVポールホルダー (KC-53) またはIVポール受 (KB-665P) が必要です。 ※5: IVポールホルダー (KQ-P90V) が必要です。 ※6: IVポール受 (KC-8251A) が必要です。</p>
KC-57	KK-8000シリーズ, KK-725シリーズ, KK-715シリーズ, KK-120, KC-240

〈車いすで使用する場合〉※KC-56のみ適合



●車いすで使用する場合は、IVポールホルダーが必要となります。車いすとIVポールホルダーの適合につきましては、下記の「適合品」を参照してください。

※イラストはKK-330SシリーズとKK-T50Aで説明しています。

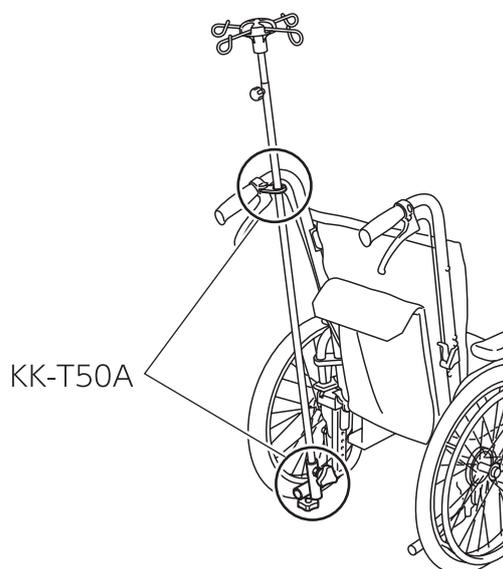

IVポールホルダー		適合品（車いす）
KK-30	前方用	KK-T50シリーズ, KK-T51シリーズ, KK-T54シリーズ
KK-T50A	後方用	KK-T50シリーズ, KK-T51シリーズ, KK-T54シリーズ, KK-T55シリーズ KK-330Sシリーズ, KK-330BASICシリーズ
KK-T60	前方用	KK-T605シリーズ
KK-T60A	前方用	KK-T626シリーズ, KK-T635シリーズ



●ベッド・車いす以外にも取付け可能な製品があります。詳しくは、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

製品のシンボル定義

■本製品では、以下のシンボルが使用されています。

シンボル	説明
	シリアルナンバー
	製造年月
	製造業者

シンボル	説明
	取扱説明書参照
	フックの耐荷重は 1本当たり 1kg

日常のお手入れ・長期保管・廃棄について

<日常のお手入れ>

■汚れを落とす場合

下記①～③の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

■消毒する場合

必ず下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

- 76.9～81.4% 消毒用エタノール
- 0.05～0.2% 塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）
- 0.05～0.2% 塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）
- 0.05% グルコン酸クロロヘキシジン（ヒビテンなど）
- 0.02～0.05% 次亜塩素酸ナトリウム（ミルトンなど）



- 揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質するおそれがあります。
- 中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。





●オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

<長期保管について>

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
温度-10～50℃、湿度30～90%RH、大気圧800～1060hPaの環境で保管してください。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

<廃棄>

廃棄の際は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および各自治体の規則に従ってください。

仕 様

品 名		IVポール	
		KC-56	KC-57
本体寸法 (cm)	全高(ハンガートップ上端までの高さ)	104.2～178.7	66.2～107.2
	フック上端までの高さ	103.0～177.5	65.0～106.0
	製品質量 (kg)	1.6	0.8
材 質	支柱・スライドパイプ・フック	ステンレス	
	固定ノブ・ハンガートップ	ABS樹脂	

環境条件	運送および保管時	使用時
温 度	-10～50℃	10～40℃
湿 度	30～90%RH	30～75%RH

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（支柱に貼付：表紙「各部の名称と部品の確認」参照）
- お買い上げ日
- 破損または異常の内容（できるだけ詳しく）
- 施設名、お名前、ご住所および電話番号

保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間：平日 8:00～18:00 / 土・日・祝日 9:00～17:00（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

〈パラマウントベッド株式会社〉

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂 2丁目14番5号	☎(03)3648-1111 (大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂 2丁目14番5号	☎(03)3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181 (代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211 (代)
さいたま支店	〒338-0001	さいたま市中央区上落合9丁目4番7号	☎(048)852-0707 (代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791 (代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311 (代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131 (代)

保証書

品名	IVポール	品番	KC-56, KC-57
保証期間	1年間		
★お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前		
	ご住所	〒□□□□ - □□□□ ☎ ()	
★販売店	店名		
	住所	☎ ()	

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に保管してください。

この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご呈示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証規定

- 保証期間内(お買い上げの日より1年間)に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
 - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.

修理実施日	修理内容	担当者

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の基において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の中の「アフターサービスについて」をご覧ください。

パラマウントベッド株式会社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号