

4 安全に使用するための注意事項

ご使用前に、必ずこの「安全に使用するための注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

警告

スマートフォンによるベッドの操作や設定を行う際は、使いかたに十分に注意してください。

- スマートフォンによるベッドの操作や設定は、ベッドが見える位置で行ってください。意図せぬベッドの動作や設定変更により、予期せぬ事故が発生するおそれがあります。
- 操作が理解できないと思われる方（12歳以下のお子様や認知症の方など）に操作をさせないでください。意図せぬベッドの動作や設定変更により、予期せぬ事故が発生するおそれがあります。




ベッドからの呼出通知の受信は、緊急時の使用を目的とした機能ではありません。ベッドの呼出機能は、ベッド使用者が家族や介護者を呼出するための補助的な機能であり、容体の急変や転倒・転落事故などの緊急時の対応を何ら保証するものではありません。

5 各機能の紹介と使用上の注意

各機能の詳しい使いかたについては、アプリのホームページまたはアプリ内のヘルプをご覧ください。アプリのホームページは、「2 アプリをインストールする」にある QR コードからご覧いただけます。

■ベッドからの呼出通知を受信

ベッド使用者が手元スイッチの呼出ボタンを押すと、お持ちのスマートフォンで通知を受信できます。受信した通知の履歴（最大3ヵ月分）を閲覧することもできます。

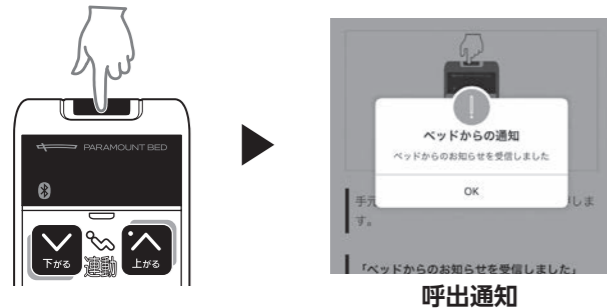

使用上の注意

- スマートフォンの設定やアプリの状態によっては、通知が正しく受け取れないことがあります。詳しくはアプリ内のヘルプをご覧ください。
- 呼出ボタンを連続で押しても通知は連続で送られません。再度通知を送る場合は、30秒～1分程度の間隔をあけて押してください。
- 通知を受信した際の音やバイブレーションは、お持ちのスマートフォンの設定により異なります。

■ベッドを操作


お持ちのスマートフォンでベッドの操作ができる画面は3種類あります。

コントローラー画面




☺☺を長押しすると、手元スイッチと同様のベッド操作ができます。

メモリー画面

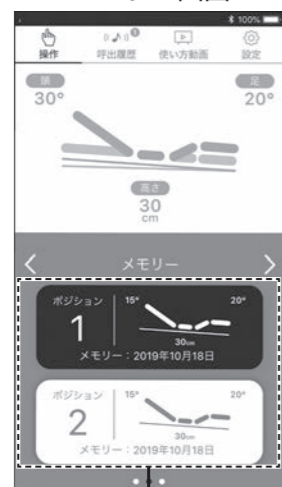

あらかじめ設定したポジションに向かってベッドを動作できます。

セレクト画面

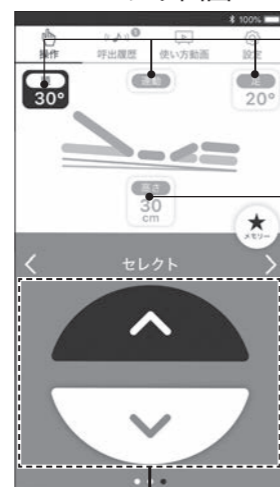

☺☺を長押しすると、選択した部位を操作できます。

アイコンをタッチすると、操作したい部位が選択されます。

- ・運動
- ・頭（背あげ / 背さげ）
- ・足（膝あげ / 膝さげ）
- ・高さ

使用上の注意

- スマートフォンによるベッドの操作は、必ずベッドが見える位置で行ってください。
- 手元スイッチとスマートフォンのベッド操作画面のボタンを同時に押すとベッドの動作が止まります。

介護用ベッド向けアプリ

このセットアップガイドは、Bluetooth Low Energy（以下、BLE）搭載の手元スイッチが付属されている介護用ベッドとお持ちのスマートフォンを連携させ、専用アプリで使用するために必要な初期設定の手順を記載しています。

- ベッドの注意事項や使用方法については、ベッドの取扱説明書をご覧ください。
- 仕様変更により、この「セットアップガイド」の内容やイラストが実際のアプリ画面と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。
- Bluetooth および Bluetooth ロゴは、米国 Bluetooth SIG, Inc. の商標です。本文中における ® および TM は省略しています。
- Apple は、米国および他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Google は、Google LLC の商標または登録商標です。
- QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

1 こんなことができます

お持ちのスマートフォンに専用アプリをインストールすると、スマートフォンで以下の機能を使うことができます。


ベッドからの呼出通知を受信できます

ベッド使用者が手元スイッチの呼出ボタンを押すと、登録したスマートフォンで通知を受け取ることができます。
※ BLE の無線が届く範囲に限定されます。
※ 緊急時の使用を目的としたものではありません。



ベッドを操作できます

登録したスマートフォンでもベッドを操作できます。
※ ベッドが見える位置で操作してください。

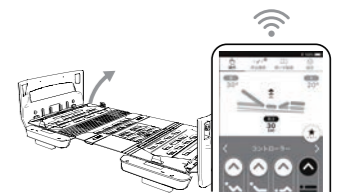

福祉用具の使い方を閲覧できます

弊社で扱っているベッドやオプション品などの福祉用具の製品紹介や使い方を見ることができます。

2 アプリをインストールする

介護用ベッド向けアプリをダウンロードし、お持ちのスマートフォンにインストールしてください。BLE 搭載の手元スイッチが付属されている介護用ベッドや連携することができるスマートフォンの詳細は、下記の QR コードからアプリのホームページでご覧いただけます。



← QR コードはこちら

アプリのダウンロードについて

- アプリのダウンロードおよびご利用時には別途通信料がかかります。お客様のご負担となります。
- Apple ID や Google アカウントは、お客様自身でご確認ください。

3 ベッドを登録する

お持ちのスマートフォンと連携してベッドをご使用になる場合は、スマートフォンにベッドを登録する必要があります。以下の手順に従って、ベッドの登録を行ってください。

※ [] : アプリの画面に表示されるボタンや項目を示しています。
 ※ お使いのスマートフォンの OS やバージョンによって、画面の表示が異なる場合があります。


登録で困ったときは
 ベッドの登録について不明点などございましたら、アプリのホームページまたはアプリ内のヘルプをご覧ください。アプリのホームページは、「2 アプリをインストールする」にある QR コードからご覧いただけます。

ベッドの登録について

- スマートフォン 1 台に対して、ベッドは 1 台しか登録できません。
- ベッド 1 台に対して、スマートフォンは 3 台まで登録できます。4 台目を登録すると、登録順の一番古いものが自動的に登録から外れます。
- スマートフォンを買い替えた際は、新規登録が必要になる場合があります。詳細については、アプリ内のヘルプ画面を参照してください。
- ベッドの登録状況は定期的にベッドと接続することで確認してください。

登録開始

①アイコンをタップする




アプリが起動します。

利用許可の通知について
 ベッドを登録するために、利用許可の通知がポップアップされます。登録に必要な設定なので、すべて「許可」を選択してください。お使いのスマートフォンによって、通知画面や種類が異なります。


登録の前に

②利用規約を確認する

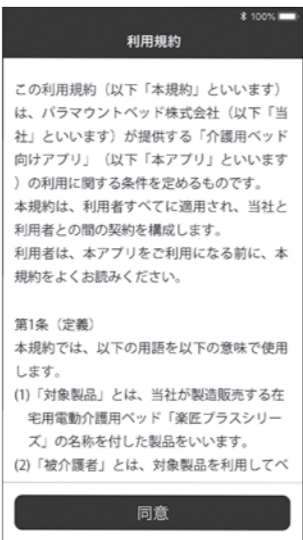


内容を確認したら、[同意] をタップします。

③アンケートに回答する

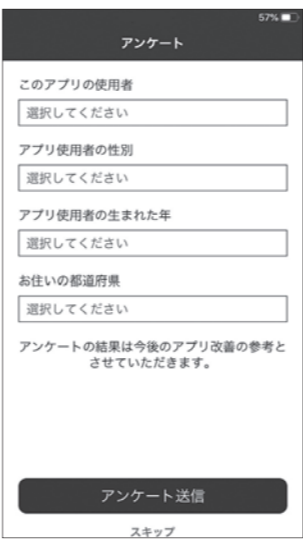

アンケートに答えたら、[アンケート送信] をタップします。


④機能紹介を確認する



画面をスクロールさせて、内容を確認し、[ベッドの登録へ] をタップします。

ベッドを登録する

⑤機器を準備する



この画面が表示されたら、機器の準備をします。

■手元スイッチ
 ベッド/手元スイッチの電源を入れて、ベッドを操作できる状態にしてください。ベッド/手元スイッチの電源の入れかたは、ベッドの取扱説明書を参照してください。

■スマートフォン
 Bluetooth の設定を ON にしてください。設定方法はお使いのスマートフォンの取扱説明書を参照してください。

ベッドを登録する (つづき)

⑥設定ボタンを 3 秒以上押し、表示された数字を入力する



表示パネルに数字が表示されます。「-」のあとから 2 桁ずつ、合計 6 桁の数字が繰返し表示されます。

■表示例
 “-” → “64” → “22” → “22” → “-” … (繰返し)
 上記の場合は「642222」と入力します。



⑥で表示された 6 桁の数字を入力します。画面や入力方法は、お使いのスマートフォンで異なります。



メッセージが表示されたら、ベッドの登録が完了です。[呼び出し機能の確認へ] をタップします。
登録できない場合は
 設定ボタンを再度押し、改めて表示された数字を入力してください。

登録後の確認

⑦呼び出し機能を確認する



手元スイッチの呼び出しボタンを押します



通知が届いたら [OK] をタップし、[無線の確認へ] をタップします。

⑧通知の届く範囲を確認する



無線の範囲に問題ないことを確認できたら、[アプリの使用を始める] をタップします。

利用開始



アプリを利用される前に「4 安全に使用するための注意事項」をお読みください。