

まえがき

このたびは、ウォーキングベスト R（以下、スリングシート）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この「取扱説明書」には、スリングシートを安全にお使いいただくための注意事項などを記載しています。

ご使用前に、この取扱説明書およびスリングシートと併用する介護リフトなどの取扱説明書をよくお読みいただき、スリングシートを正しく効果的にお使いください。

【用途・特長】

リフトを利用して立位や歩行をサポートするスリングシートです。

サイズは5種類（5ページ参照）を用意しています。

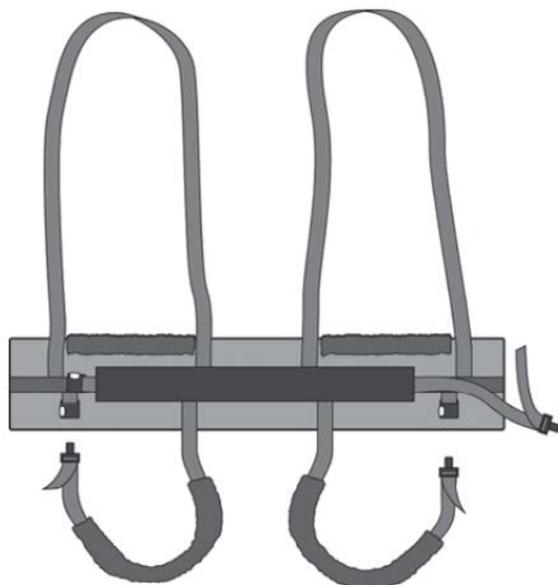

ウォーキングベスト R



装着状態

【使用する前の確認事項】

- リフト使用中は、必ず介護者が付き添い、使用者から目を離さないでください。
- 使用者が不快感を持つことや、転倒などの事故を予防するため、ご使用前にリフトの試運転とスリングシートの試用を行ってください。
- 安全に使用するため、スリングシートと併用するリフトの耐荷重を確認してください。
- ご不明な点は、販売店または弊社までご連絡ください。

製造元： **Direct Healthcare Group**

Advancing Movement & Health®

輸入・販売元： パラマウントベッド株式会社

【安全に使用するための注意事項】

■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺 ^{まひ} など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
---	--


■使用前（使用后）に点検を行ってください

- スリングシートは消耗品です。使用前（使用后）には、スリングシートに亀裂や裂け目、縫い目のほつれが無いかどうか点検してください。亀裂や裂け目、縫い目のほつれがあると、使用中に思わぬけがをするおそれがあります。

■スリングシートが破損（ほつれなど）した場合は、直ちに使用を中止してください

- 思わぬけがをするおそれがあります。

■ハンガー部のフックの断面が角張っているリフトには使用しないでください

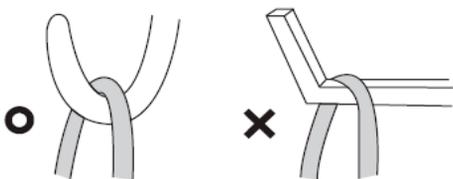

- スリングシートの吊りあげ用ループの摩耗や縫製のほつれなどにより、リフトからスリングシートが外れ、使用者が転倒してけがをするおそれがあります。

■ご使用の際は、吊りあげ用ループがリフトのハンガー部のフックに確実に掛かっていることを確認してください

- 吊りあげ用ループが確実に掛かっていない状態でリフトを操作すると、使用者が転倒して、けがをするおそれがあります。

■使用后、スリングシートが当たっていた部分の皮膚に変化がないか確認してください

- 思わぬけがをするおそれがあります。
- 皮膚に変化がある場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。

■吊りあげ時にスリングシートが車いすなどに引っ掛っていないことを確認して、リフトを操作してください

- スリングシートが破損したり、バランスを崩し思わぬけがをしたりするおそれがあります。

■スリングシートに火気や先のとがったものを近づけないでください

- スリングシートの近くで熱器具を使用しないでください。変質・変形・火災のおそれがあります。
- スリングシートが破損するおそれがあります。

	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
---	--

■吊りあげ用ループはねじれなどの無いように、リフトのハンガー部のフックに掛けてください

- 吊りあげ用ループにねじれがあると左右の長さが変わり、リフトで吊りあげた際に身体が傾き、鼠径（そけい）部への圧迫の原因となります。

【使用方法】




ちゅうい
注意

筋力の弱い方に使用する際は、十分に注意してください。身体に負担がかかるおそれがあります。

- ご使用にあたり、理学療法士・作業療法士などの専門家もしくはお買い上げの販売店にご相談いただき、スリングシートを正しく使用してください。

<使用前の点検>

- 使用する前に、スリングシートに傷や破損がないことを確認してください。

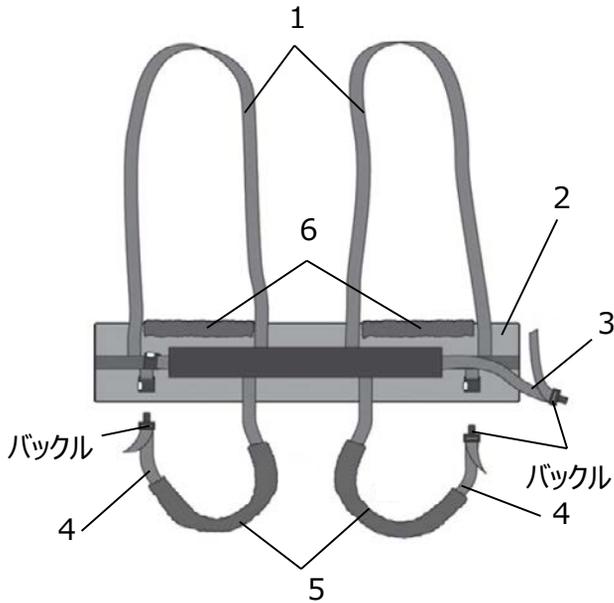


1. 吊りあげ用ループ（グレー）
※リフトのハンガー部のフックに引っ掛けます。
2. ウエスト
※上腹部に装着します。
3. ウエストベルト（赤）
※バックルが付いています。
4. 脚用ハーネス（黒）
※バックルが付いており、後方から鼠径（そけい）部を通して前部で固定します。
5. 脚用ハーネス用パッド
※鼠径（そけい）部の圧迫とすりむきを予防します。
6. ベスト用パッド
※胸部の圧迫とすりむきを予防します。

スリングシート




座位姿勢におけるウエストの装着方法

- ① バックルがある面を使用者の身体の外側に向け、吊りあげ用ループ（グレー）を上にして、スリングシートを使用者の上体周りに当ててください。
※スリングシートの中心部が使用者の背骨（せぼね）に沿うようにしてください。

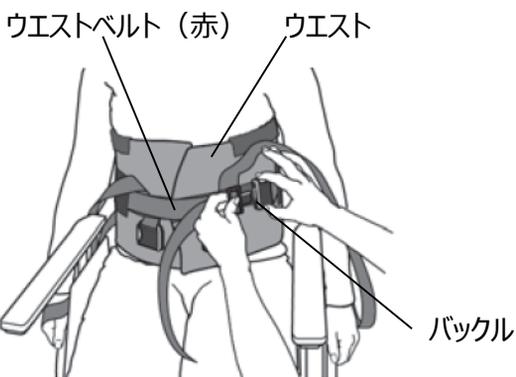


- ② ウエストを使用者の脇の下から上腹部に回し、ウエストベルト（赤）に付いているバックルを『カチッ』と音がするまでしっかりと固定してください。
- ③ 使用者の体型にあわせて、ウエストベルト（赤）を調整してください。


座位姿勢における脚用ハーネス（黒）の装着方法

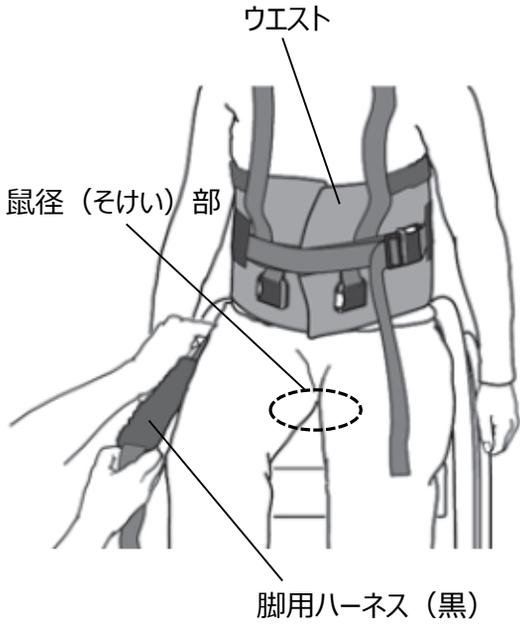

- ① ウエストが使用者の上腹部に確実に装着されたことを確認してから、脚用ハーネス（黒）を使用者の太ももの下側から鼠径（そけい）部を通して前側に回してください。（2ヶ所）

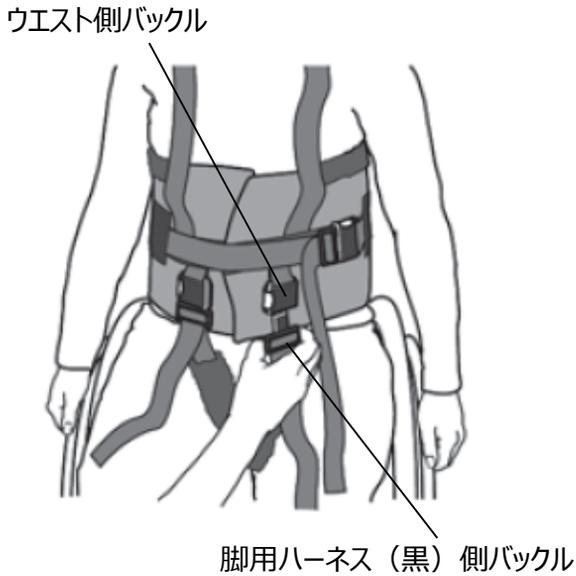

- ② 2本の脚用ハーネス（黒）側バックルを、ウエスト側バックルに『カチッ』と音がするまでしっかりと固定してください。

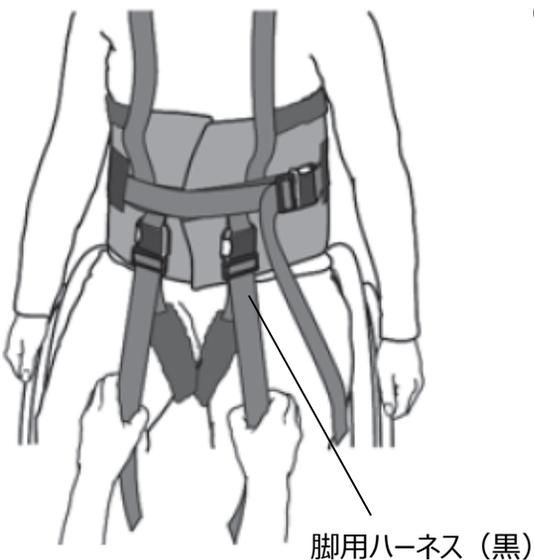

- ③ 使用者の体型にあわせ、脚用ハーネス（黒）の長さを調整してください。

起立姿勢にする方法

リフトのハンガー部のフック



- ① スリングシートが使用者に確実に装着されたことを確認してから、吊りあげ用ループ（グレー）をリフトのハンガー部のフックに確実に引っ掛けてください。（2ヶ所）

吊りあげ用ループ（グレー）



- ② リフトを上昇させ、吊りあげ用ループ（グレー）がピンと張ったら上昇をやめ、鼠径（そけい）部にねじれがないことを確認してから歩行などを行ってください。
※ねじれがある場合は、リフトを下降させ、使用者を座位姿勢に戻してからねじれを直し、再度上昇させてください。

 けい こく 警告	リフト使用中は介護者が付き添い、使用者から目を離さないでください。思わぬけがをするおそれがあります。
---	--

 ちゅう い 注意	リフトを上昇させる際は、使用者の足が浮くまであげないでください。鼠径（そけい）部が圧迫されるおそれがあります。
---	---

【お手入れ】



60-85℃

液温85℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯ができます。
60～85℃が推奨温度です。



漂白剤は使用できません。



乾燥機を使用する場合は、低い温度設定（60℃）で乾燥してください。



ドライクリーニングはできません。



アイロンがけはできません。



スリングシートを洗淨後は、縫い目や素材に傷がないか、布地が擦切れていないかを確認してください。

【仕様】

品名	ウォーキングベストR				
品番	KZ-A72801	KZ-A72802	KZ-A72803	KZ-A72804	KZ-A72805
サイズ	XS	S	M	L	XL
使用者体重(kg)	25-50	40-60	55-80	75-100	90-110
耐荷重(kg)	300				
材質	ポリエステル				

商品に関するお問い合わせ

<パラマウントベッド株式会社>

パラマウントベッド株式会社

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)
さいたま支店	〒336-0967	さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(048)878-0100(代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)



PARAMOUNT BED