


まえがき

このたびは、**延長ループ**をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、**延長ループ**を安全にお使いいただくための注意事項などを記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書および**延長ループ**と併用するスリングシートや介護リフトなどの取扱説明書をよくお読みいただき、**延長ループ**を正しく効果的にお使いください。

【用途・特長】

延長ループは、スリングシートのストラップを希望通りの長さにあわせ、横たわった姿勢や座位に近い姿勢など、よりバランスを必要とする姿勢を可能にするために使用します。多種多様な吊り上げの場面や使用者のニーズに応えることができ、サイズは2種類（裏表紙参照）を用意しています。
※延長ループは、必ず弊社製スリングシートと組合せて使用してください。

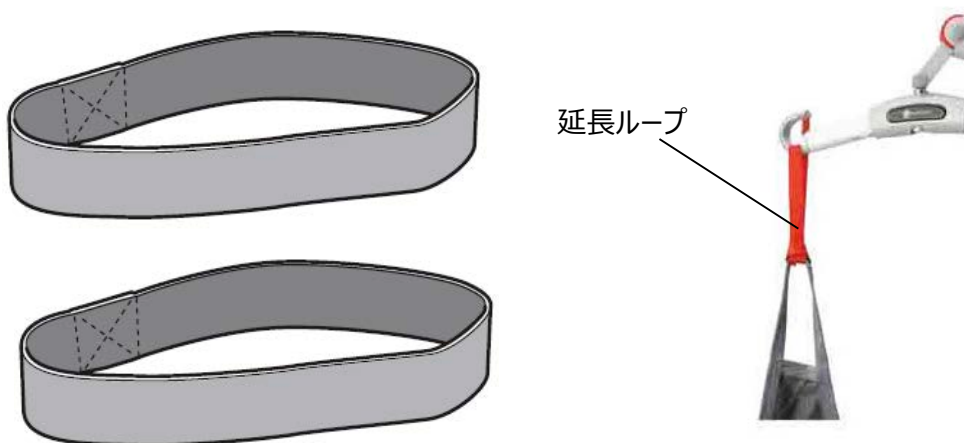


【使用する前の確認事項】

- リフト使用中は、必ず使用者に付き添ってください。
- 使用者が不快感を持つことや、スリングシートから滑り落ちる危険を防ぐため、リフトの試運転と延長ループ・スリングシートの試用を行ってください。
- 安全に使用するため、延長ループと併用するスリングシートやリフトの耐荷重を確認してください。
ご不明な点は、販売店または弊社までご連絡ください。

【安全に使用するための注意事項】

■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

 けい こく 警 告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺 ^{まひ} など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
---	--


■使用前（使用后）に点検を行ってください

- 延長ループは消耗品です。使用前（使用后）には、延長ループに亀裂や裂け目、縫い目のほつれが無いかどうか点検してください。亀裂や裂け目、縫い目のほつれがあると、使用中に思わぬけがをするおそれがあります。

■延長ループが破損（ほつれなど）した場合は、直ちに使用を中止してください

- 思わぬけがをするおそれがあります。

■ハンガー部のフックの断面が角張っているリフトには使用しないでください

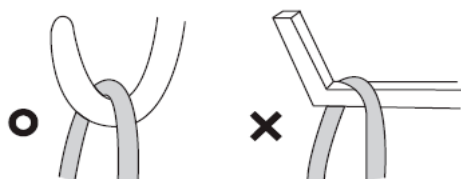


- 延長ループの摩耗や縫製のほつれなどにより、リフトから延長ループが外れ、落下してけがをするおそれがあります。

■延長ループは、リフトのハンガー部のフックに確実に掛けてください

- 延長ループが確実に掛かっていない状態でリフトを操作すると、落下して、けがをするおそれがあります。

■延長ループに火気や先のとがったものを近づけないでください

- 延長ループの近くで熱器具を使用しないでください。変質・変形・火災のおそれがあります。
- 延長ループが破損するおそれがあります。

 ちゅう い 注 意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
---	--

■延長ループはねじれなどの無いようにリフトのハンガー部のフックに掛けてください


- 延長ループにねじれがあると左右の長さが変わり、リフトで吊りあげた際に身体が傾き、大腿への圧迫の原因となります。

【使用方法】


■ご使用にあたり、理学療法士・作業療法士などの専門家もしくはお買い上げの販売店にご相談いただき、延長ループを正しく使用してください。

<使用前の点検>

●使用する前に、延長ループに傷や破損がないことを確認してください。


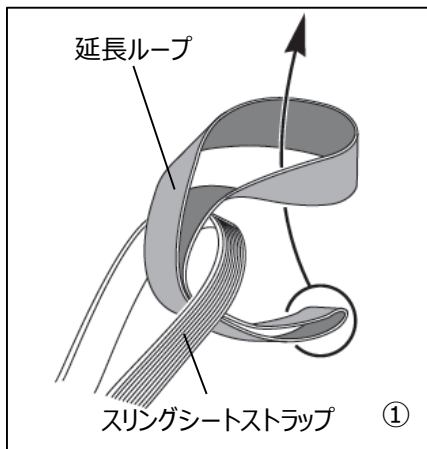


① 延長ループをスリングシートのストラップのループ部分に通し、左図のように延長ループの輪の中を通して結んでください。

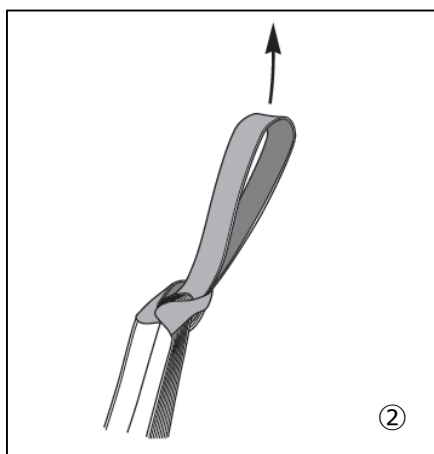

② 延長ループがスリングシートのストラップにしっかりと結びつくように引っ張ってください。
結んだ状態の延長ループの長さ（下図A部分）は、以下になります。

18cmサイズ → 12cm 28cmサイズ → 22cm

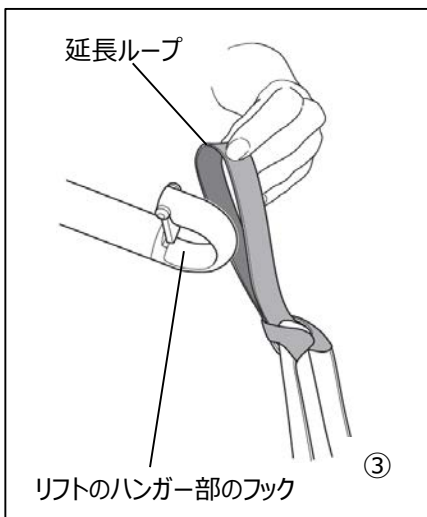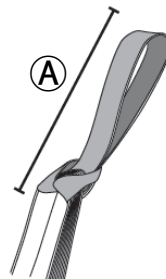

③ 延長ループをリフトのハンガー部のフックに掛けてください。リフトを上昇させ、延長ループがピンと張ったら一度上昇をやめ、ねじれが無いことを確認し（ねじれがある場合は直してから）、再びリフトを上昇させてください。

【お手入れ】



液温85℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯ができます。
60～85℃が推奨温度です。

60-85℃



漂白剤は使用できません。



乾燥機を使用する場合は、低い温度設定（60℃）で乾燥してください。



ドライクリーニングはできません。



アイロンがけはできません。



洗淨後は、縫い目や素材に傷がないか、布地が擦切れていないかを確認してください。

【仕様】

品名	延長ループ	
品番	KZ-A79010	KZ-A79011
サイズ (各サイズ2本入り)		
耐荷重 (kg)	300	
材質	ポリエステル	

商品に関するお問い合わせ

<パラマウントベッド株式会社>

パラマウントベッド株式会社

本社	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(大代)
東京支店	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)
札幌支店	〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)
仙台支店	〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)
さいたま支店	〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(048)878-0100(代)
横浜支店	〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)
名古屋支店	〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
大阪支店	〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
広島支店	〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
福岡支店	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)