


まえがき

このたびは、イージースライドをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、イージースライドを安全にお使いいただくための注意事項などを記載しています。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、イージースライドを正しく効果的にお使いください。

【用途・特長】

イージースライドは、内側には超低摩擦素材を、外側にはクッション性のある素材を使用し、ベッド⇄ポータブルトイレ、ベッド⇄台車付担架／入浴用台車の移乗の際に使用できます。また、身体の下に敷き込むことにより、ベッド上での移動も容易に行えます。

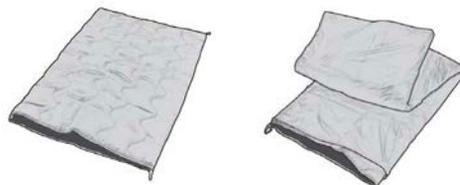

【安全に使用するための注意事項】

■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。



けい 告
こく 告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ベッド⇄車いす、ベッド台車付担架／入浴用台車の間の移乗時は、ベッド、車いす、台車付担架／入浴用台車のキャスターやブレーキがロックされていることを確認してください

●ロックされていないと、移乗中に転落・転倒してけがをするおそれがあります。



■左図のように、移乗元と移乗先の距離を5cm以内にして、イージースライドを使用してください

●5cm以内の距離を確保できないと、移乗中に転落してけがをするおそれがあります。

■移乗する際は、介助者が利用者を支えながら、移乗先（車いす、ポータブルトイレ、台車付担架／入浴用台車）に利用者の体重が移動したことを確認してから、イージースライドを抜き取ってください

●利用者の体重が移乗先に移動する前に介助者の手が離れたり、イージースライドを引き抜いたりすると、転落してけがをするおそれがあります。

■イージースライドに破損が見つかった場合は、使用を中止してください

●破損したまま使用すると、転落してけがをするおそれがあります。

【使用方法】

■ご使用にあたり、理学療法士・作業療法士などの専門家もしくはお買い上げの販売店にご相談いただき、イージースライドを正しく使用してください。



＜使用前の点検＞

●手のひらでイージースライドを左図のように前後に動かし、滑らかに回転することを確認してください。




<移乗元と移乗先の距離>

- 左図のように、移乗元と移乗先の距離を5cm以内にして、イージースライドを使用してください。
※左図は、ベッド端部と台車付担架／入浴用台車端部で説明しています。

【使用方法の例】

利用場面（ベッド⇔台車付担架／入浴用台車）

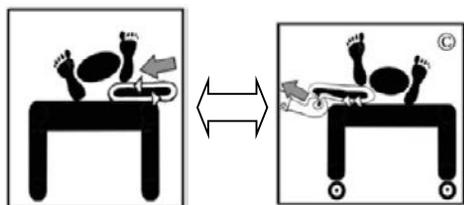

- ①利用者を片側へ傾けてください。シーツなどで引きあげると容易にできます。
- ②利用者の下にイージースライドを敷いてください。
- ③介助者が利用者を支えながら、移乗してください。
- ④移乗先（台車付担架／入浴用台車）に利用者の体重が移動したことを確認してください。
- ⑤移乗後、利用者を片側へ傾け、イージースライドを抜き取ってください。



けい
警告

- 移乗後に、イージースライドを利用者の下に敷いたままにしないでください。利用者が滑ったり転落したりして、けがをすることがあります。
- 利用者の体重が移乗先に移動する前に介助者の手が離れたり、イージースライドを引き抜いたりしないでください。転落してけがをすることがあります。



【お手入れ】



70℃以下のお湯、または水で洗浄してください。



ドライクリーニングはできません。



漂白剤は使用できません。



アイロンがけはできません。



乾燥機を使用する場合は、低い温度設定（60℃）で乾燥してください。

【仕様】

品名	イージーグスライド S	イージーグスライド M	イージーグスライド L
品番	KZ-A52042	KZ-A52043	KZ-A52049
寸法 (cm)	50 × 60	100 × 70	190 × 60
製品質量 (kg)	0.37	0.75	1.45
耐荷重 (kg)	300		
材質	ポリエステル・マイクロファイバー・ポリアミド		

商品に関するお問い合わせ ＜パラマウントベッド株式会社＞

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(大代) 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
 東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代) 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
 札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代) 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
 仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代) 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
 さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1 ☎(048)878-0100(代) 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)