

レディスライド 取扱説明書




まえがき

このたびは、レディスライドをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、レディスライドを安全にお使いいただくための注意事項などを記載しています。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、レディスライドを正しく効果的にお使いください。

【用途・特長】

レディスライドは、薄く柔軟な低摩擦素材を使用したロール状のスライディングシートです。ベッド⇔トイレ、ベッド⇔ストレッチャー／シャワートロリーの移乗の際に使用できます。また、身体の下に敷き込むことにより、ベッド上での移動も容易に行えます。

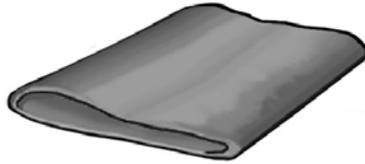

【安全に使用するための注意事項】

■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。


※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
---	---

■ベッド、車いす、ストレッチャー、シャワートロリー間の移乗時は、ブレーキやキャスターがロックされていることを確認してください

●ロックされていないと、移乗中に転落・転倒してけがをするおそれがあります。

■下図のように、移乗元と移乗先の間をできる限り狭く（5cm以内を目安）して、レディスライドを使用してください

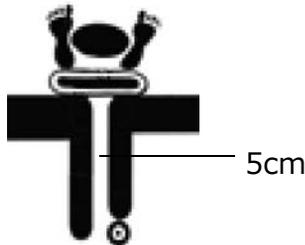

●移乗元と移乗先の間が広いと移乗中に転落して、けがをするおそれがあります。

■移乗する際は介助者が利用者を支えながら、移乗先（ベッド、車いす、ストレッチャー、シャワートロリー）に利用者の体重が移動したことを確認してから、レディスライドを抜き取ってください

●利用者の体重が移乗先に移動する前に介助者の手が離れたり、レディスライドを引き抜いたりすると、転落してけがをするおそれがあります。

■レディスライドは下記の点検項目表を参照して定期的に点検してください。また、表の項目が見つかった場合はすぐに使用を中止してください

点検項目表
生地がすり減っていないか
糸がほつれていないか
破損している箇所がないか


●破損などしたまま使用すると、転落・転倒してけがをするおそれがあります。

【使用方法】

- ご使用にあたり、理学療法士・作業療法士などの専門家もしくはお買い上げの販売店にご相談いただき、レディスライドを正しく使用してください。

<使用前の点検>

- 手のひらでレディスライドを下図のように前後に動かし、滑らかに回転することを確認してください。

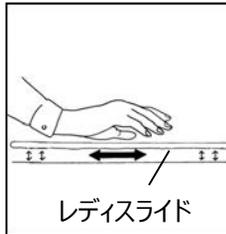

<移乗元と移乗先の間>

- 下図のように、移乗元と移乗先の間をできる限り狭く（5cm以内を目安）して、レディスライドを使用してください。

※下図は、ベッド端部とストレッチャー／シャワートロリーで説明しています。



<敷き込み／取外し>

- (1) 利用者を反対方向へ傾けて、レディスライドをできるだけ利用者の下に敷き込みます。
- (2) レディスライドの下端を引いて取外します。



【使用方法の例】


<p>けい 告 こく</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 移乗後に、レディスライドを利用者の下に敷いたままにしないでください。利用者が滑ったり転落したりして、けがをするおそれがあります。 ● 利用者の体重が移乗先に移動する前に介助者が手を離したり、レディスライドを引き抜いたりしないでください。転落してけがをするおそれがあります。 	
--------------------	---	--

利用場面（体位変換）




- ① 利用者を片側へ傾けてください。
- ② レディスライドを敷き込んでください。
- ③ 介助者が利用者を支えながら、体位変換させてください。
- ④ 体位変換後、利用者を片側へ傾け、レディスライドを抜き取ってください。

利用場面（ベッドからストレッチャー／シャワートロリーへの移乗）

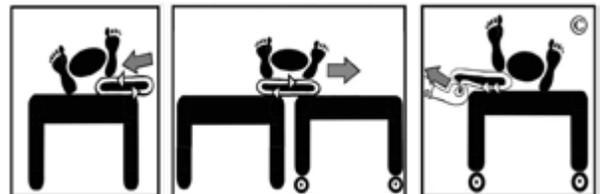

- ① 利用者の下にレディスライドを敷き込んでください。
- ② ストレッチャー／シャワートロリーをベッドの横に移動し、キャスターをロックしてください。
- ③ 介助者が利用者を支えながら押すか引き寄せ、移乗してください。
- ④ レディスライドを抜き取ってください。

利用場面（ベッド上での移動）

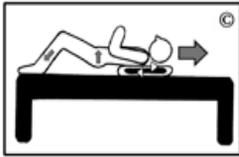


- ①レディスライドを利用者の肩の下に敷き込んでください。
- ②利用者に、膝を曲げて腰を浮かせ、足で上体を押しあげるよう伝えてください。
- ③移動後、レディスライドを抜き取ってください。

利用場面（トイレ⇄車いす）



- ①レディスライドをトイレと車いすの両方に架かるようにして、利用者のでん部に敷き込んでください。
- ②自身の体重を移乗先へ移動するように伝えてください。
※足が十分に接地しない場合は、踏台などを併用すると移乗しやすくなります。
※介助が必要な場合、介助者が介護ベルトなどを併用することでより安全に移乗することができます。
- ③移乗後、レディスライドを抜き取ってください。

利用場面（ベッド⇄車いす）

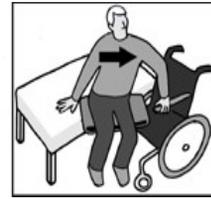

- ①車いすの車輪を固定し、レディスライドをベッドと車いすの両方に架かるようにして、利用者のでん部に敷き込んでください。
- ②車いすのひじ掛けをつかんでもらい（移乗先がベッドの場合はベッドに手を置いてもらい）、自身の体重を移乗先へ移動するように伝えてください。
※足が十分に接地しない場合は、踏み台などを併用すると移乗しやすくなります。
※介助が必要な場合、介助者が介護ベルトなどを併用することでより安全に移乗することができます。
- ③移乗後、レディスライドを抜き取ってください。

【お手入れ】

 けい 告	こく 告	洗濯後は、レディスライドに破損やほつれなどがいないか点検してください。移乗中に転落・転倒してけがをするおそれがあります。
--	-----------------	--

※リンス剤や柔軟剤は使用しないでください。


60-85°C 液温は85°Cを限度とし、洗濯機で通常の洗濯ができます。
※60～85°Cが推奨温度です。


漂白剤は使用できません。


乾燥機を使用する場合は、低い温度設定（60°C）で乾燥してください。
※乾燥機を使用することによって、製品の寿命が短くなる場合があります。


ドライクリーニングはできません。


アイロンがけはできません。

【仕様】

品名	レディスライド7070	レディスライド11090
品番	KZ-A52090	KZ-A52091
寸法 (cm)	70 × 70	110 × 90
製品質量 (g)	80	160
耐荷重 (kg)	150	
材質	ポリアミド	

商品に関するお問い合わせ

<パラマウントベッド株式会社>

パラマウントベッド株式会社

本社	〒136-8670 東京都江東区東砂 2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(大代)
東京支店	〒136-8670 東京都江東区東砂 2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)
札幌支店	〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)
仙台支店	〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)
さいたま支店	〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(048)878-0100(代)
横浜支店	〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)
名古屋支店	〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
大阪支店	〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
広島支店	〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
福岡支店	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)