

まえがき

このたびは、**ターンテーブル ソフト**をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、**ターンテーブル ソフト**を安全にお使いいただくための注意事項などを記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、**ターンテーブル ソフト**を正しく効果的にお使いください。


【用途・特長】

ターンテーブル ソフトは、座位姿勢で身体の方角転換が難しい方がお尻の下などに敷いて使用します。
柔らかい素材で、いすやベッド上で使用します。



【安全に使用するための注意事項】

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
- ※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

	<p>けい 告 こく</p>	<p>この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・^{まひ}麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>
---	----------------------------------	---

- **利用者が立った状態で使用しないでください**
 - 転倒してけがをするおそれがあります。
- **移乗時は、ベッド・車いすのキャスターやブレーキがロックされていることを確認してください**
 - ロックされていないと、移乗中に転落・転倒してけがをするおそれがあります。
- **ターンテーブル ソフトに破損やほつれなどが見つかった場合は、使用を中止してください**
 - 破損したまま使用すると、転落・転倒してけがをするおそれがあります。

【使用方法】

- ご使用にあたり、理学療法士・作業療法士などの専門家もしくはお買い上げの販売店にご相談いただき、ターンテーブル ソフトを正しく使用してください。

<使用前の点検>


- 使用する前に、ターンテーブル ソフトに破損がないことを確認してください。



より安全に使用するために、フレキシベルト（別売）との併用をおすすめします。


【使用方法の例】

車いす⇔ベッドの移乗

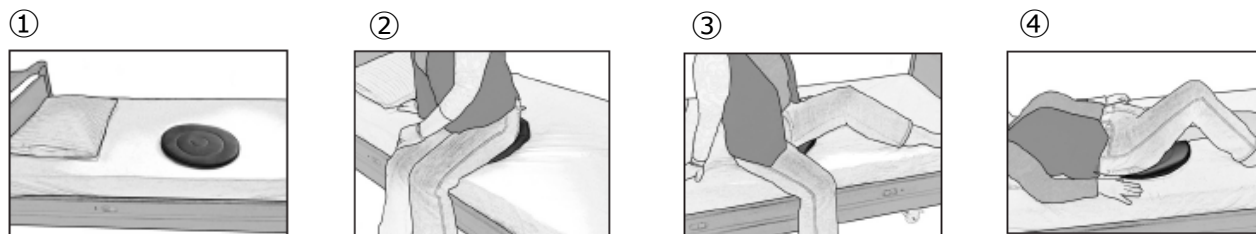



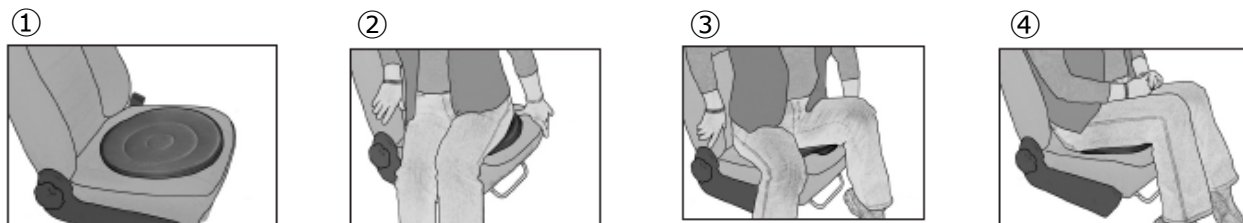


- ①利用者がベッドに寝た状態で適切な位置（利用者のお尻の位置）になるようにターンテーブル ソフトを置いてください。
- ②利用者をターンテーブル ソフトの上に座らせてください。
- ③利用者にベッドに手をついてもらうなどして、上半身を保持させてから足を引きあげ、回転させてください。
- ④利用者のお尻を持ちあげ、ターンテーブル ソフトを外してください。
※ベッドから車いすへ移乗する際は、逆の手順で行ってください。

車いす⇔自動車のシートの移乗



- ①自動車のシートの中央にターンテーブル ソフトを置いてください。
- ②利用者の足が車外にある状態で座らせてください。
- ③足を持ちあげ、車内側に回転させてください。
- ④ターンテーブル ソフトをお尻に敷いたまま、車を走行できます。
※自動車のシートから車いすへ移乗する際は、逆の手順で行ってください。

【お手入れ】

-  70℃以下のお湯、または水で洗浄してください。
-  ドライクリーニングはできません。
-  漂白剤は使用できません。
-  アイロンがけはできません。
-  乾燥機を使用する場合は、低い温度設定（60℃）で乾燥してください。

【仕様】

品名	ターンテーブル ソフト
品番	KZ-A52046
寸法 (cm)	40 (直径)
製品質量 (kg)	0.35
耐荷重 (kg)	150
材質	ポリエステル

商品に関するお問い合わせ ＜パラマウントベッド株式会社＞

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(大代) 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
 東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代) 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
 札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代) 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
 仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代) 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
 さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1 ☎(048)878-0100(代) 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)