

# フレキシベルト フレキシベルト ハグ 取扱説明書

CE  
**FlexiBelt™**  
SystemRoMedic

## まえがき

このたびは、**フレキシベルト**をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この「取扱説明書」には、**フレキシベルト**を安全にお使いいただくための注意事項などを記載しています。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、**フレキシベルト**を正しく効果的にお使いください。

## 【用途・特長】

フレキシベルトは、ベッド・車いすなどの移乗時のサポート、立ちあがりや座らせる際の介助および歩行時のサポートなどを目的に作られています。  
フレキシベルトはバックル式構造なので、着脱や取付けが簡単です。また、グリップが付いており、介助者が自身に装着することで、利用者につかまる場所を提供することもできます。

## 【安全に使用するための注意事項】

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
- ※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。



けい  
**警**  
こく  
**告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

### ■使用前に、バックルが確実に固定されていることを確認してください

- バックルが半掛かりの状態ですと、バックルが不意に外れ、転倒してけがをするおそれがあります。バックルは「パチン」と音がするまでしっかりと固定してください。

### ■ベッド⇔車いすの移乗時は、ベッド・車いすのキャスターやブレーキがロックされていることを確認してください

- ロックされていないと、移乗中に転倒してけがをするおそれがあります。


### ■フレキシベルトに破損やほつれなどが見つかった場合は、使用を中止してください

- 破損したまま使用すると、転倒してけがをするおそれがあります。

## 【使用方法】


- ご使用にあたり、理学療法士・作業療法士などの専門家もしくはお買い上げの販売店にご相談いただき、フレキシベルトを正しく使用してください。

### <装着方法>

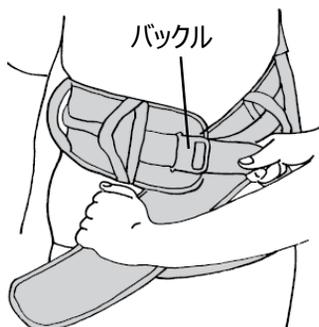

- ①フレキシベルトは腰部に斜めに巻いてください。
  - ②バックルを「パチン」と音がするまでしっかりと固定してください。
  - ③バックルが付いている方ともう一方のベルトの端を引っ張り、締め具合を調節してください。
- ※胸回りは座った状態では大きくなっているため、立位時にもう一度締め直すとしっかり装着できます。

### <取外し方法>

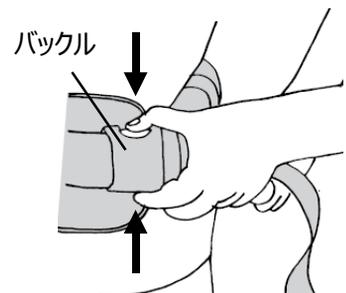

- バックルの上図矢印部分をしっかりと押してください。



Direct Healthcare  
製造元 : **Group**

Advancing Movement & Health®

輸入・販売元 : パラマウントベッド株式会社

両面あり (1/2)

## 【使用方法の例】

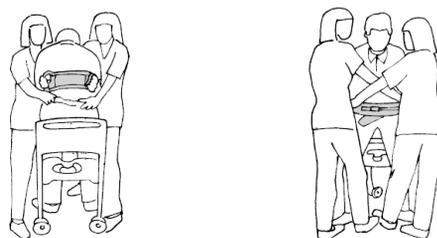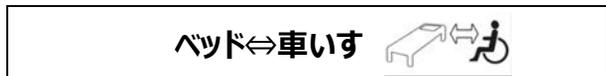

## 【お手入れ】



70℃以下のお湯、または水で洗浄してください。



ドライクリーニングはできません。



漂白剤は使用できません。



アイロンがけはできません。



乾燥機を使用する場合は、低い温度設定（60℃）で乾燥してください。

## 【仕様】

フレキシベルト／品番		KZ-A52040	KZ-A52039	KZ-A52038
フレキシベルト ハグ／品番		KZ-A52073	KZ-A52072	KZ-A52071
サイズ *1) (cm)		L	M	S
		100～160	70～120	60～100
*1) サイズはウエストが目安です。				
材質	素材	ナイロン 100%		
	中材	ポリエステル 100%		
	裏材	ポリエステル 90% ・ ポリエチレン 10%		
最大使用者体重 *2)		150 kg		

\*2) グリップ 1 つあたりの耐荷重は35kgです。

※立ちあがりの補助をするときは、必ず 2ヶ所以上のグリップを持って行ってください。

## 商品に関するお問い合わせ

<パラマウントベッド株式会社>

本 社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(大代) 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)  
 東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代) 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)  
 札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代) 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)  
 仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代) 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)  
 さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目2番1 ☎(048)878-0100(代) 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)