

まえがき

このたびは、イージーグライドをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、イージーグライドを安全にお使いいただくための注意事項などを記載しています。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、イージーグライドを正しく効果的にお使いください。

【用途・特長】


イージーグライドは、移乗時に使用する移乗ボードです。
ベッド⇔車いす・車いす⇔ポータブルトイレ・乗用車⇔車いす間などを橋渡しすることで、座ったままの姿勢で移乗することができます。サイズは（SS・S・M・L）の4種類あり、MおよびLサイズは両側を折り曲げることができるので、車いすの後輪タイヤ、その他の突起物がある場合は身体の保護に有効です。

【安全に使用するための注意事項】

■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。


※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

| | |
|---|--|
|  警告 | この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・ ^{まひ} 麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|---|--|

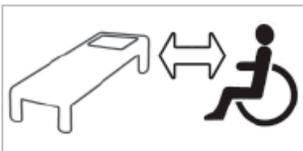


■ベッド⇔車いす間の移乗時は、ベッド・車いすのキャスターやブレーキがロックされていることを確認してください

●ロックされていないと、移乗中に転落してけがをするおそれがあります。

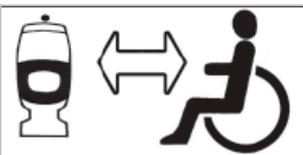

■移乗する際は、介助者が利用者を支えながら、移乗先（車いす・ポータブルトイレなど）に利用者の体重が移動したことを確認してから、イージーグライドをゆっくりと座面下部から抜き取ってください

●利用者の体重が移乗先に移動する前に介助者の手が離れたり、イージーグライドを引き抜くと、転落してけがをするおそれがあります。

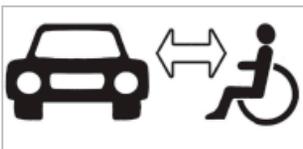

■車いす⇔乗用車間の移乗時は、周囲の安全（道路状況など）を確認してください


●交通量が多い場所では、人や車などにぶつかり、けがをするおそれがあります。
●傾斜・段差などがある場所では、転落してけがをするおそれがあります。

■イージーグライドに破損が見つかった場合は、使用を中止してください

●破損したまま使用すると、転落してけがをするおそれがあります。

【使用方法】


■ご使用にあたり、理学療法士・作業療法士などの専門家もしくはお買い上げの販売店にご相談いただき、イージーグライドを正しく使用してください。

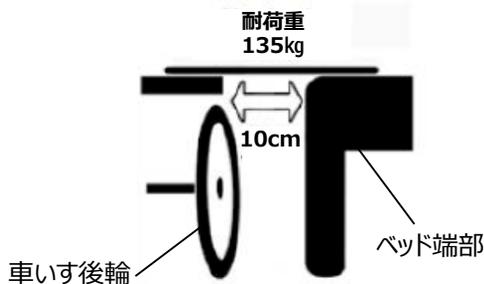

<移乗元と移乗先の距離>

●左図のように、移乗元と移乗先の距離を10cm以内にして、イージーグライドを使用してください。

※左図は、車いす後輪とベッド端部で説明しています。

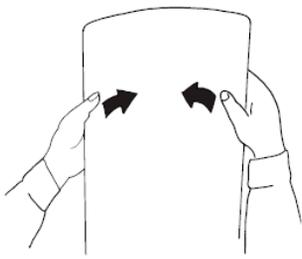

<使用前の点検>


- 使用する前に、左図を参照してイージーグライドを左右に広げ、破損がないことを確認してください。



- 使用する際は、イージーグライドの滑り止め帯が下側になるようにしてください。
- フレキシベルト（別売）をあわせてご使用になると、より安定した移乗を行うことができます。

【使用方法の例】

介護ベッド ⇔ 車いす

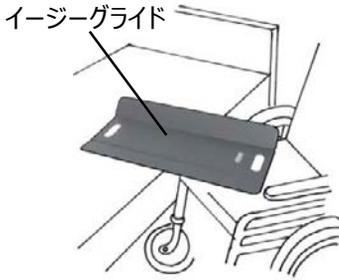

車いす ⇔ ポータブルトイレ



乗用車 ⇔ 車いす



【お手入れ】

- お手入れする場合は、中性洗剤を用いて柔らかな素材で拭き取ってください。



研磨剤を含んだクレンザーなどは使用しないでください。表面に傷がつくおそれがあります。

【仕様】

| 品名 | イージーグライド | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 品番 | KZ-A29034 | KZ-A29035 | KZ-A29036 | KZ-A29037 |
| サイズ | SS | S | M | L |
| 寸法 (cm) | 20 × 45 | 25 × 60 | 33 × 60 | 33 × 75 |
| 製品質量 (kg) | 0.43 | 0.72 | 0.89 | 1.3 |
| 耐荷重 (kg) | 135 | | | |
| 材質 | ポリエチレン | | | |

商品に関するお問い合わせ <パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(大代) 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
 東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代) 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
 札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代) 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
 仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代) 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
 さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1 ☎(048)878-0100(代) 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)