

イージーグライドオーバル 取扱説明書

CE
EasyGlideTM
SystemRoMedic

まえがき

このたびは、イージーグライドオーバルをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、イージーグライドオーバルを安全にお使いいただくための注意事項などを記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、イージーグライドオーバルを正しく効果的にお使いください。

【用途・特長】

イージーグライドオーバルは、移乗時に使用する移乗ボードです。
ベッド⇄ベッド・エクス線撮影台・手術台・ストレッチャー・シャワートロリー間などの移乗や水平移動の際に使用できます。



【安全に使用するための注意事項】

■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ベッド⇄ベッド・エクス線撮影台・手術台・ストレッチャー・シャワートロリー間などの移乗時は、移乗元・移乗先の台のキャスターやブレーキがロックされていることを確認してください

●ロックされていないと、移乗中に転落してけがをするおそれがあります。



■左図のように、移乗元と移乗先の距離を5cm以内にして、イージーグライドオーバルを使用してください

●5cm以内の距離を確保できないと、移乗中に転落してけがをするおそれがあります。

■移乗する際は、介助者が利用者を支えながら、移乗先（ベッド・エクス線撮影台・手術台・ストレッチャー・シャワートロリーなど）に利用者の体重が移動したことを確認してから、イージーグライドオーバルをゆっくりと抜き取ってください

●利用者の体重が移乗先に移動する前に介助者の手が離れたり、イージーグライドオーバルを引き抜いたりすると、転落してけがをするおそれがあります。

■イージーグライドオーバルに破損が見つかった場合は、使用を中止してください

●破損したまま使用すると、転落してけがをするおそれがあります。

【使用方法】

■ご使用にあたり、理学療法士・作業療法士などの専門家もしくはお買い上げの販売店にご相談いただき、イージーグライドオーバルを正しく使用してください。

ベッド（マット）端部 ストレッチャー・シャワートロリー端部



<移乗元と移乗先の距離>

●左図のように、移乗元と移乗先の距離を5cm以内にして、イージーグライドオーバルを使用してください。

※左図は、ベッド（マット）端部とストレッチャー・シャワートロリー端部で説明しています。

Direct Healthcare
製造元 : Group

Advancing Movement & Health®

輸入・販売元 : パラマウントベッド株式会社

<使用前の点検>

- 使用する前に、イージーグライドオーバルに傷や破損がないことを確認してください。



イラスト・説明は、イージーグライドオーバルを2枚使用した場合です。使用場面によっては、1枚でも使用できます。

■イージーグライドオーバルの設置方法

イージーグライドオーバル



イージーグライドオーバルは利用者の肩とお尻の下に敷いて使用してください。

※ウェンディレット2WAY・ウェンディレット4WAY（別売）を使うと、より移乗がしやすくなります。

1. 利用者を片側に傾けてください。
2. イージーグライドオーバルを、マットレスを押しさげながら利用者とベッドシーツの間に差込んでください。
3. 利用者のお尻と肩の重心がイージーグライドオーバルの中心にあることを確認してください。

【使用方法の例】

移乗（ベッド ⇄ ベッド・エックス線撮影台・手術台・ストレッチャー・シャワートロリーなど）



■ウェンディレット2WAY・ウェンディレット4WAYを引いて移乗する場合

※イージーグライドオーバル1枚でも行えます

1. 設置方法を参照して、イージーグライドオーバルをベッドシーツとウェンディレット2WAY・ウェンディレット4WAYの間に入れてください。
2. 移乗先の台をベッドの横に寄せてください。
3. ベッドと移乗先の台とのすき間が5 cm以内であることを確認してから、ウェンディレット2WAY・ウェンディレット4WAYを引いて移乗させてください。



■イージーグライドオーバルを引いて移乗する場合

※イージーグライドオーバル1枚でも行えます

1. イージーグライドオーバルを利用者の中心にくるように敷きます。
2. 介助者の1人がイージーグライドオーバルを引き、もう1人がイージーグライドオーバルを押して利用者を移乗させてください。

移乗



■上下方向への移動

※イージーグライドオーバル2枚で行ってください

1. 設置方法を参照して、イージーグライドオーバルを利用者のお尻と肩の下に敷きます。
2. 左図のようにベッド両側に1人ずつで立ち、イージーグライドオーバルのハンドルを握りながら移動方向へ踏み出し利用者を移動します。

■イージーグライドオーバルの取出し

利用者が移動しないように利用者の身体を抑えて、イージーグライドオーバルのハンドルを握り外側に引き抜きます。

【仕様】

品名	イージーグライドオーバル	
品番	KZ-A29032 (1枚入)	KZ-A29033 (2枚入)
寸法 (cm)	39 × 85	
製品質量 (kg)	0.9	0.9×2
耐荷重 (kg)	135	
材質	ポリエチレン	

【お手入れ】

お手入れする場合は、中性洗剤を用いて柔らかな素材で拭き取ってください。



研磨剤を含んだクレンザーなどは使用しないでください。表面に傷がつくおそれがあります。

商品に関するお問い合わせ <パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(大代) 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代) 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代) 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代) 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1 ☎(048)878-0100(代) 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)