

ローラスライドライト ローラスライドフレキシ ローラスライド

取扱説明書 RollerSlide

SystemRoMedic



まえがき


このたびは、ローラスライドライト・ローラスライドフレキシ・ローラスライド（以下、ローラスライドシリーズ）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、ローラスライドシリーズを安全にお使いいただくための注意事項などを記載しています。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、ローラスライドシリーズを正しく効果的にお使いください。

【用途・特長】

ローラスライドシリーズは、独自の超低摩擦素材で作られた、カバー付き移乗用ボードです。（Lサイズは折りたたみ式）
カバーは使用中、本体の周りを滑る仕組みになっており、利用者をベッド⇄ストレッチャー、またはストレッチャー⇄X線台／手術台／シャワートロリーなどへ水平に移乗する際に使用することで、移乗に関する介助者の負担を軽減します。

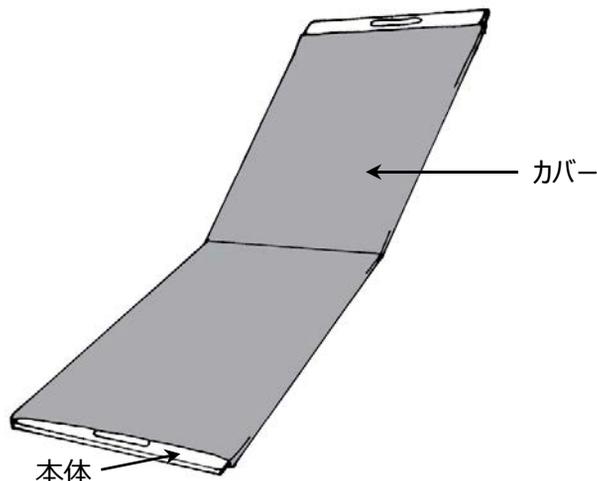

【安全に使用するための注意事項】

■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
--	---

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。


■ベッド⇄ストレッチャー、ストレッチャー⇄X線台／手術台／シャワートロリーなどの間の移乗時は、ベッド、ストレッチャー、シャワートロリーなどのキャスターやブレーキがロックされていることを確認してください

●ロックされていないと、移乗中に転落・転倒してけがをするおそれがあります。


■下図のように、それぞれの移乗元と移乗先の距離に応じた耐荷重の範囲内で使用してください

●移乗元と移乗先の距離により耐荷重が変わります。それぞれの範囲を超えると、移乗中に転落してけがをするおそれがあります。

< 耐荷重 および移乗元と移乗先の距離 >

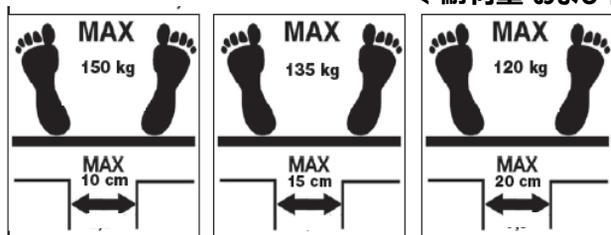

ローラスライドライト

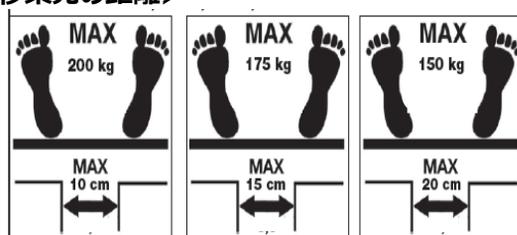

ローラスライドフレキシ・ローラスライド

Direct Healthcare

製造元 : **Group**

Advancing Movement & Health®

輸入・販売元 : パラマウントベッド株式会社



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 移乗する際は、介助者が利用者を支えながら、移乗先に利用者の体重が移動したことを確認してから、ローラーライドシリーズを抜き取ってください

- 利用者の体重が移乗先に移動する前に介助者の手が離れたり、ローラーライドシリーズを引き抜いたりすると、転落してけがをするおそれがあります。

■ ローラーライドシリーズに破損が見つかった場合は、使用を中止してください

- 破損したまま使用すると、転落してけがをするおそれがあります。

【使用方法】

■ ご使用にあたり、理学療法士・作業療法士などの専門家もしくはお買い上げの販売店にご相談いただき、ローラーライドシリーズを正しく使用してください。

<使用前の点検>

- 本品に破れや損傷がないか目視で確認してください。

<移乗元と移乗先の距離および耐荷重>

- 移乗前に移乗元と移乗先のキャスターが確実にロックされていること。また、移乗元と移乗先との距離および耐荷重が仕様表「耐荷重」（裏表紙参照）で示す数値以下であることを確認してください。

<操作方法（例）>

- シーツなどを使用した場合で説明しています。

- ① 利用者を傾け、利用者の身体の1/3が乗るよう、ローラーライドシリーズを敷き込んでください。

※右図のようにシーツなどで利用者の身体を引き上げると容易に行えます。

※手術室や浴室など、汚れが想定される場合には、ディスプレイカバー（別売）を付けてご使用ください。



- ② 介助者は移乗元と移乗先の両側に立ち、利用者の身体を押ししたりシーツなどを引いたりして移乗を行ってください。



- ③ 移乗元と移乗先に少しの段差があってもご使用いただけます。

※低い位置から高い位置へ移乗させる場合は1人がシーツなどを引き、もう1人が利用者を押ししてください。利用者を高い位置から低い位置へ移乗させる場合も同様に行い、移乗先の介助者が利用者を受け止めるようにしてください。



- ④ 移乗元と移乗先との間にすき間がある場合は、前述の移乗元と移乗先の距離に応じた耐荷重の範囲内で使用してください。



↓ 次ページに続く

⑤ご使用後は利用者の体を傾け、ローラースライドシリーズを抜き取ってください。

 <p>けい こく 警告</p>	<ul style="list-style-type: none">● 移乗後に、ローラースライドシリーズを利用者の下に敷いたままにしないでください。利用者が滑ったり転落したりして、けがをすることがあります。● 利用者の体重が移乗先に移動する前に介助者の手が離れたり、ローラースライドシリーズを引き抜いたりしないでください。転落してけがをすることがあります。	
---	--	---

【お手入れ】

カバーは以下の条件で洗浄ができます。



液温は70℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができます。
※柔軟剤は使用しないでください。



ドライクリーニングはできません。



漂白剤は使用できません。



乾燥機を使用する場合は、低い温度設定（60℃）で乾燥してください。



アイロンがけはできません。

【乾燥方法（推奨）】

ローラースライドシリーズ本体を自然乾燥する場合は、以下のように行ってください。

- 1：壁などに立てかけて乾燥させる
- 2：屏風を立てる要領で開いて乾燥させる（Lサイズのみ）
- 3：物干し竿などに引っ掛けて乾燥させる（ローラースライドライト（Lサイズ）・ローラースライドのみ）



1：壁などに立てかける



2：屏風を立てる要領で開く



3：物干し竿などに引っ掛ける

 <p>ちゅう い 注意</p>	<p>ローラースライドフレキシは右図のように、物干し竿などに引っ掛けて自然乾燥させないでください。ローラースライドフレキシが破損・変形するおそれがあります。</p>	
---	--	---

【仕様】

品名	ローラーライドライト		ローラーライドフレキシ		ローラーライド
	(L)	(S)	(L)	(S)	(L)
品番	KZ-A52063	KZ-A52064	KZ-A52065	KZ-A52066	KZ-A52069
寸法 (cm)	175×50	85×50	175×50	85×50	175×50
製品質量(kg)	2	1.1	3.9	2	4.1
耐荷重 (kg)	120~150			150~200	
材質	本体	ポリアミド 発泡ポリエチレン		ポリアミド 発泡ポリエチレン ポリ塩化ビニル樹脂	ポリアミド 発泡ポリエチレン 合板
	カバー	ポリアミド系超低摩擦素材			

商品に関するお問い合わせ

<パラマウントベッド株式会社>

パラマウントベッド株式会社

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂 2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂 2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)
さいたま支店	〒336-0967	さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(048)878-0100(代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)