

スリングバースプレッダーM 取扱説明書

SlingBarSpreader M
SystemRoMedic™


まえがき

このたびは、スリングバースプレッダーMをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、スリングバースプレッダーMを安全にお使いいただくための注意事項などを記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、スリングバースプレッダーMを正しく効果的にお使いください。

【用途・特長】

- スリングバースプレッダーMは、適合する床走行式電動介護リフト（以下、リフト）のハンガーに取付けて使用します。体重の重い方や痛みに敏感な方をつりあげるのに適しています。

※イラストはリフトのハンガーに取付けた状態です。

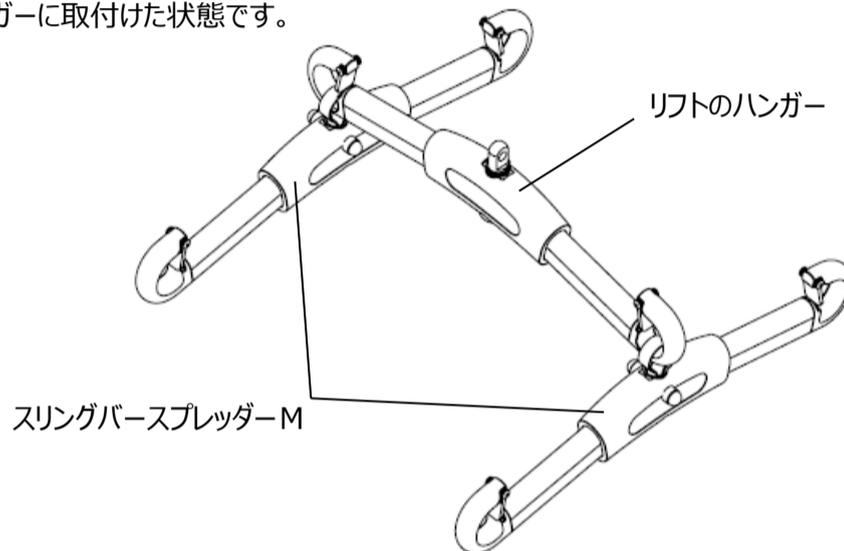

【安全に使用するための注意事項】

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。



スリングバースプレッダーMを取付けて使用するリフトおよびスリングバースプレッダーMに取付けるスリングシートの「取扱説明書」に記載されている注意事項を参照し、正しく安全に使用してください。



けい
警 告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。


- **スリングバースプレッダーMを直接取付けて使用するリフトは、弊社が指定する適合品をお使いください**
 - 指定以外の製品や他社製品と組合せると、介護を受ける方が不意に落下してけがをしたり、スリングバースプレッダーMが破損したりするおそれがあります。適合品につきましては、仕様（次ページ参照）をご確認ください。
- **スリングバースプレッダーMを取付けて使用するリフトの最大利用者体重を超える荷重を加えないでください**
 - 介護を受ける方が落下してけがをしたり、スリングバースプレッダーMやリフトが破損・変形したりする原因となります。
- **スリングバースプレッダーMに破損が見つかった場合は、使用を中止してください**
 - 破損したまま使用すると、転落してけがをするおそれがあります。

【仕様】

品名	スリングバースプレッダーM
品番	KZ-A79002
寸法 (cm)	長さ : 53.5 高さ : 9 (ループ部除く) 幅 : 7.2
製品質量(kg)	1.4 (1本)
最大利用者体重 (kg)	※スリングバースプレッダーMを取付けて使用するリフトの最大利用者体重に従って使用してください
耐荷重(kg)	300
材質	アルミニウム・スチール
適合品	KQ-781, KQ-787, KZ-A78700, KZ-A77100

【取付方法】

※イラストはリフト本体を省略した状態で説明しています。

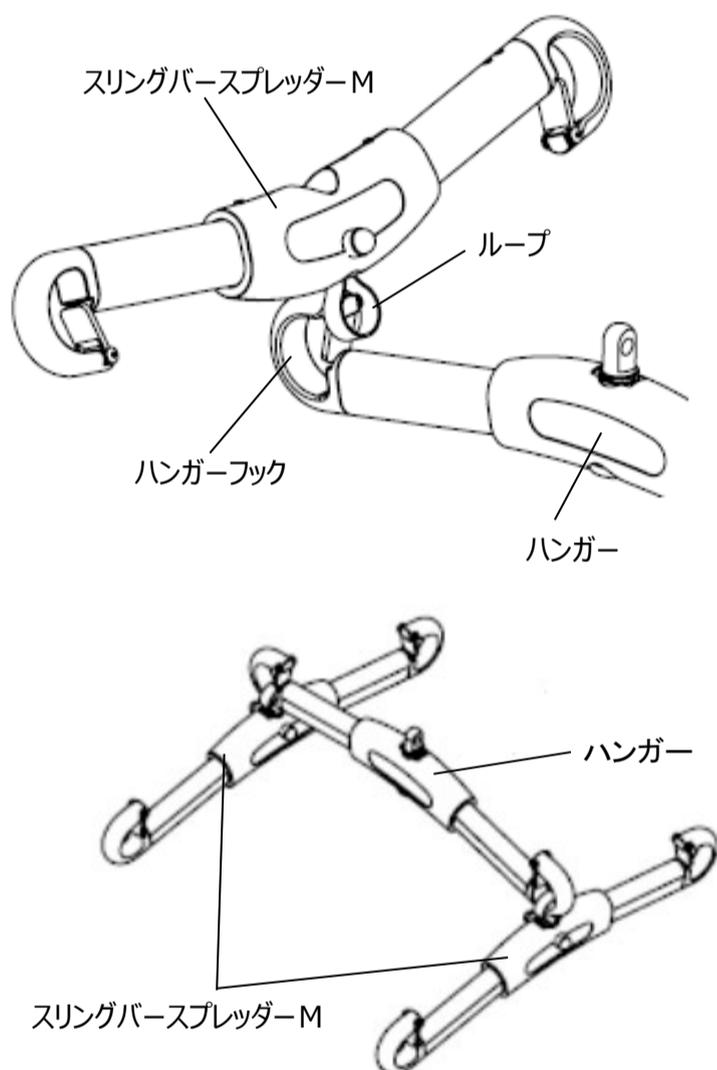


- 左図を参照して、リフトのハンガーのハンガーフックに、スリングバースプレッダーMのループを引っ掛けてください。(左右各1ヶ所)

【使用方法】

- スリングバースプレッダーMを取付けて使用するリフトおよびスリングバースプレッダーMに取付けるスリングシートの「取扱説明書」に記載されている使用方法を参照して、正しく安全に使用してください。

 けい こく 警 告	<p>下記の項目に注意してスリングシートを取付けてください。スリングバースプレッダーMが外れたり、スリングシートが外れたりして、落下してけがをするおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">・スリングバースプレッダーMはペア（2本）で使用してください。単体（1本）では使用しないでください。・スリングバースプレッダーMのループがねじれた状態で使用しないでください。
--	---

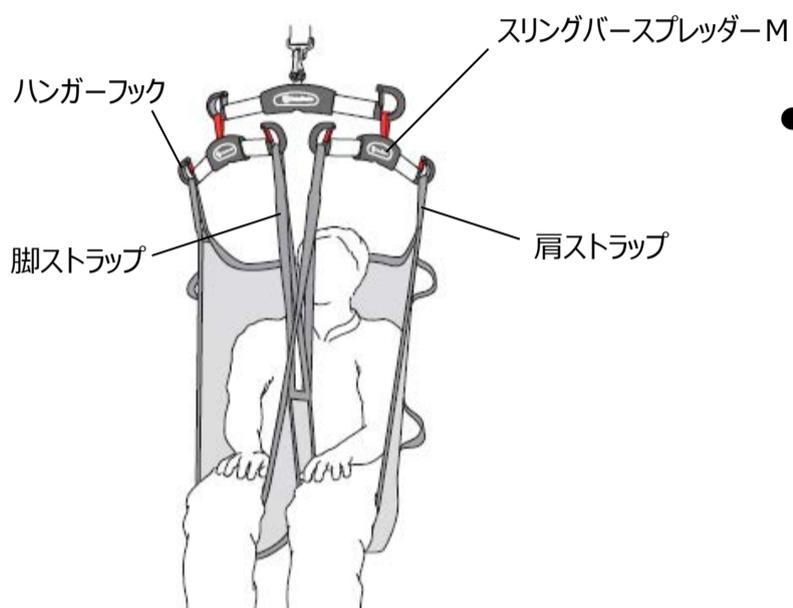

- 左図を参照して、スリングシートの肩ストラップと脚ストラップを、スリングバースプレッダーMのハンガーフックに引っ掛けてください。

【お手入れ】

- お手入れする場合は、ぬるま湯を用いて柔らかな素材で拭き取ってください。
- 消毒する場合は、消毒用アルコールを使用してください。

 ちゅう い 注 意	<p>フェノール・塩素系の洗剤、揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）は使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。</p>
--	--



オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は裏表紙にございますので、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上の領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2. 修理を依頼される時

お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■ご連絡していただきたい内容

- 品名、品番
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- 施設名、お名前、ご住所および電話番号

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間：平日 8:00～18:00 / 土・日・祝日 9:00～17:00（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

保 証 書			
品名/品番 スリングバースプレッダーM / KZ-A79002	保証期間	★お買い上げ日 年 月 日より1年間	
お客様 お名前 〒 () ご住所	★販売店 ☎ ()		

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、ラベル類などの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証規定】

1. 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。	(5) 保証書のご提示がない場合
2. 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。	(6) 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
(1) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷	(7) 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
(2) 弊社が指定する適用品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷	3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(3) お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷	● This warranty is valid only in Japan.
(4) 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷	

パラマウントベッド株式会社

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)
さいたま支店	〒336-0967	さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(048)878-0100(代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)