


ソフトガードサイドレール

まえがき

このたびは、ソフトガードサイドレール(以下、サイドレール)をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、サイドレールを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- サイドレールをご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- サイドレールと組合せたベッドで療養する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

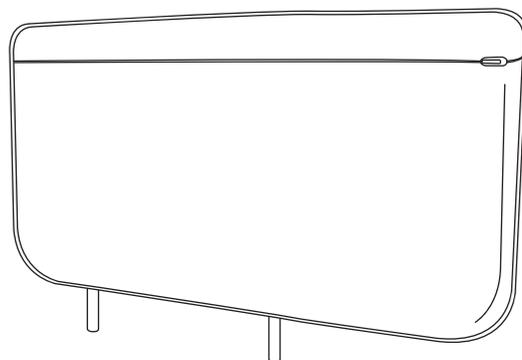



使用目的・特長

■このサイドレールは、ベッドサイドに取付けて使用し、寝ている方のベッドからの転落および寝具の落下を予防することを目的に作られています。

ご使用上、次のような特長があります。

- 1.サイドレールがベッドから簡単に抜けるのを予防するため、抜け止め機能が付いています。
- 2.カバーにより、身体をぶつけた場合の衝撃を緩和するとともに、手や足などがサイドレールのすき間からベッドの外に出ることを予防します。ベッドを使用される方の心身の状態に応じてご使用ください。

各部の名称と部品の確認

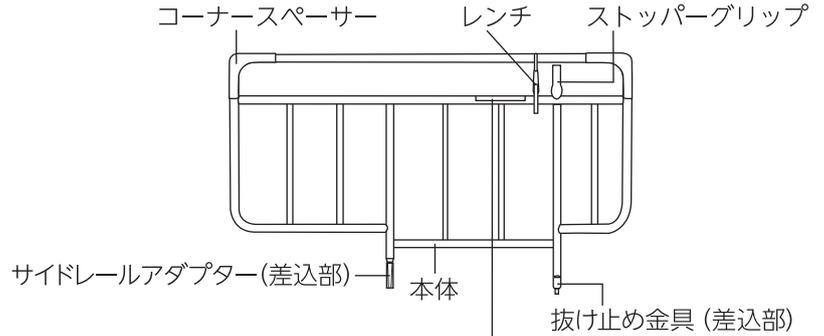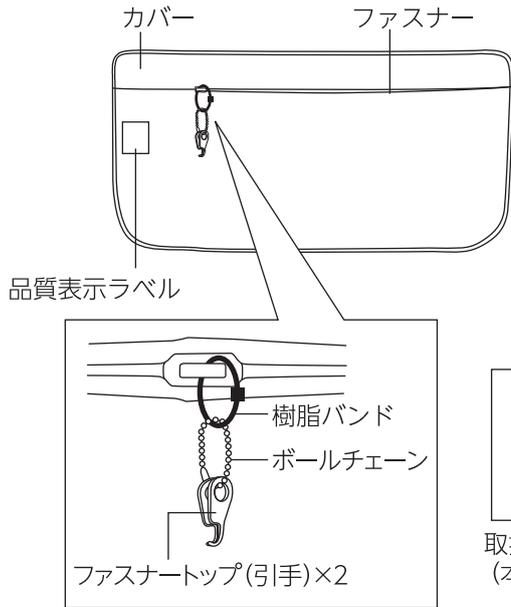

製品識別表示/安全ラベル



※納入時はカバーとファスナートップ(引手)は樹脂バンドで留められています。樹脂バンドを切り、カバーから取外してご使用ください。開閉時以外は大切に保管してください。
(ファスナートップ(引手)は、寝ている方が誤ってファスナーを開けないように、別部品となっております)
※開梱時にウレタンフォームの臭いが気になる場合は、ファスナーを開け、風通しのよい日陰で1日程度干してからお使いください。

※サイドレールの品番は製品識別表示/安全ラベルに記載されています。例) S019A→KS-019Aを示します。


●製品識別表示/安全ラベルが傷ついたり、はがれたりした場合には販売店から新しいラベルを取り寄せ、貼り直してください。

安全に使用するための注意事項

けい こく
警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷(骨折・圧迫・麻痺など)を負う可能性が想定される内容を示しています。

■サイドレールと他のオプションやボード、あがっているボトムなどとのすき間(↓)に身体の一部(特に頭や首)が入らないように注意してください

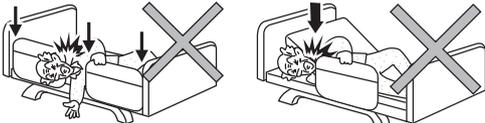

- すき間に入ると抜けなくなり、けがをするおそれがあります。
- 特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。


■サイドレールとマットレスのすき間に身体の一部(特に頭や首)が入らないように注意してください

- すき間に入ると抜けなくなり、けがをするおそれがあります。

■サイドレール使用時もベッドからの転落に十分注意してください

- サイドレールとサイドレール、ベッドのボードとサイドレールのすき間から転落したり、サイドレールの上から身を乗りだして転落したりして、けがをするおそれがあります。
- ベッドの背をあげた状態で使用する場合、角度(高い位置)によってはサイドレールによる横側の支えがなくなることで、転落予防としての効果を十分に発揮できないおそれがあります。
- 特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

■サイドレールを取付ける際は、頭側・足側から大きくとび出さない向きに取付けてください

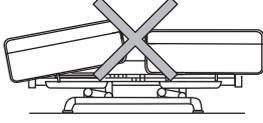

- ベッドから転落したり、意図せぬすき間が発生して、身体の一部がはさまれたりしてけがをするおそれがあります。またサイドレールが破損・変形するおそれがあります。
- ※楽匠プラス・楽匠Z・楽匠S・レント・KQ-50000・KQ-60000シリーズのミニタイプは、通常取付状態でも最大4cmとび出しますが正常です。(取付けるボードの種類によって異なります)
- 「楽匠プラスシリーズ」「楽匠Zシリーズ」「楽匠Feezシリーズ」「楽匠Sシリーズ」「レントシリーズ」「KQ-50000シリーズ」「KQ-60000シリーズ」の場合、ベッドの頭側・足側からとび出した向きでは確実に差込むことができず、サイドレールが不意に外れるなどして、けがをするおそれがあります。正しい向きでの取付けかたについては、3～5ページの「使用方法」を参照してください。

■乳幼児やお子様には使用しないでください


- サイドレールとボード、あがっているボトムなどとのすき間にはさまれてけがをしたり、転落したりするおそれがあります。

安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷(骨折・圧迫・麻痺など)を負う可能性が想定される内容を示しています。

■カバーを取外した状態で使用しないでください

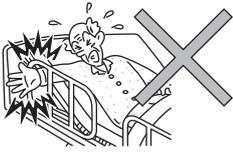

- 身体の一部がすき間に入った状態でベッドを操作すると、はさまれてけがをすることがあります。
- すき間にはさまれたり、抜けなくなったりするなどして、けがをすることがあります。
- ストッパーグリップやレンチにぶつかるなどして、思わぬけがをすることがあります。
- カバーを取外した状態で使用した場合、JIS認証を取得したベッドと組合せて使用しても、JIS認証を取得していない状態となります。

■ファスナートップ(引手)は、カバーから取外して大切に保管してください

- 寝ている方が誤ってファスナーを開け、はさまれるなどして、けがをすることがあります。
- ファスナー開閉時以外は使用者やお子様の手の届かないところに保管してください。けがをしたり、誤飲などしたりするおそれがあります。

■サイドレールに腰掛けたり、手すり代わりにしたりしないでください

- 転落・転倒して、けがをすることがあります。サイドレールはベッドで寝ている方の転落予防、寝具の落下予防を目的としています。立ちあがり時など、支えとしてお使いになる場合はベッド用グリップをお使いください。

■サイドレールに火気や先のとがったものを近づけないでください

- サイドレールの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形・発火などの原因となります。
- カバーに穴があいたり、破損したりするおそれがあります。穴があいたり、破損したりした場合は使用を中止し、カバーを交換してください。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。
- 改造などを行った場合は、JIS認証を取得したベッドと組合せて使用しても、JIS認証を取得していない状態となります。

■サイドレールと組合せて使用するベッドは弊社が指定する適合品をご使用ください

- 指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などによりけがをしたりサイドレールが破損・変形したりするおそれがあります。適合品については、3ページの「適合品(ベッド)」をご覧ください。記載されていないベッドとの適合および適合オプションについてご不明な点がございましたら、販売店または直接弊社までお問い合わせください。

■差込部を2ヶ所ともベッドのオプション取付穴に差込んでください

- 1ヶ所だけを差込んで使用すると、サイドレールが変形し、けがをすることがあります。

■抜け止め機能を使用する際はストッパーグリップで確実に締付けてください

- サイドレールが不意に抜けて、思わぬけがをすることがあります。

■抜け止め機能を使用している状態で、無理にサイドレールを抜かないでください

- 急に抜けたり、ベッドが動いたりして転倒し、けがをすることがあります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷(打撲・すり傷・切り傷など)を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■サイドレールを持ってベッドを動かさないでください

- サイドレールに大きな力がかかり、破損・変形するおそれがあります。

■スプレータイプの殺虫剤をサイドレールに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によって樹脂部分が破損・変色・溶解するおそれがあります。また破損・溶解した部分で思わぬけがをすることがあります。

■コーナースペースまたはサイドレールアダプターが外れた場合は使用を中止してください

- けがをすることがあります。上記部品が外れた場合は、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター(裏表紙参照)までお問い合わせください。

■ファスナーの面はベッドの外側に向け、ファスナーを完全に閉めた状態で使用してください

- 寝ている方がファスナー部ですりむくなどのけがをしたり、カバーが破損したりするおそれがあります。
- カバーとサイドレールのすき間に手や足などが入り、けがをすることがあります。

■カバーを他のサイドレールに取付けしないでください

- カバーはソフトガードサイドレール専用です。他のサイドレールに取付けると、サイズがあわない場合があり、破損などによりけがをすることがあります。

■サイドレールは水をかけて洗わないでください

- 本体のすき間に水が入り、本体のさびや腐食の原因となり、破損や変形のおそれがあります。また、さびや腐食した状態で使用すると思わぬけがをすることがあります。

適合品(ベッド)

■適合するベッドは以下の通りです。

楽匠プラスシリーズ(KQ-A****/KQ-A****S)・楽匠Zシリーズ(KQ-7***/KQ-7***S)・楽匠FeeZシリーズ(KQ-77**/KQ-78**)・楽匠Sシリーズ(1000幅)・レントシリーズ(KQ-68***)・KQ-50000シリーズ(KQ-5****)・KQ-60000シリーズ(KQ-6****)・INTIME COMFORT・INTIME 7000シリーズ(RS-7****/RW-7****)・INTIME TRUSTシリーズ(RS-2****)・INTIME 1000シリーズ(RQ-1*****)・INTIME 2000シリーズ(RQ-2*****)

■楽匠プラスシリーズ(KQ-A****Sは除く)・楽匠Zシリーズ(KQ-7***Sは除く)・楽匠FeeZシリーズ・楽匠Sシリーズ・レントシリーズ・KQ-50000シリーズ・KQ-60000シリーズと、このサイドレールの組合せはJIS認証を取得しています。



適合品は、仕様の変更や組合せなどにより変わる場合があります。また、新製品や製品の販売終了により、適合品が記載されていない場合があります。適合品についてご不明な場合は、販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用方法



- サイドレールを取付ける際は、ベッドの頭側・足側から大きくとび出さない向きに取付けてください。ベッドから転落したり、意図せぬすき間が発生して、身体の一部がはさまれたりしてけがをすることがあります。またサイドレールが破損・変形するおそれがあります。

※楽匠プラス・楽匠Z・楽匠S・レント・KQ-50000・KQ-60000シリーズのミニタイプは、通常取付状態でも最大4cmとび出しますが正常です。(取付けるボードの種類によって異なります)

- 「楽匠プラスシリーズ」「楽匠Zシリーズ」「楽匠FeeZシリーズ」「楽匠Sシリーズ」「レントシリーズ」「KQ-50000シリーズ」「KQ-60000シリーズ」の場合、ベッドの頭側・足側からとび出した向きでは確実に差込むことができず、サイドレールが不意に外れ転落・転倒してけがをしたり、サイドレールが破損・変形したりするおそれがあります。

- サイドレールを取付ける際は、オプション取付穴に異物が入っていないことを確認してください。異物が入っていると確実に取付けることができず、ベッドから転落したり、意図せぬすき間が発生して、身体の一部がはさまれたりしてけがをすることがあります。

- サイドレールを落下させないように注意してください。足に当たってけがをしたり、ゆかやサイドレールを傷つけたりするおそれがあります。

①サイドレールを図のようにベッドのオプション取付穴に、サイドレールアダプター(差込部)が見えなくなるまで確実に差込んで使用してください。


②サイドレールをボード側に寄せてご使用になる場合は、サイドレール本体に貼られた製品識別表示/安全ラベルに従い、矢印をボード側に向けて差込んで使用してください。製品識別表示/安全ラベルはカバーを開けると確認することができます。(抜け止め金具がボード側になります)

※INTIME7000シリーズ(RS-7****/RW-7****)、INTIME1000シリーズ(ハリウッドスタイル)、INTIME2000シリーズ(RQ-2*****)にはフットボードが付いておりません。足側に寄せて使用する場合は、矢印をエンドフレーム側に向けてください。




カバーのファスナー面とサイドレールの取付け向きがあわない場合は、5ページの「ファスナー面の向きを変える方法」を参照して、ファスナー面とサイドレールの向きを調節してください。

●サイドレールを中央でご使用になる場合 (KQ-51300のみ) ※向きの指定はありません。

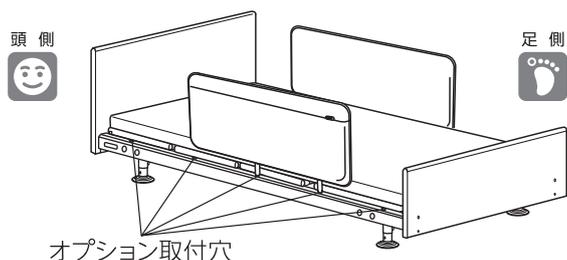


●サイドレールをボード側に寄せてご使用になる場合 ※向きの指定があります。

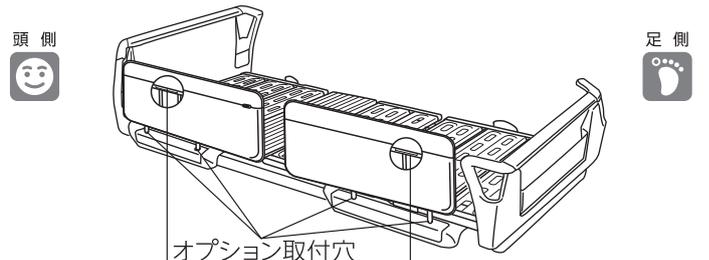

<p>ボード側 ←</p> <p>矢印をボード側に向けて取付けてください。</p>	<p>↑</p> <p>「すき間に注意」 隙や骨などがはさまれることがあります。</p> <p>「転落注意」 サイドレール使用時は注意してください。</p>	<p>↓</p> <p>「すき間に注意」 隙や骨などがはさまれることがあります。</p> <p>「転落注意」 サイドレール使用時は注意してください。</p>	<p>→</p> <p>矢印をボード側に向けて取付けてください。</p>
---	--	--	--------------------------------------

使用方法

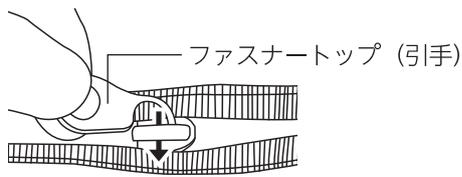


[ファスナーの開閉方法]

- ファスナーは、付属のファスナートップ (引手) を差込んで開閉してください。
- ※ファスナートップ (引手) を外すと、ファスナーの開閉ができません。

[サイドレールの取付方法]

- ボード側に寄せて使用する場合は、「ファスナーの開閉方法」(上記)を参照してファスナーを開け、本体に貼られた「製品識別表示/安全ラベル」(各部の名称と部品の確認:1ページ参照)を確認し、矢印をボード側に向けてください。
- ※INTIME7000シリーズ (RS-7****/RW-7****)、INTIME1000シリーズ (ハリウッドスタイル)、INTIME2000シリーズ (RQ-2*****)にはフットボードが付いておりません。足側に寄せて使用する場合は、矢印をエンドフレーム側に向けてください。

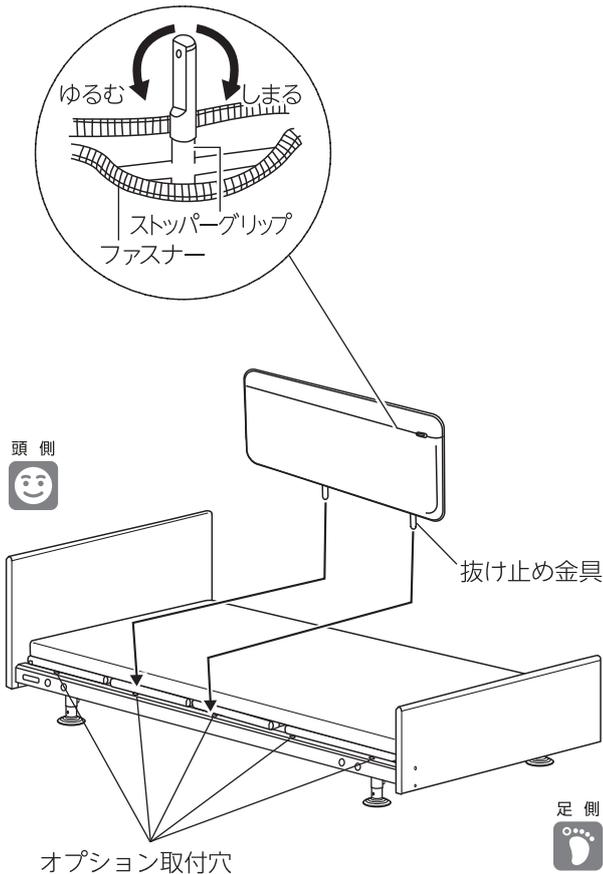

- ①カバーのファスナー面が外側になるようにしてサイドレールをベッドのオプション取付穴にまっすぐ差込んでください。

※差込みにくい場合は、ストッパーグリップを反時計回りに回し、抜け止め金具をゆるめてください。

※使用したい位置で差込む際、ファスナー面が外側にならない場合は、「ファスナー面の向きを変える方法」(5ページ)を参照して、ファスナー面の向きを変えてください。


※抜け止め機能を使用する際は、抜け止め金具がオプション取付穴の根元まで入っていることを確認し、手でストッパーグリップを時計回りに回し、しっかりと締付けた後、付属のレンチを使用して増し締めしてください。(5ページ「レンチの使用法」参照)

- ②「ファスナーの開閉方法」(上記)を参照して、ファスナーを閉めてください。



ファスナー面はベッドの外側に向け、ファスナーを完全に閉めた状態で使用してください。寝ている方がファスナー部ですりむくなどのけがをしたり、カバーが破損したりするおそれがあります。また、カバーとサイドレールのすき間に手や足などが入り、けがをするおそれがあります。

使用方法

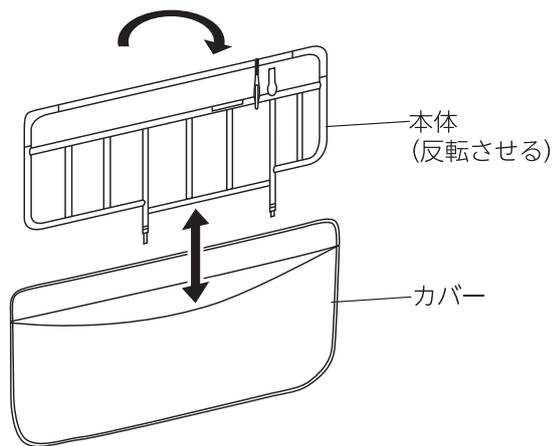


【ファスナー面の向きを変える方法】

- ①4ページの「ファスナーの開閉方法」を参照して、ファスナーを開けてください。
- ②本体をカバーから取外し、反転させてカバーへ入れなおしてください。
※カバーには、本体をどちら向きでも入れられるように、穴が4ヶ所開いています。
- ③「ファスナーの開閉方法」(4ページ)を参照して、ファスナーを閉めてください。



向きを変える際、カバーを破損しないように注意してください。

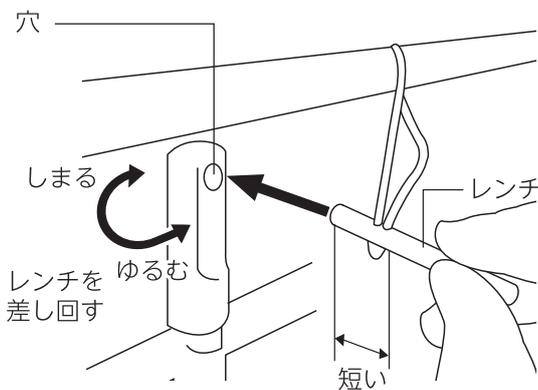

【レンチの使用方法】(抜け止め機能使用時のみ)

- ①レンチの短い方をストッパーグリップの穴に差し込み、時計回りに半回転程度回して、増し締めしてください。
- ②サイドレールを軽く上に引きあげて、抜けないことを確認してください。

【サイドレールの取外方法】(抜け止め機能使用時のみ)

- ①「ファスナーの開閉方法」(4ページ)を参照して、ファスナーを開け、付属のレンチでストッパーグリップを反時計回りに回し、ゆるめてください。
- ②手でストッパーグリップを反時計回りに回し、十分にゆるめてからまっすぐ上に持ちあげて引き抜いてください。
- ③「ファスナーの開閉方法」(4ページ)を参照して、ファスナーを閉めてください。

仕様

品名		ソフトガードサイドレール
品番		KS-019A
寸法	寸法 (cm)	(長さ) 102×(高さ) 59×(厚さ) 4
	製品質量 (kg)	4.2 (本体 3.2、カバー 1.0)
色		本体 (アイボリー)・カバー (グレー)
材質	本体	スチール製 (電着・粉体塗装)
	カバー	(表) ポリ塩化ビニル100% (裏) ナイロンハーフ100% (芯材) ウレタンフォーム
	コーナースペーサー	PP (ポリプロピレン)
	サイドレールアダプター	
ストッパーグリップ		ABS樹脂

お手入れ・長期保管について

■お手入れ

〈カバー〉カバーに取付けられている品質表示ラベルの表示に従ってお手入れをしてください。

〈本体〉●汚れを落とす場合

下記①～③の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

●消毒する場合

必ず下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

- 76.9～81.4% 消毒用エタノール
- ～0.2% 塩化ベンザルコニウム (オスバンなど)
 - ～0.2% 塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)
 - ～0.05% グルコン酸クロルヘキシジン (ヒビテンなど)
 - ～0.05% 次亜塩素酸ナトリウム (ミルトンなど)

※別の方がサイドレールを使用する前には、サイドレールを消毒することをおすすめします。



ちゅうい
注意

- 揮発性のもの (シンナー、ベンジン、ガソリンなど) やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- カバーには消毒用エタノールを使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質するおそれがあります。
- 中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。





- 漂白剤は使用しないでください。ツヤ変化や色変わりが生じるおそれがあります。
- オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

■長期保管

長期にわたりサイドレールをご使用にならないときは、下記の点にご注意ください。

- サイドレールの上には何も載せないでください。
- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- カバーは本体に取付けた状態で保管してください。
- 取扱説明書および付属のファスナートップ (引手) を紛失しないように、大切に保管してください。

アフターサービスについて

1.保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2.修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示／安全ラベルの番号
（サイドレール本体に貼付：1ページ「各部の名称と部品の確認」参照）
- お買い上げ日
- 破損または異常の内容（できるだけ詳しく）
- お名前、ご住所および電話番号

■消耗部品について

サイドレールアダプターは消耗部品です。

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは下記の保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3.部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

4.アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間：平日8:00～18:00／土・日・祝日9:00～17:00（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

保証書

品名／品番	ベッドサイドレール／KS-019A	保証期間	*お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前	★販売店				
	〒 () ご住所		☎ ()			

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、ラベル類などの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷

- 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
 - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
● This warranty is valid only in Japan.

パラマウントベッド株式会社

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(大代) 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代) 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市中区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代) 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代) 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目2番1 ☎(048)878-0100(代) 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)