

KC-0581

酸素ボンベホルダー (KC-508/KC-508A/KC-516/KC-518 IVスタンド専用)

まえがき

このたびは、酸素ボンベホルダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この「取扱説明書」には、酸素ボンベホルダーを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。



- 酸素ボンベホルダーをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」およびKC-508/KC-508A/KC-516/KC-518 IVスタンド（以下、IVスタンド）の「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- 酸素ボンベホルダーを取付けたIVスタンドを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- この製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。
- この酸素ボンベホルダーは、KC-508/KC-508A/KC-516/KC-518 IVスタンド専用です。

使用目的

■この酸素ボンベホルダーは、KC-508/KC-508A/KC-516/KC-518 IVスタンドに取付けて、酸素ポンペを格納することを目的に作られています。

各部の名称と部品の確認

■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

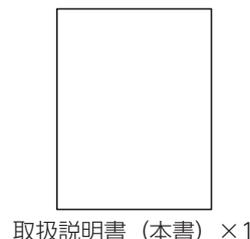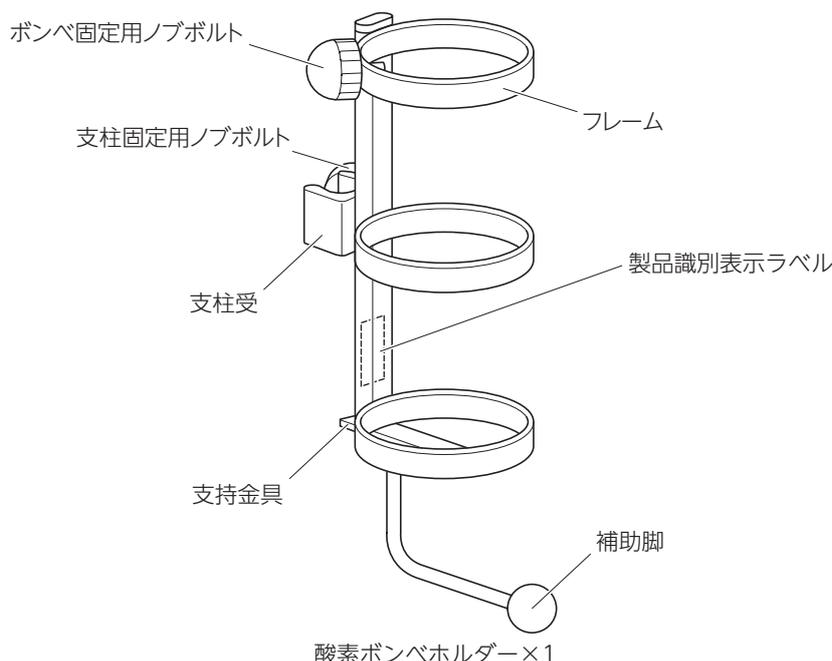

安全に使用するための注意事項

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺 ^{まひ} など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
---	--

- 弊社が指定する適合品以外の製品とは組合せない
てください
 - 指定以外の製品や他社製品と組合せて使用すると、思わぬけがをしたり、酸素ボンベホルダー・酸素ボンベ・IVスタンドが破損・変形するおそれがあります。
- 使用する前に、ボンベ固定用ノブボルト・支柱固定用ノブボルトが確実に固定されていることを確認してください
 - ボンベ固定用ノブボルトが確実に固定されていないと、酸素ボンベが安定せず、酸素の供給に支障がでるおそれがあります。
 - 支柱固定用ノブボルトが確実に固定されていないと、酸素ボンベホルダーが支柱から外れ落下してけがをしたり、酸素ボンベホルダー・酸素ボンベ・IVスタンドが破損・変形するおそれがあります。
- 酸素ボンベホルダーに酸素ボンベ以外のものを載せないでください
 - 載せたものが落下して思わぬけがをしたり、酸素ボンベホルダーが破損・変形するおそれがあります。
- 酸素ボンベホルダーに乗らないでください
 - 転倒して、けがをするおそれがあります。
- 酸素ボンベホルダーが取り付けられたIVスタンドは、勢いよく移動したり、補助脚がゆかに接触したまま、引きずったりしないでください
 - 転倒してけがをしたり、補助脚が破損するおそれがあります。
- 酸素ボンベホルダーや酸素ボンベを持ってIVスタンドを移動しないでください
 - 転倒してけがをしたり、破損・変形するおそれがあります。
- 移動する際は人や周囲のもの、壁などに当たらないように注意してください
 - けがをするおそれがあります。
 - 酸素ボンベホルダー・酸素ボンベ・IVスタンドが破損・変形するおそれがあります。
 - 酸素ボンベの流量計は特にご注意ください。
- 故障・破損した場合は使用を中止してください
 - 故障・破損した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（裏表紙参照）まで修理をご依頼ください。酸素ボンベホルダーの変形などによって、けがをするおそれがあります。
- 熱器具（ストーブなど）の近くや直射日光の当たる場所では使用しないでください
 - 変質・変形・発火の原因となります。

 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
---	--

- スプレータイプの殺虫剤を酸素ボンベホルダーに直接噴射しないでください
 - 殺虫剤に含まれる溶剤によって樹脂部分が破損・変色・溶解するおそれがあります。また破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

仕様

品名	酸素ボンベホルダー
品番	KC-0581
材質	フレーム：スチール製(アクリル塗装) ノブボルト樹脂部：ABS樹脂 補助脚：PP(ポリプロピレン)
主要寸法(cm)	幅約12.7×奥行約23.7×高さ約41.2
製品質量	約1.5kg
使用可能酸素ボンベ容量	500ℓ(直径9.5cm以上11.5cm以下)
適合品	KC-508/KC-508A/KC-516/KC-518 IVスタンド

使用方法




けい 告
こく 告

- IVスタンドのフックにもものが吊り下げられた状態で、酸素ボンベホルダーの取付作業を行わないでください。ものがIVスタンドのフックから不意に落下して、けがをするおそれがあります。
- 酸素ボンベホルダーは、正しい位置に取付けてください。誤った取付けかたをすると、けがをしたり、酸素ボンベホルダーが破損・変形するおそれがあります。

■酸素ボンベホルダーは、IVスタンドの支柱に取付けてください。



●酸素ボンベは必ず500ℓ (直径9.5cm以上、11.5cm以下) のものを使用してください。

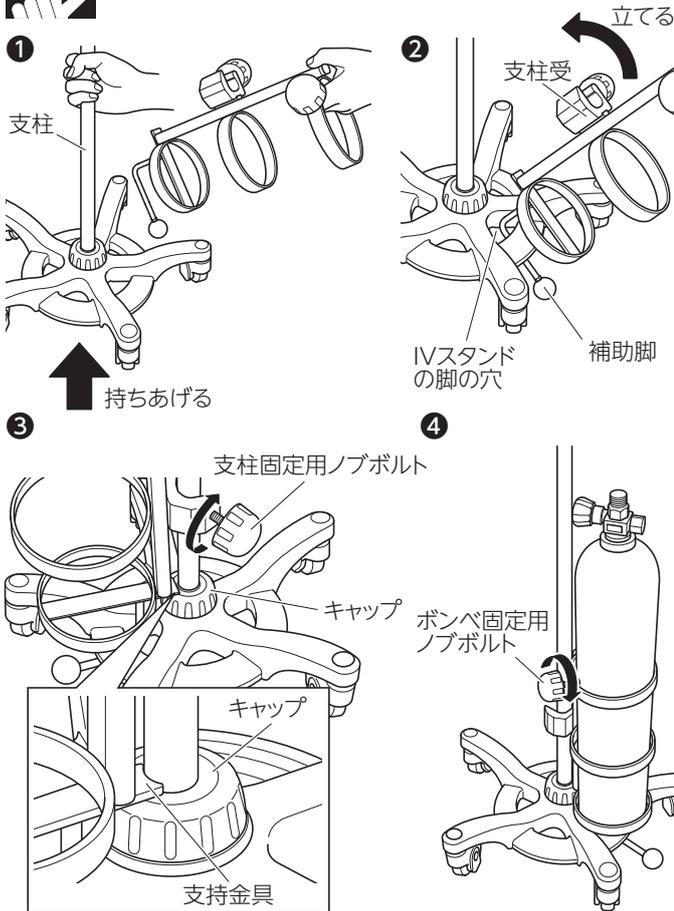

①支柱を持って、IVスタンドを持ちあげてください。



●IVスタンドを持ち上げる際、周囲の人やもの、壁などに当たらないようにしてください。

②IVスタンドの脚の穴に酸素ボンベホルダーの補助脚を入れ、IVスタンドの支柱に酸素ボンベホルダーの支柱受をあわせ、酸素ボンベホルダーを垂直に立ててください。

③酸素ボンベホルダーの支持金具がIVスタンドのキャップの上に載っていることを確認し、IVスタンドの支柱と酸素ボンベホルダーを、支柱固定用ノブボルトでしっかりと固定してください。



●支柱固定用ノブボルトが確実に固定されていることを確認してください。

④酸素ボンベを入れ、ボンベ固定用ノブボルトでしっかりと固定してください。



●ボンベ固定用ノブボルトが確実に固定されていることを確認してください。

日常のお手入れ・長期保管について

<日常のお手入れ>

■汚れを落とす場合

下記①～③の手順で行ってください。

- ① 水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ② 水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③ 乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

■消毒する場合

必ず下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

- ～81.4% 消毒用エタノール
- ～0.2% 塩化ベンザルコニウム (オスバンなど)
- ～0.2% 塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)
- ～0.05% グルコン酸クロルヘキシジン (ヒビテンなど)
- ～1.0% 次亜塩素酸ナトリウム (ミルトンなど)

以下の消毒剤も使用することができます。
SuperSani-Cloth® 殺菌使い捨てワイブ
CloroxHealthCare® ブリーチワイブ

※別の方が酸素ボンベホルダーを使用する前には、酸素ボンベホルダーを消毒することをおすすめします。



ちゅう い
注 意

- 揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリンなど)やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質するおそれがあります。
- 中性洗剤や次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れたり、変色・変質したりするおそれがあります。



●オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

日常のお手入れ・長期保管について

<長期保管について>

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
温度-10～50℃、湿度30～90%RHの環境で保管してください。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番（下記保証書を参照）
- お買い上げ日
- 故障、または異常の内容（できるだけ詳しく）
- 施設名、お名前、ご住所および電話番号

保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは下記の保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日8:00～18:00 土・日・祝日9:00～17:00（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

保証書

品名 / 品番	酸素ポンベホルダー / KC-0581	保証期間	*お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前	*販売店 (店名・住所)	☎	()		
	〒					
	ご住所					

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - (1) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - (2) 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - (3) お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - (4) 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - (5) 保証書のご提示がない場合
 - (6) 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
 - (7) 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.

<パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂 2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代)
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂 2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地3 ☎(022)239-5211(代)
さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1 ☎(048)878-0100(代)

横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)

2021-06

製版：株式会社ハル