

# KC-0582 (ベッド・ストレッチャー用) KC-0583 (車いす用)

保証書付

## 連結アーム

### まえがき

このたびは、**連結アーム**をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、**連結アーム**を安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- 連結アーム**をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」および、適合品のベッドやストレッチャー、車いすとIVスタンドの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- 連結アーム**を使用する方ばかりでなく、付き添いの方にも正しく安全な取扱方法を説明してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。



## 使用目的

■この**連結アーム**は、適合品 (5 ページ参照) のベッドやストレッチャー、車いすとIVスタンドを連結することを目的に作られています。

## 各部の名称と部品の確認


■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

### < KC-0582・KC-0583 共通部品 >

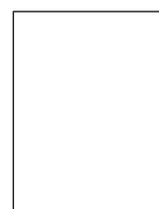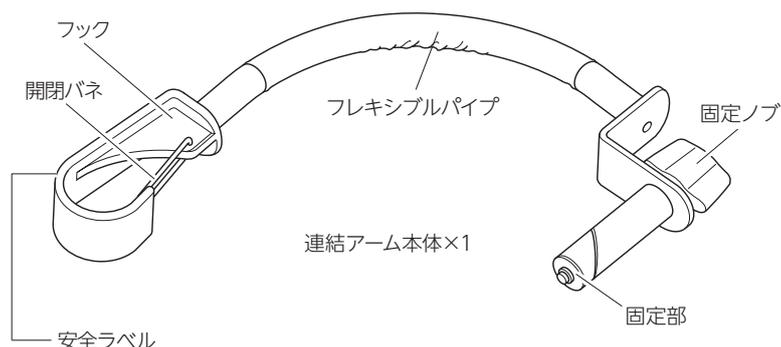

取扱説明書 (本書) ×1

### < KC-0583 (車いす用) 付属品 >

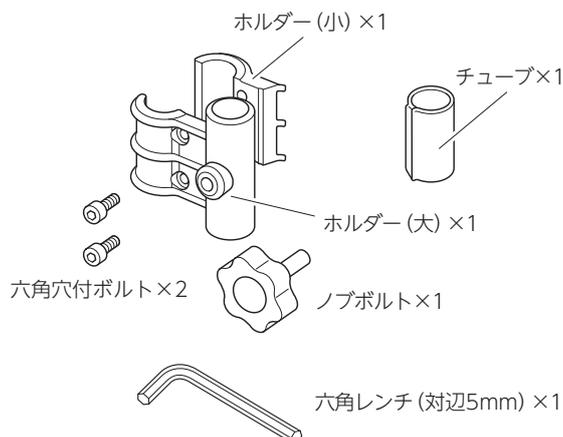

### [安全ラベルについて]

- 注意事項の中で、**連結アーム**をお使いになる方に特に注意していただきたい項目をラベルにしてフックの側面に貼ってあります。はがしたり傷つけないでください。
- 安全ラベルが傷ついたり、はがれてしまった場合には販売店から新しい安全ラベルを取り寄せ、貼り直してください。

# 安全に使用するための注意事項

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
---	---

## ■固定するベッドやストレッチャー、車いすは弊社が指定する適合品をご使用ください

- 指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたり連結アームが故障するおそれがあります。ストレッチャー、車いすの適合品につきましては、仕様（5ページ）を参照してください。ベッドの適合品につきましては、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

## ■KC-508/KC-508A/KC-509/KC-516/KC-517/KC-518/KC-519 以外のIVスタンドと連結しないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。

## ■IVスタンドとベッド、ストレッチャーまたは車いすを連結した際には、下記の項目に注意してください

- IVスタンドが転倒したり、思わぬけがをするおそれがあります。また、破損・変形の原因となります。
  - 移動する際には、連結した製品同士が当たらないよう、連結アームの向きを調整してください。
  - ベッドやストレッチャーの操作（高さ、背あげなど）を行う場合は、IVスタンドやIVスタンドに取付けられているオプション・物品にあたらぬよう、連結アームの向きを調整するか、連結アームを外すなどしてください。
  - 移動する際には、周囲の人やもの、壁などに当たらないよう注意してください。また、段差には十分に注意してください。

## ■破損・変形した場合は使用を中止してください

- 思わぬけがをするおそれがあります。

## ■熱器具（ストーブなど）の近くや直射日光の当たる場所では使用しないでください

- 変質・変形・発火の原因となります。

## ■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや故障の原因となります。

 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
---	--

## ■目的以外の使いかたをしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。

## ■使用しないときは、取外すか、邪魔にならないよう連結アームの向きを調整してください

- 思わぬけがや破損の原因となります。

## ■スプレータイプの殺虫剤を連結アームに直接噴射しないでください


- 殺虫剤に含まれる溶剤によって樹脂部分が破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

# 使用方法





●連結アームは正しく取付けてください。誤った取付けかたをするとけがをしたり、連結アームが破損・変形するおそれがあります。

## <ベッド・ストレッチャー用 (KC-0582) の場合>

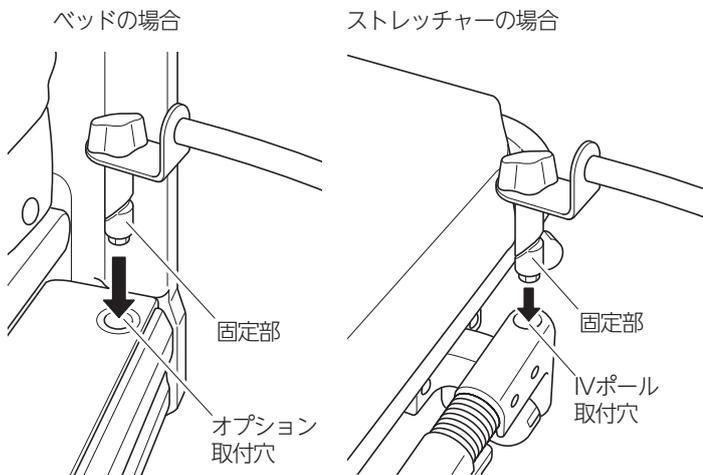

※以下イラストはベッドで説明しています。

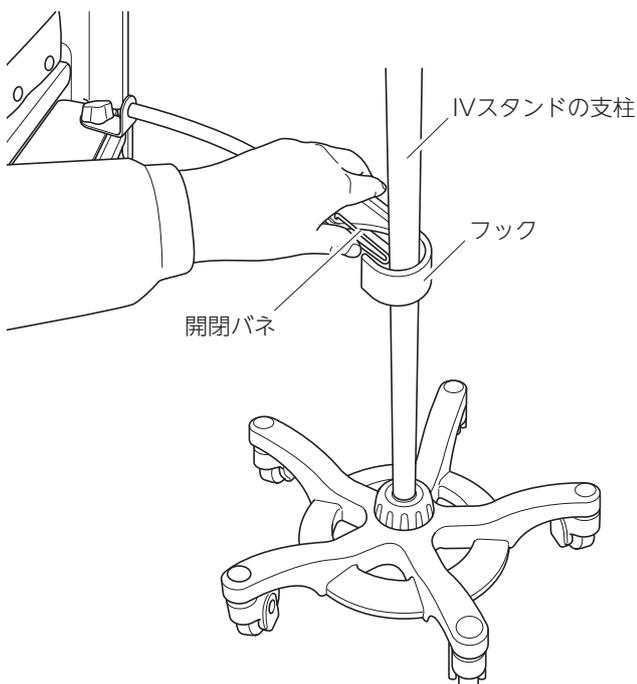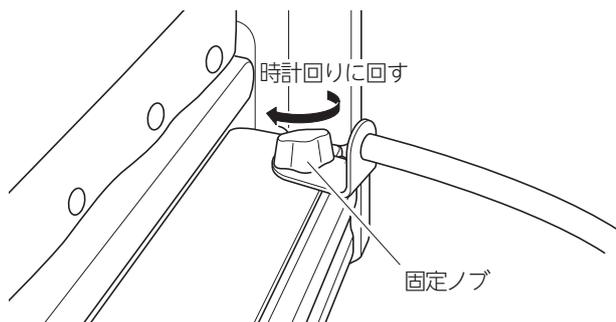

### 【取付けかた】

①左図を参照して適合品のベッドのオプション取付穴またはストレッチャーのIVポール取付穴に固定部を挿入してください。

②連結アームの使用したい向きが決まったら、固定ノブを時計回りに回してしっかりと固定してください。



●ベッドやストレッチャーの可動部などに当たらないように、連結アームの向きを調整してください。

③連結アームの開閉バネを開け、IVスタンドの支柱にフックを引っ掛けてください。



●フックを引っ掛けた後、開閉バネが閉じていることを確認してください。


# 使用方法



けい  
**警 告**  
こく

●車いすを広げて、ブレーキをロックしてから、取付け作業を行ってください。  
車いすが動き、思わぬけがをするおそれがあります。

<車いす用 (KC-0583) の場合>

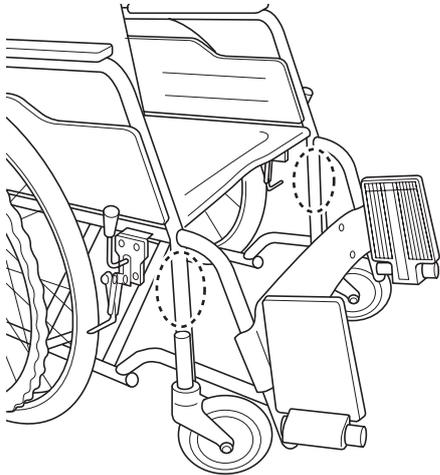


## 【取付位置】

●左図の点線○部分のどちらかに、ホルダーを取付けてください。

## 【取付けかた】


①左図を参照して適合品の車いすのパイプを、付属のホルダー (大)・ホルダー (小) ではさみ、六角穴付ボルトで仮止めした後、六角レンチでしっかりと締付けてください。  
車いすのパイプ径が細く、しっかり取付けることができない場合は、チューブを巻きつけた上から、チューブにホルダー (大)・(小) が密着するまで締付けてください。

●ホルダー (大)・(小) が確実に固定されていることを確認してください。

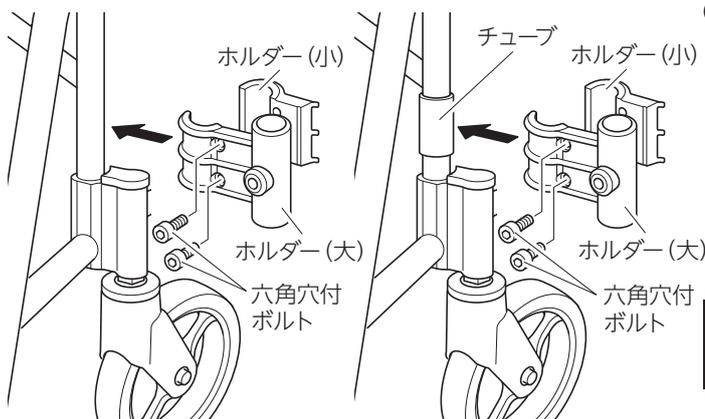


パイプ径とホルダー (大)・(小) が密着できる場合

パイプ径とホルダー (大)・(小) が密着できない場合

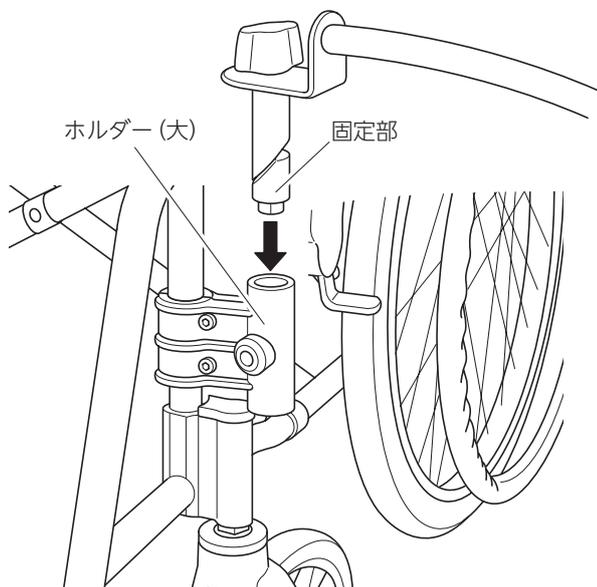


②ホルダー (大) に連結アームの固定部を挿入してください。

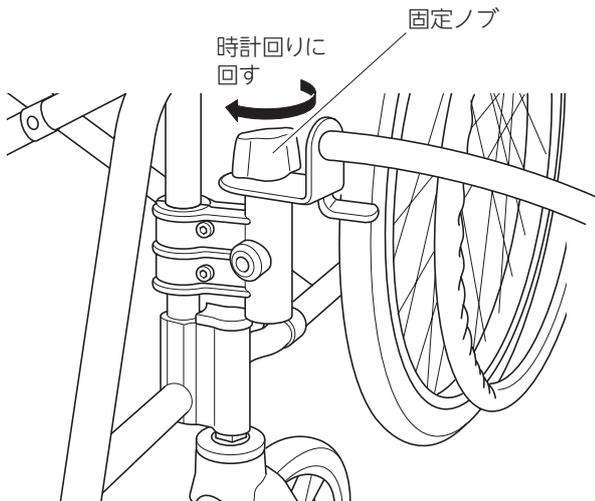


③ 連結アームの使用したい向きが決まったら、固定ノブを時計回りに回してしっかりと固定してください。



● 車いすの可動部などに当たらないように、連結アームの向きを調整してください。

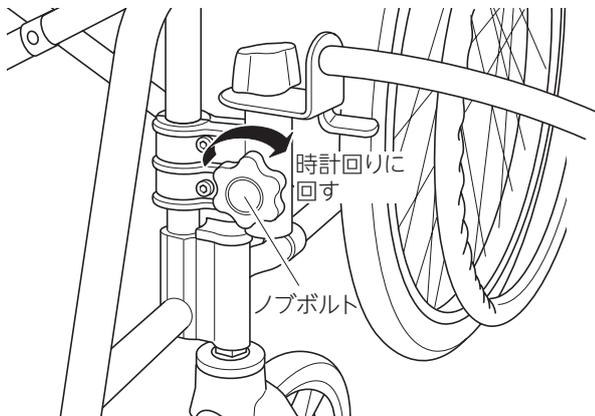

④ ホルダー（大）のノブボルトを時計回りに回してしっかりと回転を固定してください。

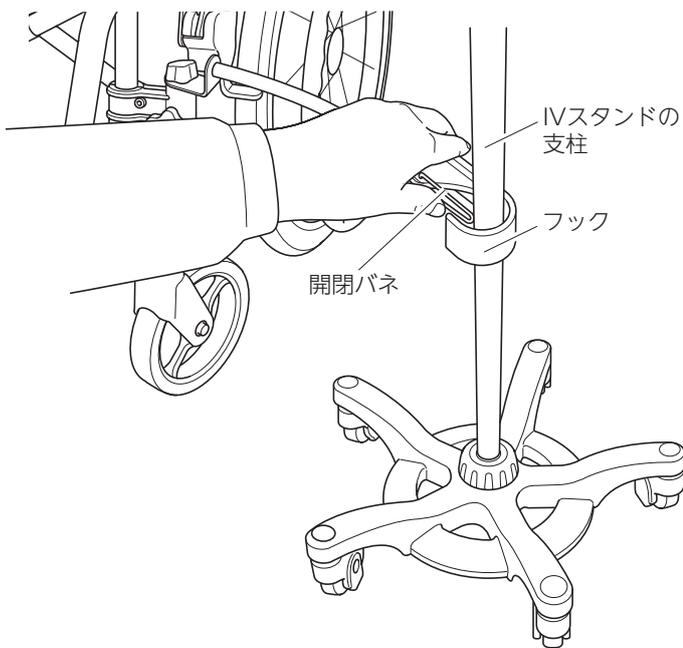

⑤ 連結アームの開閉バネを開け、IVスタンドの支柱に引っ掛けてください。



● フックを引っ掛けた後、開閉バネが閉じていることを確認してください。

# 仕様

品名		連結アーム		
品番		KC-0582 (ベッド・ストレッチャー用)	KC-0583 (車いす用)	
寸法 (cm)	連結アーム本体	幅約4.6×奥行約45.8×高さ約10.3		
	付属品	—	幅約7.9×奥行約3.9×高さ約8	
製品質量	連結アーム本体	約0.5kg		
	付属品	—	約165g	
材質	連結アーム 本体	固定部	スチール	
		フック	PP	
		フレキシブルパイプ	ステンレス+真ちゅう・ポリオレフィン	
	付属品	ホルダー	—	ナイロン
		チューブ	—	PVC (ポリ塩化ビニル)
適合品		ベッド	弊社製ベッドで、オプション取付穴を有するもの。 ご不明な点は、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください	
		ストレッチャー	KK-715 シリーズ KK-725 シリーズ	
			T-50 シリーズ T-51 シリーズ T-54 シリーズ	

# 日常のお手入れ・長期保管について

## <日常のお手入れ>

### ■汚れを落とす場合

下記①～③の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

### ■消毒する場合

必ず下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

- ～ 81.4% 消毒用エタノール
- ～ 0.2% 塩化ベンザルコニウム (オスバンなど)
- ～ 0.2% 塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)
- ～ 0.05% グルコン酸クロルヘキシジン (ヒビテンなど)
- ～ 1.0% 次亜塩素酸ナトリウム (ミルトンなど)

以下の消毒剤も使用することができます。

SuperSani-Cloth® 殺菌使い捨てワイプ

CloroxHealthCare® ブリーチワイプ

※別の方が連結アームを使用する前には、連結アームを消毒することをおすすめします。



- 揮発性のもの (シンナー、ベンジン、ガソリンなど) やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質するおそれがあります。
- 中性洗剤や次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れたり、変色・変質したりするおそれがあります。



- オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

## <長期保管について>

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。  
温度 -10 ～ 50℃、湿度 30 ～ 90% RH の環境で保管してください。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

## 2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

### ■連絡していただきたい内容

- 品名、品番（下記保証書を参照）
- お買い上げ日
- 故障、または異常の内容（できるだけ詳しく）
- 施設名、お名前、ご住所および電話番号

### 保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは下記の保証書をご覧ください。

### 保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

## 3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

## 4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日8:00～18:00 土・日・祝日9:00～17:00（年始は休業いたします）

### 【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

## 保証書

品名 / 品番	連結アーム / KC-0582・KC-0583	保証期間	*お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前	*販売店 (店名・住所)	☎ ( )			
	〒 ( ) ご住所					

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。  
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。  
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

### 【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
  - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
  - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
  - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
  - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
  - 保証書のご提示がない場合
  - 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
  - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
  - This warranty is valid only in Japan.

### <パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代)  
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代)  
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)  
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代)  
さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1 ☎(048)878-0100(代)

横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)  
名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)  
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)  
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)  
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)

2021-06

製版：株式会社ハル