


取扱説明書

KF-840 リハビリテーブル

保証書付

7F06443400A3

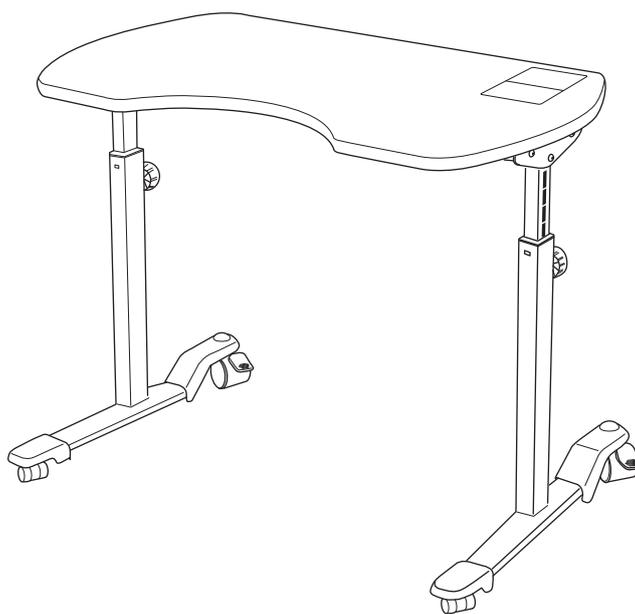

まえがき

このたびは、リハビリテーブル（以下、テーブル）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、テーブルを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- テーブルをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- テーブルを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

もくじ

1 使用目的／各部の名称	1
2 安全に使用するための注意事項	2～4
3 開梱と部品の確認	5
4 組立方法	5
5 使用方法	6
6 オプションの取付けとご注意	7
7 定期点検と日常のお手入れ	8
8 長期保管について	9
9 仕様	9
10 アフターサービスについて	10


1 使用目的／各部の名称

■使用目的


- このリハビリテーブルは、ベッドでの端座位や車いすに座っている際の補助として使用されることを目的に作られています。

■各部の名称

製品識別表示ラベル (天板裏面に貼付)

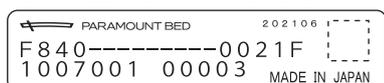

※リハビリテーブルの品番は
製品表示ラベルに表示されます。
F840→KF-840を示します。

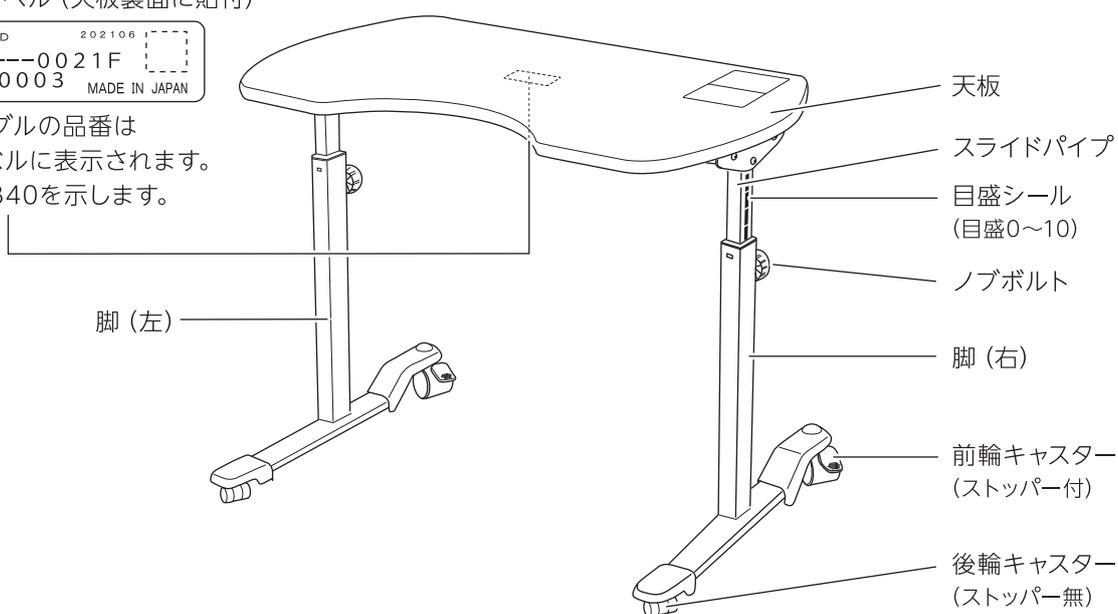

2 安全に使用するための注意事項

■必ずご使用の前にこの「安全に使用するための注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください


- ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度に応じて「△警告」と「△注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※取扱説明書をお読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

<安全ラベル貼付位置>

- 注意事項の中で、特に注意していただきたい項目をラベルにして、天板の表に貼ってあります。はがしたり傷つけたりしないでください。
- 安全ラベルが傷ついたり、はがれてしまった場合には、販売店から新しい安全ラベルを取寄せ、貼り直してください。

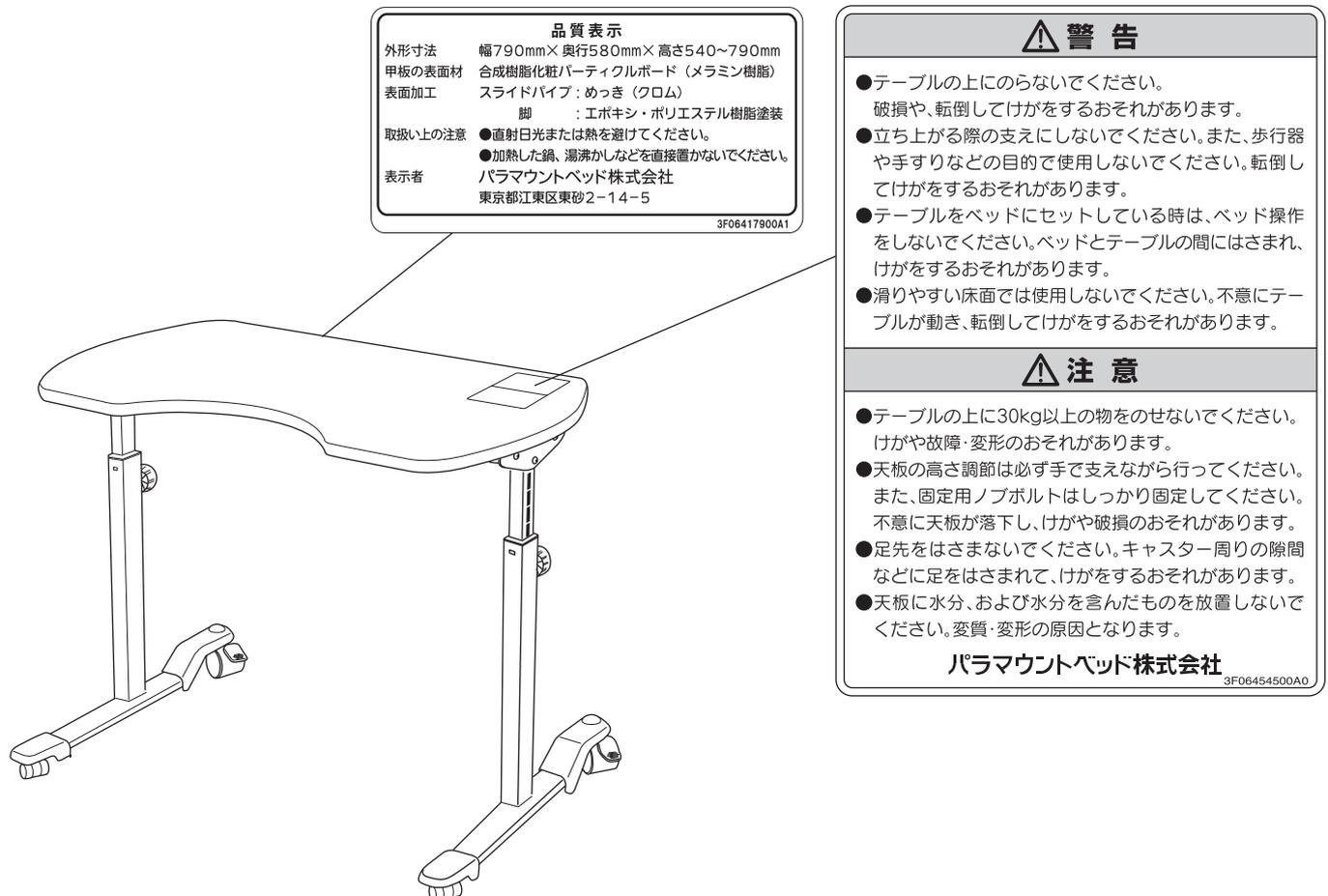

2 安全に使用するための注意事項



■目的以外の用途に使用しないでください

- 歩行器や手すりなどの目的で使用しないでください。転倒してけがをしたり、テーブルが破損・変形したりするおそれがあります。

■テーブルを固定する際は左右のストッパーを固定してください

- 片側のみを固定するとテーブルが不安定になり、転倒してけがをするおそれがあります。

■テーブルをベッドに設置しているときはベッドの操作をしないでください

- テーブルとベッドやベッド用オプションの間にはさまれて、けがをするおそれがあります。
- テーブルとベッドやベッド用オプションが接触し、テーブルやベッド・ベッド用オプションが破損・変形するおそれがあります。
- ベッドの操作を行う場合は、テーブルをベッドから外してください。

■滑りやすいゆかや段差・凹凸のある場所では使用しないでください

- ほこりや水分などの浮いたゆかや段差・凹凸のある場所では、テーブルを使用しないでください。テーブルが動きやすくなり、転倒してけがをするおそれがあります。

■テーブルの上に乗らないでください

- 転落・転倒して、けがをするおそれがあります。

■テーブルに寄り掛からないでください

- 転倒してけがをしたり、テーブルが破損・変形したりするおそれがあります。

■脚の上に乗らないでください

- 転倒してけがをしたり、脚が破損・変形したりするおそれがあります。

■天板をつかんだ状態で後ろに倒れるような姿勢をとらないでください

- 転倒してけがをするおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや故障の原因となります。

■直射日光のあたる場所や、ストーブなど熱器具の近くでの使用は避けてください

- 発火・変質・変形の原因となります。

■コード類(電源コードなど)をテーブルではさまないようにしてください

- コード類が破損し、感電・火災のおそれがあります。特に電源コードはテーブルを入れる側とは反対側に配線するようにしてください。

■テーブルをベッドに設置した状態で、テーブルの高さ調節はしないでください

- はさまれて、けがをするおそれがあります。
- 高さ調節の際は、テーブルをベッドから外してください。

■ものを載せた状態でテーブルの移動や高さ調節はしないでください

- ものが落下してけがをしたり、ものが破損・変形したりするおそれがあります。

■ベッド周辺でテーブルを移動させる際は、ベッドのキャスター操作ステップにぶつからないように注意してください

- ベッドのキャスターのロックが解除され、乗り降りの際などにベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。

■ベッドからの乗り降りやテーブルの周りで歩行する場合は足元に注意してください

- テーブルの脚に引っ掛かり、転倒してけがをするおそれがあります。
- 脚とゆかの間に足をはさんで、けがをするおそれがあります。

■テーブルを移動するときは足元に注意してください

- 脚とゆかの間に足をはさんだりキャスターに踏まれたりして、けがをするおそれがあります。

■操作が理解できないと思われる方や、体位を自分で保持できない方には、ノブボルトやキャスターのストッパーを操作させないでください

- 誤って操作したり、操作した際にバランスをくずしたりして、転落・転倒のおそれがあります。

■ノブボルトにもものをかけないでください

- 転倒してけがをしたり、テーブルが破損・変形したりするおそれがあります。

警告

■ ベッドやテーブルから身を乗り出して、ノブボルトを操作しないでください

- 転落して、けがをするおそれがあります。

■ 破損した場合は使用を中止してください

- けがをするおそれがあります。破損した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター(10ページ参照)まで修理をご依頼ください。

注意

■ 段差のある場所での移動は避けてください

- 脚やキャスターが破損・変形したり、ゆかを傷つけたりするおそれがあります。やむを得ない場合はテーブルをできるだけゆっくりと動かして移動させてください。

■ 天板の高さ調節は天板を手で支えながら行ってください

- 天板を支えずに調節すると、不意に天板が落下して指などがはさまれて、けがをするおそれがあります。

■ 30kgを超えるものを載せないでください

- 故障・破損・変形の原因となります。また、破損・変形により、けがをするおそれがあります。

■ 使用するときにはノブボルトが固定されていることを確認してください

- テーブルを目盛0で使用するとき、ノブボルトがしっかりと固定されていることを確認してから使用してください。ノブボルトがしっかりと固定されていないとけがをするおそれがあります。
- テーブルを目盛1~10で使用するとき、スライドパイプのくぼみに、ノブボルトがしっかりと固定されていることを確認してから使用してください。ノブボルトがしっかりと固定されていないと天板が落下し、けがをするおそれがあります。

■ 足先をはさまないように注意してください

- 前輪キャスターと脚(水平パイプ)の間などに、足や指をはさまれないようにしてください。けがをするおそれがあります。

■ スプレータイプの殺虫剤をテーブルに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によってテーブルの天板や他の樹脂部分が破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

■ 天板の上に、加熱したやかん・鍋などを直接載せないでください

- 変形・変色の原因となります。

■ 天板に、飲み物などの水分をこぼしたり、水分を含んだものを放置したりしないでください

- 破損・変色・変質・変形の原因となります。濡れたときはすぐに乾いた布で拭き取ってください。

■ 天板に粘着力の強いテープなどを貼り付けないようにしてください

- 表面のはがれ・破損の原因となります。

■ 傷つきやすいゆかでは使用しないでください

- ゆかを傷つけたり、汚したりするおそれがあります。

■ 塩化ビニル系の床材での使用は避けてください


- 床材にキャスターの色が移り、床材が変色するおそれがあります。

■ 可動部のすき間に手や指をはさまないように注意してください

- けがをするおそれがあります。

3 開梱と部品の確認

■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

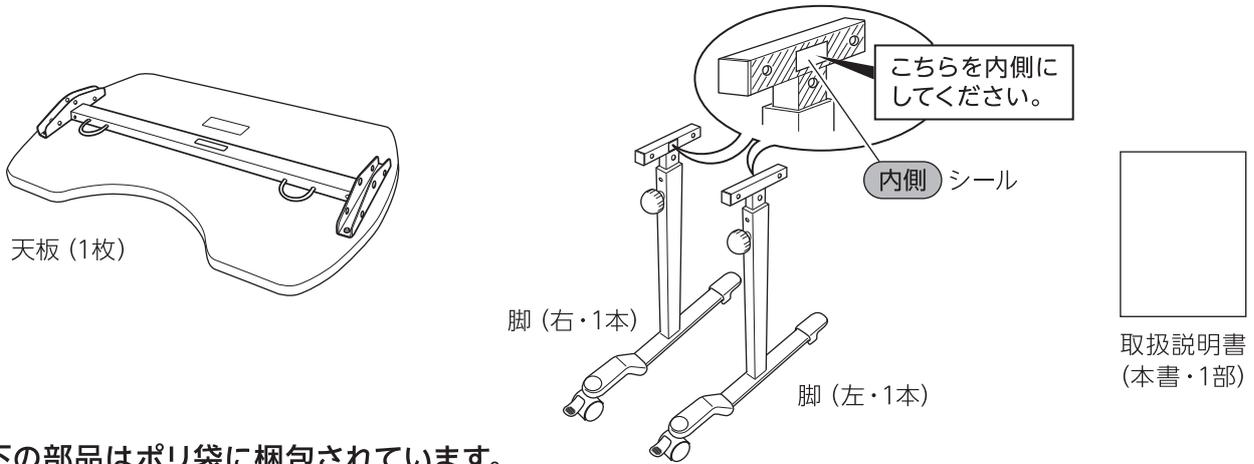

■以下の部品はポリ袋に梱包されています。




4 組立方法

- ①下図のように天板を裏返して置き、脚（右）の **内側** シールのある側を内側に向けて、脚取付部の穴に天板フレーム（コの字板）の突起が入るように差込んでください。
- ②脚（右）と天板フレームのボルト取付穴（3ヶ所）をあわせ、ボルト3本、ナット3個を使って仮止めしてください。
- ③同様に脚（左）も上記①②の要領で仮止めしてください。
- ④すべてのボルト・ナットを付属のスパナ・六角レンチを使用して、天板フレームとスライドパイプのがたつきがなくなるまでしっかりと締付けてください。
※締付ける際、ボルト側の六角レンチは動かさず、ナットを締める側のスパナを回すと、強く締付けることができます。




脚と天板フレームを固定する際の推奨締付トルクは、12N・mです。

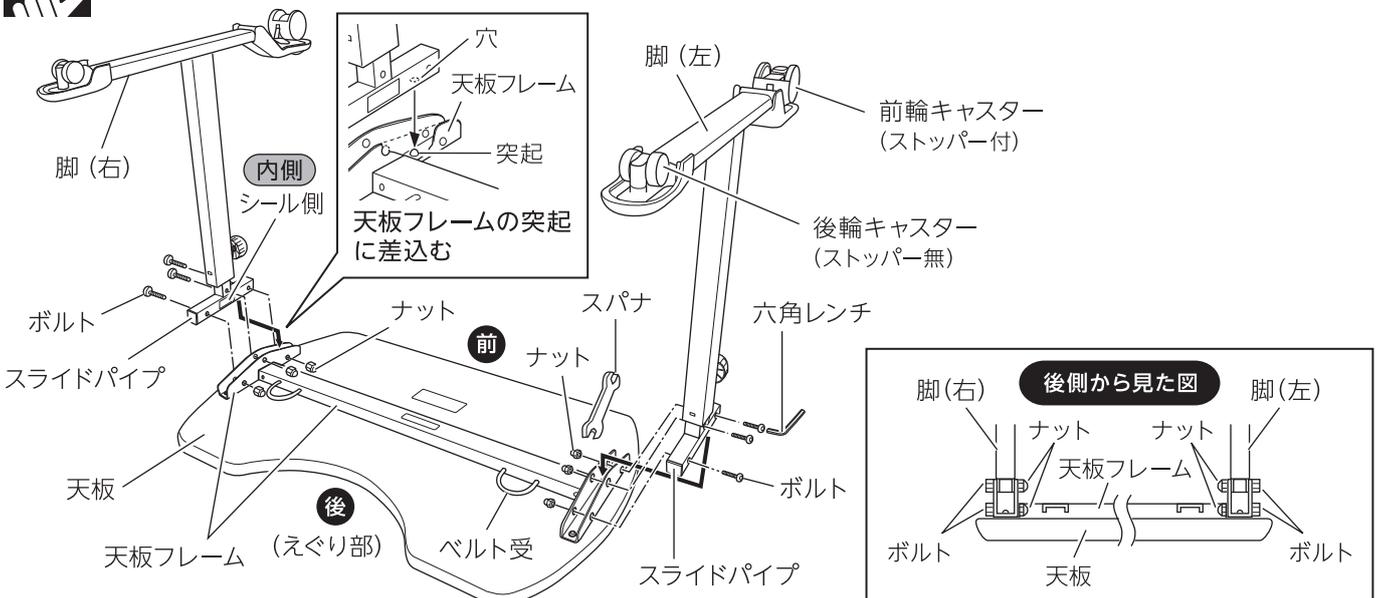

5 使用方法


■テーブル位置の固定方法

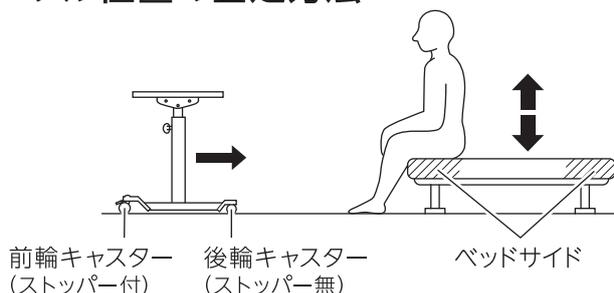

- ご使用になる方をベッドサイドまたは車いすなどに座らせてください。高さ調節ができるベッドの場合は、足の裏全体がゆかにつき無理のない姿勢になるように、ベッドの高さを調節してください。




テーブルをベッドに設置しているときは、ベッドの操作をしないでください。思わぬけがをしたり、テーブルやベッド・ベッド用オプションが破損・変形したりするおそれがあります。

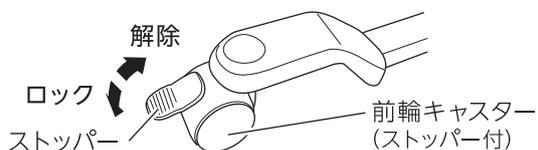

- テーブルの使用する位置が決まりましたら、前輪キャスターのストッパーをかけてください。前輪キャスターが内側に入ってロックしづらい場合は左図の様に外に出た状態にしてからロックしてください。




ゆかの状態に注意してください。ゆかの状態によっては、前輪キャスターのストッパーをかけても滑りやすくなり、転倒してけがをするおそれがあります。

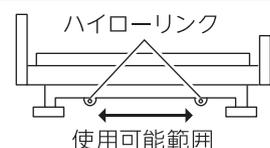

設置の際には、ベッドのハイローリンクとの接触にご注意ください。破損の原因となります。

■テーブル高さの調節方法

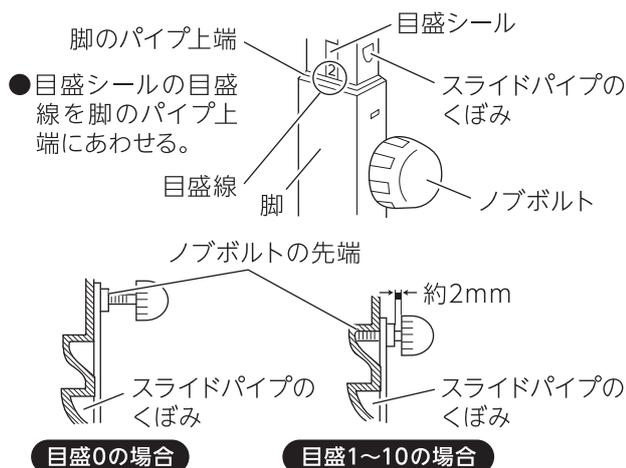

- テーブルにひじをおろしたときに、天板部に軽くあたるように、テーブルの高さを調節してください。左右同じ高さになるようにスライドパイプをスライドさせて、ノブボルトを締付けてください。
- 目盛シールには、0～10まで目盛があります。目盛番号に応じて、正しく高さを調節してください。



- ノブボルトは紛失しないように注意してください。
- ノブボルトが左図のように確実に締付けられていることを確認してください。




- 目盛1～10の位置で固定する場合は、スライドパイプのくぼみにノブボルト先端がしっかり固定されていることを必ず確認してください。ノブボルトがしっかり固定されていないと天板が落下し、けがをするおそれがあります。
- 天板の高さ調節は、天板を手で支えながら行ってください。天板を支えずに調節すると、不意に天板が落下して指などがはさまれて、けがをするおそれがあります。

6 オプションの取付けとご注意

■ベルトセット (KF-84B) について


- 上体の支持に不安のある方がご使用になる場合は、別売のベルトセット (KF-84B) を使って腰部を支えるように調節してください。

①

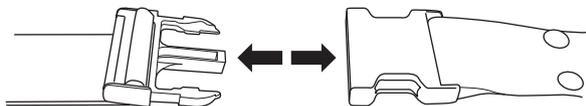

①バックルを外してください。


②

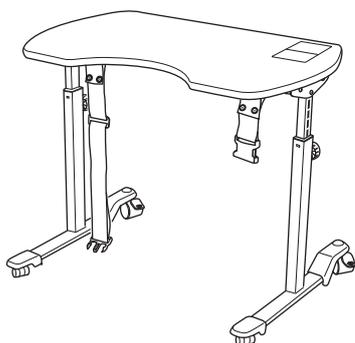

②天板裏側のベルト受にベルトセットを取付けてください。(2ヶ所)


※詳しくはベルトセット(KF-84B)の取扱説明書を参照してください。

③

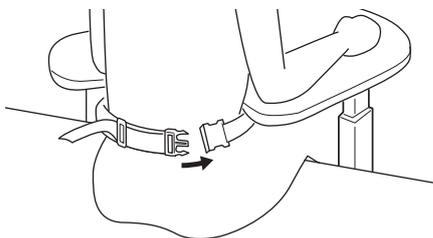

③ベルトをご使用になる方の身体に巻き、バックルを背中側で固定してください。

④

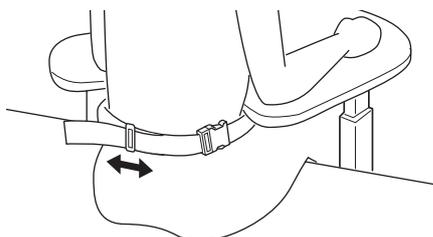

④ご使用になる方の体形にあわせて、ベルトの長さを調節してください。



- バックルは確実に固定してください。確実に固定しないと、バックルが外れ転倒してけがをするおそれがあります。
- 天板をつかんだ状態や、ベルトを使用した状態で後ろに倒れるような姿勢をとらないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 天板の前方に体重をかけ、前に倒れるような姿勢をとらないでください。転倒してけがをするおそれがあります。

7 定期点検と日常のお手入れ

1. 定期点検

- 安全にご使用いただくために、1年に1回は定期的に点検してください。使用の頻度や環境により製品は摩耗・劣化します。定期的に各部のゆるみ、可動部の動作、破損の有無などを点検してください。
- 異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、パラテクノコールセンター（10ページ参照）までお問い合わせください。

2. 日常のお手入れ

- 洗剤で清拭する場合は、下記の手順で行ってください。
 - ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
 - ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
 - ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。
- 消毒剤を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度でご使用ください。

※各消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

76.9～81.4%	消毒用エタノール
～0.2%	塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）
～0.2%	塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）
～0.05%	グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど）
～1.0%	次亜塩素酸ナトリウム（ミルトンなど）



- 揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質するおそれがあります。
- 中性洗剤や次亜塩素酸ナトリウムを使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂が割れたり、変色・変質したりするおそれがあります。



- 漂白剤を使用しないでください。ツヤ変化や色変わりが生じるおそれがあります。
- オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

8 長期保管・廃棄について

< 長期保管 >

■長期にわたりテーブルをご使用にならないときは、下記の点にご注意ください。

1. テーブルの上には何も載せないでください。
2. 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
温度-10~50℃、湿度30~90%RHの環境で保管してください。
3. 取扱説明書は紛失しないように、大切に保管してください。

< 廃棄について >

■廃棄の際は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および各自治体の規則に従ってください。

9 仕様

品名		リハビリテーブル
品番		KF-840
寸法	幅×奥行	天板:79cm×50cm / 脚部:77cm×58cm
	天板高さ	54cm~79cm (11段階調節 目盛0~10)
	キャスター	車輪径 / 前輪:双輪φ5cm (ストッパー付) 後輪:双輪φ3cm
製品質量		13kg
耐荷重		30kg(294N)
材質	天板	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)
	本体	スチール

10 アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（1ページ「使用目的／各部の名称」参照）
- お買い上げ日 ●破損または異常の内容（できるだけ詳しく）
- 施設名、お名前、ご住所および電話番号

■消耗部品について

- キャスターは消耗部品です。

保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後6年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間：平日8:00～18:00／土・日・祝日9:00～17:00（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

パラマウントベッド株式会社

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)
さいたま支店	〒336-0967	さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(048)878-0100(代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)

保証書

品名	リハビリテーブル	品番	KF-840
保証期間	1年間		

★ お買い上げ日			
お客様	お名前		
	ご住所	〒 □□□□ - □□□□	☎ ()
★ 販売店	店名		
	住所		☎ ()

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証規定

- 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
 - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.

修理実施日	修理内容	担当者

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の基において無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書中の「アフターサービスについて」をご覧ください。

パラマウントベッド株式会社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号