


まえがき

このたびは、**ターンテーブル ハード**をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、**ターンテーブル ハード**を安全にお使いいただくための注意事項などを記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、**ターンテーブル ハード**を正しく効果的にお使いください。

【用途・特長】

ターンテーブル ハードは、車いす⇔ベッドやトイレなどの
移乗時に足の踏み替えが難しい方が、身体の方向
転換をするために使用します。介助者が足で回転を
抑制しやすく、必要に応じて止めることができる大きさ・
薄さになっています。また、軽量で持ち運びに便利なハン
ドルがついています。

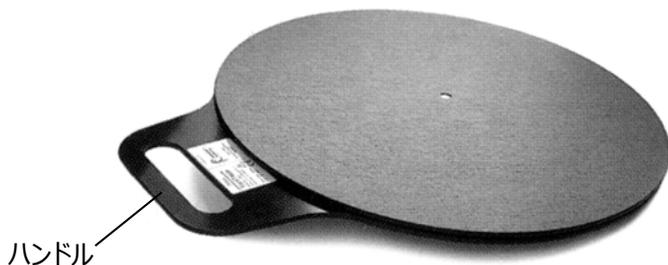

【安全に使用するための注意事項】

■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■移乗時は、ベッド・車いすのキャスターやブレーキがロックされていることを確認してください

●ロックされていないと、移乗中に転倒してけがをするおそれがあります。

■ターンテーブル ハードを使用しないときは、ゆかに放置しないでください

●誤って乗った際に、転倒してけがをするおそれがあります。

■ターンテーブル ハードに破損やほつれなどが見つかった場合は、使用を中止してください

●破損したまま使用すると、転倒してけがをするおそれがあります。

【使用方法】

■ご使用にあたり、理学療法士・作業療法士などの専門家もしくはお買い上げの販売店にご相談いただき、ターンテーブル ハードを正しく使用してください。

<使用前の点検>

●使用する前に、ターンテーブル ハードに破損がないことを確認してください。

<ターンテーブル ハードの使用条件>

- ・立位ができる方
- ・立ちあがりが可能でバランス（介助あり）を保持できる方
- ・介助者の指示が理解できる方



より安全に使用するために、フレキシベルト（別売）との併用をおすすめします。

【仕様】

品名	ターンテーブル ハード	ターンテーブル ハード
	S	L
品番	KZ-A52044	KZ-A52045
寸法 (cm)	38 (直径)	45 (直径)
製品重量 (kg)	1.1	1.3
耐荷重 (kg)	135	250
材質	ABS樹脂	

【使用方法の例】



ターンテーブル ハード

- ①ターンテーブル ハードを利用者の脇のゆかに置いてください。
※利用者が座る際に、座る場所に対して適切な位置に来るように確認してください。
- ②利用者が立ちあがる前に、回転を防ぐ為、介助者は足の前方ではターンテーブル ハードを、同じ足の後方のかかとではゆかをしっかりと捉えている状態にしてから利用者が立ちあがるようにしてください。
- ③利用者がターンテーブル ハードに乗り、腰をあげたら、介助者が足先でターンテーブルハードを回転させ、動きを止めるときは同じ足の裏全体で止めてください。

車いす⇔ベッドの移乗



- ①車いすをベッドに出来るだけ近づけて、車いすのキャスターをロックしてください。
- ②利用者がベッドから腰をあげたら、ターンテーブル ハードを回転させてください。
- ③利用者を車いすに座らせてください。
※車いすからベッドへ移乗する際は、同様の手順で行ってください。

車いす⇔トイレの移乗



- ①車いすをトイレに出来るだけ近づけて、車いすのキャスターをロックしてください。
- ②利用者が車いすから腰をあげたら、ターンテーブル ハードを回転させてください。
- ③利用者をトイレに座らせてください。
※介助は2人以上で行ってください。
※トイレから車いすへ移乗する際は、同様の手順で行ってください。

【お手入れ】

洗剤で清拭する場合は、下記の手順で行ってください。

- ① 水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ② 水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③ 乾いた布で、残った水分を拭き取ってください。



プレート同士の動きが滑らかではない場合は、テフロンスプレーを使用して、上下のプレートの間に塗布すると、プレート同士が滑らかに動くようになります。

商品に関するお問い合わせ ＜パラマウントベッド株式会社＞

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(大代)	横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)	名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)	大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)	広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
さいたま支店	〒336-0967	さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(048)878-0100(代)	福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)