

# キャスター

## まえがき

このたびは、キャスターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この「取扱説明書」には、キャスターを安全にお使いいただくための注意事項や使用方法などを記載しています。

- キャスターをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」および適合するベッドの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- キャスターを取付けたベッドで療養する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」および適合するベッドの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

## 使用目的

■この製品はベッドに取付けて部屋の中での配置換えや掃除をする際などに、ベッドの移動を補助することを目的に作られています。  
※長い距離や段差・傾斜のある場所での移動には適していません。

## 各部の名称

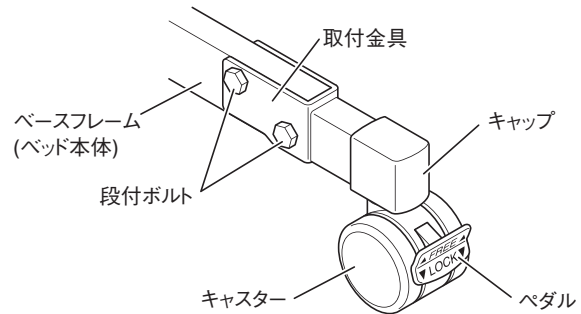


## 適合品

- KQ-B6000 シリーズ (KQ-B60 \*\* / KQ-B62 \*\* / KQ-B63 \*\* / KQ-B64 \*\* / KQ-B65 \*\*) 用です。
- KQ-B6000 シリーズ (KQ-B60 \*\* / KQ-B62 \*\* / KQ-B63 \*\* / KQ-B64 \*\* / KQ-B65 \*\*) と、このキャスターの組合せは JIS 認証を取得しています。

## 部品の確認

■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

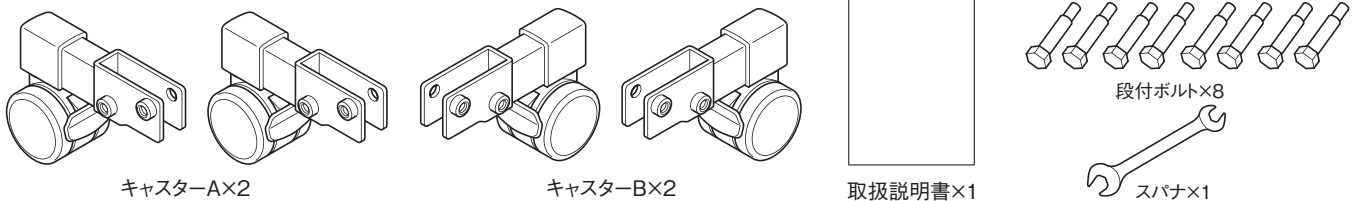


### 【事前に準備すると便利なもの】

高さ 8.5cm 程度のスペーサー (4個)


※使用すると作業しやすくなります。(なくても作業できます)

※ベースフレームの下にはさんで使います。十分な強度のあるものをご用意ください。

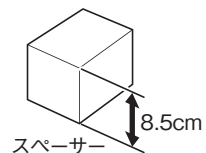


※付属されていません。お客様でご用意ください。


# 安全に使用するための注意事項

 <b>警告</b> <small>けいこく</small>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺 <sup>まひ</sup> など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
--	--

- ベッドを移動させるとき以外は4輪すべてのキャスターをロック状態にしてください**
  - ベッドに乗り降りする際などに、ベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。
- お客様による修理・改造はしないでください**
  - 思わぬけがや破損の原因となります。
- キャスターは確実に取付けてください**
  - キャスターが確実に取付けられていないと、キャスターの脱落などによりベッドがバランスを崩し、思わぬけがをするおそれがあります。
- キャスターを直接取付けて使用するベッドは、弊社が指定する適合品をご使用ください**
  - 指定以外の製品や他社製品と組合せると、製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたり、ベッドやキャスターが破損したりするおそれがあります。

 <b>注意</b> <small>ちゆうい</small>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
--	--


- 長い距離や段差・傾斜のある場所での移動は避けてください**
  - 破損の原因となります。
  - ベッドの部品とゆかとのすき間が少ないため、ゆかを傷つけることがあります。また、ベッドやキャスターの故障の原因となるおそれがあります。
- 以下の場合にはキャスターの下に敷物や脚座ゴムシート KQ-P732（別売）などを敷いてください**
  - すべりやすいゆか材（ビニル床シート・ビニル床タイル・フローリングなど）の上で使用すると、キャスターがすべりベッドが動いて、思わぬけがをするおそれがあります。
  - ビニル系のゆか材の上で使用する場合、ゆか材が変色するおそれがあります。
- ベッドを移動する際はヘッドボード・フットボードを持って移動してください**
  - サイドレールなどを持つとサイドレールなどに大きな力がかかり、破損・変形するおそれがあります。
- スプレータイプの殺虫剤をキャスターに直接噴射しないでください**
  - 殺虫剤に含まれる溶剤によってキャスターが破損・変色などするおそれがあります。また、破損した部分で思わぬけがをするおそれがあります。
- キャスターと取付金具のすき間やベースフレームとゆかとのすき間に、足先や手や指などはさまないように注意してください**
  - キャスターが旋回したときや移動させる際に、すき間にはさまれて、けがをするおそれがあります。

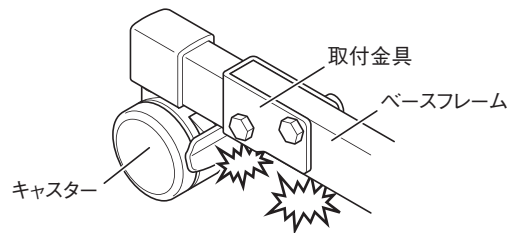

## 仕様

品名		キャスター	
品番		KQ-PB3C	
キャスター色		ダークグレー	
主要寸法	キャスター (cm)	キャスター径：φ 6.5 / キャスター幅：6.2	
	取付金具 (cm)	長さ 15.3 × 幅 3.8 × 高さ 4.6	
製品質量（1個当り）(g)		キャスター：280 / キャップ：40 / 取付金具：320	
材質	キャスター	車輪	熱可塑性エラストマー
		ペダル	ナイロン
		軸	スチール
	取付金具	スチール	
	キャップ	ナイロン	
	段付ボルト	スチール	
適合品		KQ-B6000 シリーズ (KQ-B60 ** / KQ-B62 ** / KQ-B63 ** / KQ-B64 ** / KQ-B65 **)	

## 使用方法

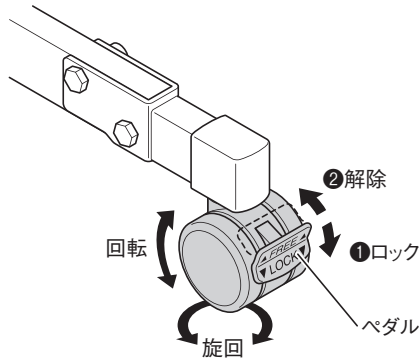

ベッドを移動させるとき  
4輪すべてのロック状態を  
解除してください

ベッドを移動させるとき以外  
4輪すべてをロック状態に  
してください

- ① ペダルを下側にするると回転・旋回ともにロックされた状態になります。ロック状態にするとキャスターは回転・旋回しません。
- ② ペダルを上側にするると回転・旋回ともにロック状態が解除されます。ロック状態を解除するとキャスターは回転・旋回します。



- ロック状態にしたときに、キャスターが回転・旋回しないことを確認してください。
- ロック状態を解除したときに、キャスターがスムーズに回転・旋回することを確認してください。



- ベッドを移動させるとき以外は、4輪すべてのキャスターをロック状態にしてください。ベッドに乗り降りする際などに、ベッドが動いて思わぬけがをすることがあります。




- キャスターがロックされた状態でベッドを無理に動かさないでください。ベッドやキャスターが故障したり、ゆか材を傷つけたりすることがあります。

## 取付・取外方法



- 組立てられているベッドにキャスターを取付け・取外するときは、ベッドを分解してベースフレームのみの状態にし、ベースフレームの脚座を取外してから作業を行ってください。（ベッドの分解方法は、ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの分解方法」を参照してください。）
- ベッドを分解せずにキャスターを取付け・取外すると思わぬけがをしたり、ベッドが破損・変形したりすることがあります。

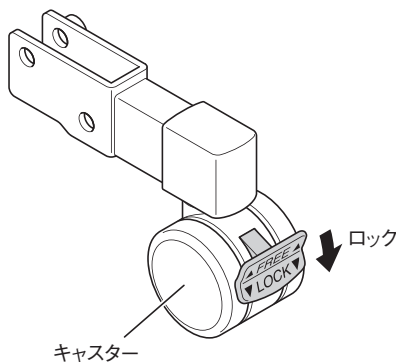


### ■取付方法

1. キャスターの固定
- ① 4輪すべてのキャスターをロック状態にしてください。



- キャスターがロック状態になっていない場合、組立作業中にベッドが動いて思わぬけがをすることがあります。

# 取付・取外方法

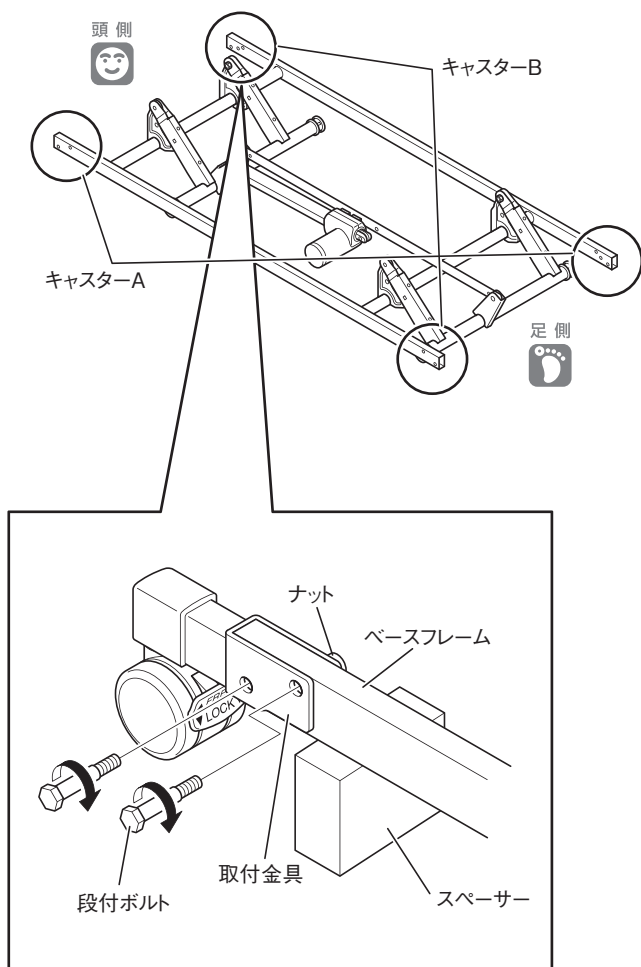

## 2. キャスターの取付け

① ベースフレームの先端を持ち上げて、取付金具のナットがない側をベッドの内側にして、取付金具をベースフレームのパイプにかぶせてください。



● ベースフレームを持ち上げる際、手や指などはさまないように注意してください。けがをすることがあります。



● キャスターには向きがあります。左図を参照してキャスター A・B の取付け向きに注意してください。

※左図のようにベースフレームの下に 8.5cm 程度のスペーサーを置くと作業しやすくなります。




● スペーサーを置いた際、ベースフレームが安定していることを確認してから次の作業を行ってください。ベースフレームが落下してけがをしたり、ゆかなどを傷つけたりするおそれがあります。

② 取付金具とベースフレームのパイプの穴位置をあわせ、ベッドの内側から段付ボルトを差込んで仮止めしてください。(2ヶ所)

③ 仮止めした段付ボルトを付属のスパナでしっかりと締付けてください。(2ヶ所)



● 段付ボルトは適正な状態まで締付けてください。段付ボルトがゆるんでいると、キャスターががたついたり外れたりしてけがをすることがあります。段付ボルトを締付ける際、ボルトの頭と取付金具との間にすき間(右図参照)ができるのが適正な状態です。段付ボルトを締付けすぎないように注意してください。

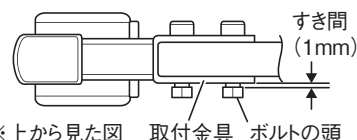

※上から見た図 取付金具 ボルトの頭


- ④ ①～③の手順で、頭側・足側の左右各2ヶ所にキャスターを取付けてください。



- ベースフレームの下にスペーサーを置いた場合は、キャスター取付け後にスペーサーを取外してください。

- ⑤キャスターにゆるみやがたつきがないことを確認してください。

※以降のベッドの組立方法については、ベッド本体の「取扱説明書」を参照してください。

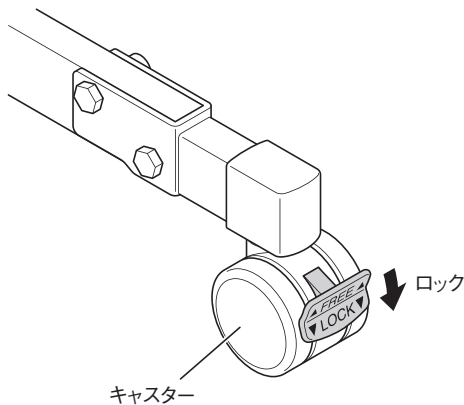

## ■取外方法

### 1. キャスターの固定

- ①4輪すべてのキャスターをロック状態にしてください。




ちゅう  
**注 意**

- キャスターがロック状態になっていない場合、取外し作業中にベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。

### 2. ベッドの分解

- ①ベッドを分解し、ベースフレームのみの状態にしてください。(ベッドの分解方法は、ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの分解方法」を参照してください。)

## 取付・取外方法

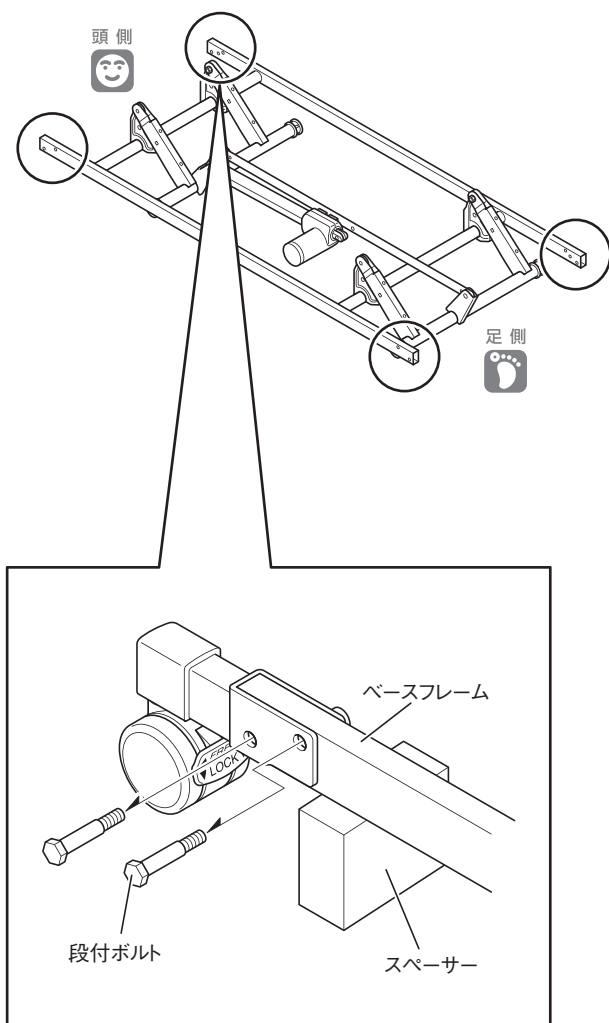

### 3. キャスターの取外し

- 1 ベースフレームの先端を支え、キャスターを固定している段付ボルトを取外してください。(頭側・足側の左右各2ヶ所)



●ベースフレームを持ち上げる際、手や指などはさまないように注意してください。けがをすることがあります。

※左図のようにベースフレームの下に 8.5cm 程度のスペーサーを置くと作業しやすくなります。



●スペーサーを置いた際、ベースフレームが安定していることを確認してから次の作業を行ってください。ベースフレームが落下してけがをしたり、ゆかなどを傷つけたりするおそれがあります。

- 2 ベースフレームからキャスターを取外してください。(頭側・足側の左右各2個)



●ベースフレームの下にスペーサーを置いた場合は、ベースフレームを持ちあげて取外してください。

# お手入れ・長期保管について

## 【お手入れ】



### ■汚れを落とす場合

- 下記①～③の手順で行ってください。
  - ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
  - ②水にひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
  - ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

### ■消毒する場合

- 必ず下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

76.9 ~ 81.4%	消毒用エタノール
0.05 ~ 0.2%	塩化ベンザルコニウム (オスバンなど)
0.05 ~ 0.2%	塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)
0.05%	グルコン酸クロルヘキシジン (ヒビテンなど)
0.02 ~ 0.05%	次亜塩素酸ナトリウム (ミルトンなど)

	<ul style="list-style-type: none"><li>●揮発性のもの (シンナー、ベンジン、ガソリンなど) やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。</li><li>●消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質するおそれがあります。</li><li>●中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。</li></ul> 
---	---



- オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。
- キャスターへの注油や分解によるキャスター内部の清掃はしないでください。

## 【長期保管】

### ■長期にわたりキャスターをご使用にならないときは、下記の点にご注意ください。

- キャスターの上には何も載せないでください。
- 本取扱説明書および組立付属部品 (段付ボルト・スパナ) を袋などに入れ、直射日光を避け、大切に保管してください。
- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。  
温度 - 10℃ ~ 50℃、湿度 30% RH ~ 90% RH の環境で保管してください。
- ベッドに取付けたまま保管する場合は、再使用時にキャスターが確実に取付けられていることを確認してください。

# キャスターの交換について

### ■キャスターは消耗部品のため、長期間ご使用いただいた場合、摩耗、損傷などにより機能が低下するおそれがあります。下記の場合は部品の寿命ですので、使用を中止して新しい部品に交換してください。

- キャスターのペダルを下側にしても、車輪が回転・旋回し、ロック状態にならない場合。
- 車輪の劣化により、キャスターをロック状態にしてもベッドが動いてしまう場合。
- ベースフレームを持ちあげたときに、キャスターがキャップから抜ける場合。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

## 2. 修理を依頼されるとき

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

### ■連絡していただきたい内容

- 品名、品番（下記保証書を参照）
- お買い上げ日
- 破損または異常の内容（できるだけ詳しく）
- お名前、ご住所および電話番号

### ■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは下記の保証書をご覧ください。

### ■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

## 3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

## 4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日8:00～18:00 / 土・日・祝日9:00～17:00（年始は休業いたします）

## 【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

## 保証書

品名 / 品番	キャスター / KQ-PB3C	保証期間	★お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前	★販売店 (店名・住所)	☎	( )	( )	( )
	〒					
	ご住所					

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された☆印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。  
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、ラベル類などの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。  
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

### 【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
  - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
  - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
  - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
- （4）火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷  
（5）保証書のご提示がない場合  
（6）本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合  
（7）字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合  
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
● This warranty is valid only in Japan.

## <パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂 2 丁目 14 番 5 号 ☎(03)3648-1111(代)

東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂 2 丁目 14 番 5 号 ☎(03)3648-1171(代)

札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南 2 条西 13 丁目 318 番地 11 ☎(011)271-1181(代)

仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町 2 丁目 3 番地の 3 ☎(022)239-5211(代)

さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園 3 丁目 23 番 1 ☎(048)878-0100(代)

横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間 5 丁目 3 番 33 号 ☎(042)795-8800(代)

名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉 1 丁目 20 番 17 号 ☎(052)963-0600(代)

大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀 2 丁目 3 番 33 号 ☎(06)6443-8791(代)

広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町 3 丁目 8 番 5 号 ☎(082)293-1311(代)

福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3 丁目 14 番 20 号 ☎(092)461-1131(代)

2020-12

製版：株式会社 ハル