

ハイトスペーサー

まえがき

このたびは、ハイトスペーサーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」にはハイトスペーサーを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- ハイトスペーサーをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」およびハイトスペーサーを取付けるベッド本体の「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- ベッドで療養する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」およびハイトスペーサーを取付けるベッド本体の「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。


使用目的

■このハイトスペーサーは、ベッドの高さを高くすることを目的に作られています。


※ハイトスペーサーを取付けることにより、ベッドの高さが7cm高くなります。

各部の名称と部品の確認

●開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までお問い合わせください。

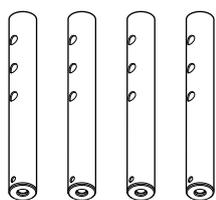


ハイトスペーサー：4本
(延長脚)

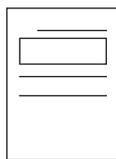

取扱説明書：1部

【取付状態】

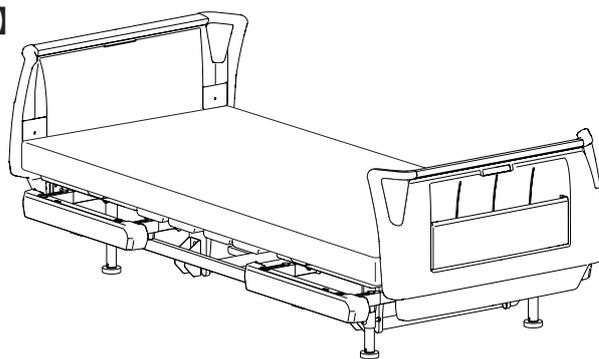

仕様

品名	ハイトスペーサー
品番	KQ-PB1H
寸法	直径3.2cm × 長さ24.6cm
製品質量 (1本あたり)	約360g
材質	スチール製…電着・粉体塗装仕上げ

安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■脚の高さは、4ヶ所すべて同じ高さにしてください

- 脚の高さが異なるとベッドが傾き、けがをしたりベッドが破損するおそれがあります。

■弊社が指定する適合品以外の製品とは組合せないでください

- 弊社が指定する適合品以外の製品や他社製品と組合せると、思わぬけがや破損の原因となります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■スプレータイプの殺虫剤をハイトスペーサーに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によってハイトスペーサーが破損・変形するおそれがあります。また、破損した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

■ハイトスペーサーを取付けた状態でベッドを引きずらないでください

- ゆかを傷つけたり、ベッドおよびハイトスペーサーが破損する原因となります。

適合品

■KQ-B6000シリーズ (KQ-B61**) 用です。

■KQ-B6000シリーズ (KQ-B61**) とこのハイトスペーサー（延長脚）の組合せはJIS認証を取得しています。




ハイトスペーサー (KQ-PB1H) には、キャスター (KQ-PB1C) を取付けてご使用いただけます。

取付方法



組立てられているベッドにハイトスペーサーを取付けるときは、ベッドを分解してベースフレームの状態にし、脚またはキャスターを取外してから作業を行ってください。

※ベッドの分解方法は、ベッドの取扱説明書の「ベッドの分解方法」を参照してください。

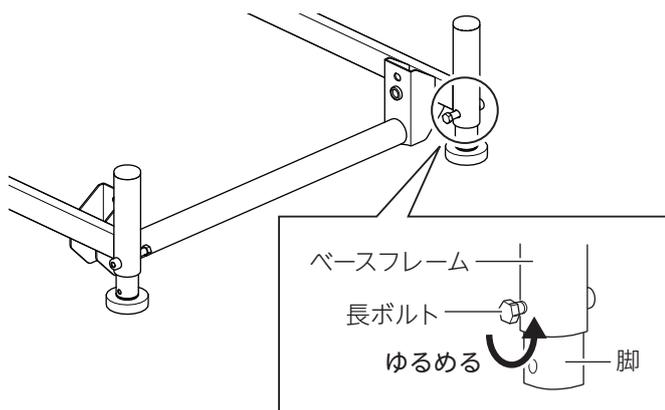



1. 脚の取外し

ベースフレームに付いている長ボルトをスパナ（対辺13mm）で取外し、脚を取外してください。（4ヶ所）





取外したボルトはハイトスペーサーの取付けに使用します。また、脚は紛失しないように大切に保管してください。

取付方法

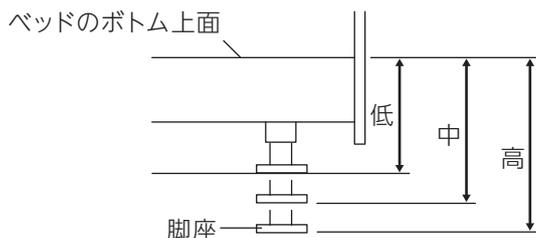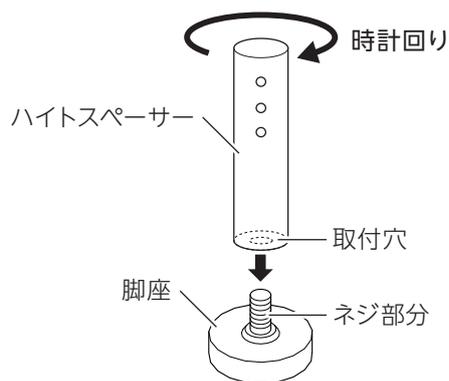

ゆかからベッドのボトム上面までの高さ

	通常時	高さスペーサー使用時
低	25cm	32cm
中	29cm	36cm
高	33cm	40cm

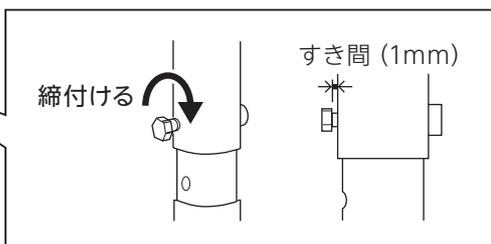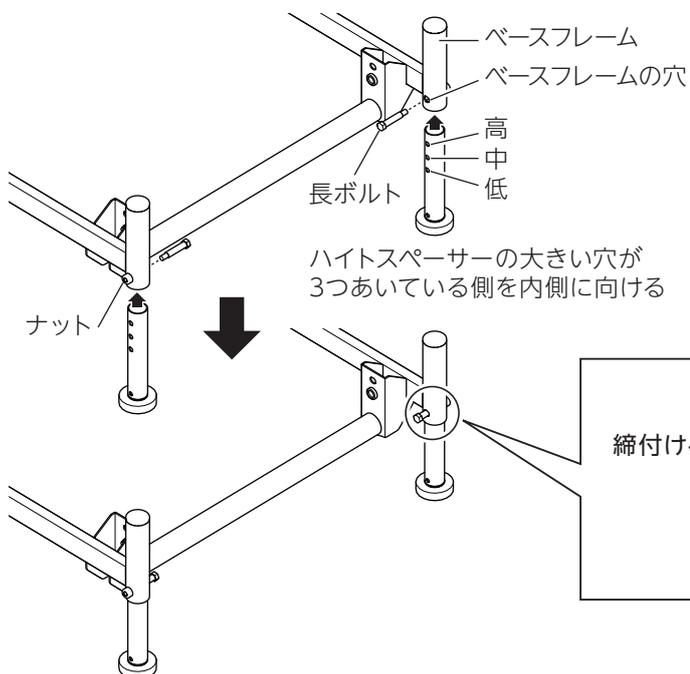

2. 脚座の取付け

- ①脚座に対して脚を反時計回りに回し、脚座を取外してください。
- ②高さスペーサーの端面にある取付穴に脚座のネジ部分に合わせ、高さスペーサーを時計回りに回し、締付けてください。(4ヶ所)



高さスペーサーの端面が脚座と完全に接するまで、しっかりと締付けてください。

3. 高さスペーサーの取付け

ベッドの高さ(脚の高さ)は左図のように3段階に調節できます。ベースフレームに高さスペーサーの大きい穴が3つあいている側を内側に向けて入れ、低・中・高いずれかの穴とベースフレームの穴位置をあわせ、長ボルトで高さスペーサーを固定してください。長ボルトはスパナ(対辺13mm)でしっかりと締付けてください。



●長ボルトは確実に締付けてください。ボルト頭とベースフレームとの間にすき間(下図参照)ができるのが適正な状態です。

●締付けた後、高さスペーサーにゆるみやがたつきがないことを確認してください。

※以降のベッドの組立方法については、ベッドの取扱説明書の「ベッドの組立方法」を参照してください。



滑りやすいゆか材(フローリングなど)の上で使用する場合は、脚座やキャスターKQ-PB1C(別売)の下に敷物や脚座ゴムシートKQ-P732(別売)などを敷いてください。使用中にベッドが不意に動き、転倒してけがをするおそれがあります。



畳やじゅうたんなどの上で長時間使用する場合は、脚座やキャスターKQ-PB1C(別売)の下に敷物や脚座ゴムシートKQ-P732(別売)などを敷いてください。畳やじゅうたんなどがへこむおそれがあります。

日常のお手入れ・長期保管について

■日常のお手入れ

- 汚れを落とす場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、その後水でひたした布をよくしぼって残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で残った水分を拭き取ってください。
- ※揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質させるおそれがあります。

■長期保管する場合

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所での保管は避けてください。温度-10～50℃、湿度30～90%RHの環境で保管してください。
- 取扱説明書および取外した脚は紛失しないよう、大切に保管してください。

アフターサービスについて

1.保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番（下記保証書を参照）
- お買い上げ日
- 破損または異常の内容（できるだけ詳しく）
- お名前、ご住所および電話番号

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは下記の保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3.部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

4.アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日 8：00～18：00 / 土・日・祝日 9：00～17：00（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

保証書

品名/品番	ハイトスペーサー/KQ-PB1H	保証期間	*お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前	★販売店				
	〒 () ご住所		☎ ()			

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、ラベル類などの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - (1) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - (2) 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - (3) お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - (4) 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - (5) 保証書のご提示がない場合
 - (6) 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
 - (7) 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.

パラマウントベッド株式会社

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代) 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代) 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市長区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代) 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代) 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1 ☎(048)878-0100(代) 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)